

Руководство по эксплуатации

**I. Тележка медицинская для перевозки больных механическая модель
«Медицинофф», с принадлежностями, варианты исполнения: E-8, E-2, E-3, E-5, E-4**

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМН:

«Hebei Pukang Medical Instruments CO.,LTD», Hebei Province 072550 China

Телефон: 86-312-859-2888; Факс: 86-312-859-2026.




河北普康医疗设备有限公司

HEBEI PUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Руководство по эксплуатации

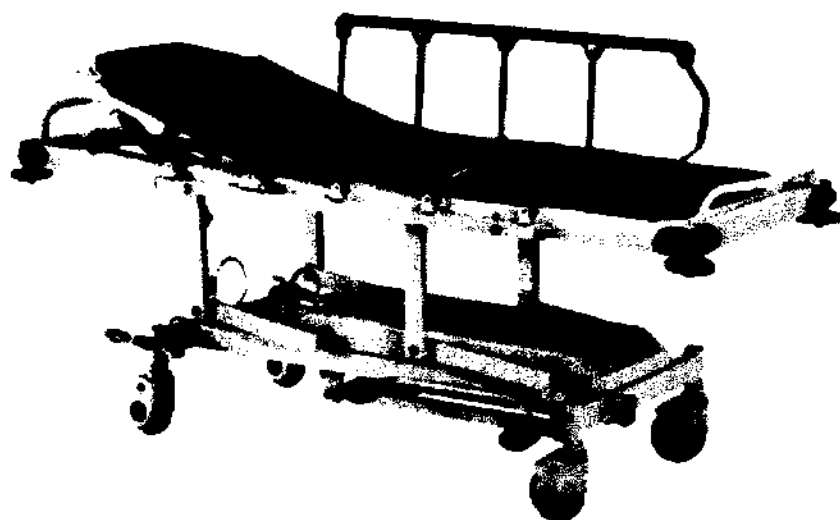

Е-2 Медицинская тележка

Е-2 – медицинская тележка-каталка, предназначенная для перемещения пациентов к транспортным средствам (в дальнейшем - ТС) экстренной медицинской помощи (наземным, воздушным и т.д.). В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, топчана или перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Благодаря наличию регулировки высоты панели и откидных боковых ограждений значительно облегчен процесс перекладывания пациента. Материалы, обработка, оборудование и грузоподъемность строго контролируются в соответствии с международными стандартами. Изделие имеет достойный внешний вид, обладает высоким уровнем практичности и надежности, удобно в эксплуатации.

А: Наименование, габаритные размеры, номер модели.

Наименование: Медицинская тележка-каталка.

Габаритные размеры: 2100×690×460/850 мм.

Модель: Е-2.

В: Назначение и сфера применения.

Изделие предназначено для использования в различных медицинских учреждениях. Ложе изделия - двухсекционное, имеется регулировка подъема спинной секции. Высота изделия регулируется в диапазоне от 460 до 850 мм.

С: Расшифровка габаритных размеров и номера модели.

2100 мм - полная длина.

690 мм - ширина.

460/850 мм - минимальное расстояние от платформы до земли.

Д: Условия окружающей среды и требования к транспортировке

а) Условия хранения.

- 1) температура: $-5^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- 2) относительная влажность: $\leq 85\%$
- 3) атмосферное давление: 86кПа ~ 106кПа

б) Условия рабочей среды.

- 1) температура: $10^{\circ} \text{C} \sim 40^{\circ} \text{C}$
- 2) относительная влажность: $\leq 85\%$
- 3) атмосферное давление: 86кПа ~ 106кПа

с) Требования к транспортировке.

1. Не переворачивать
2.  Кантовать с осторожностью



3. Воздействие влаги недопустимо

4. При загрузке и выгрузке с помощью погрузчика, расстояние между вилками погрузчика устанавливать 1 м, поднимать за среднюю часть упаковки

Е: Установка и пусконаладочные работы

Установкой и отладкой изделия занимается наша компания.

И: Подготовка к использованию

Перед началом использования должна быть тщательно изучена функциональность изделия. Принцип следующий: в ненагруженном состоянии осуществляйте каждую функцию, проверяя, в то же время, нормально ли работают движущиеся части и все ли соответствует требованиям. Если никаких неполадок не замечено, тележку можно допускать к применению.

Г: Технические параметры.

а) Безопасная для работы нагрузка: 109 кг.

б) Угол отклонения спинной секции: $\geq 45^\circ$

с) Опорная рама выполнена из стального листа холодной прокатки, полученного с помощью технологии машинной обработки и сильного сжатия.

д) Ложе тележки-каталки изготовлено из металлической сетки, боковые ограждения тележки-каталки выполнены из нержавеющей стали.

е) В углах тележки-каталки предусмотрены 4 отверстия для дополнительного оборудования с защитными ограничителями.

ф) Изделие оснащено колесами диаметром 125 мм с центральной системой блокировки, которые обеспечивают устойчивость.

Г Предупреждающие обозначения для безопасной работы: см. таблицу 2

Условное обозначение	Значение	Место размещения
	Ознакомьтесь с инструкцией	Внутри упаковки и в инструкции
	40° Температурные условия транспортировки и хранения	Снаружи упаковки
	Температурные условия рабочей среды	Поверхности изделия и в инструкции
	Отчет о проверке	В бланке отчета о проверке

	Официальный представитель в Европейском Союзе.	В инструкции
	Информация производителя	Снаружи упаковки, в отдельной подшивке
	Будьте осторожны и ознакомьтесь с соответствующими инструкциями.	Как внутри, так и снаружи упаковки
	Радиационная стерилизация	Матрас
 2007-10-1 5	Дата выпуска	Снаружи упаковки
SN 071003 050	Номер подтверждения	Соответствующий номер
LOT	Количество изделий	Отчет о проверке
 2010-09	Срок службы	В инструкции и на поверхности изделия
 DANGEROUS	Опасное напряжение	На электропроводах

Н: Примечания

- Тележка-каталка всегда должна находиться в заблокированном состоянии, кроме случая, когда ее необходимо транспортировать.
- Когда пациент находится на тележке-каталке, боковые ограждения должны быть зафиксированы в верхнем положении.
После фиксации в верхнем положении, следует потрясти их несколько раз и удостовериться, что ограждения надежно зафиксированы.
- Платформу тележки-каталки следует устанавливать в нижнем положении (кроме случаев специальной необходимости).
- Запрещено вставать на тележке-каталке в разложенном состоянии во избежание повреждений вследствие точечной концентрации веса.
- В помещении для курения не должно быть горючих газов. Относительная влажность должна поддерживаться до 80%.

Q: Обязательства обслуживания

- Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев с даты приобретения.
Отдельные запасные детали поставляются в течение всей службы изделия.
- В течение гарантийного срока по поводу обслуживания обращайтесь к дилеру. За продукцию, реализуемую на Европейском рынке, ответственность несет доверенное лицо ЕЕА, назначенное нашей компанией.