

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «МЕДОРТЕКС»



[Signature] **Купцова Н.А.**

«05» 04 2012г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Обуви ортопедической

**ROMA, ATYS, KORA, FAUN, ARION, ATLAS, PALAS, FLORA, DORIS,
DAFNE, SILVIA, AMATA, PARIS, IKAR, FENIX, PALES, DIONE, SKYLLA,
ARTEMIS, TITAN, ALBA, EUROS, DANAE, IRIS, KARPO, GALA, METIS,
THALLO, NOTOS, HELIOS, ELPIS, ASTRAIA, NOMIA, ZEUS, SORS, JANUS**

производства Leos Duda – Leon SHOES

Чешская Республика

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ортопедическая обувь малосложная серийного производства Leos Duda – Leon SHOES Чешская Республика (далее - обувь), предназначена для профилактики и реабилитации инвалидности, для коррекции деформации стоп и разгрузки болезненных участков на плантарной поверхности стопы. Указанные виды обуви (см. табл.1 и Приложение 1) предназначены для лечения заболеваний стоп при плоско-вальгусном плоскостопии, при заболевании Hallux valgus и при диагнозе пяточной шпоры. Обувь условно подразделяется по размерам на детскую, женскую, мужскую. Обувь используется при посттравматических остеоэстатических нарушениях стопы, при нарушениях осанки и деформациях позвоночника. Обувь можно назначать как профилактическую с целью плантегрального положения ноги. Анатомически правильный профиль стельки обуви обеспечивает комфорт, улучшает кровообращение, снижает опасность варикозного заболевания и уменьшает утомляемость от длительного пребывания на ногах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия выпускается по артикулам, размерам, указанным в табл. 1 и цветам, согласно Приложений 1, 2.

Табл.1

№	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры
1	2	ROMA	цветные	женские 35-42
2	3	ATYS	цветные	детские 30-34
				женские 35-42
			двухцветные	мужские 41-48
				детские 30-34
3	6	KORA	цветные	женские 35-42
4	7	FAUN	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48
5	8	ARION	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48
6	9	ATLAS	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48
7	11	PALAS	цветные	женские 35-42
8	12	FLORA	цветные	женские 35-42
9	13	DORIS	цветные	женские 35-42
10	14	DAFNE	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48
11	15	SILVIA	цветные	женские 35-42
12	16	AMATA	цветные	женские 35-42
13	17	PARIS	цветные	детские 30-34
				женские 35-42
				мужские 41-48
			двухцветные	детские 30-34

14	18	IKAR	цветные	детские 30-34
				женские 35-42
				мужские 41-48
15	19	FENIX	двухцветные	детские 30-34
			цветные	детские 30-34
				женские 35-42
				мужские 41-48
			двухцветные	детские 30-34
16	20	PALES	цветные	женские 35-42
17	21	DIONE	цветные	женские 35-42
18	22	SKYLLA	цветные	женские 35-42
19	23	ARTEMIS	цветные	женские 35-42
20	24	TITAN	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48
21	25	ALBA	цветные	женские 35-42
22	26	EUROS	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48
23	27	DANAE	цветные	женские 35-42
24	28	IRIS	цветные	женские 35-42
25	29	KARPO	цветные	женские 35-42
26	30	GALA	цветные	женские 35-42
27	32	METIS	цветные	женские 35-42
28	32	THALLO	цветные	женские 35-42
29	33	NOTOS	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48
30	34	HELIOS	цветные	мужские 41-48
32	35	ELPIS	цветные	женские 35-42
32	36	ASTRAIA	цветные	женские 35-42
33	37	NOMIA	цветные	женские 35-42
34	38	ZEUS	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48
35	39	SORS	цветные	женские 35-42
36	40	JANUS	цветные	женские 35-42
				мужские 41-48

Обувь женская производится в двух видах: 1 – широкая, на стопу с широкой пяткой; 2 – узкая, на колодке с узкой пяткой, оборудованная невысоким клином (танкеткой) для удобства при ходьбе. Обувь мужская производится на широкую стопу с широкой пяткой.

Обувь произведена из натуральной пробки и натуральной кожи с натуральной подкладкой. На всех образцах обуви присутствуют элементы профилактической коррекции стопы, рекомендуемые для малосложной обуви, пяточная часть выполнена с углублением и наличием шварцевого кольца, стелька изготовлена с малым продольным сводом пятки. Верхняя часть обуви

выполнена с возможностью регулировки внутреннего объёма стопы с помощью ремней и пряжек или липучек. Правильный пережат при ходьбе обеспечивает слой специального амортизационного материала. В носочной части стельки присутствует подпальцевый валик, препятствующий смещению стопы во время ходьбы.

Представляемые образцы имеют различную цветовую гамму и изготовлены из качественного сырья.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 3.1 Нарушение целостности кожных покровов.
- 3.2 Сахарный диабет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

- 4.1 Подобрать обувь по размеру стопы и полноте с учётом индивидуальных особенностей так, чтобы стопа легла в основании, а пятка и пальцы не заходили на борт.
- 4.2 Расстегнуть пряжки, подобрать степень фиксации, и застегнуть.

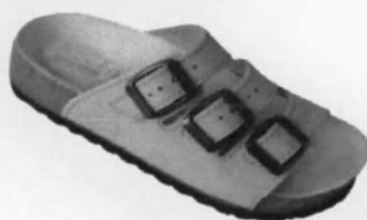
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- 5.1 По степени заболевания стопы предлагается постепенное использование обуви в первые 2 - 3 дня для привыкания.
- 5.2 В период носки, необходимо регулируемые застёжки или пряжки подтягивать.
- 5.3 Не рекомендуется использовать обувь без застёгнутых пряжек и ремешков.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 6.1 Новую обувь носить сначала короткое время для привыкания к ортопедическим вкладкам.
- 6.2 Не допускается соприкосновение обуви с острыми предметами, красящими веществами, растворителями.
- 6.3 Сушить обувь только естественным путём без использования нагревательных и отопительных приборов.
- 6.4 Верх обуви очищать от грязи и пыли мягкой влажной тканью или щёткой с использованием воды с температурой до 40°C без использования моющих средств, затем вытереть насухо.
- 6.5 Верх обуви из шлифованной кожи чистить резиновой щёткой.

Обувь ортопедическая**ROMA (2)****ATYS (3)****KORA (6)****FAUN (7)****ARION (8)****ATLAS (9)****PALAS (11)****FLORA (12)****DORIS (13)****DAFNE (14)****SILVIA (15)****AMATA (16)**

**PARIS (17)****IKAR (18)****FENIX (19)****PALES (20)****DIONE (21)****SKYLLA (22)****ARTEMIS (23)****TITAN (24)****ALBA (25)****EUROS (26)****DANAE (27)****IRIS (28)**



KARPO (29)



GALA (30)



METIS (31)



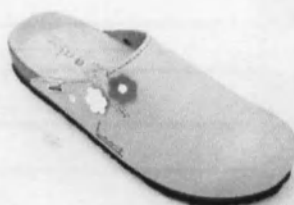
THALLO (32)



NOTOS (33)



HELIOS (34)

**ELPIS (35)****ASTRAJA (36)****NOMIA (37)****ZEUS (38)****SORS (39)****JANUS (40)**

Верхняя часть обуви может быть дополнена элементами дизайна без потери ортопедических качеств.

**Цветовая палитра верха
обуви ортопедической**

№ цвета	Наименование	
10	Белый	
50	Оливковый	
52	Зеленый	
01	Песочный	
16	Бежевый	
17	Светло-коричневый	
46	Коричневый	
49	Темно-коричневый	
51	Киви	
48	Кофейный	
90	Голубой	
95	Джинсовый	
97	Синий	
96	Серый	
98	Седой	
60,62	Черный	
07	Фиолетовый	
08	Бегония	
22	Кармен	
37	Бордовый	
36	Красный	
40	Светло оранжевый	
41	Оранжевый	
09	Розовый	

**Цветовая палитра подошвы
обуви ортопедической**

№ цвета	Наименование	
10	Белый	
49	Коричневый	
60	Черный	