


КОД ОКП 94 4480

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Аэрон»

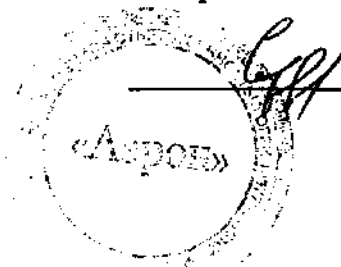

И.П. Сидоров

ИНСТРУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Аппарат слуховой заушный Bernafon с принадлежностями

Соответствует требованиям национальных стандартов
ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51024-97, ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003,
ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96 и документации, представленной заявителем

2010

Содержание

Введение

Обзор со звуковым крючком
Обзор со звуковой трубкой Сирафлекс
Введение аппарата с вкладышем
Удаление вкладыша и слухового аппарата
Введение аппарата с трубкой Спирэфлекс
Удаление аппарата и трубки со Спирэфлекс
Управление аппаратом
(ВКЛючение/ВЫКЛючение)
Изменение уровня громкости
Изменение программы
Функции телефонной катушки
Использование телефона
Смена батареи
Даталогинг
Прямой аудиовход и ФМ

Уход за слуховым аппаратом

Использование слухового аппарата
Пользование телефоном
Охрана окружающей среды
Сертификат соответствия
Сотовые телефоны и совместимость со слуховыми аппаратами
Международная гарантия
Программирование аппарата
Аксессуары
Общие предостережения и Безопасность использования
Общие проблемы и их решение
Сертификат происхождения для Европы
Сервис

Данная инструкция касается следующих
слуховых

аппаратов:

Инициа (Inizia) компактная

мощная заушина

IN3 CPx / IN3 CP. IN3 N

IN1 CPx / IN1 CP. IN1 N

Внимание: В наличии аппараты как с крючком,
так и с тонкой трубкой Spira Flex.

1

Введение аппарата с вкладышем

Вы потянете мочку уха вниз с помощью другой руки, или потянете верхушку уха вверх и назад.

• Проведите Вашим указательным пальцем по коже перед Вашим ухом.

Если Вы можете потрогать завитковую часть вкладыша, он введен неправильно. Осторожно нажмите за складкой Вашего уха.

• Расположите слуховой аппарат за Вашим ухом. Будьте осторожным при перекручивании вашей трубки.

• Сначала удалите слуховой аппарат

• Нажмите на заднюю часть Вашего уха большим пальцем, чтобы освободить завитковую часть вкладыша, потом с помощью указательного пальца удалите его.

• Возьмите за завитковую часть вкладыша и поверните его вперед.

• Осторожно потяните вкладыш прямо из уха, держа за завитковую часть вкладыша.

Важно: не удаляйте вкладыш, потянув за корпус аппарата, это может повредить соединению аппарата с вкладышем, а также и повредить трубку.

Удаление вкладыша и слухового аппарата

Введение аппарата с трубкой Спирафлекс

Потренируйтесь правильному введению Вашей звуковой трубки.

- Сначала расположите слуховой аппарат за Вашим ухом.
- Возьмите за изгиб звуковой трубки и осторожно введите вкладыш (доум) в Ваш слуховой проход, пока трубка не будет касаться боковой поверхности Вашей головы.
- Введите держатель вкладыша в углубление уха.
- Если звуковая трубка выступает из Вашего уха, вставьте вкладыш глубже. Если упор уха выступает, он вставлен неправильно.

Удаление аппарата и трубки со СпираФлекс

- Возьмите за изгиб звуковой трубки и осторожно выведите трубку и вкладыш (доум) из Вашего уха.
- Снимите аппарат с уха пациента.

Важно: не удаляйте звуковую трубку или вкладыш, потянув за корпус аппарата, это может повредить соединение трубки и аппарата.

Внимание: никогда не применяйте усилие при открытии или закрытии батарейного отсека.

Для ВКЛЮЧЕНИЯ

Закройте полностью батарейный отсек, пока не почувствуете щелчок. Слуховой аппарат издаст длинный сигнал.

Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Откройте батарейный отсек, пока не почувствуете щелчок.

Управление аппаратом (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)

Щелчок "ВКЛ" Щелчок "Выкл"

Для увеличения уровня громкости

Коротко нажимайте на верхнюю кнопку Мультирегулятора, повторяя, пока не достигнете необходимого уровня громкости. Вы услышите звуковой сигнал, когда достигнете максимума запрограммированной громкости.

Для уменьшения уровня громкости

Коротко нажимайте на нижнюю кнопку Мультирегулятора, повторяя, пока не достигнете необходимого уровня громкости. Вы услышите звуковой сигнал, когда достигнете минимума запрограммированной громкости.

Внимание: Ваш аппарат автоматически возвращается на исходный уровень громкости при включении аппарата, разрядженности батареи, или при изменении программ. Если Вы обнаружите, что Вам часто приходится изменять уровень громкости, попросите Вашего специалиста по слуховым аппаратам изменить программные настройки.

Изменение уровня громкости

Ваш слуховой аппарат может быть запрограммирован 3-мя программами прослушивания. На стр. 42 Вы можете посмотреть, какие программы были настроены в Вашем аппарате. Вы можете следующим образом изменять программы:

Мультирегулятор

Длительное нажатие (более 2сек) на верхнюю или нижнюю кнопки приведет к переключению программ. Количество сигналов, которые вы слышите, скажут Вам, в какой Вы программе.

Внимание: Ваш акустик может запрограммировать мультирегулятор, чтобы иметь только одну функцию или переключать программы на одном ухе, и изменять уровень громкости на другом ухе, если Вы видите в этом необходимость. Пожалуйста, прочитайте стр. 43, чтобы увидеть, как запрограммирован Ваш мультирегулятор.

Изменение программы

Телефонная катушка помогает Вам лучше слышать при использовании телефона или в зданиях, оборудованных индукционными системами (места богослужений, залы, театры и пр.). При активации телефонной катушки, Вы слышите напрямую через телефон или индукционную петлю. Чтобы активировать телефонную катушку, перейдите к программе

Внимание: Не все телефоны работают с телефонными катушками.

Функции телефонной катушки

Ваш акустик может настроить программутелефона. Вы можете включить ее нажатием мультирегулятора.

Использование телефона

Когда батарея разряжается, аппарат будет сигнализировать через регулярные промежутки времени. Время, через которое аппарат перестанет работать, зависит от типа батареи и завода-производителя. Нертуговые батареи вызывают сигнал предостережения раньше.

Используется следующий размер батареи:

– Compact Power BTE: Батарея размер 13

- Поддев ногтем, полностью откройте батарейный отсек, не оказывая усилия.
- Удалите использованную батарею.
- Удалите наклейку на новой батарее.
- Расположите новую батарею в батарейном отсеке гладкой поверхностью вверх (обозначено "+").
- Осторожно закройте батарейный отсек.

Смена батареи

В опции с защитой от открывания батарейный отсек для Инициатора Компактных мощных Заушин

- Вставьте маленькую отвертку или ручку в щель внизу аппарата и нажмите, чтобы открыть. Важно: Не нажимайте на батарейный отсек после того, как он уже полностью открыт. Повышенное усилие может деформировать батарейный отсек, что уменьшит защитные от открывания свойства.

Важная Информация о батареях

- Длительность работы батареи зависит от условий ее эксплуатации. (в шумных условиях батарея будет разряжаться быстрее) Всегда имейте небольшой запас батарей.
- Приобрести их Вы можете у Вашего специалиста по слуховым аппаратам.
- Израсходованную батарею следует удалить немедленно.
- Если Вы несколько дней не пользуетесь слуховым аппаратом, удалите батарею.
- Используйте только те батареи, которые рекомендованы Вам специалистом, поскольку плохие по качеству батареи могут производить вредные вещества.
- На время сна или в период, когда Вы не используете слуховой аппарат, полностью откройте батарейный отсек.
- Это поможет сохранить заряд батареи и уменьшить влияние влаги.
- Если слуховой аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, убедитесь, что батарея удалена. Храните аппарат в месте, где он не будет подвергаться воздействию влаги и солнца.
- Если батарея влажная, протрите ее сухой материей.
- Использованные батареи необходимо возвращать обратно для дальнейшей утилизации.
- Никогда не сжигайте батареи – это может привести к взрыву и вызвать повреждения.
- Никогда не выбрасывайте батареи с домашним мусором, это вызывает загрязнение окружающей среды.

Внимание: всегда удаляйте цинковые батареи, перед тем как просушить слуховой аппарат с помощью высушивающего набора. Высушивание цинковых батарей сокращает срок их эксплуатации.

Даталогинг (IN3 Заушина только)

Даталогинг автоматически запоминает информацию об использовании слухового аппарата, такую, как изменения, производимые в регуляторе громкости, часы использования, и пр. Эта информация может использоваться акустиком для точной настройки слухового аппарата. Если Вы не хотите активировать данное свойство, пожалуйста, попросите Вашего акустика выключить его.

Даталогинг

Адаптер Прямого Аудиовхода позволяет Вашему аппарату принимать звуковые сигналы напрямую от внешних источников сигнала, таких как ТВ, персональные стереосистемы и пр. FM приемник позволяет принимать сигналы напрямую от внешнего FM передатчика.

Подключение Прямого Аудиовхода

- Откройте батарейный отсек
- Вставьте адаптер ПА в аппарат

- Закройте батарейный отсек
- Потом введите шнур ПА или ФМ приемника в адаптер

Внимание: Когда адаптер ПА присоединен, цикл переключения программ выглядит иначе, чем обычно.

Прямой аудиовход и ФМ

Предостережения

Безопасность слухового аппарата с Прямым Аудиовходом определяется внешним источником звука. Если ПА соединен с прибором, с электрическим питанием, оборудование должно соответствовать EN 60601-1-1, EN 60065 или эквивалентному стандарту.

Здоровые уши выделяют серу, которая может закупорить слуховой аппарат. Пожалуйста, следуйте инструкции по очистке аппарата для предотвращения накопления серы, чтобы позволить аппарату функционировать в оптимальном режиме.

Перед сном

- Проверьте Ваш аппарат на наличие серы и протирайте его чистой материей.
- При необходимости, пользуйтесь очищающим инструментом, для удаления серы из отверстий звукового канала или вента.
- Откройте полностью батарейный отсек, чтобы позволить воздуху циркулировать.
- Рекомендуется пользоваться высушивающим устройством для удаления влаги, которая может собираться в аппарате.

Уход за слуховым аппаратом

Если вы пользуетесь индивидуальным вкладышем

Вам необходимо регулярно чистить вкладыши.

Никогда не мойте слуховой аппарат и не подвергайте его влаге.

- Держите слуховой аппарат над мягкой поверхностью, чтобы избежать повреждений, при его внезапном падении.
- Отсоедините вкладыш от слухового аппарата, крепко взявшись за конец крючка одной рукой и за звуковую трубку другой рукой.
- Потяните трубку от крючка
- Осторожно протрите вкладыш теплой мыльной водой.
- Прополощите и насухо протрите вкладыш.
- Используйте воздушный баллончик, чтобы удалить остатки влаги в трубке.
- При присоединении снова вкладыша к аппарату, важно расположить его правильно, как показано выше.

Очистка тонкой трубки Спиралфлекс

Если у Вас система тонкой трубки, убедитесь, что в трубке и во вкладыше нет серы, и они свободны.

- Крепко возьмитесь за адаптер и отсоедините звуковую трубку от аппарата, потянув ее.
- Используйте мягкую, сухую материю, чтобы вытереть наружную часть трубки и вкладыша.
- Чтобы удалить серу из звуковой трубки, введите чистящую нить в отверстие переходника. Проталкивайте нить в звуковую трубку, пока она не появится из вкладыша (доум).
- Потяните.
- Вновь подсоедините трубку к адаптеру.

Важно: Не используйте воду для чистки звуковой трубки во избежании ее закупорки.

Смена вкладыша

Вкладыш необходимо регулярно заменять.

Частота смены вкладыша зависит от скорости продукции на вкладыше. Вкладыши можно получить у Вашего акустика.

- Удалите старый вкладыш потянув его от конца звуковой трубки.
- Чистыми пальцами наденьте вкладыш на трубку так далеко, как только возможно.

При правильном расположении вкладыш касается пластикового круга, расположенного вокруг звуковой трубки.

Предостережения

Если вкладыш недостаточно плотно закреплен, он может упасть в слуховой проход.

Если это случилось, обратитесь немедленно к врачу.

Замена звуковой трубки Спиралфлекс

Если звуковая трубка становится

бесцветной, твердой или хрупкой, она должна быть немедленно заменена.

- Держите аппарат за адаптер и возьмите трубку вблизи коннектора.
- Потяните с усилием, чтобы удалить старую трубку.
- Присоедините новую трубку, с усилием вставив ее в коннектор.

Избегайте перенагревания, влаги и химического воздействия

- Не подвергайте слуховой аппарат воздействию повышенной температуры, оставив его в машине, около радиатора и пр.
- Избегайте попадания аппарата во влажную среду, под душ, сильный дождь и пр.
- Никогда не пытайтесь высушить аппарат с помощью фена, микроволновой печи и пр.
- Снимите аппарат перед использованием крема после бритья, лака для волос, масел, парфюмерии, средств от комаров, лосьонов и пр. Высушите волосы перед использованием слухового аппарата.
- Храните аппарат в коробке, чтобы защитить его от повреждений, когда вы им не пользуетесь.

Слуховой аппарат не восстанавливает прежний слух. Он усиливает громкость звуков и помогает получить максимальную возможность использовать остаточный слух. Несмотря на очевидные положительные результаты сразу от начала использования слухового аппарата, часто требуется несколько недель для Вашего мозга, чтобы адаптироваться к новым звукам.

Следующие советы помогут Вам адаптироваться к пользованию слуховым аппаратом.

Если у Вас есть проблемы в настройке, проконсультируйтесь со специалистом по слуховым аппаратам.

Начало использования

- Носите Ваш слуховой аппарат дома в тихой обстановке. Беседуйте с одним человеком или слушайте программу новостей по ТВ.
- Вы получите больше преимуществ от аппарата, если будете им пользоваться целый день. Увеличивайте время пользования аппаратом каждый день, пока не почувствуете комфортность в использовании несколько часов в день.
- Вы можете заметить, что звук Вашего собственного голоса громче. Если голоса окружающих людей на уровне комфорта, постарайтесь говорить несколько тише.
- Такие звуки, как звуки шагов, щебетание птиц, шуршание бумаги и пр. могут сначала показаться слишком громкими, т.к., возможно Вы их долго не слышали. Скоро они ослабеют и перейдут на задний фон.

Посещение ресторана

- Начните с тихого ресторана (без музыки или представления)
- Попросите столик вдали от кухни или других шумных мест
- Беседа будет проще в маленькой группе

В машине

- Займите место в машине так, чтобы лучшее слышащее ухо было направлено к центру машины.
- Выключите радио.

- Держите окна закрытыми, чтобы уменьшить шум транспорта, дороги и шум ветра.

Посещение театра, концертов, лекций и пр.

- Спросите, установлена ли система индукционной катушки. Если нет, спросите место, чтобы сидеть впереди, напротив.
- Старайтесь занять место, чтобы лучше слышащее ухо было ближе к источнику звука.
- Первоначально, ознакомьтесь с программой, чтобы легче было следить за ходом действия.

На работе

- Проинформируйте сотрудников о Вашем снижении слуха.
- Если Вы слышите только часть беседы, повторите, что Вы слышали и спросите о неслышанной информации.
- Держите телефон вблизи выхода микрофона Вашего слухового аппарата. Если он начинает свистеть, отодвиньте телефон на некоторое расстояние.
- Если голоса по телефону несколько тихие или мешает окружающий шум, попробуйте телефонной катушкой (внимание, не все телефоны могут быть использованы с телефонной катушкой).
- При использовании телефона, держите телефон за ухом, рядом со слуховым аппаратом для лучшего восприятия.
- Мобильные телефоны могут вызывать искажения с телефонной катушкой. В этом случае лучше прослушивать через обычный режим микрофона.
- Перед использованием мобильного телефона попробуйте его с Вашим слуховым аппаратом.
- Пациентам с большей степенью потери слуха может быть необходим регулятор громкости на телефоне.

Пользование телефоном

Охрана окружающей среды

Аппараты содержат электронные компоненты. При их утилизации следует придерживаться директивы 2002/96/ЕС по использованию электрических и электронных устройств. Не выбрасывайте аппараты или батареи с домашним мусором, это помогает охранять окружающую среду. Утилизируйте использованные аппараты и батареи согласно правилам, предусмотренным в Вашем регионе, или возвращайте их Вашему специалисту по слуховым аппаратам.

Сертификат соответствия

Ваш слуховой аппарат удовлетворяет большинству строгих Стандартов по Международной Электромагнитной Совместимости.

В связи с небольшим размером аппарата всю соответствующую информацию Вы найдете в данной брошюре.

Электромагнитные Помехи

Ваш слуховой аппарат тщательно тестирован по поводу помех, согласно международным стандартам. Тем не менее, новые технологические разработки постоянно дают новые продукты и некоторые могут производить электромагнитное излучение, вызывающее непредвиденные взаимодействия со слуховым аппаратом. Индукция кухонных приборов, системы охраны магазинов, мобильные телефоны, факсы, ПК, рентгеновское излучение, компьютерные томографы, и пр.

Сотовые телефоны и совместимость со слуховыми аппаратами

Некоторые пользователи слуховых аппаратов сообщают о гудящих звуках в аппаратах при использовании сотовых телефонов, показывающих, что сотовые телефоны и слуховые аппараты могут быть несовместимы.

Совместимость определенного слухового аппарата с сотовым телефоном можно предположить, сложив степень защиты слухового аппарата со степенью излучения сотового телефона (ANSI C63.19-2006 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communication Devices and Hearing Aids).

Например сумма степени слухового аппарата 2 (M2/T2) и телефона со степенью 3 (M3/T3) дает результат в комбинированной степени 5. Согласно стандарту, любая комбинированная степень, равная как минимум 5, позволяет нормальное использование, а комбинированная степень 6 или более означает "великолепное восприятие".

Защита Вашего слухового аппарата, как минимум M2/T2. Измерения оборудования, категории и система классификации основана на максимальной информации, полученной от Бернафона.

Международная гарантия

Слуховые аппараты Бернафон имеют гарантию на материал и технологию производства.

Гарантия распространяется только на слуховой аппарат, но не на аксессуары, такие как батареи, трубки, вкладыши и т.д.

Гарантийный ремонт не производится, если поломка наступила в результате неправильного обращения или ремонта аппарата. Гарантийный ремонт не производится, если поломка наступила в результате того, что неспециалист пытался открывать и чинить аппарат.

Обратите внимание, чтобы Ваш гарантийный талон был правильно заполнен.

Аксессуары

Бернафон предлагает большое количество аксессуаров в опции, которые могут улучшить работу вашей слуховой системы. Возможны следующие аксессуары:

- Набор для чистки и сушки

Для более полной информации об аксессуарах, пожалуйста, свяжитесь с Вашим специалистом по слуховым аппаратам.

Общие предостережения и Безопасность использования

Неправильное использование слуховых аппаратов и батареек может привести к внезапному длительному снижению слуха, повреждению.

Внимательно ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности перед использованием слуховых аппаратов.

- Вы должны использовать слуховой аппарат только таким образом, как Вам его настроил специалист-акустик или врач-сурдолог. Неправильное использование может привести к внезапному и длительному снижению слуха.
- Слуховые аппараты не восстанавливают естественный слух и не могут предотвратить дальнейшее снижение слуха, вызванное органическими причинами.
- Никогда не позволяйте другим лицам использовать Ваши слуховые аппараты, потому что они настроены для Вашей потери слуха и могут ухудшить слух другого человека.
- Будьте внимательны: удар по уху с надетым слуховым аппаратом может привести к серьезным повреждениям. Избегайте использования аппарата при контактных видах спорта (регби и др.).
- Учтите, что использование слухового аппарата может вызвать образование серной пробки в слуховом канале, это может потребовать ее удаления специалистом.
- В редких случаях слуховой аппарат или вкладыш может вызвать выделения из уха или аллергическую реакцию. Обратитесь немедленно к специалисту, если это произошло.
- Вкладыш – индивидуальный продукт. Если Вы испытываете дискомфорт или раздражение кожи слухового прохода, пожалуйста, немедленно обратитесь к специалисту для модификации вкладыша в месте раздражения.
- Слуховые аппараты, запасные части, батареи должны находиться вне пределов досягаемости людей, которые их могут проглотить или нанести себе повреждение другим способом.
- Храните батареи вне пределов досягаемости детей, душевнобольных людей и домашних животных.
- Регулярно очищайте Ваши аппараты и их части специальными средствами, рекомендованными Вашим специалистом. Микроорганизмы, остающиеся на аппарате, могут вызвать раздражение кожи.
- Будьте внимательны, жидкость, вытекающая из батарей, опасна для здоровья.
- Никогда не пытайтесь перезарядить одноразовые батареи.
- Не меняйте батарею и не настраивайте регуляторы вблизи детей или душевнобольных людей.
- Никогда не берите слуховой аппарат или батареи в рот, Вы их можете легко проглотить.
- Храните батареи отдельно от медикаментов, их легко перепутать с таблетками.
- Если батареи или аппараты были проглочены, следует немедленно обратиться к врачу.
- Обратите внимание, аппарат может прекратить функционировать без предупреждения. Всегда помните об этом при дорожном движении, в ситуациях, зависящих от предупредительных сигналов.
- Звуки дорожного движения или предупредительные сигналы могут передаваться тише, если они попадают на направленный микрофон сзади Вас.
- Никогда не вставляйте инструменты очистки в отверстия выхода звука и микрофона. Это может повредить слуховой аппарат.

Предупреждение для специалистов и покупателей

Особенную осторожность нужно проявлять при настройке и использовании слухового аппарата с максимальным УЗД 132 дБ (IEC 711 / IEC 60318-4), может быть риск повреждения остатков слуха у пользователя слуховыми аппаратами.

Комментарии

Общие проблемы и их решение

Проблемы Возможная причина

Аппарат свистит или скрипит

Аппарат вставлен неправильно Ушная сера собралась в слуховом проходе

Может быть слишком мал индивидуальный вкладыш

Может быть расщелина в трубке или она расположена неправильно

Нет усиления,

Недостаточное усиление, или жужжащие звуки

Инструмент может быть не включен Разряженная батарея или бата

рея вставлена неправильно Уровень громкости слишком тихий

Аппарат переключен в положение телефонной катушки

Ушная сера собралась в слуховом проходе

Контакты батарей грязные или коррозированные

Может быть закрыто отверстие для выхода звука

Решение

Снова оденьте слуховой аппарат

Проконсультируйтесь с Вашим акустиком или врачом

Проконсультируйтесь с Вашим акустиком

Проконсультируйтесь с Вашим акустиком

Проверьте батарейный отсек, закрыт ли он полностью
Вставьте свежую батарею
Увеличьте громкость аппарата с помощью регулятора громкости или дистанционным управлением
Убедитесь, что Вы находитесь в нужной Вам программе
Проконсультируйтесь с Вашим акустиком или врачом
Откройте и закройте батарейный отсек несколько раз или осторожно вытрите батарейные контакты сухой ваткой
Проверьте звуковую трубку и вкладыш

Проблемы Возможная причина

Может быть закрыто отверстие микрофона
Возможно у Вас произошло снижение слуха
Жужжащий шум, затихающий, слабый или звук лодочного мотора
Батарейные контакты могут быть грязными или окисленными
Влага в слуховом аппарате Слабая батарея Аппарат периодически переключается с ВКЛ в Выкл
Слабая батарея

Решение

Проконсультируйтесь с Вашим акустиком, Сами старайтесь не чистить
Проконсультируйтесь с Вашим акустиком
Откройте и закройте батарейный отсек несколько раз или осторожно вытрите батарейные контакты сухой ваткой
Положите аппарат в высушивающий резервуар. Первоначально удалите батарею. Проконсультируйтесь с Вашим акустиком.
Вставьте новую батарею

Сертификат происхождения для Европы

Данный прибор согласуется с требованиями, Директивы 93/42/ЕЕС, СЕ о медицинских приборах, МДД. Это сертифицировано следующей маркировкой:

Сертификат происхождения можно запросить:

Бернафон АГ
Моргенштрассе 131
СХ 3018
Берн
Швейцария

Комментарии

Сервис

Если ни одно из действий, описанных на данных страницах, не решает проблему, проконсультируйтесь с Вашим акустиком.

Не пытайтесь ремонтировать слуховой аппарат сами.

Печать и адрес акустической фирмы:

08.10/BAG/105347/RU/subject to change

Производитель
Бернафон АГ
Моргенштрассе 131
3018 Берн
Швейцария

Тел: +41 31 998 15 15
Факс: +41 31 998 15 90

www.bernafon.ru
www.bernafon.com

Для более полной информации о
слуховом слухе и тугоухости ____