

Notariat Leonberg B2

Notar Weidenmann

Bahnhofstraße 57 ♦ 71229 Leonberg
Tel.: 07152/93484 ♦ Fax: 07152/934888



Beglaubigte Abschrift

Die Abschrift stimmt mit der Urschrift überein.

Leonberg, den 17.02.2017

Weidenmann
Notar



Unser AZ: B2 UZ 222 / 2017/
Ihr AZ:

Notariat Leonberg B2* Bahnhofstraße 57 * 71229 Leonberg

Bio3 Implants GmbH
Carl-Zeiss-Straße 4

71229 Leonberg



Boris Simanovsky
CEO

Bio3 Implants GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 4,
Leonberg 71229,
Germany

BIO3 IMPLANTS GmbH
Carl-Zeiss-Str. 4
71229 Leonberg, Germany
tel. +49 (7152) 3534221

Date: 07 February 2017

To whom it may concern,

STATEMENT

FOR REGISTRATION PURPOSE IN RUSSIA.

INSTRUCTION FOR USE

Dental implants system Bio3 Implants with accessories

We, Bio3 Implants GmbH, Carl-Zeiss-Straße 4, Leonberg 71229, Germany, hereby state that the attached Instruction for Use is true.

Июнь 2016 года Bio3 Implants GmbH / «Био3 Имплантс ГмбХ»

Нижеприведенная Инструкция по применению составлена для предоставления информации в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации.

Сведения предоставляются в необходимом объеме в соответствии с Правилами регистрации медицинского изделия (Постановление Правительства РФ № 1416 от 27 декабря 2012).

Более подробную информацию о продукции компании Bio3 Implants GmbH Вы можете получить у производителя или уполномоченного представителя производителя.

www.bio3-implants.com

Содержание

1.	Наименование медицинского изделия	4
2.	Описание, показания/назначение, область применения, принцип действия и установка имплантата, противопоказания	7
2.1.	Описание.....	7
2.2.	Показания/назначение.....	8
2.3.	Область применения	9
2.4.	Принцип действия и установка имплантата.....	9
2.5.	Противопоказания	21
	Важные предупреждения	21
3.	Стерилизация, дезинфекция, срок годности	22
4.	Меры предосторожности при проведении хирургических вмешательств	26
5.	Меры предосторожности при проведении реставрации	26
6.	Возможные неблагоприятные последствия	27
7.	Требования к техническому обслуживанию	27
8.	Характеристика материалов изготовления с указанием типа контакта	27
9.	Данные о лекарственных средствах, содержащихся в медицинском изделии	30
10.	Данные о клетках, тканях, органах животных или человека, входящих в состав медицинского изделия.....	30
11.	Комплектация поставки	31
12.	Сведения об упаковке.....	31
13.	Условия транспортировки, хранения, эксплуатации и утилизации.....	38
14.	Сведения о маркировке	39
15.	Технические характеристики	116
16.	Гарантии производителя и рекламации	221
17.	Информация о производителе медицинского изделия. Уполномоченный представитель производителя на территории РФ	222

1. Наименование медицинского изделия

Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями:

I. Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants в составе:

1. Имплантаты:

- Адванс S (узкая платформа) диаметром: 3.3 мм, 3.8 мм, длиной: 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм;
- Адванс W (широкая платформа) диаметром: 4.2 мм, 4.6 мм, 5 мм, 5.5 мм, длиной: 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм;
- Прогрессив S (узкая платформа) диаметром: 3.3 мм, 3.8 мм, длиной: 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм;
- Прогрессив W (широкая платформа) диаметром: 4.2 мм, 5 мм, длиной: 8 мм, 10 мм, 11.5 мм, 13 мм;

2. Абатменты, варианты исполнения:

- прямой анатомический W (широкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- прямой анатомический S (узкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- прямой W (широкая платформа) длиной: 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 13 мм;
- прямой S (узкая платформа) длиной: 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 13 мм;
- угловой анатомический W (широкая платформа): 15 градусов, 25 градусов;
- угловой анатомический W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- угловой анатомический S (узкая платформа): 15 градусов, 25 градусов;
- угловой анатомический S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- угловой анатомический W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- угловой анатомический S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- угловой анатомический W (широкая платформа): 35 градусов, 45 градусов;
- угловой анатомический S (узкая платформа): 35 градусов, 45 градусов;
- эстетический антиротационный W (широкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- эстетический антиротационный S (узкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- прямой для формообразования W (широкая платформа);
- прямой для формообразования S (узкая платформа);
- угловой для формообразования W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- угловой для формообразования S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- угловой для формообразования W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- угловой для формообразования S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- для мультиюнита для цементной фиксации;
- эстетический для мультиюнита;
- шаровидный для мультиюнита высотой: 1.25 мм, 2.25 мм, 3.25 мм;
- циркониевый прямой на титановой основе W (широкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- циркониевый прямой на титановой основе S (узкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- циркониевый угловой на титановой основе W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- циркониевый угловой на титановой основе S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;

- временный прямой W (широкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- временный прямой S (узкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- временный угловой W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- временный угловой S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- временный угловой W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- временный угловой S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- шаровидный W (широкая платформа) высотой: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм;
- шаровидный S (узкая платформа) высотой: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм;
- титановый для CAD/CAM W (широкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- титановый для CAD/CAM S (узкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- титановый с пластиковым колпачком W (широкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- титановый с пластиковым колпачком S (узкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- титановый база для мультиюнита W (широкая платформа) 17 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- титановый база для мультиюнита S (узкая платформа) 17 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- титановый база для мультиюнита **W** (широкая платформа) 30 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- титановый база для мультиюнита S (узкая платформа) 30 градусов, с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- прямой для резцов S (узкая платформа) длиной: 8.5 мм, 10 мм;
- прямой для резцов **W** (широкая платформа) длиной: 8.5 мм, 10 мм;
- прямой для клыков S (узкая платформа) длиной: 9 мм, 10.5 мм;
- прямой для клыков **W** (широкая платформа) длиной: 9 мм, 10.5 мм;
- прямой для премоляров S (узкая платформа) длиной: 9 мм, 10.5 мм;
- прямой для премоляров **W** (широкая платформа) длиной: 9 мм, 10.5 мм;
- прямой для моляров S (узкая платформа) длиной: 7.5 мм, 8.5 мм;
- прямой для моляров **W** (широкая платформа) длиной: 7.5 мм, 8.5 мм;
- угловой для резцов S (узкая платформа) 15 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для резцов S (узкая платформа) 25 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для резцов **W** (широкая платформа) 15 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для резцов **W** (широкая платформа) 25 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для клыков S (узкая платформа) 15 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для клыков S (узкая платформа) 25 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для клыков **W** (широкая платформа) 15 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для клыков **W** (широкая платформа) 25 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для премоляров S (узкая платформа) 15 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для премоляров S (узкая платформа) 25 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для премоляров **W** (широкая платформа) 15 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для премоляров **W** (широкая платформа) 25 градусов, длиной: 9 мм, 10 мм;
- угловой для моляров S (узкая платформа) 15 градусов, длиной: 8 мм, 9 мм;
- угловой для моляров S (узкая платформа) 25 градусов, длиной: 8 мм, 9 мм;
- угловой для моляров **W** (широкая платформа) 15 градусов, длиной: 8 мм, 9 мм;
- угловой для моляров **W** (широкая платформа) 25 градусов, длиной: 8 мм, 9 мм;
- прямой анатомический широкий S (узкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- прямой анатомический широкий W (широкая платформа) с высотой уступа: 1 мм, 2 мм, 3 мм;
- прямой широкий W (широкая платформа) длиной 9 мм;
- прямой широкий S (узкая платформа) длиной 9 мм.

3. Локаторы, варианты исполнения:

- для мультиюнита высотой: 2 мм, 3 мм, 4 мм;
- W (широкая платформа) высотой: 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм;
- S (узкая платформа) высотой: 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм.

4. Абатменты лечебные для десны (формирователь десны), варианты исполнения:

- W (широкая платформа) высотой: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм;
- S (узкая платформа) высотой: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм;
- для эстетического абатмента;
- для резцов S (узкая платформа) длиной: 2.25 мм, 4 мм;
- для резцов W (широкая платформа) длиной: 2.25 мм, 4 мм;
- для клыков S (узкая платформа) длиной: 2.25 мм, 4 мм;
- для клыков W (широкая платформа) длиной: 2.25 мм, 4 мм;
- для премоляров S (узкая платформа) длиной: 2.25 мм, 4 мм;
- для премоляров W (широкая платформа) длиной: 2.25 мм, 4 мм;
- для моляров S (узкая платформа) длиной: 2.25 мм, 4 мм;
- для моляров W (широкая платформа) длиной: 2.25 мм, 4 мм;
- широкий W (широкая платформа) высотой: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм;
- широкий S (узкая платформа) высотой: 3 мм, 4 мм, 5 мм.

5. Аналоги имплантата, варианты исполнения:

- W (широкая платформа);
- S (узкая платформа);
- для эстетического абатмента;
- для мультиюнита.

6. Трансферы оттисковые, варианты исполнения:

- для открытой ложки W (широкая платформа);
- для открытой ложки S (узкая платформа);
- для закрытой ложки W (широкая платформа);
- для закрытой ложки S (узкая платформа);
- для эстетического абатмента;
- пластиковый;
- для мультиюнита.

7. Винты для абатмента, варианты исполнения:

- широкая платформа;
- узкая платформа;
- для эстетического.

II. Принадлежности:

1. Колпачок пластиковый для абатмента титанового для CAD/CAM.
2. Колпачок пластиковый для абатмента эстетического.
3. Колпачок для локатора металлический.
4. Колпачок для локатора стандартный.
5. Колпачок для локатора мягкий.
6. Колпачок для локатора жесткий.
7. Диск защитный.

8. Колпачок для шаровидного абатмента металлический.
9. Колпачок для шаровидного абатмента стандартный.
10. Колпачок для шаровидного абатмента мягкий.
11. Колпачок для шаровидного абатмента жесткий.
12. Сканмаркер для CAD/CAM (широкая платформа).
13. Сканмаркер для CAD/CAM (узкая платформа).
14. Манжетка титановая для абатмента эстетического.
15. Колпачок временный для абатмента эстетического.
16. Манжетка пластиковая для абатмента эстетического.
17. Манжетка пластиковая без шестигранника для абатмента эстетического.

2. Описание, показания/назначение, область применения, принцип действия и установка имплантата, противопоказания

2.1. Описание

Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями (далее по тексту – «Система Bio3 Implants») включает в себя: имплантаты, абатменты, локаторы, абатменты лечебные для десны (формирователи десны), аналоги имплантата, трансферы оттисковые, винты для абатмента и принадлежности, такие как: колпачки, диски защитные, сканмаркеры для CAD/CAM, манжетки. Все компоненты системы используются в совокупности между собой для создания ортопедической конструкции с целью восстановления жевательной функции пациента.

Имплантаты Адванс – имплантаты спиралевидной формы с классической, треугольной формой резьбы. Были разработаны для лучшей первичной стабильности. Используются для различных типов кости.

Имплантаты Прогрессив являются имплантатами с динамичной резьбой для лучшей первичной стабильности, поэтому рекомендуется к установке в II, III и IV типах костной ткани. Точный дизайн апикальной части имплантата предотвращает повреждение анатомической структуры кости и дает возможность врачу-имплантологу сократить время хирургического этапа имплантации.

Имплантаты Адванс и Прогрессив подходят для зон с недостатком костной ткани, потому что их размеры и область позволяют быстро восстанавливать исходную устойчивость в таких зонах. Апикальная часть имеет сужение с узкой резьбой, которое уменьшает напряжение в надкостнице и предотвращает дальнейшую атрофию костей. Они используются для всех типов костей челюсти пациента. Поверхность имплантатов активна и гидрофильна. Увеличенная площадь поверхности обеспечивает идеальное соединение между костью и поверхностью имплантата. Благодаря этому преимуществу имплантат имеет высокий уровень первичной стабильности и быструю остеоинтеграцию и может быть использован в одноэтапном или двухэтапном протоколе.

Конусное тело имплантата повторяет форму сверла для более точного костного прилегания.

Конусность тела имплантата улучшает свойство самонарезания. Атрауматичный кончик имплантата предотвращает анатомические повреждения при синус-лифтинге.

Абатмент - это супраструктура, переходник между имплантатом, установленным в

костной ткани и зубным протезом, который находится в ротовой полости. Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост. Абатменты отличаются друг от друга составом материала, формой и типом, и используются, исходя из анатомических особенностей пациента. Выбор наиболее подходящей конструкции абатмента зависит от целого ряда критериев, включая толщину тканей десны, эстетические требования, особенности фиксации протеза и др.

Локатор используется при съемном или условно-съемном протезировании на имплантатах, позволяет решить основную проблему съемного протезирования, а именно обеспечить надежное крепление съемных и условно-съемных конструкций на имплантатах. Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на локатор ставится съемная или условно-съемная конструкция.

Абатмент лечебный (формирователь десны) - представляет собой специальную винтообразную конструкцию, оснащенную цилиндрической головкой, с различной высотой и диаметром. Устанавливается на имплантате и остается в нем до тех пор, пока не будет сформирован эстетичный и естественный вид десны перед установкой ортопедической конструкции.

Аналоги имплантата полностью повторяют форму тела имплантата, но без резьбы. Используются для изготовления модели и дальнейшей ортопедической конструкции (перенос клинической ситуации на модель – используется при изготовлении лабораторных моделей с целью передачи формы и положения платформы имплантата), в результате чего значительно повышается точность операции и снижается операционная травма.

Трансферы оттисковые предназначены для снятия оттиска с имплантата - позволяют переносить точное положение имплантата в оттисковый материал для точного позиционирования аналога имплантата, для последующего изготовления модели и ортопедической конструкции (переходной элемент, используемый для передачи полного соответствия положения имплантата в полости рта на модель).

Винт для абатмента представляет собой резьбовой стержень, выполненный с возможностью винтовой фиксации с внутренней резьбой указанной полости имплантата и предназначенный для удерживания внутри имплантата.

Принадлежности служат для временной защиты компонентов системы.

2.2. Показания/назначение

Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants предназначена для хирургического размещения в альвеолярной и/или базальной кости нижней или верхней челюсти для обеспечения поддержки (опоры) и ретенции зубного протеза, для постоянной или временной фиксации мостовидных конструкций, одного зуба или протезов. Система Bio3 Implants служит в качестве опоры для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функции пациента. Имплантаты можно устанавливать как единичную опору под коронку, так и в случае с установкой множества имплантатов для последующего протезирования мостовидными протезами или множественными индивидуальными коронками. Супраструктуры (другие компоненты системы) фиксируются на имплантатах методом цементной или винтовой фиксации. Все компоненты системы и принадлежности используются в совокупности между собой для создания ортопедической конструкции с целью восстановления жевательной функции пациента. Выбор вариантов компонентов осуществляет лечащий врач.

2.3. Область применения

Система Bio3 Implants предназначена для установки квалифицированными стоматологами в специализированных медицинских учреждениях, при соблюдении всех соответствующих санитарных норм и стандартов.

Система Bio3 Implants может быть установлена сразу при условии, что удовлетворены начальные требования устойчивости.

2.4. Принцип действия и установка имплантата

2.4.1. Принцип действия

Все компоненты системы используются в совокупности между собой для создания ортопедической конструкции с целью восстановления жевательной функции пациента. Выбор вариантов компонентов системы осуществляет лечащий врач.

Конусное соединение с внутренним шестигранником обеспечивает прецизионное соединение абатмента с имплантатом, что в свою очередь благоприятно влияет на процесс стабильности постоянных ортопедических конструкций и долговечности любого вида протезов. Конус обеспечивает это соединение идеальным прилеганием и герметичностью.

Принцип действия принадлежностей:

Колпачки фиксируются на абатменте до установки протеза.

Для кратковременной защиты абатмента применяют диски.

Сканмаркеры для CAD/CAM применяют для изготовления индивидуальных конструкций.

Манжетки используются для временной защиты абатмента.

Врач в зависимости от процедуры может выбирать и варьировать компоненты системы.

Также см. пункт «Технические характеристики».


2.4.2. Установка имплантата

1. Выберите размер имплантата


2. Подготовьте костное ложе для имплантата (см. ниже рекомендованную скорость сверления, где D1 – первый тип кости, D2 – второй тип кости, D3 – третий тип кости, D4 – четвертый тип кости).

**** только при первом и втором типе кости**


Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.3 мм

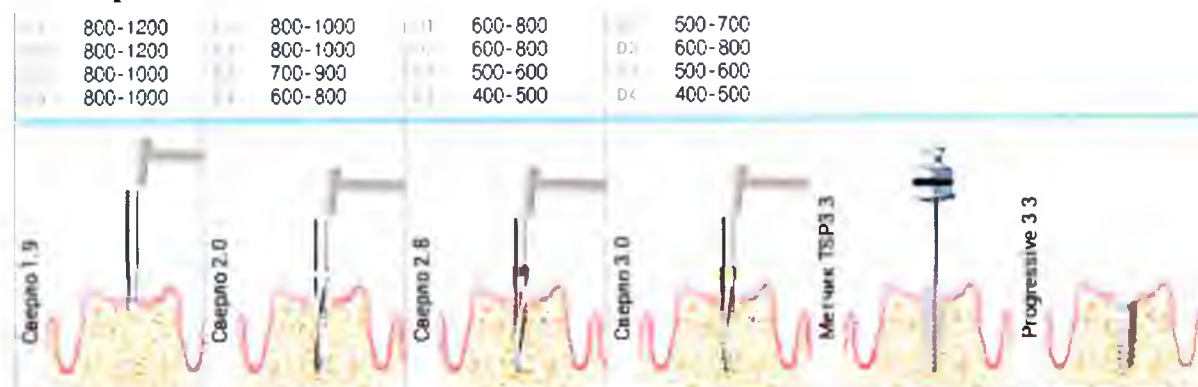


Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм

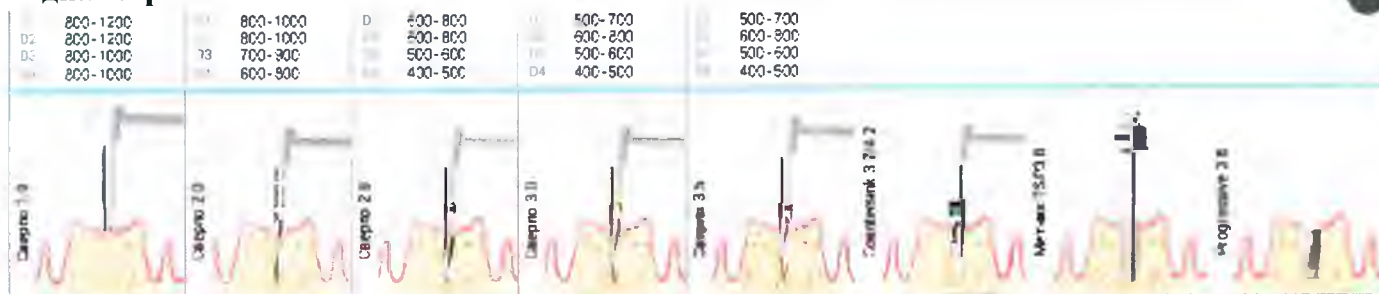


Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм

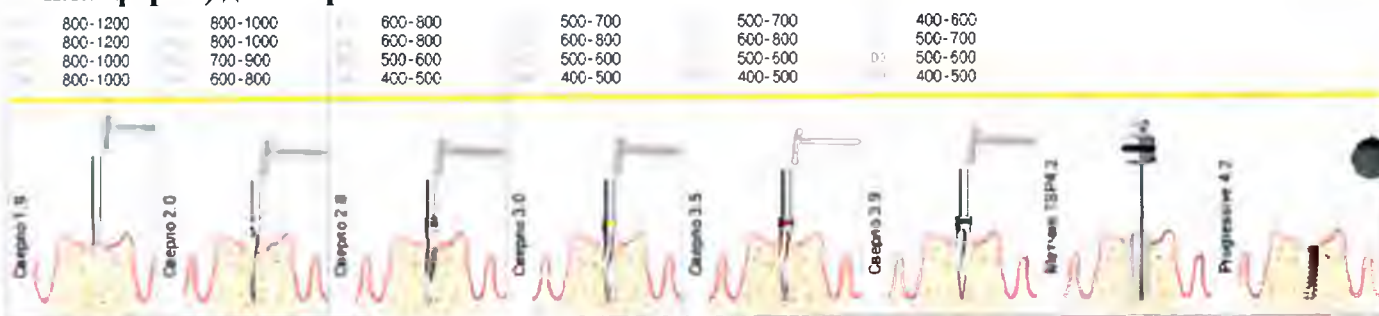


Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 5 мм

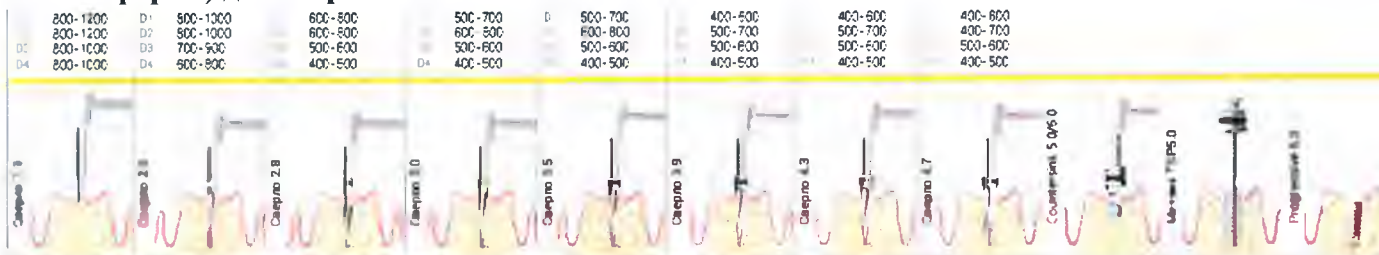

Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Адванс S (узкая платформа) диаметром 3.3 мм

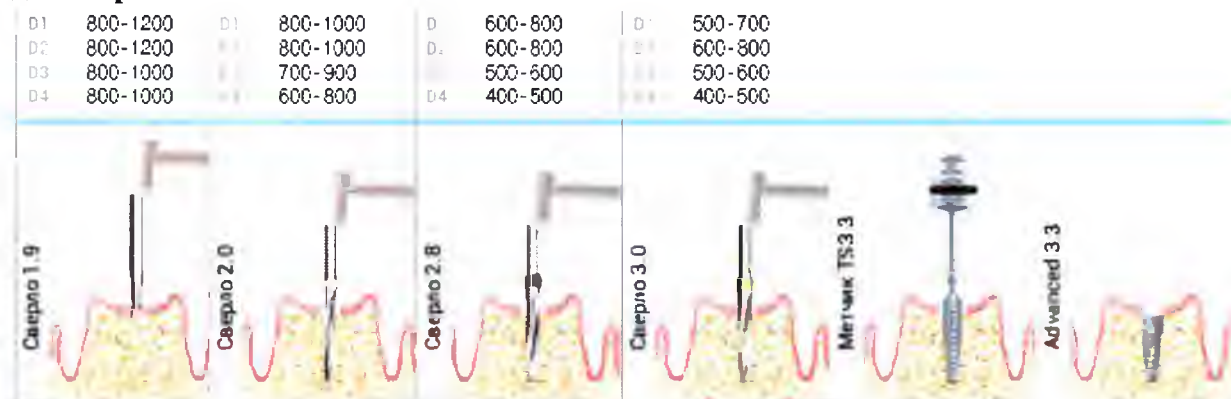

Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Адванс S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм

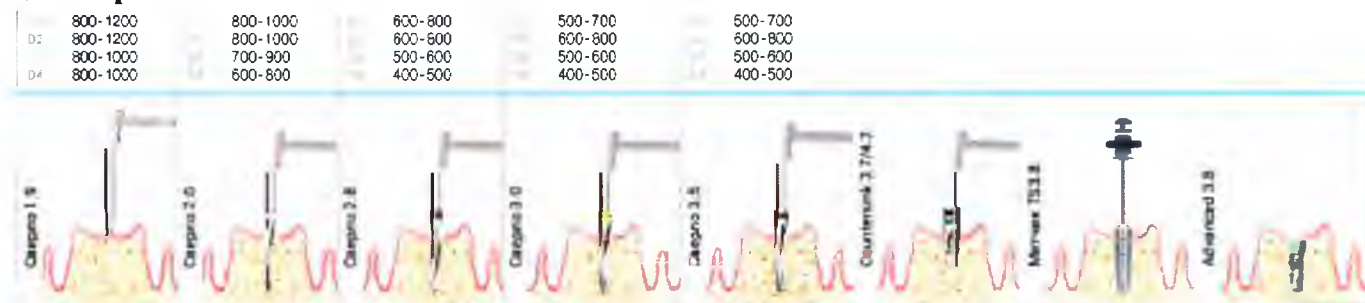


Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм




Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Адванс W (широкая платформа)
диаметром 4.6 мм



Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Адванс W (широкая платформа)
диаметром 5 мм

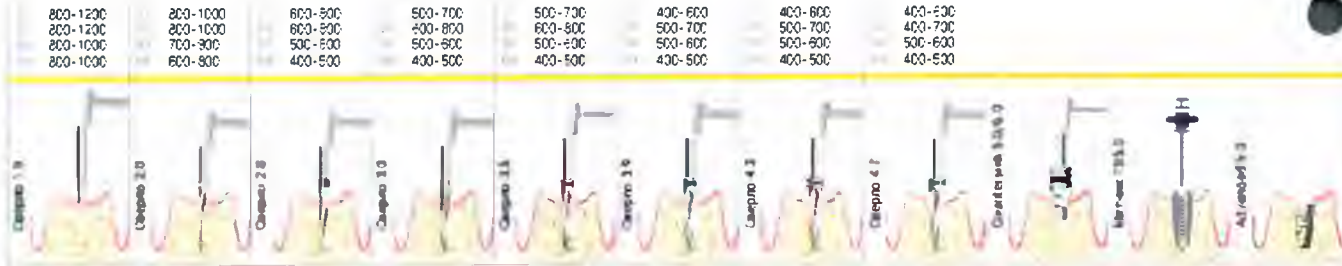

Рекомендованная скорость сверления для Имплантата Адванс W (широкая платформа) диаметром 5.5 мм

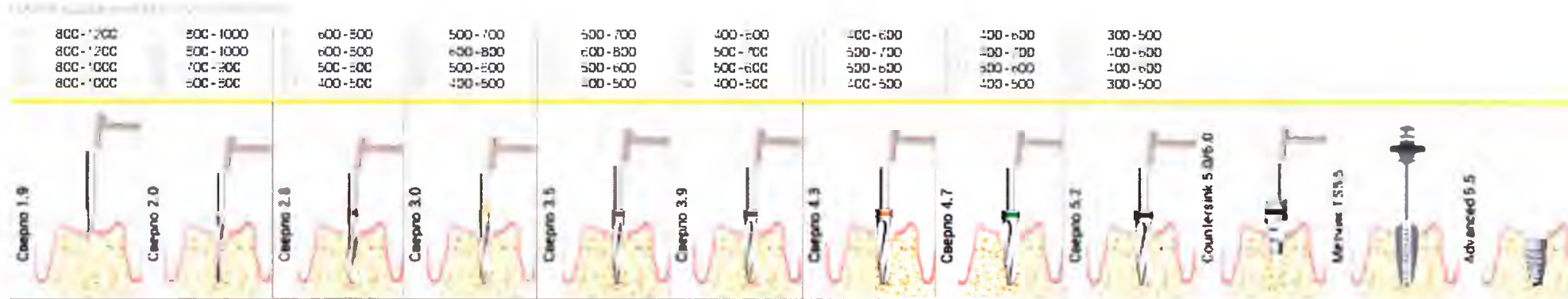


3. После подготовки ложа вскройте упаковку с имплантатом.
4. Распечатайте внешний блистер.




5. Извлеките флакон с имплантатом из упаковки, аккуратно перевернув блистер вниз
6. Извлеките имплантат из флакона большим и указательным пальцами рабочей руки за головку транспортного винта (предварительно зафиксирован в имплантате) или при помощи инструмента (ключ-трещотка*, динамометрический ключ*, или хирургический наконечник*)

Пример извлечения руками

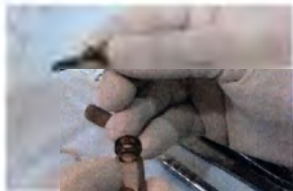

Пример извлечения ключом-трещоткой*

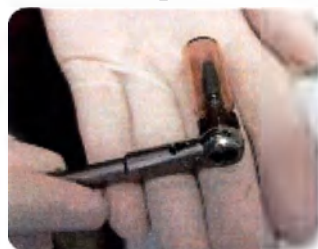

7. Подготовив костное ложе для имплантата, произведите первичное наживление имплантата в остеотомическое отверстие. Извлеките транспортный винт. Установите соответствующий имплантовод* согласно платформе. Для дальнейшей процедуры установки имплантата вы можете использовать либо физиодиспенсер* на низкой скорости (не выше 15 об/мин.), ключ – трещотку* или динамометрический ключ*. Установите имплантат на полную глубину, не превышая усилие 35-70 Н/см (в зависимости от типа кости). Следите за тем, чтобы имплантовод* находился на одной оси с имплантатом во время установки. Извлеките имплантовод*, слегка потянув за него.

или

Позиционирование и затягивание вручную: установите динамометрический ключ* на имплантовод* и установите имплантат на соответствующую глубину остеотомического отверстия.

8. После установки имплантата извлеките ортопедической отверткой* заглушку (поставляется в упаковке с имплантатом) и вкрутите ее в имплантат с помощью ключа-трещотки* или динамометрического ключа*. Убедитесь, что заглушка установлена полностью, чтобы избежать вращение кости между заглушкой и внутренней платформой имплантата. Окончательное затягивание необходимо выполнить вручную.

9. Двухэтапная методика с отсроченной нагрузкой

9.1 Выполните разрез или воспользуйтесь мукотомом* для удаления мягких тканей чтобы раскрыть заглушку.

9.2 Извлеките заглушку из имплантата с помощью ортопедической отвертки*

9.3 Зафиксируйте абатмент лечебный для десны (формирователь десны) на имплантате с помощью ортопедической отвертки*.

10. Временный мостовидный протез с цементной фиксацией

10.1 Через 10-14 дней, после установки лечебного абатмента (формирователя десны) извлеките его при помощи ортопедической отвертки*

10.2 Установите абатменты на имплантаты и зафиксируйте с усилием не более 35 Н/см при помощи ортопедической отвертки* и динамометрического ключа*.

10.3 Выполните примерку пластиковых колпачков, они должны плотно фиксироваться на абатментах

10.4 Изготовьте временный мостовидный протез из пластмассы или композита по стандартной методике**. Если в лаборатории был изготовлен временный мостовидный протез, скорректируйте его и перебазировать на абатменты.

10.5 Выполните фиксацию на временный цемент.

Не используйте полиуретановый цемент для фиксации пластиковых колпачков, отверждения цемента не произойдет.

10.6 Излишки цемента удалить, избегайте попадания цемента на мягкие ткани.

11. Постоянные конструкции

11.1 Через 10-14 дней, после установки лечебного абатмента (формирователя десны) извлеките его при помощи ортопедической отвертки*

11.2 Выбор метода снятия слепка – открытой или закрытой ложки – осуществляется в зависимости от ситуации

11.2.1 Метод открытой ложки

Установить оттисковой трансфер для снятия слепка методом открытой ложки в имплантат и зафиксировать, вращая винт по часовой стрелке (усилием руки не более 10 Н/см) (инструмент: ортопедическая отвертка*). Проверить плотное прилегание слепочного трансфера (при необходимости сделать рентгеновский снимок). Используйте для снятия слепка индивидуальную или стандартную ложку*. Примерить ложку* и проверить подгонку. После застывания слепочного материала*(следуйте указаниям производителя) открутить винт против часовой стрелки и удалить его (инструмент: ортопедическая отвертка*). Удалить слепочную ложку* из полости рта пациента. Оттисковой трансфер для снятия слепка методом открытой ложки остается в слепке. Присоедините аналог имплантата к слепочному трансферу для открытой ложки и привинтите с помощью винта, вращая по часовой стрелке (усилием руки не более 10 Н/см) (инструмент: ортопедическая отвертка*). Проверьте, нет ли зазора в месте прилегания. Внимание: при завинчивании удерживайте аналог имплантата щипцами*, чтобы оттисковой трансфер не проворачивался в слепке. После застывания гипса (соблюдайте указания производителя) отвинтите винт против

часовой стрелки. Удалите винты и слепок (инструмент: ортопедическая отвертка*). Оттисковой трансфер для снятия слепка открытой ложкой останется в слепке.

11.2.2 Метод закрытой ложки

Прикрутить (по часовой стрелке) оттисковой трансфер для снятия слепка методом закрытой ложки к имплантату (усилием руки не более 10 Н/см) (инструмент: ортопедическая отвертка*). Проверить плотное прилегание слепочного трансфера (при необходимости сделать рентгеновский снимок). Используйте для снятия слепка индивидуальную или стандартную ложку*. Примерить ложку* и проверить подгонку. После застывания слепочного материала* (следуйте указаниям производителя) удалить слепочную ложку* из полости рта пациента. Оттисковой трансфер для снятия слепка методом закрытой ложки остается в полости рта пациента. Отвинтите против часовой стрелки оттисковой трансфер от имплантата и извлеките из полости рта пациента. Присоедините аналог имплантата со слепочным трансфером для закрытой ложки и привинтите, вращая по часовой стрелке (усилием руки не более 10 Н/см) (инструмент: ортопедическая отвертка*). Вправьте оттисковой трансфер в слепок. После застывания гипса (соблюдайте указания производителя) удалите слепок. Оттисковой трансфер для снятия слепка методом закрытой ложки останется на модели. Отвинтите оттисковой трансфер против часовой стрелки и удалите его (инструмент: ортопедическая отвертка*).



Метод снятия оттиска открытой ложкой



Извлечение заглушки из имплантата



Установка трансфера для открытой ложки



Трансферы прикручены

Оттисная масса



Открытая оттисная ложка



Готовый оттиск


Метод снятия оттиска закрытой ложкой



Извлечение заглушки



Установка трансферов для закрытой ложки

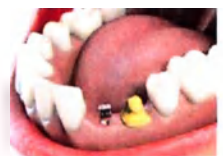

Трансферы
прикручены



Оттисная масса



Закрытая оттисная ложка



Готовый оттиск



Извлечение трансферов



Утановка трансферов в оттиске

12. Фиксация конструкции: Установите абатмент на имплантат. Затяните с помощью динамометрического ключа* с усилием не более 35 Н/см. Проверьте посадку конструкции и выполните цементную фиксацию*. Удалите излишки цемента по стандартному протоколу. Избегайте попадания цемента на мягкие ткани.



Извлечение заглушки



Установка абатментов



Прикручивание абатментов
винтом



Цементная фиксация
коронок



Установка компонентов системы

13. Абатменты титановые база для мультиюнита устанавливаются с помощью универсальной или ручной ортопедической отвертки*, используется для условно съемных, мостовидных и цементируемых конструкций. Мультиюнит позволяет провести реабилитацию на непараллельно установленных имплантатах, корректируя угол.

14. Абатмент титановый для CAD/CAM применяют при изготовлении любых ортопедических конструкций с повышенными эстетическими требованиями. Титановый абатмент должен в точности соответствовать выбранной имплантационной системе, а тело абатмента** (вторичная деталь) индивидуально фрезеруется из диоксида циркония по технологии CAD/CAM. Далее абатмент титановый вклеивается (цементируется) в индивидуальную вторичную часть** из диоксида циркония.

15. Абатмент титановый с пластиковым колпачком применяют для изготовления приклеиваемых индивидуальных коронок к стандартному основанию. Техник в лаборатории изготавливает гипсовую модель и прикручивает к ней абатмент титановый вместе с пластиковым колпачком. Техник в лаборатории моделирует на колпачке восковую модель будущей коронки (зуба). Смоделированную восковую модель вместе с колпачком техник снимает с титанового основания. Данная модель с колпачком передается в литейную лабораторию для отливки основания будущей коронки.

Принцип действия принадлежностей:

Колпачки фиксируются на абатменте до установки протеза.

Для кратковременной защиты абатмента применяют диски

Сканмаркеры для CAD/CAM применяют для изготовления индивидуальных конструкций

Манжетки используются для временной защиты абатмента

Стоматолог в зависимости от процедуры может выбирать и варьировать компоненты системы.

«*» - инструмент, не входящий в состав системы и приобретаемый пользователем отдельно.

«**» - не входят в состав системы, изготавливаются в лаборатории.

2.5. Противопоказания

В зависимости от общего состояния здоровья пациента, могут существовать противопоказания к установке системы Bio3 Implants.

К числу противопоказаний относятся следующие заболевания: не поддающийся лечению диабет, сосудистые заболевания, нарушение свертывания крови, нарушения метаболизма в костях, химиотерапия или лучевая терапия, метаболические или системные заболевания, вызванные ранами и (или) срастанием переломов, прием лекарственных препаратов, замедляющих или изменяющих процесс естественного восстановления кости, заболевания пациента, при которых он неспособен ежедневно поддерживать необходимый уровень гигиены полости рта, хроническое воспаление тканей периодонта, недостаток объема мягких тканей, общее неудовлетворительное состояние здоровья, психические заболевания, наркомания/алкоголизм, а также не поддающиеся лечению заболевания эндокринной системы.

К числу противопоказаний со стороны полости рта относятся следующие заболевания: не поддающиеся лечению функциональные привычки (например: бруксизм, сжимание зубов), недостаточная высота и (или) ширина кости, недостаточная межжюкклюзионная высота, инфекции полости рта, сухость слизистой оболочки рта – ксеростомия, несоблюдение пациентом гигиены полости рта.

Важные предупреждения

Подобное плановое лечение не рекомендуется применять для детей и подростков, у которых еще не произошло замыкание зоны роста эпифиза (не прекратился рост). При планировании лечения и определении места установки имплантатов необходимо принимать во внимание особые факторы. Неправильный выбор методики установки имплантата или протезирования может привести к повреждению имплантата и существенным потерям окружающей костной ткани.

Следует обратить особое внимание:

(1) Прежде чем приступать к хирургической имплантации, необходимо оценить следующие показатели: являются ли удовлетворительными количество и качество костной ткани, соблюдается ли надлежащая гигиена полости рта, а также нет ли других противопоказаний, перечисленных выше.

(2) Установка имплантата на глубину, превышающую пройденную сверлом, приводит к повреждению поверхности соприкасающейся с имплантоносителем внутри имплантата, самого имплантоносителя, или стенок канала при остеотомии, в результате ухудшается первичная стабильность имплантата.

(3) Физиологические и анатомические особенности могут оказывать отрицательное действие на качество стоматологических имплантатов. При чрезмерной нагрузке на имплантат или абатмент может возникнуть потеря костной массы, произойти поломка зубного имплантата или нарушение реставрации.

(4) При неправильном использовании небольших незакрепленных компонентов в полости рта пациента возникает риск аспирации.

(5) При нарушении орошения во время процесса препарирования костной ткани немедленно прекратите работу. Несоблюдение данного правила может привести к некрозу костной ткани и к нарушению процесса остеоинтеграции.

(6) Повторное использование одноразовых устройств может повредить устройство или привести к загрязнению. Поверхность имплантата должна быть целостной и не должна иметь повреждений. Запрещено использовать имплантат в случае если его поверхность имеет повреждения.

Поврежденные или удаленные хирургическим путем имплантаты не могут быть использованы повторно ни при каких обстоятельствах. Помните, при повторном

использовании (рестерилизации) имплантатов существует высокий риск возникновения тяжелой инфекции, заражения мягких тканей и кости, что может привести к тяжелым заболеваниям пациента.

(7) Период приживления имплантатов на верхней челюсти 3-6 недель, на нижней челюсти 2-4 недели, не рекомендуется немедленная нагрузка. Врач должен постоянно контролировать состояние пациента и проверять следующее: периимплантит, потери периимплантантной костной ткани, изменения реакции имплантата на перкуссию, либо определяемые рентгенографически изменения в костной ткани, с которой имплантат контактирует по длине (высоте). В случае подвижности имплантата или потере костной массы, которая составляет более 50%, необходимо проверить, не следует ли удалить имплантат. Если врач установил короткий имплантат, необходимо использовать двухэтапную методику имплантации, с более длительными периодами остеоинтеграции и шинированием короткого имплантата с дополнительным имплантатом и установкой имплантата максимального диаметра.

(8) Все инструменты* во время операции должны находиться в стерильной зоне (*инструменты поставляются отдельно от системы стоматологических имплантатов).

3. Стерилизация, дезинфекция, срок годности

Имплантаты стоматологические Bio3 Implants поставляются в стерильном виде и только для одноразового использования. Запрещено повторно использовать. Запрещено повторно стерилизовать. Запрещено подвергать вторичной переработке. Вторичная переработка может привести к нарушению стерильности, биосовместимости.

Имплантаты стоматологические Bio3 Implants стерилизуются гамма излучением (радиационная стерилизация). Доза излучения VDMax 22.5 доза стерилизации 4.9 +/-10% КГр.

Срок годности имплантатов стоматологических Bio3 Implants – 5 лет.

Срок службы Имплантатов стоматологических Bio3 Implants минимум 10 лет после имплантации пациентам. Эти данные основаны на мировом опыте и статистике.

Остальные компоненты системы стоматологической Bio3 Implants и принадлежности поставляются нестерильные, не имеют установленного срока годности. Срок службы минимум 10 лет.

Дезинфекция супраструктур:

Поместить в ультразвуковую ванную (ультразвуковая мойка (иногда называют ванной) представляет собой контейнер с крышкой, встроенным нагревательным элементом, источником ультразвука и отражателем. Внутри мойки имеется поддон для инструментов. Слив использованной воды происходит через шланг. Аппарат оснащён таймером и электронной системой контроля. Выпускаются ёмкости разных форм и размеров. Корпус мойки может быть выполнен из нержавеющей стали или из пластика)

супраструктуры, необходимые для дезинфекции.

Залить дезинфицирующим средством для обработки хирургических инструментов (например, Durr Dental ID 220).

Выставить таймер на УЗВ на 10 минут.

Включить процесс ультразвуковой очистки.

После окончания процесса (через 10 минут) оставить в ванной еще на 60 мин без ультразвуковых колебаний.

По истечению времени необходимо извлечь супраструктуры из дезинфицирующего раствора и промыть дистиллированной водой с использованием неабразивных щеток (по типу зубной щетки, мягкой или средней жесткости) (щетки обрабатываются в том же дезинфицирующем средстве).

Далее супраструктуры необходимо оставить на стерильной салфетке для испарения

воды с поверхности. Затем упаковать в крафт-пакет (например, Crosstex) и поместить в автоклав. Продолжительность стерилизации в автоклаве составляет 40 минут.

(Температура при которой проходит стерилизация супраструктур указана в Таблице 1)

После даем супраструктурам остыть естественным способом.

Таблица 1. Метод стерилизации / дезинфекции

Наименование	Метод стерилизации / дезинфекции
Имплантат Адванс S (узкая платформа), W (широкая платформа)	Стерилизуются гамма излучением (радиационная стерилизация)
Имплантат Прогрессив S (узкая платформа), W (широкая платформа)	Стерилизуются гамма излучением (радиационная стерилизация)
Абатмент прямой анатомический W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент прямой W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент эстетический антиротационный W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент прямой для формообразования W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Абатмент титановый для CAD/CAM W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Абатмент титановый с пластиковым колпачком W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Абатмент для мультиюнита для цементной фиксации.	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент эстетический для мультиюнита.	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент шаровидный для мультиюнита	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент прямой широкий W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент циркониевый прямой на титановой основе W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта

Абатмент циркониевый угловой на титановой основе W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Абатмент временный прямой W (широкая платформа), S (узкая платформа).	Обработка 6% раствором спирта
Абатмент временный угловой W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для эстетического абатмента	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для резцов W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для клыков W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для премоляров W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для моляров W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент шаровидный W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент прямой для резцов W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент прямой для клыков W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент прямой для премоляров W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент прямой для моляров W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент угловой для резцов W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент угловой для клыков W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент угловой для премоляров W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C
Абатмент угловой для моляров W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °C

Абатмент прямой анатомический широкий W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Аналог имплантата W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Аналог имплантата для эстетического абатмента	Обработка 6% раствором спирта
Аналог имплантата для мультиюнита	Обработка 6% раствором спирта
Трансфер оттисковой для открытой ложки W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Трансфер оттисковой для закрытой ложки W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Трансфер оттисковой для эстетического абатмента	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Трансфер оттисковой пластиковый	Обработка 6% раствором спирта
Трансфер оттисковой для мультиюнита	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Винт для абатмента широкая платформа	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Винт для абатмента узкая платформа	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Винт для абатмента для эстетического	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Локатор W (широкая платформа), S (узкая платформа)	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Локатор для мультиюнита	Стерилизуются в автоклаве при температуре 134 °С
Колпачок пластиковый для абатмента титанового для CAD/CAM	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок пластиковый для абатмента эстетического	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок для локатора стандартный	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок для локатора мягкий	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок для локатора жесткий	Обработка 6% раствором спирта
Диск защитный	Обработка 6% раствором спирта
Сканмаркер для CAD/CAM (широкая платформа), (узкая платформа)	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок для локатора металлический.	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок для шаровидного абатмента металлический.	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок для шаровидного абатмента стандартный	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок для шаровидного абатмента мягкий	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок для шаровидного абатмента жесткий	Обработка 6% раствором спирта

Манжетка титановая для абатмента эстетического	Обработка 6% раствором спирта
Колпачок временный для абатмента эстетического	Обработка 6% раствором спирта
Манжетка пластиковая для абатмента эстетического	Обработка 6% раствором спирта
Манжетка пластиковая без шестигранника для абатмента эстетического	Обработка 6% раствором спирта
Ручка-держатель для основы (в упаковке с абатментом титановым базой для мультититана)	Обработка 6% раствором спирта

4. Меры предосторожности при проведении хирургических вмешательств

Необходимо принять все меры по минимизации повреждения питающей ткани, уделяя при этом особое внимание термическим и хирургическим травмам, а также исключить вероятность действия загрязняющих веществ и источников инфекций.

(1) На этапе планирования, до проведения хирургического вмешательства, важно определить размер по вертикали от гребня альвеолярного отростка до противоположного зубного ряда, чтобы убедиться, что свободное пространство соответствует выбранному абатменту и позволяет произвести окончательную реставрацию. Размеры свободного пространства и используемые абатменты у каждого пациента являются индивидуальными. Поэтому прежде чем приступать к хирургическому вмешательству, необходимо тщательно проверить размеры. Окончательная конструкция протеза должна быть определена до начала установки зубного имплантата.

(2) В течение всей процедуры непрерывно производите орошение холодным стерильным раствором, чтобы не допустить теплового повреждения окружающих тканей.

(3) При подготовке ложа имплантата не допускайте чрезмерного давления. Проверьте, соответствие скорости и крутящий момент в наконечнике с рекомендуемыми параметрами в хирургическом протоколе. Для минимизации повреждения кости и окружающих тканей пользуйтесь острыми инструментами*. Таким образом, повышается вероятность остеоинтеграции.

(4) Любое нестерильное оборудование необходимо очистить и стерилизовать перед использованием, чтобы не допустить загрязнений и инфицирования.

(5) Режущие инструменты* (например, сверла) не следует использовать более 10 раз.

** Инструменты не являются частью системы стоматологических имплантатов Bio3 Implants в составе и с принадлежностями и приобретаются отдельно.*

5. Меры предосторожности при проведении реставрации

Период приживления имплантата зависит от качества костной ткани на месте имплантации, реакции ткани на имплантат и оценки хирургом плотности костной ткани пациента на момент проведения хирургического вмешательства. Чтобы предотвратить действие на зубной имплантат чрезмерных усилий в течение периода приживления, при реставрации с использованием имплантата нужно следить за характером смыкания зубных рядов. При проведении протезирования с помощью протезов с опорой на имплантатах,

советуется соблюдать следующие указания: на верхней челюсти должны быть условия для расположения как минимум 4 имплантатов, на нижней – 2 имплантатов.

6. Возможные неблагоприятные последствия

При использовании стоматологических имплантатов возможны следующие неблагоприятные последствия: неполная первоначальная интеграция, дегисценция кости, перфорация костных или мягких тканей в полости рта, признаки инфицирования, онемение, парестезия, постоянная боль, чрезмерная потеря костной массы, поломка или разрушение имплантата, сепсис, повреждение нерва, нарушение интеграции имплантата в кости с течением времени.

7. Требования к техническому обслуживанию

Не применимо, так как Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями предназначена только для одноразового применения.

Данные о калибровке и поверке

Не применимо, так как Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями не имеет функции измерения.

8. Характеристика материалов изготовления с указанием типа контакта

Наименование	Материал	Вид контакта
Имплантат Адванс S (узкая платформа), W (широкая платформа); Имплантат Прогрессив S (узкая платформа), W (широкая платформа).	100% Титан марки Grade 4	Постоянный контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью
Абатмент прямой анатомический W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент прямой W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент эстетический антиротационный W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент титановый для CAD/CAM W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент для мультиюнита для цементной фиксации; Абатмент эстетический для мультиюнита; Абатмент шаровидный для мультиюнита;	100% Титан марки Grade 5	Постоянный контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью

Абатмент прямой широкий W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент шаровидный W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент прямой для резцов W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент прямой для клыков W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент прямой для премоляров W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент прямой для моляров W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент угловой для резцов W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент угловой для клыков W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент угловой для премоляров W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент угловой для моляров W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент прямой анатомический широкий W (широкая платформа), S (узкая платформа); Винт для абатмента широкая платформа; Винт для абатмента узкая платформа; Винт для абатмента для эстетического; Локаатор W (широкая платформа), S (узкая платформа); Локаатор для мультиюнита.		
Абатмент прямой для формообразования W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа), S (узкая платформа).	100% Текаформ (Tecaform) AD POM-H	Кратковременный (< 24 часов) контакт с неповрежденной кожей
Абатмент титановый с пластиковым колпачком W (широкая платформа), S (узкая платформа).	100% Титан марки Grade 5 (абатмент), 100% Текаформ (Tecaform) AD POM-H (колпачок)	Постоянный контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью
Абатмент циркониевый прямой на титановой основе W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент циркониевый угловой на титановой основе W (широкая платформа), S (узкая платформа).	70% Титан марки Grade 5, 30% Цирконий (ASTM B551)	Постоянный контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью
Абатмент временный прямой W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент временный угловой W (широкая платформа), S (узкая платформа).	100% Пластик PEEK (ISO 1133)	Длительный (> 24 часов) контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью

Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для эстетического абатмента; Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для резцов W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для клыков W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для премоляров W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для моляров W (широкая платформа), S (узкая платформа); Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий W (широкая платформа), S (узкая платформа).	100% Титан марки Grade 5	Длительный (> 24 часов) контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью
Аналог имплантата W (широкая платформа), S (узкая платформа); Аналог имплантата для эстетического абатмента; Аналог имплантата для мультиюнита; Сканмаркер для CAD/CAM (широкая платформа), (узкая платформа).	100% Титан марки Grade 5	Кратковременный (< 24 часов) контакт с неповрежденной кожей
Трансфер оттисковой для открытой ложки W (широкая платформа), S (узкая платформа); Трансфер оттисковой для закрытой ложки W (широкая платформа), S (узкая платформа); Трансфер оттисковой для эстетического абатмента; Трансфер оттисковой для мультиюнита.	100% Титан марки Grade 5	Кратковременный (< 24 часов) контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью
Трансфер оттисковой пластиковый.	100% Текаформ (Tecaform) AD POM-H	Кратковременный (< 24 часов) контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Колпачок пластиковый для абатмента титанового для CAD/CAM; Колпачок пластиковый для абатмента эстетического; Манжетка пластиковая для абатмента эстетического.	100% Текаформ (Tecaform) AD POM-H	Длительный (> 24 часов) контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Колпачок для лоатора стандартный; Колпачок для лоатора мягкий; Колпачок для лоатора жесткий; Колпачок для шаровидного абатмента стандартный; Колпачок для шаровидного абатмента мягкий; Колпачок для шаровидного абатмента жесткий.	Полиамид марки 610	Постоянный контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта

Диск защитный.	Полиамид марки 610	Кратковременный (< 24 часов) контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Колпачок для локатора металлический; Колпачок для шаровидного абатмента металлический.	100% Хирургическая сталь AISI 303	Постоянный контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Транспортный винт.	98% Хирургическая сталь AISI 303 2% Полиамид марки 610	Кратковременный (< 24 часов) контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Заглушка.	Внутренняя часть – 100% Титан марки Grade 5, Внешняя оболочка – 100% Пластик PEEK (ISO 1133)	Постоянный контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Колпачок временный для абатмента эстетического; Манжетка пластиковая без шестигранника для абатмента эстетического.	100% Пластик PEEK (ISO 1133)	Длительный (> 24 часов) контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Манжетка титановая для абатмента эстетического	100% Титан марки Grade 5	Длительный (> 24 часов) контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта

Материалы упаковки и комплектующих см. пункт «Сведения об упаковке»

9. Данные о лекарственных средствах, содержащихся в медицинском изделии

Не применимо, так как Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями не содержит лекарственных средств.

10. Данные о клетках, тканях, органах животных или человека, входящих в состав медицинского изделия

Не содержатся

11. Комплектация поставки

Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями комплектуется из каждого компонента системы в необходимом количестве в соответствии с заказом на поставку, и по необходимости, вместе с системой могут комплектоваться принадлежности. Размеры и вариации компонентов также зависят от заказа на поставку.

Все компоненты системы имплантатов стоматологических Bio3 Implants с принадлежностями поставляются в индивидуальных упаковках, которые затем размещают в транспортном коробе.

Каждая упаковка с имплантатом содержит:

- 1) Имплантат стоматологический в стеклянном флаконе, закрытый транспортным винтом -1шт.
- 2) Стикер-этикетку -2шт.
- 3) Заглушку -1шт.
- 4) Инструкцию по применению -1шт.
- 5) Сертификат-памятку для пациента -1шт.

Остальные компоненты системы (абатменты, локаторы, абатменты лечебные для десны (формирователи десны), аналоги имплантата, трансферы оттисковые, винты для абатмента) и принадлежности (колпачки, диски защитные, сканмаркеры для CAD/CAM, манжетки) поставляются в индивидуальных упаковках (полиэтиленовый пакет (100% полиэтилен HDPE)), которые размещаются в транспортных коробах вместе с остальными компонентами системы и принадлежностями. В полиэтиленовый пакет могут помещаться дополнительные устройства (винт для фиксации абатмента (100% титан марки Grade 5), винт для фиксации абатмента эстетического (100% титан марки Grade 5), ручка-держатель для основы (100% текаформ (Tesaform) AD POM-H), манжетка-держатель (100% текаформ (Tesaform) AD POM-H)) без дополнительной упаковки.

Комплектуются транспортные короба в количествах согласно размещенным заказам на поставку.

Подробнее характеристики см. в пункте «Сведения об упаковке»

12. Сведения об упаковке

Все имплантаты стоматологические Bio3 Implants поставляются с маркировкой "sterile". Стерилизация проводится с применением гамма-излучения.

Любые стерильные изделия предназначены только для одноразового применения и должны использоваться до истечения срока годности, указанного на этикетке изделия. Не используйте стерильные изделия, если упаковка была ранее открыта или разорвана. Повторная стерилизация имплантатов запрещена.


Остальные компоненты системы и принадлежности, которые при поставке являются нестерильными, имеют маркировку 'NON STERILE'.



Имплантат размещается во внутрь стеклянного флакона (стекло марки AB-1) и закрывается транспортным винтом (98% хирургическая сталь AISI 303, 2% полиамид марки 610). Имплантат во флаконе, заглушка (внутренняя часть – 100% титан марки Grade 5, внешняя оболочка – 100% пластик PEEK (ISO 1133)) и стикер-этикетка (синтетическая бумага Synaps) размещаются на бумажной подложке (синтетическая бумага Synaps) и помещаются в блистерную пластиковую упаковку (100% полиэтилен 276). Маркировка изделия наносится на стикер-этикетку и сзади на бумажную подложку. Далее блистерная пластиковая упаковка вместе с инструкцией по применению (бумага А+) и сертификатом-памяткой для пациента (картон плотностью 300 г/м2) помещается в двухслойную картонную упаковку (Graphiart Card HB), на которую наносится маркировка.

Остальные компоненты системы (абатменты, локаторы, абатменты лечебные для десны (формирователи десны), аналоги имплантата, трансферы оттискные, винты для абатмента) и принадлежности (колпачки, диски защитные, сканмаркеры для CAD/CAM, манжетки) поставляются в индивидуальных упаковках (полиэтиленовый пакет (100% полиэтилен HDPE)), на которые наносится маркировка. Индивидуальные упаковки размещаются в транспортных коробах вместе с остальными компонентами системы и принадлежностями. В полиэтиленовый пакет могут помещаться дополнительные устройства (винт для фиксации абатмента (100% титан марки Grade 5) – предустановлен на абатмент, но допускается отдельное размещение в упаковке со всеми видами абатментов (кроме абатментов шаровидных W (широкая платформа), абатментов шаровидных S (узкая платформа), абатментов шаровидных для мультиюнита, абатментов эстетических для мультиюнита, абатментов для мультиюнита для цементной фиксации), в упаковке с абатментами лечебными для десны (формирователями десны) для резцов, клыков, моляров и премоляров, в упаковке с манжетками; винт для фиксации абатмента эстетического (100% титан марки Grade 5) – предустановлен на абатмент, но допускается отдельное размещение в упаковке с абатментом эстетическим антиротационным, в упаковке с абатментом эстетическим для мультиюнита; ручка-держатель для основы (100% текаформ (Tecaform) AD POM-H) - в упаковке с абатментом титановым базой для мультиюнита; манжетка-держатель (100% текаформ (Tecaform) AD POM-H) - в упаковке с абатментом эстетическим для мультиюнита) без дополнительной упаковки.

Имплантаты, остальные компоненты системы и принадлежности размещаются в транспортную тару (короб) (гофрокартон BF K5 × K5) и отгружаются заказчику. Размер гофрощика зависит от объема заказа (подбирается индивидуально).

Характеристики упаковки и комплектующих

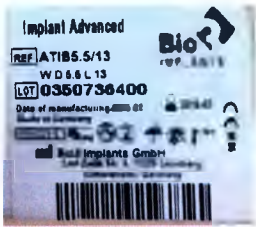Компонент	Характеристики	Фото	Материал
Стеклянный флакон	Размер флакона: 31,00 мм ± 1,00 мм х 11,70 мм ± 0,30 мм Высота упорного кольца: 3,60 мм ± 0,20 мм Размер горловины флакона: (внешний диаметр): 9,00 мм ± 0,30 мм (внутренний диаметр): 6,50 мм ± 0,30 мм Масса не более 4,00 г Флакон должен выдерживать перепад температур не менее 100 °С Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению: 2,0 Мпа Флакон должен быть герметичен		Стекло марки АВ-1
Транспортный винт	Длина: 22,00 мм ± 1,00 мм Диаметр широкой части: 8,00 мм ± 0,30 мм Диаметр узкой части: 1,00 мм ± 0,30 мм Масса не более 4,00 г		98% Хирургическая сталь AISI 303 2% Полиамид марки 610 <i>*Примечание:</i> Вид контакта: Кратковременный (< 24 часов) контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Стикер-этикетка (в упаковке 2 штуки)	Размер (1штуки): 2,80 см ± 0,10 см х 3,00 см ± 0,10 см Масса не более 0,50 г		синтетическая бумага Synaps

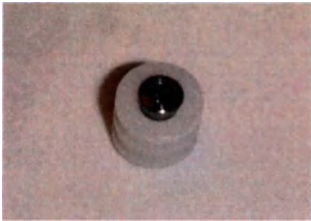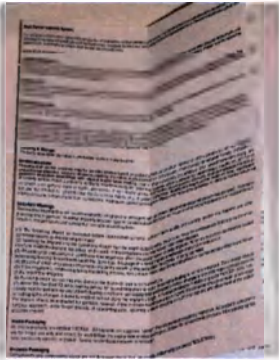Заглушка	Размер внешней оболочки: 5,20 мм ± 0,10 мм x 5,30 мм ± 0,10 мм Размер внутренней части: 5,04 мм ± 0,10 мм x 2,77 мм ± 0,10 мм Масса не более 0,50 г		Внутренняя часть – 100% Титан марки Grade 5, Внешняя оболочка – 100% пластик PEEK (ISO 1133) <i>*Примечание:</i> Вид контакта: Постоянный контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта
Инструкция по применению	Размер (в развернутом виде): 13,00 см ± 0,20 см x 27,00 см ± 0,20 см Размер (в свернутом виде): 6,50 см ± 0,20 см x 4,50 см ± 0,20 см Масса не более 5,00 г		Бумага А+
Бумажная подложка	Размер: 7,60 см ± 0,10 см x 4,70 см ± 0,10 см Масса не более 2,00 г		синтетическая бумага Synaps
Блистерная пластиковая упаковка	Размер: 7,60 см ± 0,10 см x 4,70 см ± 0,10 см x 1,27 см ± 0,10 см Масса не более 4,00 г		100% полиэтилен 276

Сертификат-памятка для пациента	Размер: 6,70 см ± 0,20 см x 9,70 см ± 0,20 см x 0,74 см ± 0,20 см Масса не более 40,00 г		Картон плотностью 300 г/м2
Двухслойная картонная упаковка	Первый слой: Размер: 10,00 см ± 0,20 см x 6,80 см ± 0,20 см x 2,60 см ± 0,20 см Масса (первого слоя) не более 15,00 г Второй слой: Размер: 10,00 см ± 0,20 см x 7,00 см ± 0,20 см x 3,50 см ± 0,20 см Масса (второго слоя) не более 9,00 г	 	Graphiart Card HB
Полиэтиленовый пакет для остальных компонентов системы (кроме имплантатов) и для принадлежностей	Размер: 6,00 см ± 0,20 см x 9,00 см ± 0,20 см Масса не более 2,00 г		100% Полиэтилен HDPE
Транспортная тара (пример транспортной тары)	Высота: 60,00 см ± 2,00 см Длина: 55,00 см ± 2,00 см Глубина: 40,00 см ± 2,00 см Масса 400,00 г ± 50,00 г		Гофрокартон BF K5 × K5
Винт для фиксации абатмента (в упаковке со всеми видами абатментов (кроме абатментов шаровидных W (широкая платформа), абатментов шаровидных S (узкая	Диаметр широкой части: 2,20 мм ± 0,05 мм Диаметр узкой части: 1,40 мм ± 0,10 мм Длина (винт для абатмента широкая платформа): 8,70 мм ± 0,05 мм		100% Титан марки Grade 5 <i>*Примечание:</i>

платформа), абатментов шаровидных для мультиюнита, абатментов эстетических для мультиюнита, абатментов для мультиюнита для цементной фиксации); в упаковке с абатментами лечебными для десны (формирователями десны) для резцов, клыков, моляров и премоляров; в упаковке с манжетками)	Длина (винт для абатмента узкая платформа): $8,20 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ Диаметр резьбы: $1,80 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$ Длина резьбы: $2,50 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ Шаг резьбы: $0,35 \text{ мм} \pm 0,02 \text{ мм}$ Длина головки винта: $1,80 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ Масса не более $0,08 \text{ г}$		<i>Вид контакта:</i> <i>Постоянный контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью</i>
Винт для фиксации абатмента эстетического (в упаковке с абатментом эстетическим антиротационным, в упаковке с абатментом эстетическим для мультиюнита)	Диаметр широкой части: $2,90 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ Диаметр узкой части: $1,90 \text{ мм} \pm 0,10 \text{ мм}$ Длина: $5,00 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ Диаметр резьбы: $2,50 \text{ мм} \pm 0,01 \text{ мм}$ Длина резьбы: $2,00 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ Шаг резьбы: $0,40 \text{ мм} \pm 0,02 \text{ мм}$ Длина головки винта: $2,30 \text{ мм} \pm 0,05 \text{ мм}$ Масса не более $0,09 \text{ г}$		100% Титан марки Grade 5 <i>*Примечание:</i> <i>Вид контакта:</i> <i>Постоянный контакт со слизистой оболочкой полости рта, костной тканью, кровью</i>
Ручка-держатель для основы (в упаковке с абатментом титановым базой для мультиюнита)	Диаметр: $4,50 \text{ мм} \pm 0,02 \text{ мм}$ Длина: $25,00 \text{ мм} \pm 0,02 \text{ мм}$ Масса не более $0,22 \text{ г}$		100% Текаформ (Tesaform) AD POM-H <i>*Примечание:</i> <i>Вид контакта:</i> <i>Кратковременный (< 24 часов) контакт с внутренней средой организма и</i>

			<i>слизистой оболочкой полости рта</i>
Манжетка-держатель (в упаковке с абатментом эстетическим для мультиюнита)	Диаметр широкой части: 4,70 мм ± 0,50 мм Диаметр узкой части: 4,00 мм ± 0,50 мм Длина: 12,00 мм ± 0,40 мм Масса не более 0,10 г		100% Текаформ (Tecaform) AD POM-H <i>*Примечание:</i> <i>Вид контакта:</i> Длительный (> 24 часов) контакт с внутренней средой организма и слизистой оболочкой полости рта

Прочностные характеристики:

- прочность на разрыв в продольном (машинном) направлении	> 1,2 кН/см2
- прочность на разрыв в поперечном направлении	> 1,4 кН/см2
- прочность на продавливание	> 650 кПа

13. Условия транспортировки, хранения, эксплуатации и утилизации

Условия транспортировки

Температура транспортировки - от -18 °С до + 23 °С

Транспортировать при относительной влажности не более 60% вдали от солнечных лучей

Атмосферное давление: 86 – 106 кПа

Условия хранения

Температура хранения - не более + 23°С

Хранить при относительной влажности не более 60% вдали от солнечных лучей

Атмосферное давление: 86 – 106 кПа

Условия эксплуатации

Изделие предназначено для применения обученным медицинским персоналом при комнатной температуре воздуха не более + 23°С

Диапазон температур при использовании – температура тела от +32°С до +42°С

Относительная влажность: не более 60 %

Атмосферное давление: 86 – 106 кПа

Утилизация

Изделие должно быть использовано немедленно после вскрытия упаковки, а после использования его необходимо утилизировать безопасным и разрешенным способом.

Согласно классификации медицинских отходов ЛПУ использованное изделие относится к классу Б. Не загрязненная упаковка утилизируется как бытовые отходы.

14. Сведения о маркировке

Маркировка наносится на бумажную подложку, стикер-этикетку и картонную коробку имплантатов, а также на полиэтиленовые пакеты, в которые упаковываются все остальные компоненты системы и принадлежности.



Образец маркировки картонной упаковки Имплантата Адванс

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
ADVANCED	Адванс
Diameter 3.8 Length 13	Диаметром 3.8 длиной 13
Implant Advanced	Имплантат Адванс
REF AT13.8/13	Код продукта AT13.8/13
S d 3.8 L 13	S (узкая платформа) диаметр 3.8 длина 13
LOT	Лот
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Использовать до
STERILE R	Радиационная стерилизация
Rx ONLY	Продажа разрешена только врачам-стоматологам и врачам-имплантологам
	Не стерилизовать повторно
	Запрет на повторное применение
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Верхняя граница температурного диапазона
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг, Гебершайм, Германия



Образец маркировки картонной упаковки Имплантата Прогрессив
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
PROGRESSIVE	Прогрессив
Diameter 3.8 Length 13	Диаметром 3.8 длиной 13
Implant Progressive	Имплантат Прогрессив
REF PTI3.8/13	Код продукта PTI3.8/13
S D 3.8 L 13	S (узкая платформа) диаметр 3.8 длина 13
LOT	Лот
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Использовать до
STERILE R	Радиационная стерилизация
Rx ONLY	Продажа разрешена только врачам-стоматологам и врачам-имплантологам
	Не стерилизовать повторно
	Запрет на повторное применение
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Верхняя граница температурного диапазона
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг, Гебершайм, Германия



Образец маркировки бумажной подложки Имплантата Адванс
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Импланте»
The package contains one sterile implant	В упаковке содержится один стерильный имплантат
Product sterility assured unless package has been damaged or opened	Продукт стерilen до момента вскрытия или повреждения упаковки
The sale is restricted by law	Продажа ограничена законом
For licensed dentists use only	Для применения только сертифицированными дантистами
Please read instructions carefully before use	Пожалуйста, перед применением внимательно прочтите инструкции
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg-Gebersheim, Germany	Био3 Импланте ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг-Гебершайм, Германия
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Радиационная стерилизация

	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
Implant Advanced	Имплантат Адванс
 ATIB5.5/13	Код продукта ATIB5.5/13
W D 5.5 L 13	W (широкая платформа) диаметр 5.5 длина 13
	Лот
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Использовать до
	Радиационная стерилизация
	Продажа разрешена только врачам-стоматологам и врачам-имплантологам
	Не стерилизовать повторно
	Запрет на повторное применение
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Верхняя граница температурного диапазона
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg-Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг-Гебершайм, Германия



Образец маркировки бумажной подложки Имплантата Прогрессив
Перевод маркировки и расшифровка символов:


Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
The package contains one sterile implant	В упаковке содержится один стерильный имплантат
Product sterility assured unless package has been damaged or opened	Продукт стерilen до момента вскрытия или повреждения упаковки
The sale is restricted by law	Продажа ограничена законом
For licensed dentists use only	Для применения только сертифицированными дантистами
Please read instructions carefully before use	Пожалуйста, перед применением внимательно прочтите инструкции
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg-Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг-Гебершайм, Германия
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Радиационная стерилизация

	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
Implant Progressive	Имплантат Прогрессив
 PTI3.8/13	Код продукта PTI3.8/13
S D 3.8 L 13	S (узкая платформа) диаметр 3.8 длина 13
	Лот
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Использовать до
	Радиационная стерилизация
	Продажа разрешена только врачам-стоматологам и врачам-имплантологам
	Не стерилизовать повторно
	Запрет на повторное применение
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Верхняя граница температурного диапазона
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg-Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки стикер-этикетки Имплантата Прогрессив
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
Implant Progressive	Имплантат Прогрессив
REF PT13.8/13	Код продукта PT13.8/13
S D 3.8 L 13	S (узкая платформа) диаметр 3.8 длина 13
LOT	Лот
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Использовать до
STERILE R	Радиационная стерилизация
Rx ONLY	Продажа разрешена только врачам-стоматологам и врачам-имплантологам
	Не стерилизовать повторно
	Запрет на повторное применение
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Верхняя граница температурного диапазона
CE 0086	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг, Гебершайм, Германия

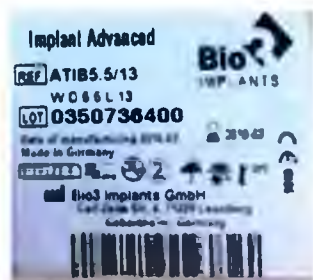

Образец маркировки стикер-этикетки Имплантата Адванс
Перевод маркировки и расшифровка символов:


Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
Implant Advanced	Имплантат Адванс
REF ATIB5.5/13	Код продукта ATIB5.5/13
W D 5.5 L 13	W (широкая платформа) диаметр 5.5 длина 13
LOT	Лот
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Использовать до
STERILE R	Радиационная стерилизация
Rx ONLY	Продажа разрешена только врачам-стоматологам и врачам-имплантологам
	Не стерилизовать повторно
	Запрет на повторное применение
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Верхняя граница температурного диапазона
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг, Гебершайм, Германия



Образец маркировки картонной упаковки Имплантатов
Перевод маркировки и расшифровка символов.

Текст	Перевод
Bio3 IMPLANTS	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
www.bio3-implants.com	Сайт компании
The package contains one sterile implant	В упаковке содержится один стерильный имплантат
Product sterility assured unless package has been damaged or opened	Продукт стерilen до момента вскрытия или повреждения упаковки
The sale is restricted by law	Продажа ограничена законом
For licensed dentists use only	Для применения только сертифицированными дантистами
Please read instructions carefully before use	Пожалуйста, перед применением внимательно прочтите инструкции
STERILE R	Радиационная стерилизация
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки
	Изготовитель


Manufactured by Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg-Gebersheim, Germany	Произведено компанией Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)

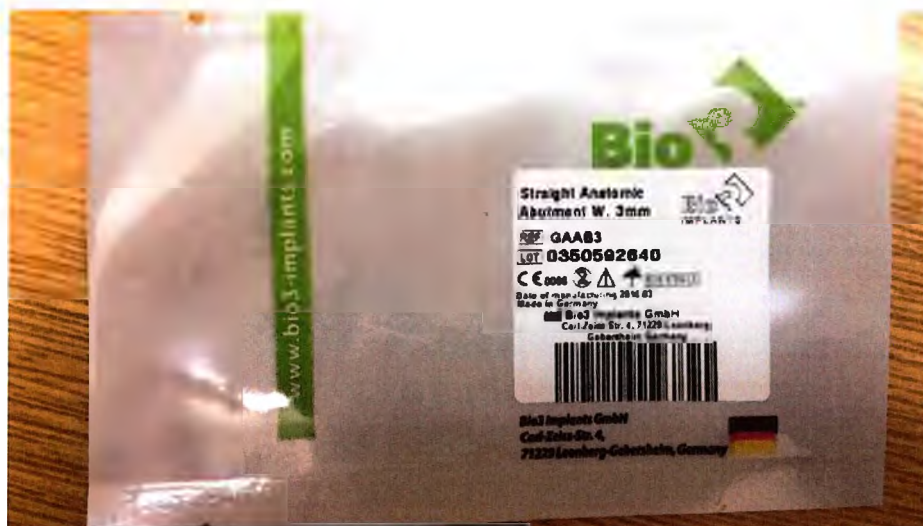

Образец маркировки Абатмента прямого анатомического

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Anatomic Abutment W. 3mm	Абатмент прямой анатомический W' (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм
REF GAAB3	Код продукта GAAB3
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

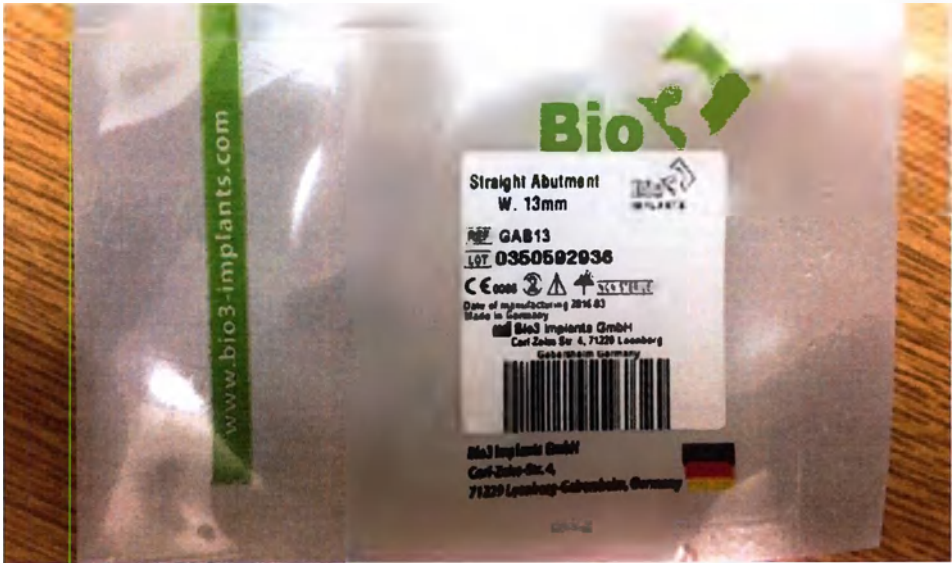

Образец маркировки Абатмента прямого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Abutment W. 13mm	Абатмент прямой W (широкая платформа) длиной 13 мм
REF GAB13	Код продукта GAB13
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Абатмента углового анатомического
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Angled Anatomic Abutment W. 15 degree	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 15 градусов
REF EAAB15	Код продукта EAAB15
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента эстетического антиротационного
Перевод маркировки и расшифровка символов:

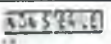Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Antirotational Aesthetic Abutment W. 3mm	Абатмент эстетический антиротационный W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм
 VAAB3	Код продукта VAAB3
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента прямого для формообразования
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Abutment for formation W.	Абатмент прямой для формообразования W (широкая платформа)
GABB	Код продукта GABB
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента углового для формообразования
Перевод маркировки и расшифровка символов:


Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Angled Abutment for formation W. 3mm 15 degree	Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа) 15 градусов с высотой уступа 3 мм
 EABB1503	Код продукта EABB1503
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Абатмента для мультиюнита для цементной фиксации

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Cemented Abutment for multiunit	Абатмент для мультиюнита для цементной фиксации
 ZAM	Код продукта ZAM
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

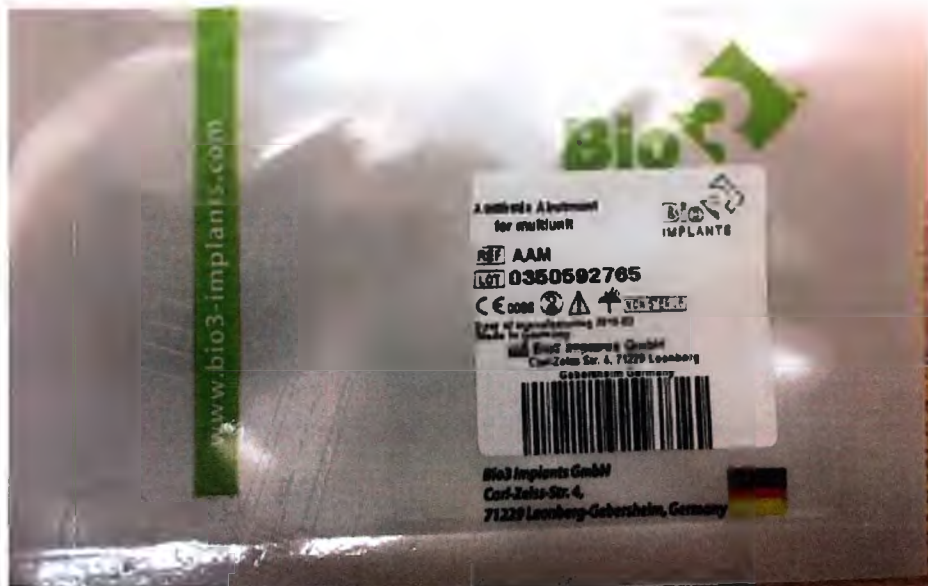

Образец маркировки Абатмента эстетического для мультиюнита
Перевод маркировки и расшифровка символов:

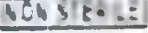Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Aesthetic Abutment for multiunit	Абатмент эстетический для мультиюнита
REF AAM	Код продукта ААМ
LOT	Лот
CE 0086	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента шаровидного для мультиюнита
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Ball Attachment for multiunit 3.25 mm	Абатмент шаровидный для мультиюнита высотой 3.25 мм
 BAM4	Код продукта BAM4
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента циркониевого прямого на титановой основе
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Zirconium Abutment on titanium basis W. 3 mm	Абатмент циркониевый прямой на титановой основе W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм
 GZTB3	Код продукта GZTB3
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента циркониевого углового на титановой основе
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Angled Zirconium Abutment on titanium basis W. 3 mm 15 degree	Абатмент циркониевый угловой на титановой основе W (широкая платформа) 15 градусов с высотой уступа 3 мм
REF EZTB1503	Код продукта EZTB1503
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента временного прямого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Temporary Straight Abutment W. 3 mm	Абатмент временный прямой W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм
REF TGAB3	Код продукта TGAB3
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента временного углового
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Temporary Angled Abutment W. 3 mm 15 degree	Абатмент временный угловой W (широкая платформа) 15 градусов с высотой уступа 3 мм
REF TEAB1503	Код продукта TEAB1503
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента шаровидного
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Ball Attachment W. 6 mm	Абатмент шаровидный W (широкая платформа) высотой 6 мм
 BAB6	Код продукта BAB6
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента титанового для CAD/CAM

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Titanium Abutment for CAD/CAM W. 1 mm	Абатмент титановый для CAD/CAM W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм
REF TPB	Код продукта TPB
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента титанового с пластиковым колпачком
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Abutment Titanium With a plastic cap W. 1 mm	Абатмент титановый с пластиковым колпачком W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм
REF TBKB1	Код продукта TBKB1
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Абатмента титанового база для мультиюнита

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Abutment Titanium basis for multiunit W. 3 mm 17 degree	Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа) 17 градусов с высотой уступа 3 мм
REF TBMB1703	Код продукта TBMB1703
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента прямого для резцов
Перевод маркировки и расшифровка символов:

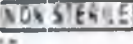Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Abutment Incisor Type S 8.5 mm	Абатмент прямой для резцов S (узкая платформа) длиной 8.5 мм
 GAIS 8.5	Код продукта GAIS 8.5
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента прямого для клыков

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Abutment Canine Type S 9.0 mm	Абатмент прямой для клыков S (узкая платформа) длиной 9.0 мм
 GACS 9.0	Код продукта GACS 9.0
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента прямого для премоляров
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Abutment Pre-Molar Type S 9.0 mm	Абатмент прямой для премоляров S (узкая платформа) длиной 9.0 мм
GAPS 9.0	Код продукта GAPS 9.0
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента прямого для моляров
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Abutment Molar Type S 7.5 mm	Абатмент прямой для моляров S (узкая платформа) длиной 7.5 мм
REF GAMS 7.5	Код продукта GAMS 7.5
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Абатмента углового для резцов
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Angulated Abutment Incisor Type S 15 deg 9.0 mm	Абатмент угловой для резцов S (узкая платформа) 15 градусов длиной 9.0 мм
REF EAIS 15/9.0	Код продукта EAIS 15/9.0
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента углового для клыков
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Angulated Abutment Canine Type S 15 deg 9.0 mm	Абатмент угловой для клыков S (узкая платформа) 15 градусов длиной 9.0 мм
 EACS 15/9.0	Код продукта EACS 15/9.0
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg-Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг-Гебершайм, Германия

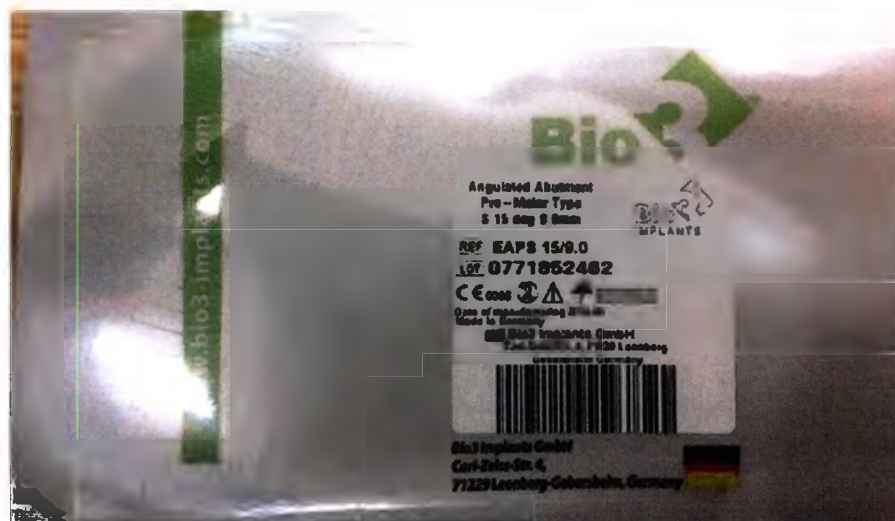

Образец маркировки Абатмента углового для премоляров

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Angulated Abutment Pre-Molar Type S 15 deg 9.0 mm	Абатмент угловой для премоляров S (узкая платформа) 15 градусов длиной 9.0 мм
EAPS 15/9.0	Код продукта EAPS 15/9.0
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Абатмента углового для моляров
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Angulated Abutment Molar Type S 15 deg 8.0 mm	Абатмент угловой для моляров S (узкая платформа) 15 градусов длиной 8.0 мм
EAMS 15/8.0	Код продукта EAMS 15/8.0
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента прямого анатомического широкого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

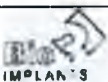Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Anatomic Abutment Wide S 1 mm	Абатмент прямой анатомический широкий S (узкая платформа) с высотой уступа 1 мм
 GAAS/W1	Код продукта GAAS/W1
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента прямого широкого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Straight Abutment Wide W 9mm	Абатмент прямой широкий W (широкая платформа) длиной 9 мм
REF GABB9	Код продукта GABB9
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Локатора для мультиюнита

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Locator for multiunit 4mm	Локатор для мультиюнита высотой 4 мм
 LM4	Код продукта LM4
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Локатора W (широкая платформа)

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Locator W 6mm	Локатор W (широкая платформа) высотой 6 мм
LB6	Код продукта LB6
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Локатора S (узкая платформа)

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Locator S 4mm	Локатор S (узкая платформа) высотой 4 мм
	Код продукта LS4
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента лечебного для десны (формирователь десны) W (широкая платформа)
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Gingiva Healing Abutment W. 7mm	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа) высотой 7 мм
GFB7	Код продукта GFB7
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента лечебного для десны (формирователь десны) S (узкая платформа)

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Gingiva Healing Abutment S 7mm	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) S (узкая платформа) высотой 7 мм
 GFS7	Код продукта GFS7
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Абатмента лечебного для десны (формирователь десны) для эстетического абатмента

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Gingiva Healing Abutment for Aesthetic	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для эстетического абатмента
REF GAES2	Код продукта GAES2
LOT	Лот
CE 0086	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
NON STERILE	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента лечебного для десны (формирователь десны) для резцов
Перевод маркировки и расшифровка символов:

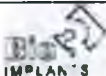Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Gingiva Healing Abutment Incisor Type S 2.25mm	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для резцов S (узкая платформа) длиной 2.25 мм
 GFIS 2.25	Код продукта GFIS 2.25
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента лечебного для десны (формирователь десны) для клыков
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Gingiva Healing Abutment Canine Type S 2.25mm	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для клыков S (узкая платформа) длиной 2.25 мм
REF GFCS 2.25	Код продукта GFCS 2.25
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента лечебного для десны (формирователь десны) для премоляров

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Gingiva Healing Abutment Pre-Molar Type S 2.25mm	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для премоляров S (узкая платформа) длиной 2.25 мм
REF GFPS 2.25	Код продукта GFPS 2.25
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Абатмента лечебного для десны (формирователь десны) для моляров
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Gingiva Healing Abutment Molar Type S 2.25mm	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для моляров S (узкая платформа) длиной 2.25 мм
REF GFMS2.25	Код продукта GFMS2.25
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg-Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг-Гебершайм, Германия



Образец маркировки Абатмента лечебного для десны (формирователь десны) широкого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Gingiva Healing Abutment Wide W 4mm	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий W (широкая платформа) высотой 4 мм
REF GFB/W4	Код продукта GFB/W4
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

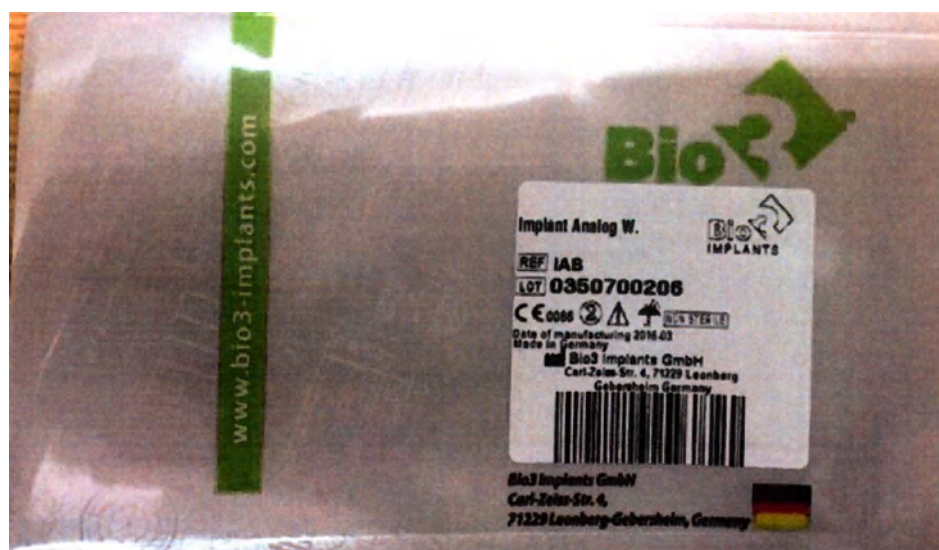


Образец маркировки Аналога имплантата W (широкая платформа)

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Implant Analog W.	Аналог имплантата W (широкая платформа)
IAB	Код продукта IAB
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Аналога имплантата S (узкая платформа)
Перевод маркировки и расшифровка символов:

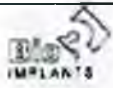Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Implant Analog S	Аналог имплантата S (узкая платформа)
 IAS	Код продукта IAS
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Аналога имплантата для эстетического абатмента
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Implant Analog for Aesthetic S	Аналог имплантата для эстетического абатмента
IAES	Код продукта IAES
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Аналога имплантата для мультиюнита
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Implant Analog for Multiunit	Аналог имплантата для мультиюнита
REF IAMS	Код продукта IAMS
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Трансфера оттискного для открытой ложки
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Impression Transfer Open Tray W.	Трансфер оттискной для открытой ложки W (широкая платформа)
SOLB15	Код продукта SOLB15
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Трансфера оттискового для закрытой ложки
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Impression Transfer Closed Tray W.	Трансфер оттисковой для закрытой ложки W (широкая платформа)
	Код продукта SGLB9
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Трансфера оттискового для эстетического абатмента
Перевод маркировки и расшифровка символов:

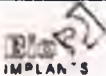Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Impression Transfer for Aesthetic	Трансфер оттисковой для эстетического абатмента
REF SAES15	Код продукта SAES15
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Трансфера оттискового пластикового
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Plastic Impression Transfer	Трансфер оттисковой пластиковый
	Код продукта KSS
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

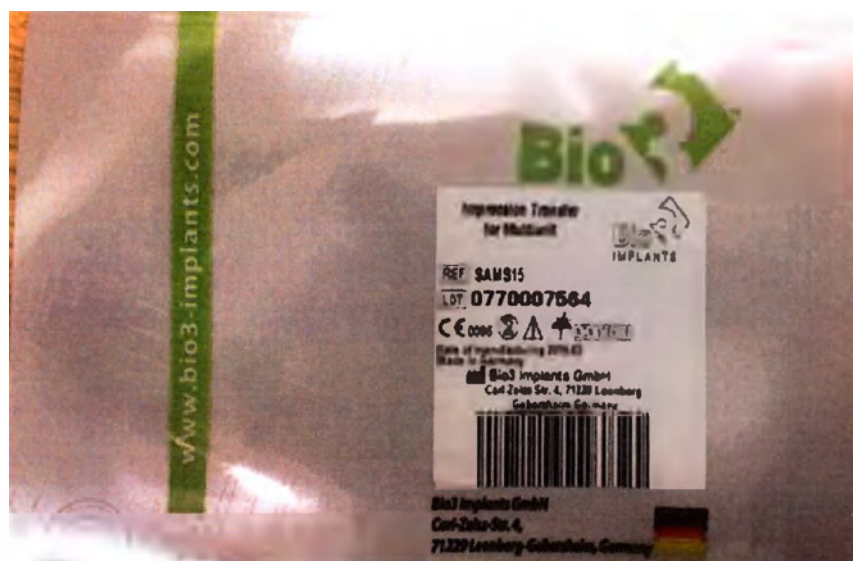


Образец маркировки Трансфера оттискового для мультиюнита
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Impression Transfer for Multiunit	Трансфер оттисковой для мультиюнита
REF SAMS15	Код продукта SAMS15
LOT	Лот
CE 0066	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
NON STERILE	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Винта для абатмента широкая платформа
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Screw for Abutment W	Винт для абатмента широкая платформа
REF SW	Код продукта SW
LOT	Лот
CE 0086	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
NON STERILE	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

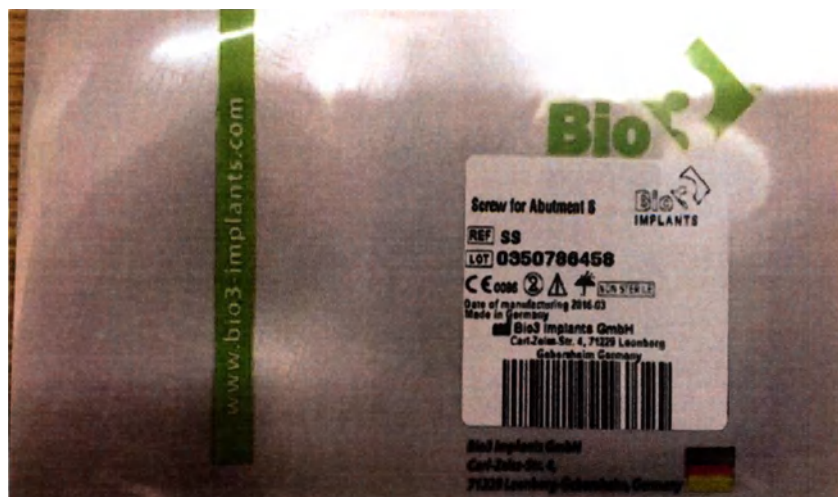

Образец маркировки Винта для абатмента узкая платформа
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Screw for Abutment S	Винт для абатмента узкая платформа
 SS	Код продукта SS
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Винта для абатмента для эстетического
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
SCREW FOR AESTHETIC abutment	Винт для абатмента для эстетического
REF SSA	Код продукта SSA
LOT	Лот
CE 0046	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
NON STERILE	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Колпачка пластикового для абатмента титанового для CAD/CAM
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Plastic cap for titanium Abutment for CAD/CAM	Колпачок пластиковый для абатмента титанового для CAD/CAM
	Код продукта KTPS
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Колпачка пластикового для абатмента эстетического
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Plastic sleeve for aesthetic abutment	Колпачок пластиковый для абатмента эстетического
 AAMps	Код продукта AAMps
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Колпачка для локатора металлического

Перевод маркировки и расшифровка символов:

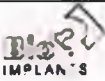Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Metal cap for locator	Колпачок для локатора металлический
 MKL	Код продукта MKL
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Колпачка для локатора стандартного
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Standart cap for locator	Колпачок для локатора стандартный
 SKL	Код продукта SKL
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Колпачка для локатора мягкого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Soft cap for locator	Колпачок для локатора мягкий
 WKL	Код продукта WKL
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Колпачка для локатора жесткого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Hard cap for locator	Колпачок для локатора жесткий
 FKL	Код продукта FKL
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Диска защитного
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Protective disk.	Диск защитный
 SL	Код продукта SL
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Колпачка для шаровидного абатмента металлического
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Metall cap for Ball Attachment	Колпачок для шаровидного абатмента металлический
 MKBA	Код продукта МКБА
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

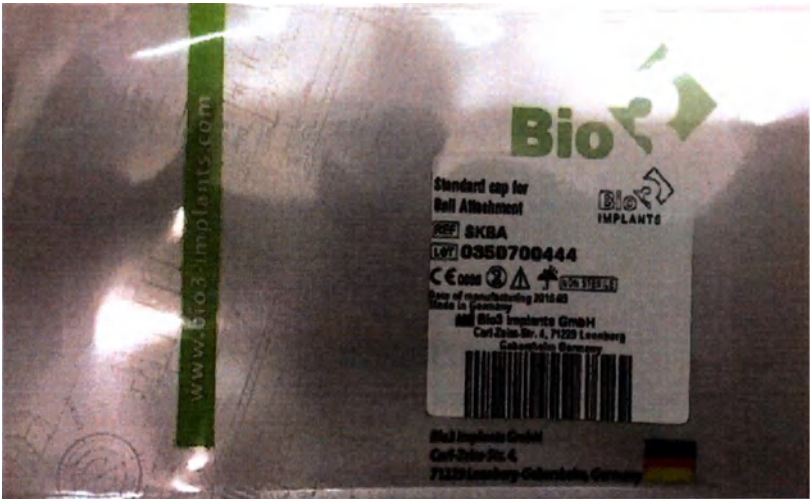

Образец маркировки Колпачка для шаровидного абатмента стандартного
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Standard cap for Ball Attachment	Колпачок для шаровидного абатмента стандартный
 SKBA	Код продукта SKBA
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

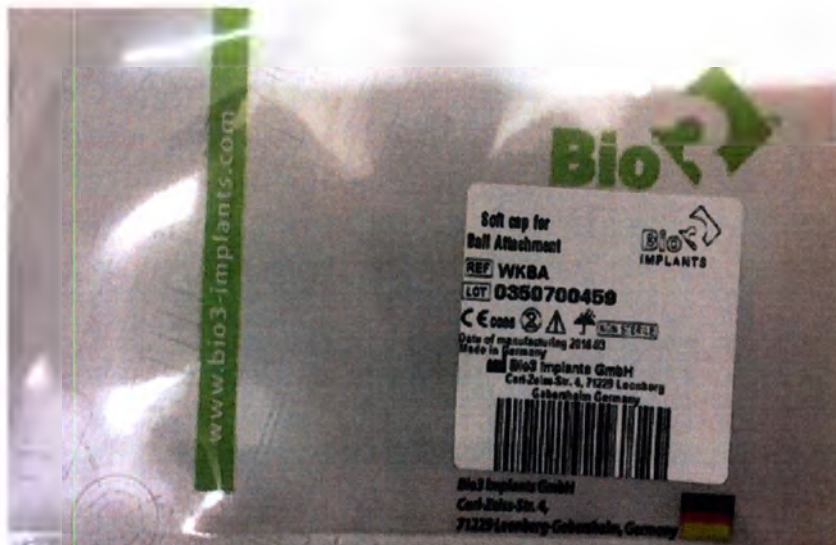

Образец маркировки Колпачка для шаровидного абатмента мягкого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Soft cap for Ball Attachment	Колпачок для шаровидного абатмента мягкий
 WKBA	Код продукта WKBA
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия




Образец маркировки Колпачка для шаровидного абатмента жесткого
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Hard cap for Ball Attachment	Колпачок для шаровидного абатмента жесткий
 FKBA	Код продукта FKBA
	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg-Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг-Гебершайм, Германия



Образец маркировки Сканмаркера для CAD/CAM (широкая платформа)
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Scanmarker for CAD/CAM W	Сканмаркер для CAD/CAM (широкая платформа)
REF STPB	Код продукта STPB
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
NON STERILE	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

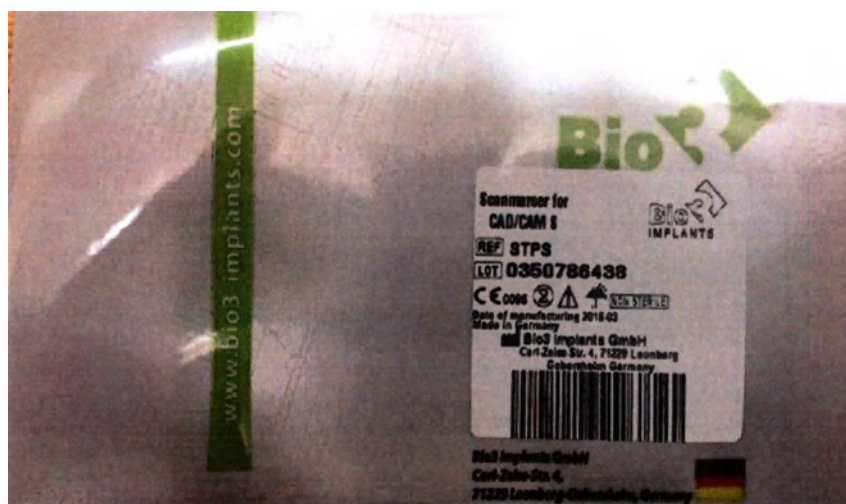

Образец маркировки Сканмаркера для CAD/CAM (узкая платформа)

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Scanmarker for CAD/CAM S	Сканмаркер для CAD/CAM (узкая платформа)
REF STPS	Код продукта STPS
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Манжетки титановой для абатмента эстетического
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Titanium Sleeve for Aesthetic Abutment	Манжетка титановая для абатмента эстетического
REF GAVAA	Код продукта GAVAA
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
NON STERILE	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия





Образец маркировки Колпачка временного для абатмента эстетического
Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Temporary cap for aesthetic abutment	Колпачок временный для абатмента эстетического
REF TGAS 1	Код продукта TGAS 1
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям CE (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия



Образец маркировки Манжетки пластиковой для абатмента эстетического
Перевод маркировки и расшифровка символов:

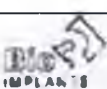Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Plastic Sleeve for aesthetic abutment	Манжетка пластиковая для абатмента эстетического
REF Plastic VAAS	Код продукта Plastic VAAS
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

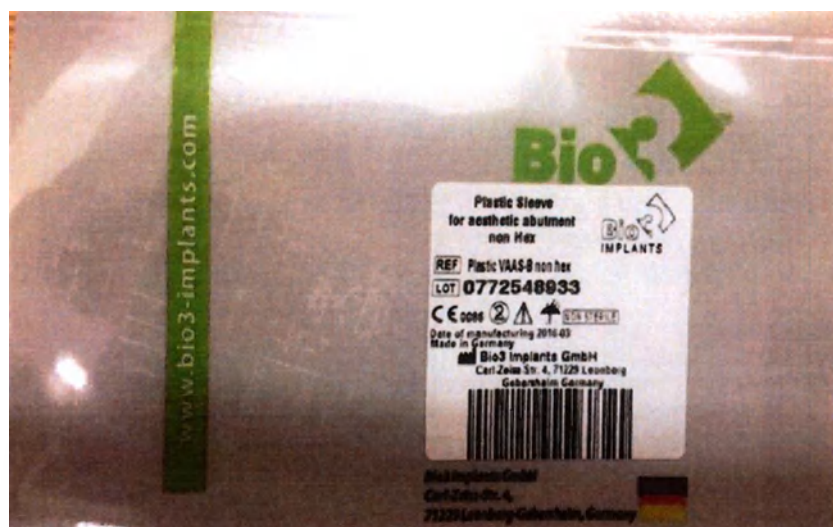

Образец маркировки Манжетки пластиковой без шестигранника для абатмента эстетического

Перевод маркировки и расшифровка символов:

Текст	Перевод
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
	Логотип компании-производителя «Био3 Имплантс»
TM	Торговая марка
www.bio3-implants.com	Сайт компании
Plastic Sleeve for aesthetic abutment non Hex	Манжетка пластиковая без шестигранника для абатмента эстетического
REF Plastic VAAS-B non hex	Код продукта Plastic VAAS-B non hex
LOT	Лот
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Запрет на повторное применение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Не стерильно
Date of manufacturing	Дата производства
Made in Germany	Сделано в Германии
	Изготовитель
Bio3 Implants GmbH Carl-Zeiss-Str. 4, 71229 Leonberg- Gebersheim, Germany	Био3 Имплантс ГмбХ ул. Карл-Цейсс 4, 71229 Леонберг- Гебершайм, Германия

15. Технические характеристики

Общие технические характеристики имплантатов

Шероховатость поверхности имплантатов = 10-15 микрон.

Максимальная выдерживаемая нагрузка при $5 \cdot 10^6$ циклов = 439 Н.

Усилие установки – не более 35-70 Н/см (см. таблицу 2).

Период приживления имплантатов на верхней челюсти 3-6 недель, на нижней челюсти 2-4 недели.



Таблица 2. Рекомендованное усилие при установке имплантата

Имплантат (ø, мм)	Разновидность имплантата	максимальное рекомендуемое усилие	Тип кости			
			D1	D2	D3	D4
3,3	Прогрессив	Н/см	45	45	40	35
	Адванс	Н/см	45	45	40	35
3,8	Прогрессив	Н/см	60	60	55	50
	Адванс	Н/см	60	60	55	50
4,2	Прогрессив	Н/см	65	65	60	55
	Адванс	Н/см	65	65	60	55
4,6	Адванс	Н/см	65	65	60	55
5	Прогрессив	Н/см	70	70	65	60
	Адванс	Н/см	70	70	65	60
5,5	Адванс	Н/см	70	70	65	60

D1 – первый тип кости, D2 – второй тип кости, D3 – третий тип кости, D4 - четвертый тип кости

Врач самостоятельно определяет, насколько данная продукция подходит ему для применения и берет на себя всю ответственность за риск. Ошибка во время манипуляции может привести к неправильной установке имплантата, воспалению или потере окружающей костной ткани. Компания Bio3 Implants GmbH / «Био3 Имплантс ГмбХ» не несет ответственности за неправильное использование имплантатов или причинение вреда пациенту.

*На представленных чертежах единицы измерения размеров указаны в мм.

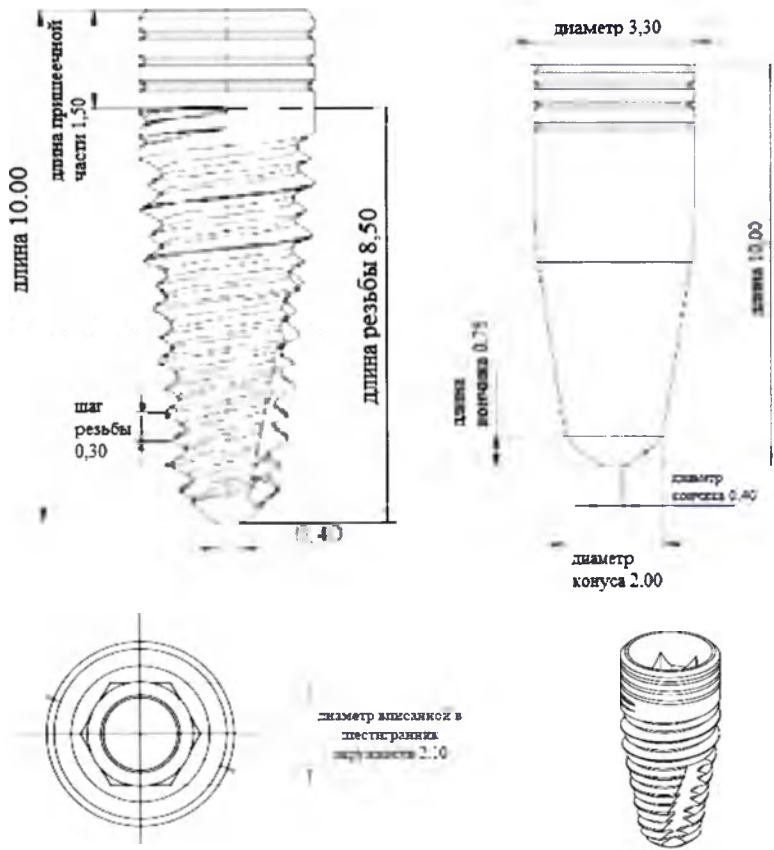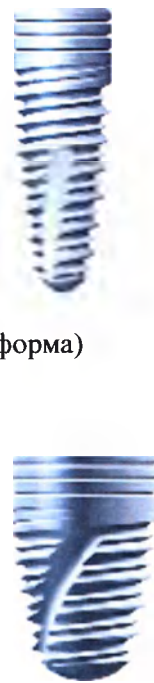Чертеж*	Описание	Изображение
Имплантат Адванс  Technical drawing of the 'Advans' implant. The side view shows a total length of 10.00 mm, a threaded length of 8.50 mm, and a non-threaded length of 1.50 mm. The thread pitch is 0.30 mm. The diameter of the main body is 3.30 mm. The cross-sectional view shows a conical base with a diameter of 2.00 mm and a diameter of 0.40 mm at the tip. The diameter of the hexagonal base is 2.00 mm. The drawing also includes a detail of the hexagonal base and a side view of the threaded part.		
	Служит в качестве опоры для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента (используется для внедрения в костную ткань челюсти с последующим сращением (остеоинтеграцией) с целью протезирования; замещает собой корни утраченных зубов, позволяя впоследствии провести восстановление зубного ряда)	 (узкая платформа) (широкая платформа)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Название на русском языке	Диаметр ($\pm 0,05$ мм)	Длина ($\pm 0,01$ мм)	Диаметр вписанной в шестигранник окружности ($\pm 0,20$ мм)	Шаг резьбы ($\pm 0,02$ мм)	Рабочая длина ($\pm 0,40$ мм)	Длина пришеечной части ($\pm 0,10$ мм)	Длина резьбы ($\pm 0,10$ мм)	Диаметр конуса ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр кончика ($\pm 0,05$ мм)	Длина кончика ($\pm 0,01$ мм)	масса, г. (не более)
АТІЗ.3/8	Имплантат Адванс S (узкая платформа) диаметром 3,3 мм, длиной 8 мм	3,30	8,00	2,10	0,30	8,00	1,50	6,50	2,00	0,40	0,75	0,20
АТІЗ.3/10	Имплантат Адванс S (узкая платформа) диаметром 3,3 мм, длиной 10 мм	3,30	10,00	2,10	0,30	10,00	1,50	8,50	2,00	0,40	0,75	0,28

АТІЗ.3/11 .5	Имплантат Адванс S (узкая платформа) диаметром 3.3 мм, длиной 11.5 мм	3,30	11,50	2,10	0,30	11,50	1,50	10,00	2,00	0,40	0,75	0,34
АТІЗ.3/13	Имплантат Адванс S (узкая платформа) диаметром 3.3 мм, длиной 13 мм	3,30	13,00	2,10	0,30	13,00	1,50	11,50	2,00	0,40	0,75	0,40

АТІЗ.8/8	Имплантат Адванс S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм, длиной 8 мм	3,80	8,00	2,10	0,30	8,00	1,50	6,50	2,80	0,40	0,75	0,30
АТІЗ.8/10	Имплантат Адванс S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм, длиной 10 мм	3,80	10,00	2,10	0,30	10,00	1,50	8,50	2,80	0,40	0,75	0,41
АТІЗ.8/11 .5	Имплантат Адванс S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм, длиной 11.5 мм	3,80	11,50	2,10	0,30	11,50	1,50	10,00	2,80	0,40	0,75	0,48

АТІ3.8/13	Имплантат Адванс S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм, длиной 13 мм	3,80	13,00	2,10	0,30	13,00	1,50	11,50	2,80	0,40	0,75	0,56
АТІВ4.2/ 8	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм, длиной 8 мм	4,20	8,00	2,50	0,30	8,00	1,50	6,50	3,10	0,40	0,75	0,40
АТІВ4.2/ 10	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм, длиной 10 мм	4,20	10,00	2,50	0,30	10,00	1,50	8,50	3,10	0,40	0,75	0,52


АТІВ4.2/ 11.5	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм, длиной 11.5 мм	4,20	11,50	2,50	0,30	11,50	1,50	10,00	3,10	0,40	0,75	0,63
АТІВ4.2/ 13	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм, длиной 13 мм	4,20	13,00	2,50	0,30	13,00	1,50	11,50	3,10	0,40	0,75	0,71
АТІВ4.6/ 8	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.6 мм, длиной 8 мм	4,60	8,00	2,50	0,30	8,00	1,50	6,50	3,10	0,40	0,75	0,49

АТІВ4.6/ 10	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.6 мм, длиной 10 мм	4,60	10,00	2,50	0,30	10,00	1,50	8,50	3,10	0,40	0,75	0,64
АТІВ4.6/ 11.5	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.6 мм, длиной 11.5 мм	4,60	11,50	2,50	0,30	11,50	1,50	10,00	3,10	0,40	0,75	0,76
АТІВ4.6/ 13	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 4.6 мм, длиной 13 мм	4,60	13,00	2,50	0,30	13,00	1,50	11,50	3,10	0,40	0,75	0,87

ATIB5/8	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 5 мм, длиной 8 мм	5,00	8,00	2,50	0,30	8,00	1,50	6,50	3,60	0,40	0,75	0,60
ATIB5/10	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 5 мм, длиной 10 мм	5,00	10,00	2,50	0,30	10,00	1,50	8,50	3,60	0,40	0,75	0,78
ATIB5/11 .5	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 5 мм, длиной 11.5 мм	5,00	11,50	2,50	0,30	11,50	1,50	10,00	3,60	0,40	0,75	0,90
ATIB5/13	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 5 мм, длиной 13 мм	5,00	13,00	2,50	0,30	13,00	1,50	11,50	3,60	0,40	0,75	1,04

ATIB5.5/ 8	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 5.5 мм, длиной 8 мм	5,50	8,00	2,50	0,30	8,00	1,50	6,50	3,60	0,40	0,75	0,75
ATIB5.5/ 10	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 5.5 мм, длиной 10 мм	5,50	10,00	2,50	0,30	10,00	1,50	8,50	3,60	0,40	0,75	0,96
ATIB5.5/ 11.5	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 5.5 мм, длиной 11.5 мм	5,50	11,50	2,50	0,30	11,50	1,50	10,00	3,60	0,40	0,75	1,12

ATIB5.5/ 13	Имплантат Адванс W (широкая платформа) диаметром 5.5 мм, длиной 13 мм	5,50	13,00	2,50	0,30	13,00	1,50	11,50	3,60	0,40	0,75	1,23
----------------	--	------	-------	------	------	-------	------	-------	------	------	------	------

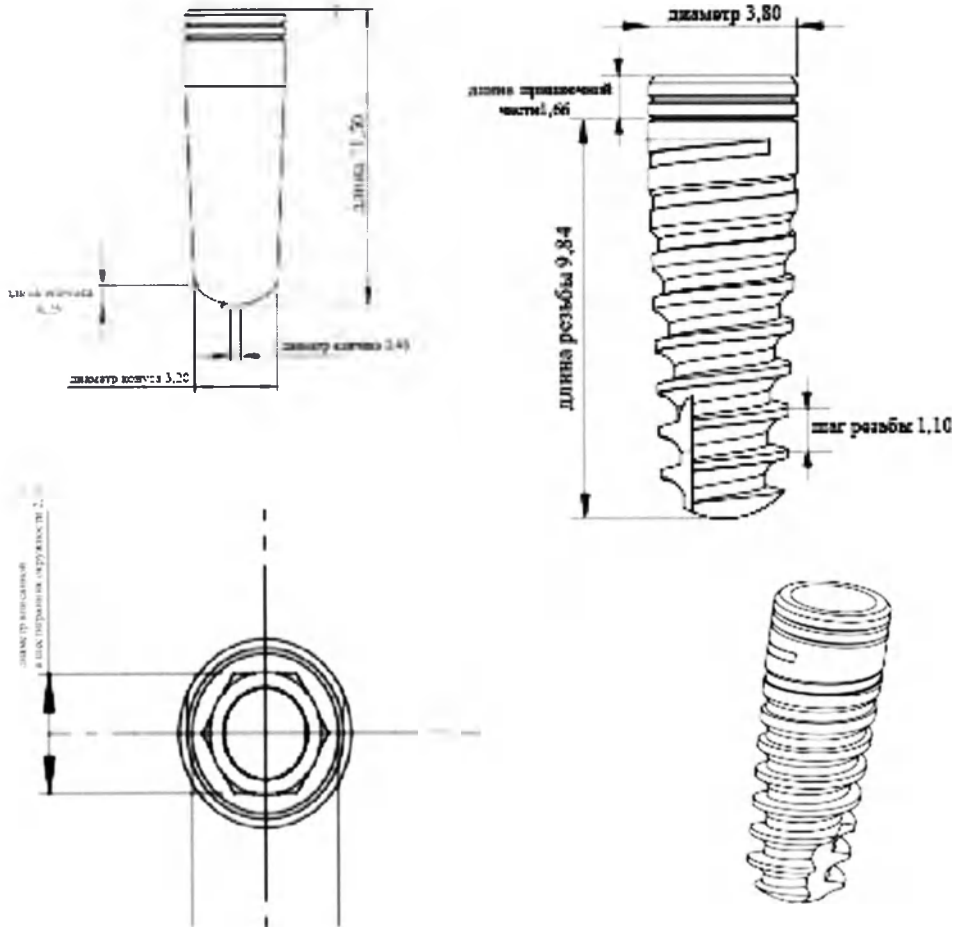Чертеж*	Описание	Изображение
Имплантат Прогрессив 		
	Служат в качестве опоры для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функцию пациента (используется для внедрения в костную ткань челюсти с последующим сращением (остеоинтеграцией) с целью протезирования; замещает собой корни утраченных зубов, позволяя впоследствии провести восстановление зубного ряда)	 (Узкая платформа)  (Широкая платформа)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Название на русском языке	Диаметр (± 0,05 мм)	Длина (± 0,01 мм)	Диаметр вписанной в шестигранник окружности (±0,20 мм)	Шаг резьбы (±0,02 мм)	Рабочая длина (± 0,40 мм)	Длина пришеечной части (±0,10 мм)	Длина резьбы (±0,10 мм)	Диаметр конуса (± 0,05 мм)	Диаметр кончика (± 0,05 мм)	Длина кончика (± 0,01 мм)	масса, г (не более)
РТИЗ. 3/10	Имплантат Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.3 мм, длиной 10 мм	3,30	10,00	2,10	1,10	10,00	1,69	8,31	2,60	0,40	0,75	0,14
РТИЗ. 3/11.5	Имплантат Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.3 мм, длиной 11.5 мм	3,30	11,50	2,10	1,10	11,50	1,70	9,80	2,60	0,40	0,75	0,24

РТИЗ. 3/13	Имплантат Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.3 мм, длиной 13 мм	3,30	13,00	2,10	1,10	13,00	1,70	11,30	2,60	0,40	0,75	0,30
РТИЗ. 8/8	Имплантат Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм, длиной 8 мм	3,80	8,00	2,10	1,10	8,00	1,60	6,40	3,20	0,40	0,75	0,20

PT13. 8/10	Имплантат Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм, длиной 10 мм	3,80	10,00	2,10	1,10	10,00	1,65	8,35	3,20	0,40	0,75	0,31
PT13. 8/11. 5	Имплантат Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм, длиной 11.5 мм	3,80	11,50	2,10	1,10	11,50	1,66	9,84	3,20	0,40	0,75	0,38


PTI3. 8/13	Имплантат Прогрессив S (узкая платформа) диаметром 3.8 мм, длиной 13 мм	3,80	13,00	2,10	1,10	13,00	1,66	11,34	3,20	0,40	0,75	0,46
PTIB 4.2/8	Имплантат Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм, длиной 8 мм	4,20	8,00	2,50	1,10	8,00	1,70	6,30	3,60	0,40	0,75	0,29


РТИВ 4.2/1 0	Имплантат Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм, длиной 10 мм	4,20	10,00	2,50	1,10	10,00	1,70	8,30	3,60	0,40	0,75	0,42
РТИВ 4.2/1 1.5	Имплантат Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм, длиной 11.5 мм	4,20	11,50	2,50	1,10	11,50	1,70	9,80	3,60	0,40	0,75	0,51

РТІВ 4.2/1 3	Имплантат Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 4.2 мм, длиной 13 мм	4,20	13,00	2,50	1,10	13,00	1,70	11,30	3,60	0,40	0,75	0,61
РТІВ 5/8	Имплантат Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 5 мм, длиной 8 мм	5,00	8,00	2,50	1,10	8,00	1,70	6,30	4,20	0,40	0,75	0,50

РТИВ 5/10	Имплантат Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 5 мм, длиной 10 мм	5,00	10,00	2,50	1,10	10,00	1,70	8,30	4,20	0,40	0,75	0,68
РТИВ 5/11. 5	Имплантат Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 5 мм, длиной 11.5 мм	5,00	11,50	2,50	1,10	11,50	1,70	9,80	4,20	0,40	0,75	0,81

РТИВ 5/13	Имплантат Прогрессив W (широкая платформа) диаметром 5 мм, длиной 13 мм	5,00	13,00	2,50	1,10	13,00	2,13	10,87	4,20	0,40	0,75	0,95
--------------	---	------	-------	------	------	-------	------	-------	------	------	------	------

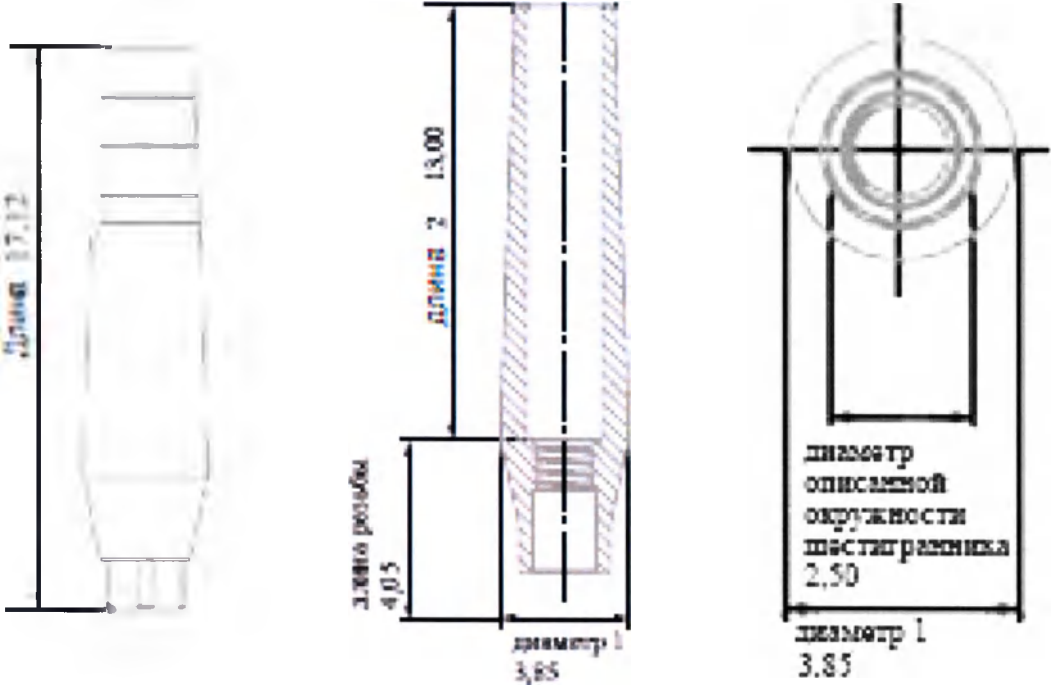
Чертеж*	Описание	Изображение
Абатменты		
 Technical drawing of a straight abutment. The side view shows a length of 17.12 and a diameter of 3.85. The cross-sectional view shows a length of 13.00, a diameter of 3.85, and a diameter of 2.50 for the hexagonal part. The text 'длина резьбы 4,05' (thread length 4.05) is also present.	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка)	 (абатмент прямой)

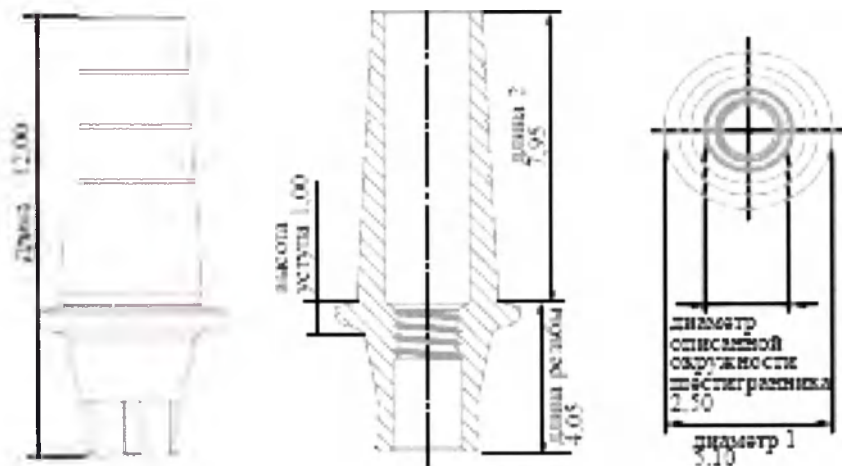

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка)




(абатмент прямой анатомический)

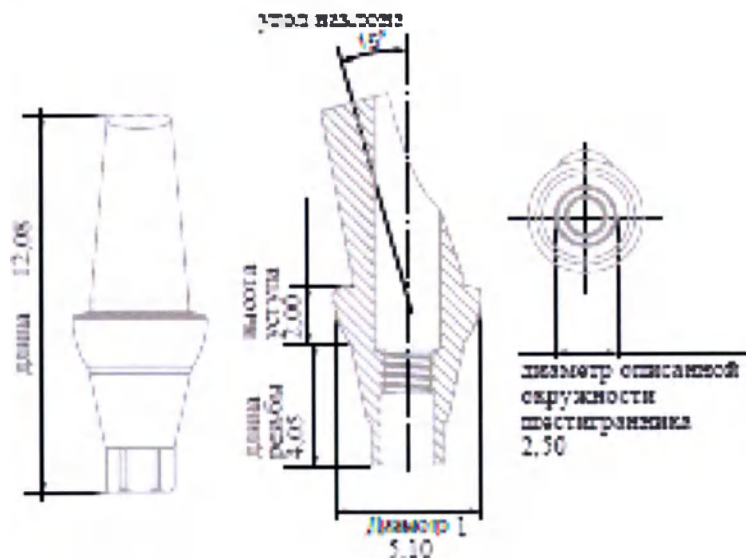

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка)




(абатмент угловой анатомический)

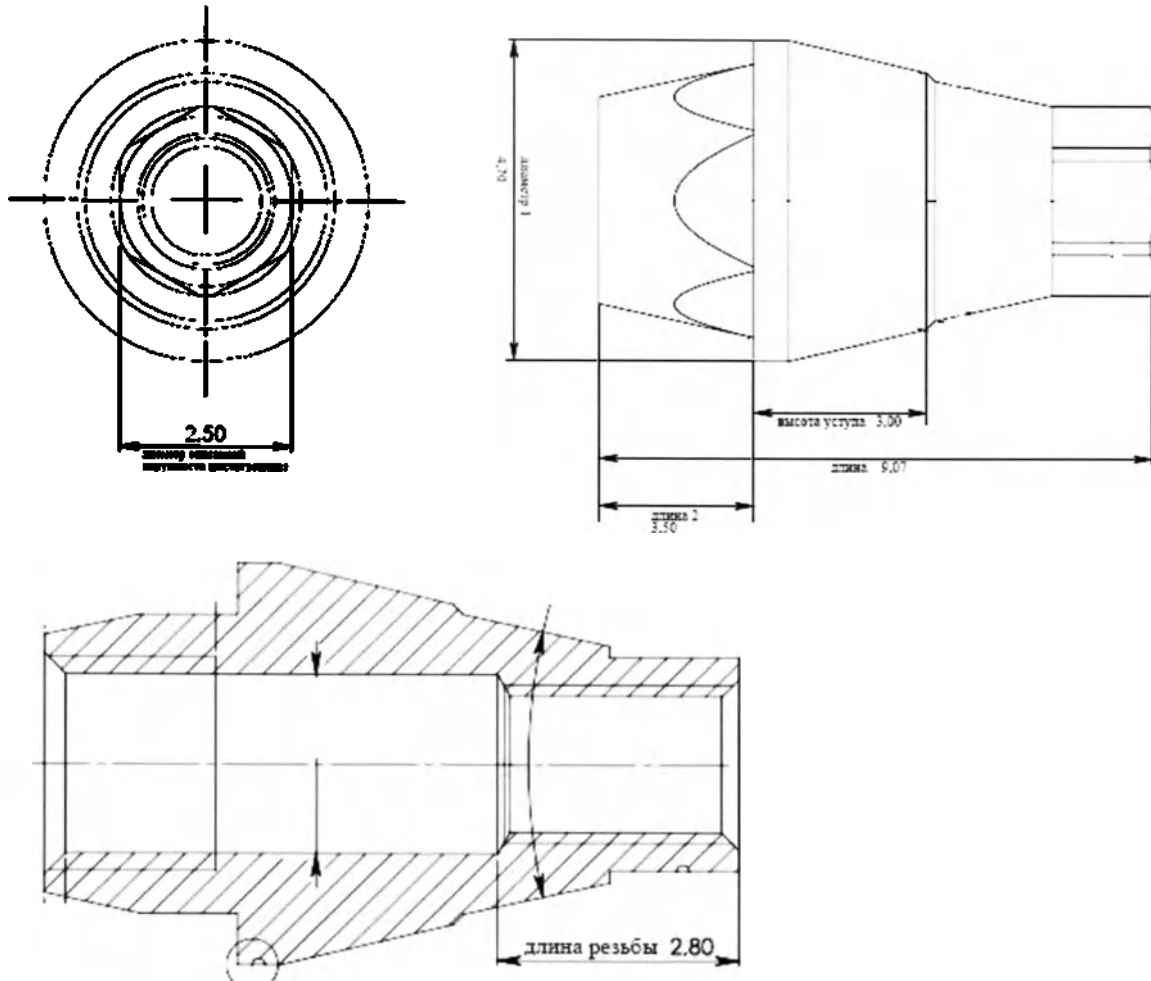

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.





(абатмент эстетический
антиротационный)

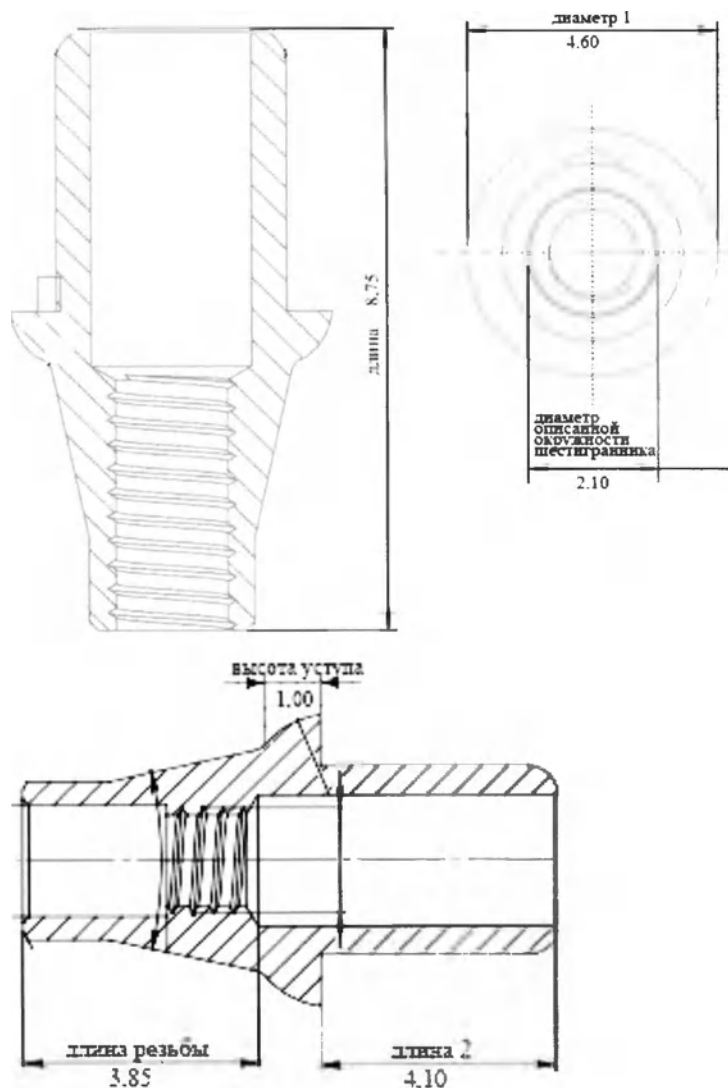

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.





(абатмент титановый для CAD/CAM)

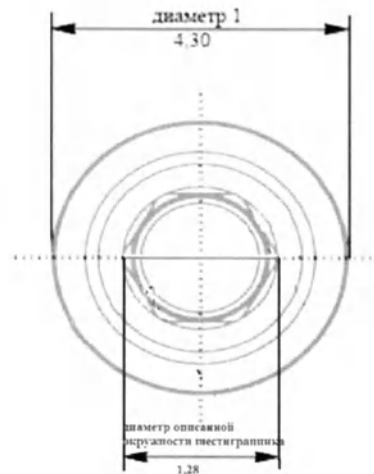
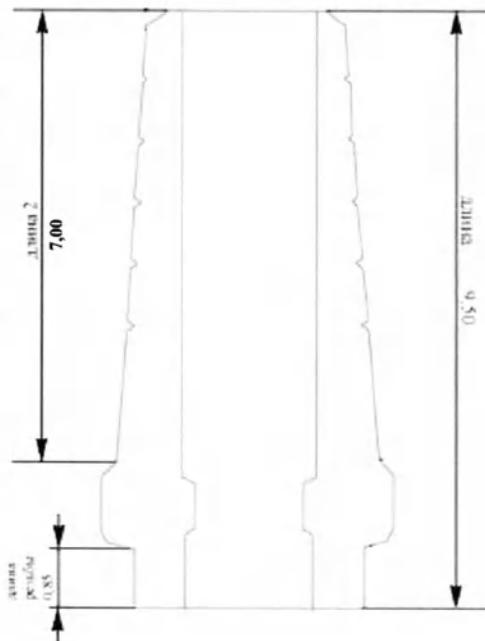



Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.



(абатмент для мультиюнита для цементной фиксации)

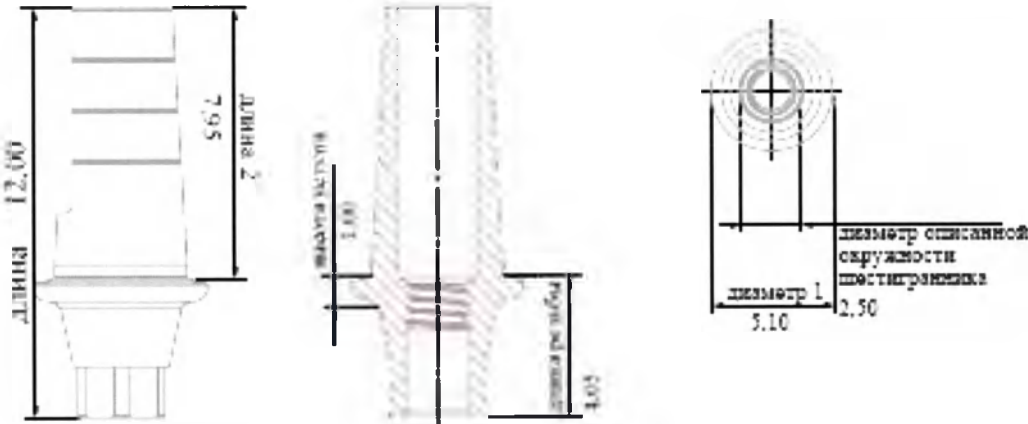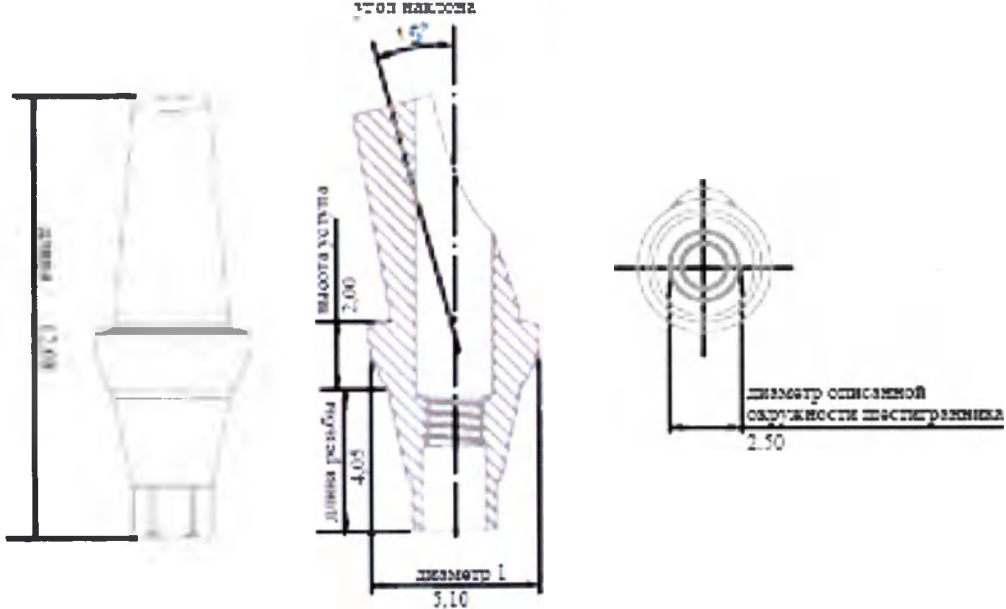	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент циркониевый прямой на титановой основе)
	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент циркониевый угловой на титановой основе)

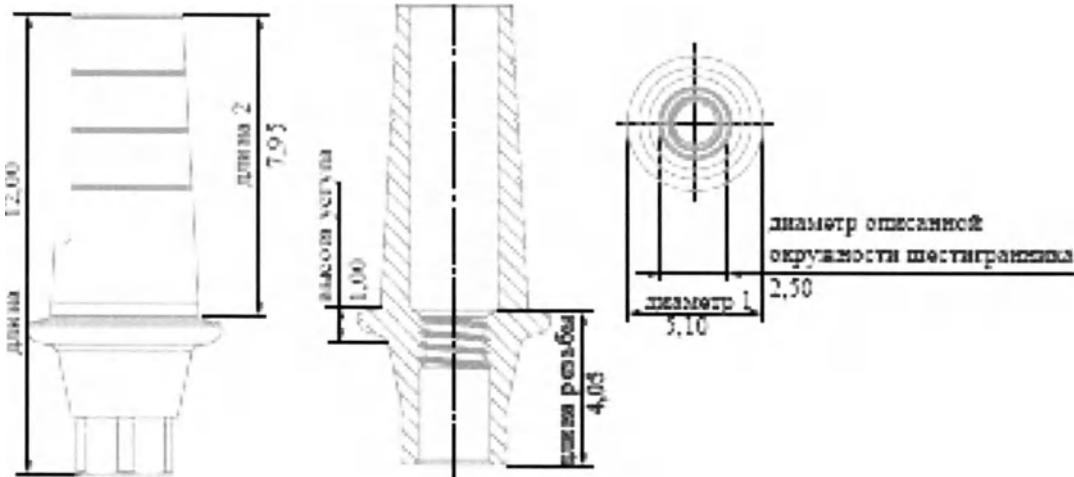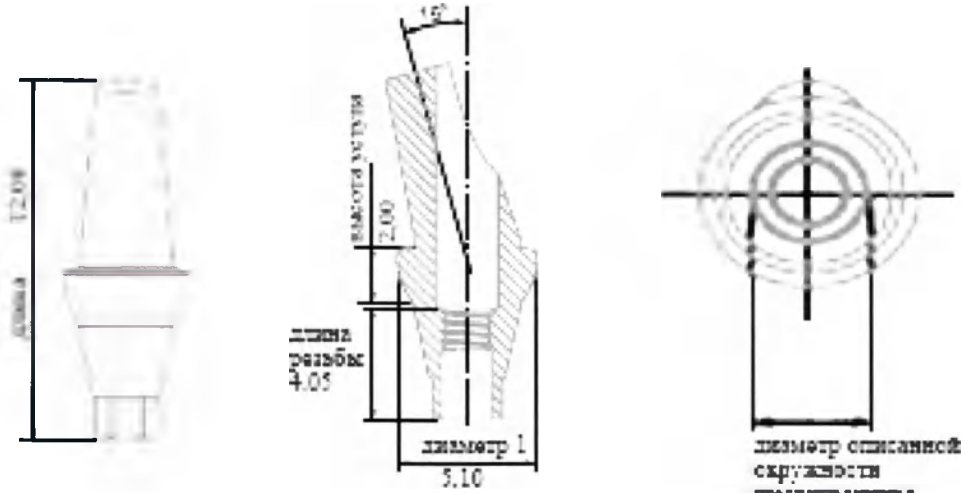
 диаметр 12,00 длина 7,03 высота шейки 1,00 длина резьбы 4,03 диаметр описанной окружности шестигранника 2,50 диаметр 3,10	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент временный прямой)
 диаметр 12,00 длина 7,03 высота шейки 1,00 длина резьбы 4,03 15° диаметр описанной окружности шестигранника 2,50 диаметр 3,10	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент временный угловой)

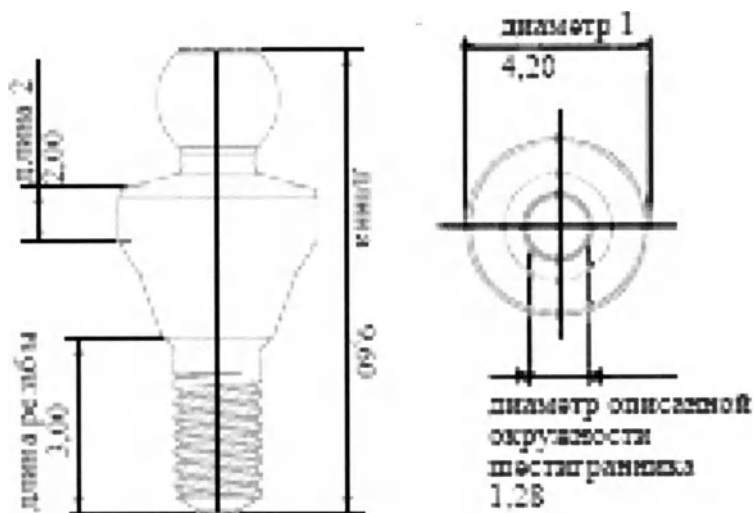

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.




(абатмент шаровидный)

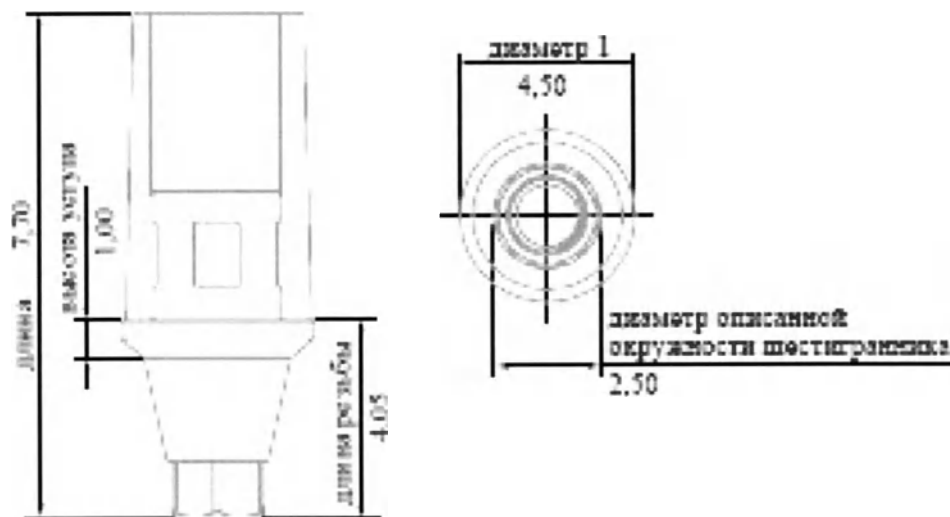

Служат как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещаются на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.




(абатмент титановый с пластиковым колпачком)

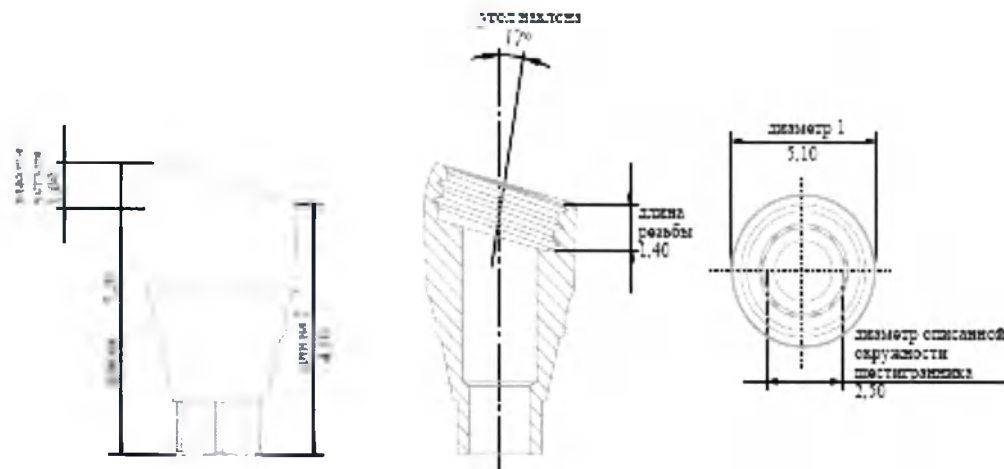

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.




(абатмент титановый база для мультиюнита)

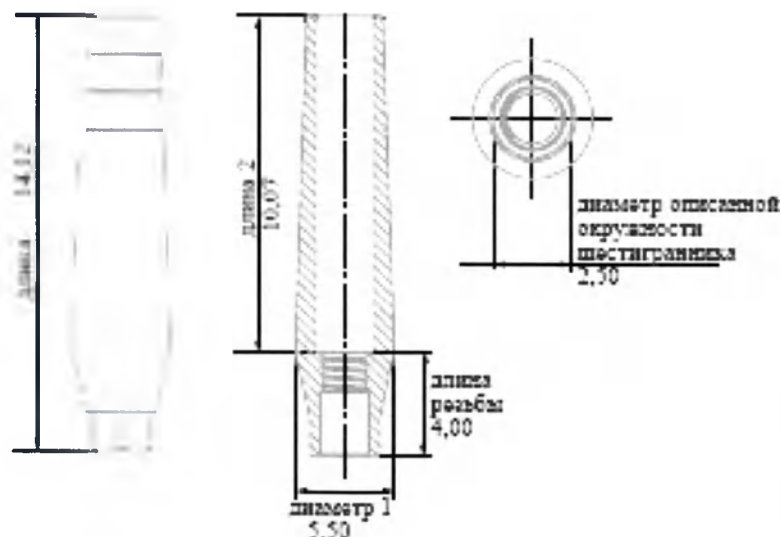

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.




(абатмент прямой для формообразования)

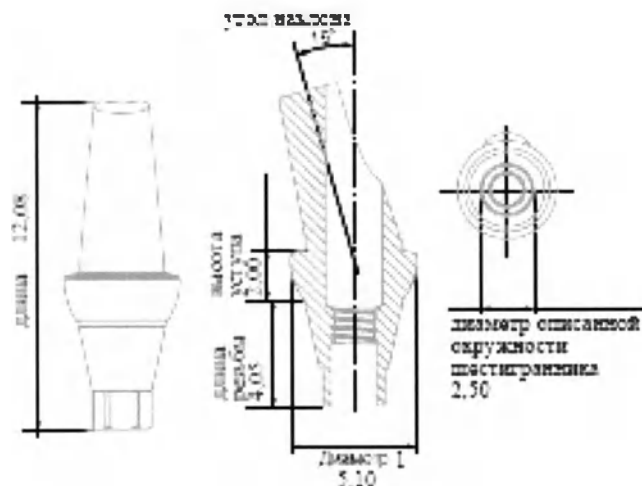

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.





(абатмент угловой для формообразования)

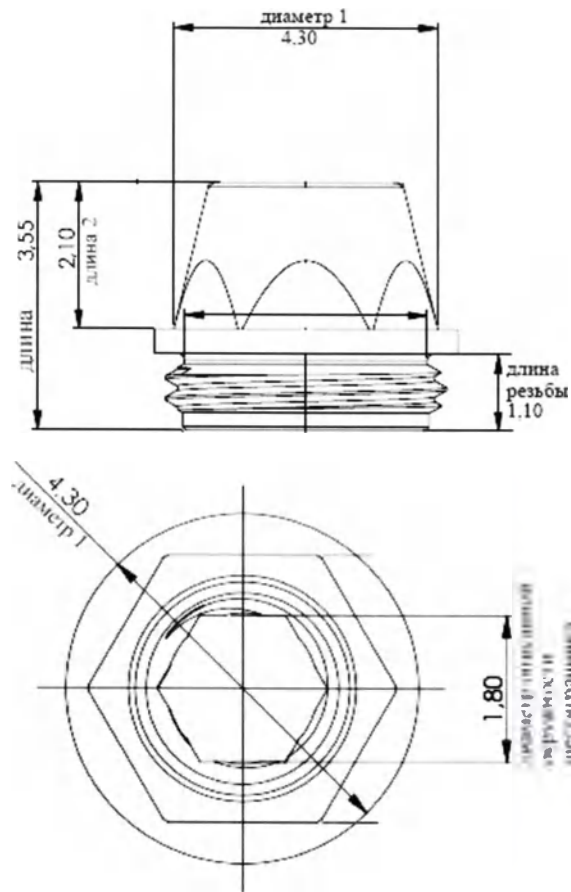

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.





(абатмент эстетический для мультиюнита)

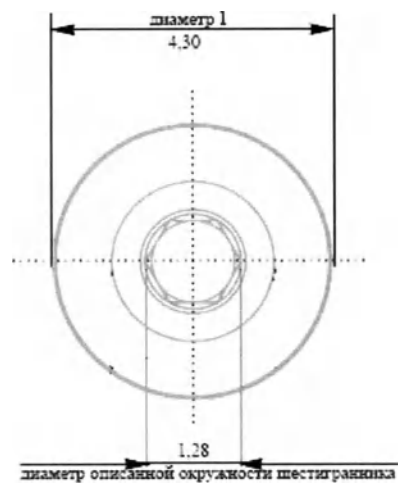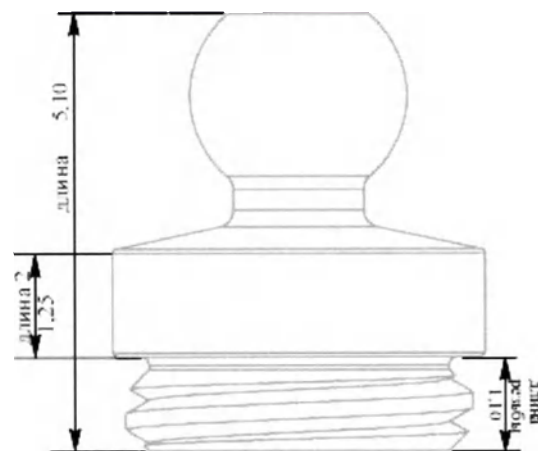


Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.



(абатмент шаровидный для мультиюнита)

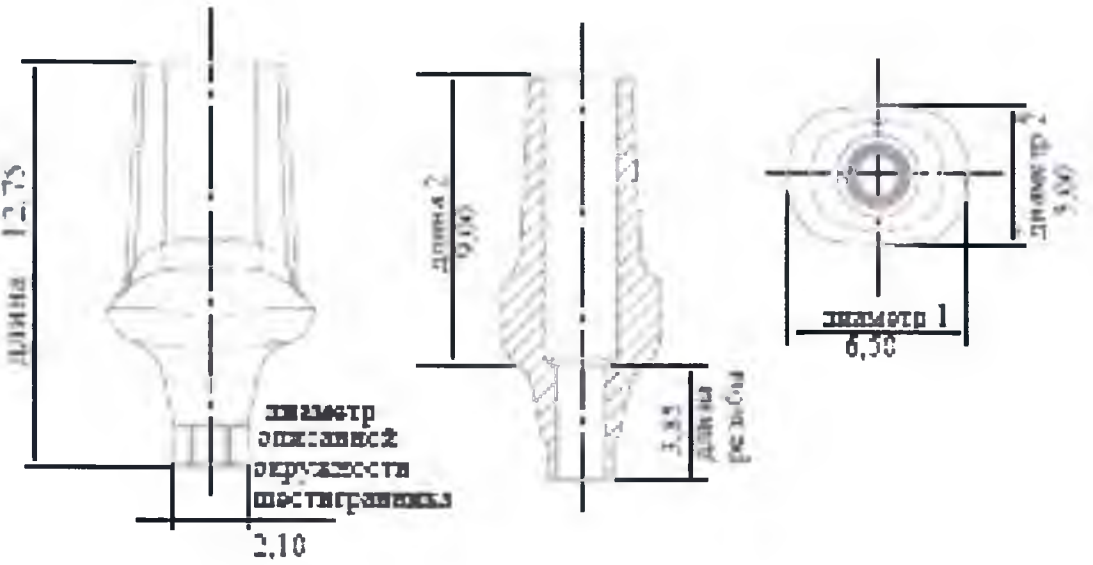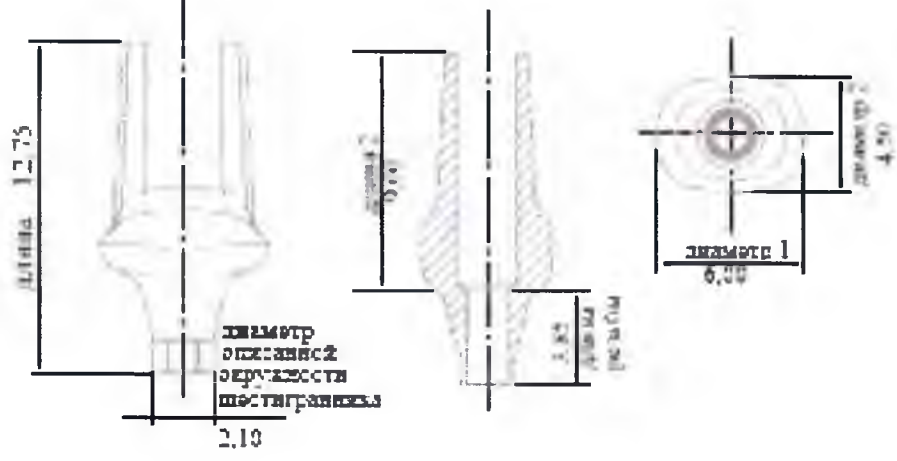	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент прямой для клыков)
	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент прямой для премоляров)



	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	(абатмент прямой для моляров)
	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	(абатмент прямой для резцов)


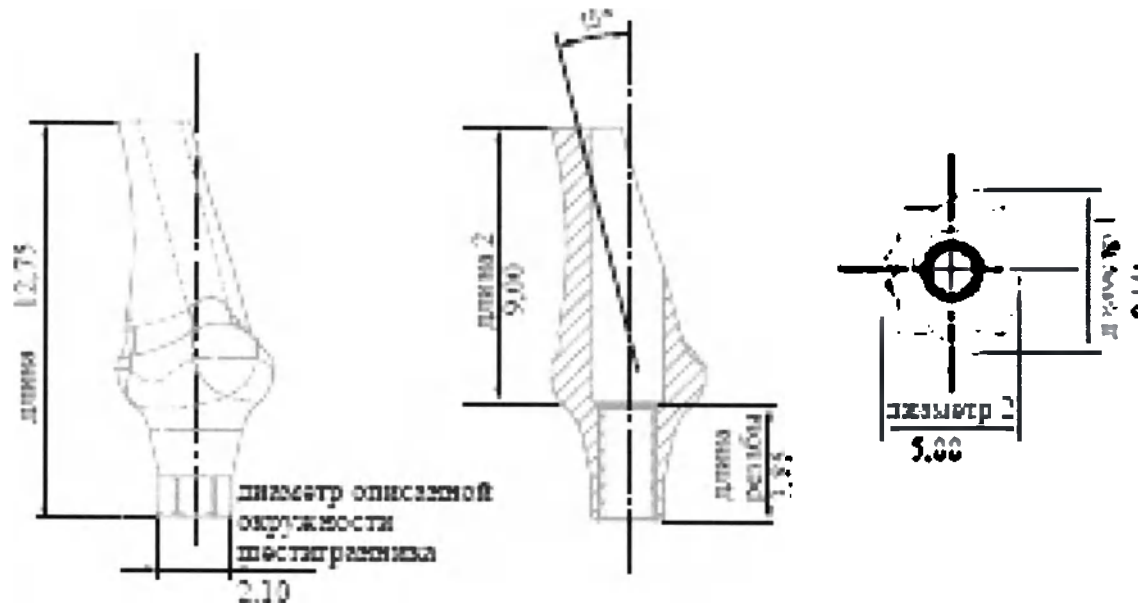




Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.



(абатмент угловой для резцов)

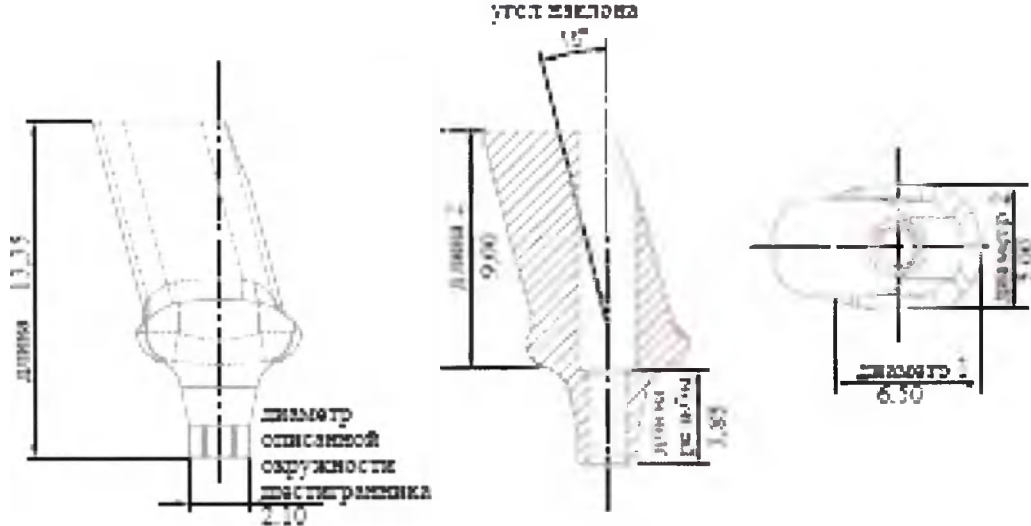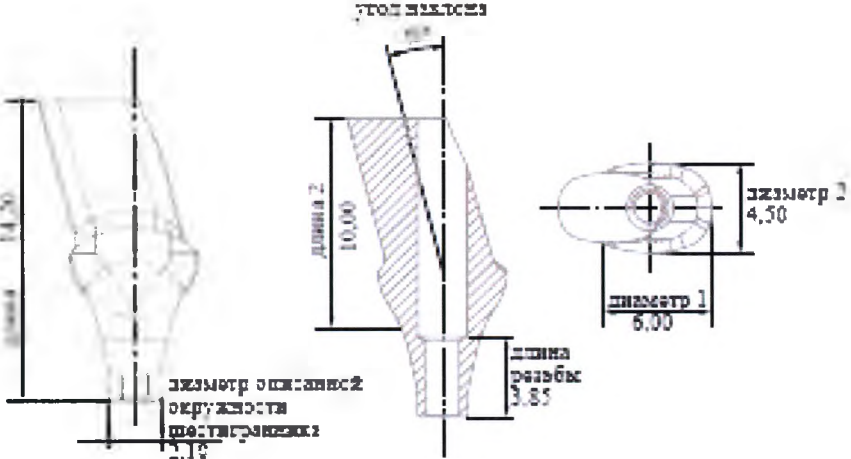 УГОЛ НАКЛОНА 15° длина 13.35 длина 2 9.00 диаметр описанной окружности шестигранника 2.10 диаметр 1 6.50 диаметр 2 1.85	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент угловой для клыков)
 УГОЛ НАКЛОНА 15° длина 14.20 длина 2 10.00 диаметр описанной окружности шестигранника 2.10 диаметр 1 6.00 диаметр 2 1.85	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент угловой для премоляров)

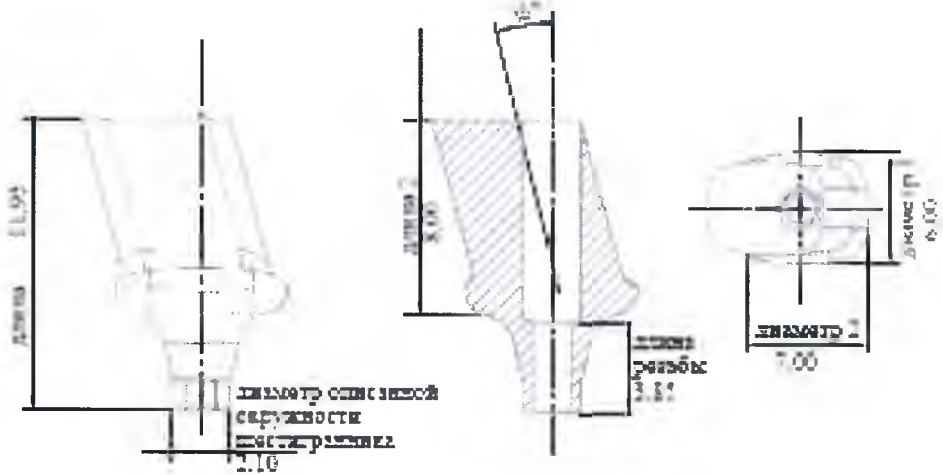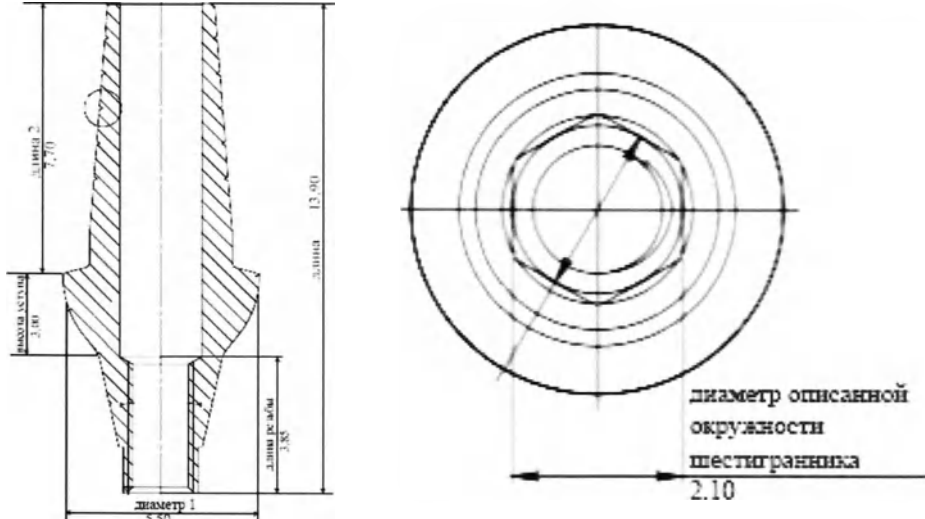 Technical drawing of an angled abutment. The side view shows a length of 11.95 and a diameter of 2.10. The cross-section shows a length of 8.00 and a diameter of 2.10. The top view shows a diameter of 6.00 and a diameter of 7.00. The text 'диаметр описанной окружности шестигранника' (diameter of the circumscribed hexagon) is present.	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент угловой для моляров)
 Technical drawing of a straight anatomical wide abutment. The side view shows a length of 13.90, a diameter of 2.10, and a diameter of 5.50. The top view shows a diameter of 2.10 and a diameter of 6.00. The text 'диаметр описанной окружности шестигранника' (diameter of the circumscribed hexagon) is present.	Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.	 (абатмент прямой анатомический широкий)

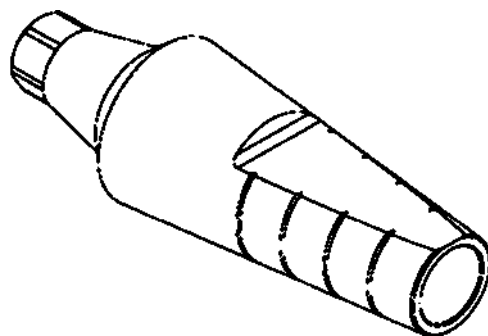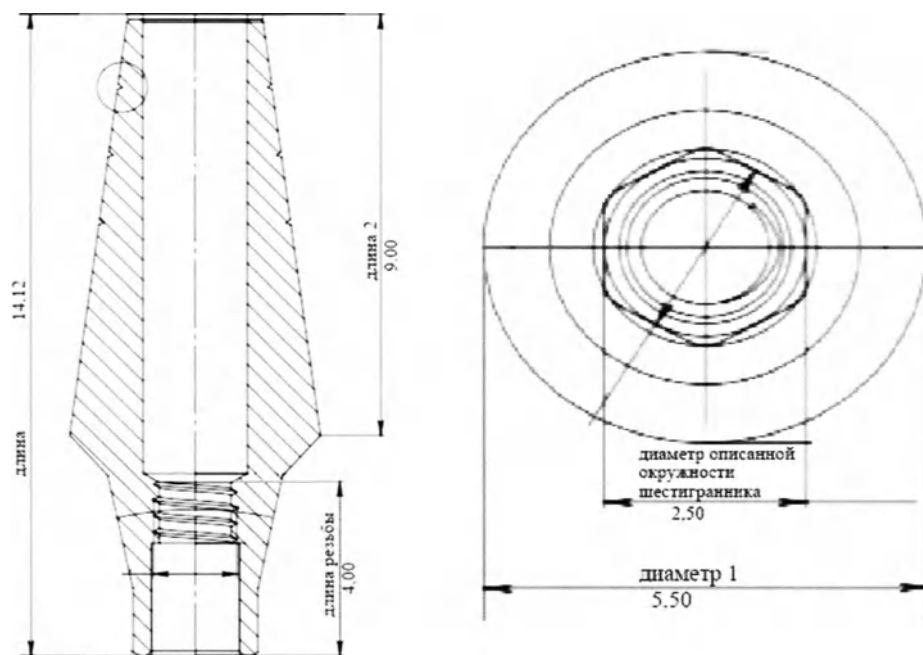

Служит как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функций пациента. Размещается на имплантате, затем на абатмент ставится протез зуба (коронка), балка или мост.



(абатмент прямой широкий)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Название на русском языке	Диаметр 1 ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр 2 ($\pm 0,05$ мм)	Длина ($\pm 0,01$ мм)	Длина 2 ($\pm 0,03$ мм)	Диаметр описанной окружности шестигранника ($\pm 0,20$ мм)	Диаметр вписанной в шестигранник окружности ($\pm 0,20$ мм)	Длина резьбы ($\pm 0,05$ мм)	Шаг резьбы ($\pm 0,02$ мм)	Высота уступа ($\pm 0,10$ мм)	Рабочая длина ($\pm 0,40$ мм)	Угол наклона (не более $^\circ$)	масса, г (не более)
GAAB 1	Абатмент прямой анатомический W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм	5,10	-	12,00	7,95	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	12,00	-	0,35
GAAB 2	Абатмент прямой анатомический W (широкая платформа) с высотой уступа 2 мм	5,10	-	13,00	8,95	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	13,00	-	0,40
GAAB 3	Абатмент прямой анатомический W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм	5,10	-	14,00	9,95	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	14,00	-	0,46

GAAS 1	Абатмент прямой анатомический S (узкая платформа) с высотой уступа 1 мм	4,60	-	11,55	7,70	2,10	1,75	3,85	0,35	1,00	11,55	-	0,28
GAAS 2	Абатмент прямой анатомический S (узкая платформа) с высотой уступа 2 мм	4,60	-	12,55	8,70	2,10	1,75	3,85	0,35	2,00	12,55	-	0,31
GAAS 3	Абатмент прямой анатомический S (узкая платформа) с высотой уступа 3 мм	4,60	-	13,55	9,70	2,10	1,75	3,85	0,35	3,00	13,55	-	0,35
GAB7	Абатмент прямой W (широкая платформа), длиной 7 мм	3,85	-	11,12	7,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	11,12	-	0,31
GAB8	Абатмент прямой W (широкая платформа), длиной 8 мм	3,85	-	12,12	8,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	12,12	-	0,33
GAB9	Абатмент прямой W (широкая платформа), длиной 9 мм	3,85	-	14,12	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	14,12	-	0,37

GAB1 0	Абатмент прямой W (широкая платформа), длиной 10 мм	3,85	-	15,12	10,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	15,12	-	0,41
GAB1 3	Абатмент прямой W (широкая платформа), длиной 13 мм	3,85	-	17,12	13,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	17,12	-	0,45
GAS7	Абатмент прямой S (узкая платформа), длиной 7 мм	3,35	-	9,55	7,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	9,55	-	0,21
GAS8	Абатмент прямой S (узкая платформа), длиной 8 мм	3,35	-	10,55	8,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	10,55	-	0,24
GAS9	Абатмент прямой S (узкая платформа), длиной 9 мм	3,35	-	12,55	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	8,70	-	0,27
GAS1 0	Абатмент прямой S (узкая платформа), длиной 10 мм	3,35	-	13,55	10,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	9,70	-	0,29

GAS1 3	Абатмент прямой S (узкая платформа), длиной 13 мм	3,35	-	15,55	13,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	11,70	-	0,32
VAAB 1	Абатмент эстетический антиротационный W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм	4,70	-	7,07	1,50	2,50	1,95	2,80	0,35	1,00	7,07	-	0,39
VAAB 2	Абатмент эстетический антиротационный W (широкая платформа) с высотой уступа 2 мм	4,70	-	8,07	2,50	2,50	1,95	2,80	0,35	2,00	8,07	-	0,44
VAAB 3	Абатмент эстетический антиротационный W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм	4,70	-	9,07	3,50	2,50	1,95	2,80	0,35	3,00	9,07	-	0,48
VAAS 1	Абатмент эстетический антиротационный S (узкая платформа) с высотой уступа 1 мм	4,70	-	6,92	1,50	2,10	1,75	2,80	0,35	1,00	6,92	-	0,36

VAAS 2	Абатмент эстетический анторотационный S (узкая платформа) с высотой уступа 2 мм	4,70	-	7,92	2,50	2,10	1,75	2,80	0,35	2,00	7,92	-	0,42
VAAS 3	Абатмент эстетический анторотационный S (узкая платформа) с высотой уступа 3 мм	4,70	-	8,92	3,50	2,10	1,75	2,80	0,35	3,00	8,92	-	0,46
GABB	Абатмент прямой для формообразования W (широкая платформа)	5,50	-	14,12	10,07	2,50	1,95	4,00	0,35	-	10,07	-	0,60
GABS	Абатмент прямой для формообразования S (узкая платформа)	5,00	-	15,55	11,70	2,10	1,75	3,80	0,35	-	11,70	-	0,56
TPB	Абатмент титановый для CAD/CAM W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм	5,10	-	9,23	4,10	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	9,23	-	0,30
TPB2	Абатмент титановый для CAD/CAM W (широкая платформа) с высотой уступа 2 мм	5,10	-	10,23	4,10	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	10,23	-	0,39

TPB3	Абатмент титановый для CAD/CAM W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм	5,10	-	11,23	4,10	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	11,23	-	0,49
TPS	Абатмент титановый для CAD/CAM S (узкая платформа) с высотой уступа 1 мм	4,60	-	8,75	4,10	2,10	1,75	3,85	0,35	1,00	8,75	-	0,23
TPS2	Абатмент титановый для CAD/CAM S (узкая платформа) с высотой уступа 2 мм	4,60	-	9,75	4,10	2,10	1,75	3,85	0,35	2,00	9,75	-	0,27
TPS3	Абатмент титановый для CAD/CAM S (узкая платформа) с высотой уступа 3 мм	4,60	-	10,75	4,10	2,10	1,75	3,85	0,35	3,00	10,75	-	0,34
ZAM	Абатмент для мультиюнита для цементной фиксации	4,30	-	9,50	7,00	1,28	-	0,85	0,30	-	9,50	-	0,28
AAM	Абатмент эстетический для мультиюнита	4,30	-	3,55	2,10	1,80	-	1,10	0,30	-	3,55	-	0,08

BAM2	Абатмент шаровидный для мультиюнита высотой 1.25 мм	4,30	-	5,10	1,25	1,28	-	1,10	0,30	-	5,10	-	0,20
BAM3	Абатмент шаровидный для мультиюнита высотой 2.25 мм	4,30	-	6,10	2,25	1,28	-	1,10	0,30	-	6,10	-	0,26
BAM4	Абатмент шаровидный для мультиюнита высотой 3.25 мм	4,30	-	7,10	3,25	1,28	-	1,10	0,30	-	7,10	-	0,33
GZTB 1	Абатмент циркониевый прямой на титановой основе W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм	5,10	-	12,00	7,95	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	12,00	-	0,49
GZTB 2	Абатмент циркониевый прямой на титановой основе W (широкая платформа) с высотой уступа 2 мм	5,10	-	13,00	8,95	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	13,00	-	0,51

GZTB 3	Абатмент циркониевый прямой на титановой основе W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм	5,10	-	14,00	9,95	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	14,00	-	0,53
GZTS 1	Абатмент циркониевый прямой на титановой основе S (узкая платформа) с высотой уступа 1 мм	4,60	-	11,55	7,70	2,10	1,75	3,85	0,35	1,00	11,55	-	0,46
GZTS 2	Абатмент циркониевый прямой на титановой основе S (узкая платформа) с высотой уступа 2 мм	4,60	-	12,55	8,70	2,10	1,75	3,85	0,35	2,00	12,55	-	0,49
GZTS 3	Абатмент циркониевый прямой на титановой основе S (узкая платформа) с высотой уступа 3 мм	4,60	-	13,55	9,70	2,10	1,75	3,85	0,35	3,00	13,55	-	0,52
TGAB 1	Абатмент временный прямой W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм	5,10	-	12,00	7,95	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	12,00	-	0,25
TGAB 2	Абатмент временный прямой W (широкая платформа) с высотой уступа 2 мм	5,10	-	13,00	8,95	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	13,00	-	0,26

TGAB 3	Абатмент временный прямой W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм	5,10	-	14,00	9,95	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	14,00	-	0,27
TGAS 1	Абатмент временный прямой S (узкая платформа) с высотой уступа 1 мм	4,60	-	11,55	7,70	2,10	1,75	3,85	0,35	1,00	11,55	-	0,20
TGAS 2	Абатмент временный прямой S (узкая платформа) с высотой уступа 2 мм	4,60	-	12,55	8,70	2,10	1,75	3,85	0,35	2,00	12,55	-	0,22
TGAS 3	Абатмент временный прямой S (узкая платформа) с высотой уступа 3 мм	4,60	-	13,55	9,70	2,10	1,75	3,85	0,35	3,00	13,55	-	0,23
TEAB 1501	Абатмент временный угловой W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	11,15	-	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	11,15	15	0,26
TEAB 1502	Абатмент временный угловой W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	12,08	-	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	12,08	15	0,27

TEAB 1503	Абатмент временный угловой W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	12,99	-	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	12,99	15	0,29
TEAS 1501	Абатмент временный угловой S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,60	-	10,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	1,00	10,86	15	0,21
TEAS 1502	Абатмент временный угловой S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,60	-	11,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	2,00	11,86	15	0,22
TEAS 1503	Абатмент временный угловой S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,60	-	12,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	3,00	12,86	15	0,23
TEAB 2501	Абатмент временный угловой W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	11,58	-	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	11,58	25	0,26
TEAB 2502	Абатмент временный угловой W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	12,03	-	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	12,03	25	0,27

TEAB 2503	Абатмент временный угловой W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	12,48	-	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	12,48	25	0,29
TEAS 2501	Абатмент временный угловой S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,60	-	11,28	-	2,10	1,75	4,05	0,35	1,00	11,28	25	0,21
TEAS 2502	Абатмент временный угловой S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,60	-	11,74	-	2,10	1,75	4,05	0,35	2,00	11,74	25	0,22
TEAS 2503	Абатмент временный угловой S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,60	-	12,19	-	2,10	1,75	4,05	0,35	3,00	12,19	25	0,23
BAВ2	Абатмент шаровидный W (широкая платформа) высотой 2 мм	5,50	-	10,26	2,00	1,28	-	3,00	0,35	-	10,26	-	0,31
BAВ3	Абатмент шаровидный W (широкая платформа) высотой 3 мм	5,50	-	11,26	3,00	1,28	-	3,00	0,35	-	11,26	-	0,41

BAB4	Абатмент шаровидный W (широкая платформа) высотой 4 мм	5,50	-	12,26	4,00	1,28	-	3,00	0,35	-	12,26	-	0,52
BAB5	Абатмент шаровидный W (широкая платформа) высотой 5 мм	5,50	-	13,26	5,00	1,28	-	3,00	0,35	-	13,26	-	0,60
BAB6	Абатмент шаровидный W (широкая платформа) высотой 6 мм	5,50	-	14,26	6,00	1,28	-	3,00	0,35	-	14,26	-	0,72
BAS2	Абатмент шаровидный S (узкая платформа) высотой 2 мм	4,20	-	9,60	2,00	1,28	-	3,00	0,35	-	9,60	-	0,20
BAS3	Абатмент шаровидный S (узкая платформа) высотой 3 мм	4,20	-	10,60	3,00	1,28	-	3,00	0,35	-	10,60	-	0,27
BAS4	Абатмент шаровидный S (узкая платформа) высотой 4 мм	4,20	-	11,60	4,00	1,28	-	3,00	0,35	-	11,60	-	0,31

BAS5	Абатмент шаровидный S (узкая платформа) высотой 5 мм	4,20	-	12,60	5,00	1,28	-	3,00	0,35	-	12,60	-	0,39
BAS6	Абатмент шаровидный S (узкая платформа) высотой 6 мм	4,20	-	13,60	6,00	1,28	-	3,00	0,35	-	13,60	-	0,45
EAAB 15	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 15 градусов	3,85	-	12,84	-	2,50	1,95	4,05	0,35	-	12,84	15	0,30
EAAB 1501	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	11,15	-	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	11,15	15	0,34
EAAB 1502	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	12,08	-	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	12,08	15	0,39

EAAB 1503	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	12,99	-	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	12,99	15	0,43
EAAS 15	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 15 градусов	3,35	-	10,99	-	2,10	1,75	4,05	0,35	-	10,99	15	0,24
EAAS 1501	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,60	-	10,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	1,00	10,86	15	0,26
EAAS 1502	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,60	-	11,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	2,00	11,86	15	0,29
EAAS 1503	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,60	-	12,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	3,00	12,86	15	0,32

EABB 1501	Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	11,15	-	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	11,15	15	0,55
EABB 1502	Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	12,08	-	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	12,08	15	0,57
EABB 1503	Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	12,99	-	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	12,99	15	0,58
EABS 1501	Абатмент угловой для формообразования S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,60	-	10,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	1,00	10,86	15	0,48
EABS 1502	Абатмент угловой для формообразования S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,60	-	11,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	2,00	11,86	15	0,49

EABS 1503	Абатмент угловой для формообразования S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,60	-	12,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	3,00	12,86	15	0,50
EZTB 1501	Абатмент циркониевый угловой на титановой основе W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	11,15	-	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	11,15	15	0,50
EZTB 1502	Абатмент циркониевый угловой на титановой основе W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	12,08	-	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	12,08	15	0,53
EZTB 1503	Абатмент циркониевый угловой на титановой основе W (широкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	12,99	-	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	12,99	15	0,55

EZTS1 501	Абатмент циркониевый угловой на титановой основе S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,60	-	10,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	1,00	10,86	15	0,47
EZTS1 502	Абатмент циркониевый угловой на титановой основе S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,60	-	11,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	2,00	11,86	15	0,50
EZTS1 503	Абатмент циркониевый угловой на титановой основе S (узкая платформа) 15 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,60	-	12,86	-	2,10	1,75	4,05	0,35	3,00	12,86	15	0,53
EAAB 25	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 25 градусов	3,85	-	12,80	-	2,50	1,95	4,05	0,35	-	12,80	25	0,38
EAAB 2501	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	11,58	-	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	11,58	25	0,40

EAAB 2502	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	12,03	-	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	12,03	25	0,41
EAAB 2503	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	12,48	-	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	12,48	25	0,43
EAAS 25	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 25 градусов	3,35	-	10,87	-	2,10	1,75	4,05	0,35	-	10,87	25	0,24
EAAS 2501	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,60	-	11,28	-	2,10	1,75	4,05	0,35	1,00	11,28	25	0,28
EAAS 2502	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,60	-	11,74	-	2,10	1,75	4,05	0,35	2,00	11,74	25	0,30

EAAS 2503	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,60	-	12,19	-	2,10	1,75	4,05	0,35	3,00	9,00	25	0,33
EABV 2501	Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	11,58	-	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	11,58	25	0,55
EABV 2502	Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	12,03	-	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	12,03	25	0,57
EABV 2503	Абатмент угловой для формообразования W (широкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	12,48	-	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	12,48	25	0,58
EABS 2501	Абатмент угловой для формообразования S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,60	-	11,28	-	2,10	1,75	4,05	0,35	1,00	11,28	25	0,48

EABS 2502	Абатмент угловой для формообразования S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,60	-	11,74	-	2,10	1,75	4,05	0,35	2,00	11,74	25	0,49
EABS 2503	Абатмент угловой для формообразования S (узкая платформа) 25 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,60	-	12,19	-	2,10	1,75	4,05	0,35	3,00	12,19	25	0,50
EAAB 35	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 35 градусов	3,85	-	12,80	-	2,50	1,95	4,05	0,35	-	12,80	35	0,38
EAAS 35	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 35 градусов	3,35	-	10,87	-	2,10	1,75	4,05	0,35	-	10,87	35	0,31
EAAB 45	Абатмент угловой анатомический W (широкая платформа) 45 градусов	3,85	-	12,80	-	2,50	1,95	4,05	0,35	-	12,80	45	0,39
EAAS 45	Абатмент угловой анатомический S (узкая платформа) 45 градусов	3,35	-	10,87	-	2,10	1,75	4,05	0,35	-	10,87	45	0,32

GAIS 8.5	Абатмент прямой для резцов S (узкая платформа), длиной 8.5 мм	6,00	5,00	12,35	8,50	2,10	1,75	3,85	0,35	-	12,35	-	0,40
GAIS 10.0	Абатмент прямой для резцов S (узкая платформа), длиной 10 мм	6,00	5,00	14,20	10,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	14,20	-	0,48
GAIB 8.5	Абатмент прямой для резцов W (широкая платформа), длиной 8.5 мм	6,00	5,00	13,35	8,50	2,50	1,95	4,05	0,35	-	13,35	-	0,43
GAIB 10.0	Абатмент прямой для резцов W (широкая платформа), длиной 10 мм	6,00	5,00	15,20	10,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	15,20	-	0,51
GACS 9.0	Абатмент прямой для клыков S (узкая платформа), длиной 9 мм	6,50	5,00	12,75	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	12,75	-	0,47

GACS 10.5	Абатмент прямой для клыков S (узкая платформа), длиной 10.5 мм	6,50	5,00	14,60	10,50	2,10	1,75	3,85	0,35	-	14,60	-	0,55
GACB 9.0	Абатмент прямой для клыков W (широкая платформа), длиной 9 мм	6,50	5,00	13,75	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	13,75	-	0,53
GACB 10.5	Абатмент прямой для клыков W (широкая платформа), длиной 10.5 мм	6,50	5,00	15,60	10,50	2,50	1,95	4,05	0,35	-	15,60	-	0,61
GAPS 9.0	Абатмент прямой для премоляров S (узкая платформа), длиной 9 мм	6,00	4,50	12,75	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	12,75	-	0,38
GAPS 10.5	Абатмент прямой для премоляров S (узкая платформа), длиной 10.5 мм	6,00	4,50	14,60	10,50	2,10	1,75	3,85	0,35	-	14,60	-	0,44

GAPB 9.0	Абатмент прямой для премоляров W (широкая платформа), длиной 9 мм	6,00	4,50	13,75	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	13,75	-	0,42
GAPB 10.5	Абатмент прямой для премоляров W (широкая платформа), длиной 10.5 мм	6,00	4,50	15,60	10,50	2,50	1,95	4,05	0,35	-	15,60	-	0,50
GAMS 7.5	Абатмент прямой для моляров S (узкая платформа), длиной 7.5 мм	6,00	7,00	11,35	7,50	2,10	1,75	3,85	0,35	-	11,35	-	0,60
GAMS 8.5	Абатмент прямой для моляров S (узкая платформа), длиной 8.5 мм	6,00	7,00	13,20	8,50	2,10	1,75	3,85	0,35	-	13,20	-	0,68
GAM B 7.5	Абатмент прямой для моляров W (широкая платформа), длиной 7.5 мм	6,00	7,00	12,35	7,50	2,50	1,95	4,05	0,35	-	12,35	-	0,64

GAM B 8.5	Абатмент прямой для моляров W (широкая платформа), длиной 8.5 мм	6,00	7,00	14,20	8,50	2,50	1,95	4,05	0,35	-	14,20	-	0,72
EAIS 15/9.0	Абатмент угловой для резцов S (узкая платформа) 15 градусов, длиной 9 мм	6,00	5,00	12,75	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	12,75	15	0,40
EAIS 15/10. 0	Абатмент угловой для резцов S (узкая платформа) 15 градусов, длиной 10 мм	6,00	5,00	14,60	10,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	14,60	15	0,42
EAIS 25/9.0	Абатмент угловой для резцов S (узкая платформа) 25 градусов, длиной 9 мм	6,00	5,00	12,75	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	12,75	25	0,40
EAIS 25/10. 0	Абатмент угловой для резцов S (узкая платформа) 25 градусов, длиной 10 мм	6,00	5,00	14,60	10,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	14,60	25	0,42

EAIB 15/9.0	Абатмент угловой для резцов W (широкая платформа) 15 градусов, длиной 9 мм	6,00	5,00	13,75	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	13,75	15	0,43
EAIB 15/10. 0	Абатмент угловой для резцов W (широкая платформа) 15 градусов, длиной 10 мм	6,00	5,00	15,60	10,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	15,60	15	0,45
EAIB 25/9.0	Абатмент угловой для резцов W (широкая платформа) 25 градусов, длиной 9 мм	6,00	5,00	13,75	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	13,75	25	0,43
EAIB 25/10. 0	Абатмент угловой для резцов W (широкая платформа) 25 градусов, длиной 10 мм	6,00	5,00	15,60	10,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	15,60	25	0,45
EACS 15/9.0	Абатмент угловой для клыков S (узкая платформа) 15 градусов, длиной 9 мм	6,50	5,00	13,35	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	13,35	15	0,46

EACS 15/10. 0	Абатмент угловой для клыков S (узкая платформа) 15 градусов, длиной 10 мм	6,50	5,00	15,20	10,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	15,20	15	0,48
EACS 25/9.0	Абатмент угловой для клыков S (узкая платформа) 25 градусов, длиной 9 мм	6,50	5,00	13,35	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	13,35	25	0,46
EACS 25/10. 0	Абатмент угловой для клыков S (узкая платформа) 25 градусов, длиной 10 мм	6,50	5,00	15,20	10,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	15,20	25	0,48
EACB 15/9.0	Абатмент угловой для клыков W (широкая платформа) 15 градусов, длиной 9 мм	6,50	5,00	14,35	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	14,35	15	0,47
EACB 15/10. 0	Абатмент угловой для клыков W (широкая платформа) 15 градусов, длиной 10 мм	6,50	5,00	16,20	10,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	16,20	15	0,49

EACB 25/9.0	Абатмент угловой для клыков W (широкая платформа) 25 градусов, длиной 9 мм	6,50	5,00	14,35	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	14,35	25	0,47
EACB 25/10. 0	Абатмент угловой для клыков W (широкая платформа) 25 градусов, длиной 10 мм	6,50	5,00	16,20	10,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	16,20	25	0,49
EAPS 15/9.0	Абатмент угловой для премоляров S (узкая платформа) 15 градусов, длиной 9 мм	6,00	4,50	12,35	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	12,35	15	0,37
EAPS 15/10. 0	Абатмент угловой для премоляров S (узкая платформа) 15 градусов, длиной 10 мм	6,00	4,50	14,20	10,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	14,20	15	0,41
EAPS 25/9.0	Абатмент угловой для премоляров S (узкая платформа) 25 градусов, длиной 9 мм	6,00	4,50	12,35	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	12,35	25	0,37

EAPS 25/10. 0	Абатмент угловой для премоляров S (узкая платформа) 25 градусов, длиной 10 мм	6,00	4,50	14,20	10,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	14,20	25	0,41
EAPB 15/9.0	Абатмент угловой для премоляров W (широкая платформа) 15 градусов, длиной 9 мм	6,00	4,50	13,35	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	13,35	15	0,40
EAPB 15/10. 0	Абатмент угловой для премоляров W (широкая платформа) 15 градусов, длиной 10 мм	6,00	4,50	15,20	10,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	15,20	15	0,44
EAPB 25/9.0	Абатмент угловой для премоляров W (широкая платформа) 25 градусов, длиной 9 мм	6,00	4,50	13,35	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	13,35	25	0,40
EAPB 25/10. 0	Абатмент угловой для премоляров W (широкая платформа) 25 градусов, длиной 10 мм	6,00	4,50	15,20	10,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	15,20	25	0,44

EAMS 15/8.0	Абатмент угловой для моляров S (узкая платформа) 15 градусов, длиной 8 мм	6,00	7,00	11,95	8,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	11,95	15	0,52
EAMS 15/9.0	Абатмент угловой для моляров S (узкая платформа) 15 градусов, длиной 9 мм	6,00	7,00	13,80	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	13,80	15	0,56
EAMS 25/8.0	Абатмент угловой для моляров S (узкая платформа) 25 градусов, длиной 8 мм	6,00	7,00	11,95	8,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	11,95	25	0,52
EAMS 25/9.0	Абатмент угловой для моляров S (узкая платформа) 25 градусов, длиной 9 мм	6,00	7,00	13,80	9,00	2,10	1,75	3,85	0,35	-	13,80	25	0,56

EAMB 15/8.0	Абатмент угловой для моляров W (широкая платформа) 15 градусов, длиной 8 мм	6,00	7,00	12,95	8,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	12,95	15	0,55
EAMB 15/9.0	Абатмент угловой для моляров W (широкая платформа) 15 градусов, длиной 9 мм	6,00	7,00	14,80	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	14,80	15	0,59
EAMB 25/8.0	Абатмент угловой для моляров W (широкая платформа) 25 градусов, длиной 8 мм	6,00	7,00	12,95	8,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	12,95	25	0,55
EAMB 25/9.0	Абатмент угловой для моляров W (широкая платформа) 25 градусов, длиной 9 мм	6,00	7,00	14,80	9,00	2,50	1,95	4,05	0,35	-	14,80	25	0,59

GAAS /W1	Абатмент прямой анатомический широкий S (узкая платформа) с высотой уступа 1 мм	5,50	-	11,90	7,70	2,10	1,75	3,85	0,35	1,00	11,90	-	0,38
GAAS /W2	Абатмент прямой анатомический широкий S (узкая платформа) с высотой уступа 2 мм	5,50	-	12,90	7,70	2,10	1,75	3,85	0,35	2,00	12,90	-	0,42
GAAS /W3	Абатмент прямой анатомический широкий S (узкая платформа) с высотой уступа 3 мм	5,50	-	13,90	7,70	2,10	1,75	3,85	0,35	3,00	13,90	-	0,47
GAAB /W1	Абатмент прямой анатомический широкий W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм	5,50	-	13,00	7,70	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	13, 00	-	0,44


GAAB /W2	Абатмент прямой анатомический широкий W (широкая платформа) с высотой уступа 2 мм	5,50	-	14,00	7,70	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	14,00	-	0,49
GAAB /W3	Абатмент прямой анатомический широкий W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм	5,50	-	15,00	7,70	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	15,00	-	0,56
GABB 9	Абатмент прямой широкий W (широкая платформа) длиной 9 мм	5,50	-	14,12	9,00	2,50	1,95	4,00	0,35	-	14,12	-	0,51
GABS 9	Абатмент прямой широкий S (узкая платформа) длиной 9 мм	5,00	-	15,55	9,00	2,10	1,75	3,80	0,35	-	15,55	-	0,48
TBKB 1	Абатмент титановый с пластиковым колпачком W (широкая платформа) с высотой уступа 1 мм	4,50	-	7,70	-	2,50	1,95	4,05	0,35	1,00	7,70	-	0,35


ТВКВ 2	Абатмент титановый с пластиковым колпачком W (широкая платформа) с высотой уступа 2 мм	4,50	-	8,20	-	2,50	1,95	4,05	0,35	2,00	8,20	-	0,36
ТВКВ 3	Абатмент титановый с пластиковым колпачком W (широкая платформа) с высотой уступа 3 мм	4,50	-	8,70	-	2,50	1,95	4,05	0,35	3,00	8,70	-	0,38
ТВКС 1	Абатмент титановый с пластиковым колпачком S (узкая платформа) с высотой уступа 1 мм	4,50	-	7,70	-	2,10	1,75	3,85	0,35	1,00	7,70	-	0,33
ТВКС 2	Абатмент титановый с пластиковым колпачком S (узкая платформа) с высотой уступа 2 мм	4,50	-	8,20	-	2,10	1,75	3,85	0,35	2,00	8,20	-	0,34
ТВКС 3	Абатмент титановый с пластиковым колпачком S (узкая платформа) с высотой уступа 3 мм	4,50	-	8,70	-	2,10	1,75	3,85	0,35	3,00	8,70	-	0,35

TBMB 1701	Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа) 17 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	7,20	4,10	2,50	1,95	1,40	0,30	1,00	7,20	17	0,44
TBMB 1702	Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа) 17 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	8,20	4,10	2,50	1,95	1,40	0,30	2,00	8,20	17	0,53
TBMB 1703	Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа) 17 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	9,20	4,10	2,50	1,95	1,40	0,30	3,00	9,20	17	0,60
TBMS 1701	Абатмент титановый база для мультиюнита S (узкая платформа) 17 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,50	-	6,00	3,00	2,10	1,75	1,40	0,30	1,00	6,00	17	0,35

TVMS 1702	Абатмент титановый база для мультиюнита S (узкая платформа) 17 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,50	-	7,00	3,00	2,10	1,75	1,40	0,30	2,00	7,00	17	0,40
TVMS 1703	Абатмент титановый база для мультиюнита S (узкая платформа) 17 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,50	-	8,00	3,00	2,10	1,75	1,40	0,30	3,00	8,00	17	0,46
TVMB 3001	Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа) 30 градусов, с высотой уступа 1 мм	5,10	-	7,80	4,10	2,50	1,95	1,40	0,30	1,00	7,80	30	0,46
TVMB 3002	Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа) 30 градусов, с высотой уступа 2 мм	5,10	-	8,80	4,10	2,50	1,95	1,40	0,30	2,00	8,80	30	0,55

TBMB 3003	Абатмент титановый база для мультиюнита W (широкая платформа) 30 градусов, с высотой уступа 3 мм	5,10	-	9,75	4,10	2,50	1,95	1,40	0,30	3,00	9,75	30	0,62
TBMS 3001	Абатмент титановый база для мультиюнита S (узкая платформа) 30 градусов, с высотой уступа 1 мм	4,50	-	6,50	3,00	2,10	1,75	1,40	0,30	1,00	6,50	30	0,36
TBMS 3002	Абатмент титановый база для мультиюнита S (узкая платформа) 30 градусов, с высотой уступа 2 мм	4,50	-	7,50	3,00	2,10	1,75	1,40	0,30	2,00	7,50	30	0,43
TBMS 3003	Абатмент титановый база для мультиюнита S (узкая платформа) 30 градусов, с высотой уступа 3 мм	4,50	-	8,50	3,00	2,10	1,75	1,40	0,30	3,00	8,50	30	0,47

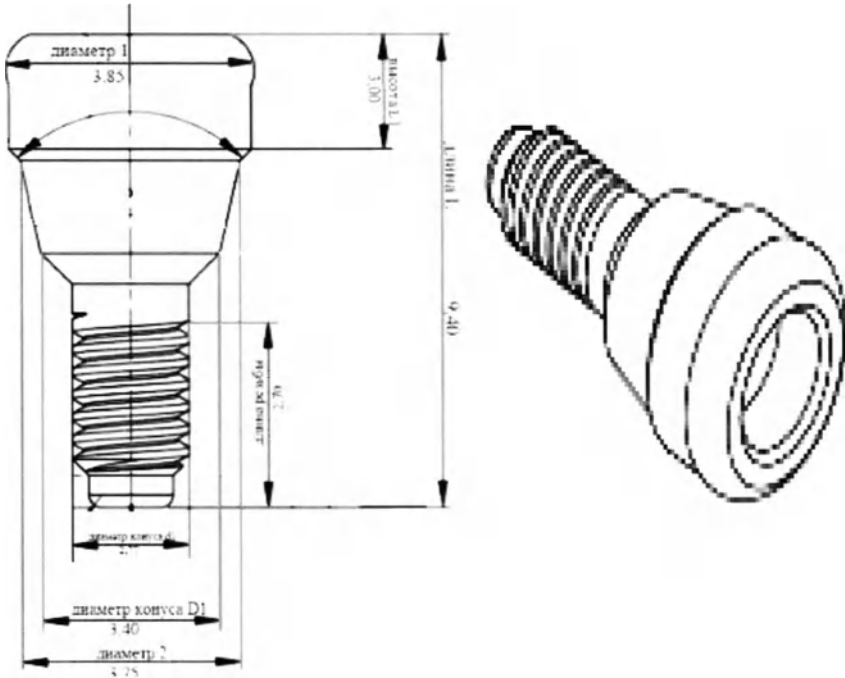Локаторы		
Чертеж ^А	Описание	Изображение
	Служат как элемент для ортопедических конструкций с целью восстановления жевательной и эстетической функцию пациента. Размещаются на имплантате, затем на локатор ставится съемная и/или цементируемая конструкции.	 (локатор для мультиюнита)

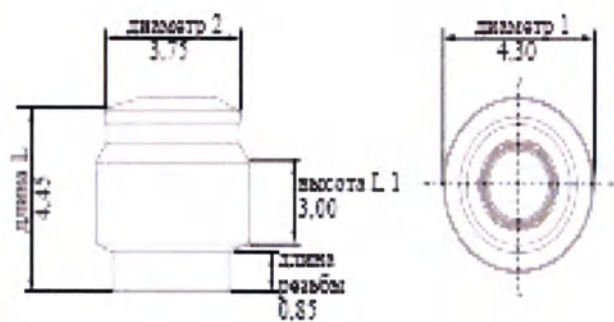


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Код	Название на русском языке	Диаметр 1 ($\pm 0,01$ мм)	Диаметр 2 ($\pm 0,01$ мм)	Высота L1 ($\pm 0,40$ мм)	Диаметр вписанной в шестигранник окружности ($\pm 0,20$ мм)	Диаметр описанной окружности ($\pm 0,20$ мм)	Длина L ($\pm 0,40$ мм)	Длина резьбы ($\pm 0,05$ мм)	Шаг резьбы ($\pm 0,02$ мм)	Диаметр конуса d1 ($\pm 0,02$ мм)	Диаметр конуса D1 ($\pm 0,02$ мм)	Рабочая длина ($\pm 0,40$ мм)	масса, г (не более)
LM2	Локатор для мультиюнита высотой 2 мм	4,30	3,75	2,00	-	3,70	3,45	0,85	0,30	-	-	3,45	0,13
LM3	Локатор для мультиюнита высотой 3 мм	4,30	3,75	3,00	-	3,70	4,45	0,85	0,30	-	-	4,45	0,21
LM4	Локатор для мультиюнита высотой 4 мм	4,30	3,75	4,00	-	3,70	5,45	0,85	0,30	-	-	5,45	0,28
LB1	Локатор W (широкая платформа) высотой 1 мм	3,85	3,75	1,00	1,28	-	7,40	2,70	0,35	2,77	3,40	7,40	0,17

LB2	Локатор W (широкая платформа) высотой 2 мм	3,85	3,75	2,00	1,28	-	8,40	2,70	0,35	2,77	3,40	8,40	0,20
LB3	Локатор W (широкая платформа) высотой 3 мм	3,85	3,75	3,00	1,28	-	9,40	2,70	0,35	2,77	3,40	9,40	0,25
LB4	Локатор W (широкая платформа) высотой 4 мм	3,85	3,75	4,00	1,28	-	10,40	2,70	0,35	2,77	3,40	10,40	0,29
LB5	Локатор W (широкая платформа) высотой 5 мм	3,85	3,75	5,00	1,28	-	11,40	2,70	0,35	2,77	3,40	11,40	0,35
LB6	Локатор W (широкая платформа) высотой 6 мм	3,85	3,75	6,00	1,28	-	12,40	2,70	0,35	2,77	3,40	12,40	0,41

LS1	Локатор S (узкая платформа) высотой 1 мм	3,85	3,75	1,00	1,28	-	7,18	2,70	0,35	2,30	2,80	7,18	0,16
LS2	Локатор S (узкая платформа) высотой 2 мм	3,85	3,75	2,00	1,28	-	8,18	2,70	0,35	2,30	2,80	8,18	0,19
LS3	Локатор S (узкая платформа) высотой 3 мм	3,85	3,75	3,00	1,28	-	9,18	2,70	0,35	2,30	2,80	9,18	0,23
LS4	Локатор S (узкая платформа) высотой 4 мм	3,85	3,75	4,00	1,28	-	10,18	2,70	0,35	2,30	2,80	10,18	0,28
LS5	Локатор S (узкая платформа) высотой 5 мм	3,85	3,75	5,00	1,28	-	11,18	2,70	0,35	2,30	2,80	11,18	0,34

LS6	Локатор S (узкая платформа) высотой 6 мм	3,85	3,75	6,00	1,28	-	12,18	2,70	0,35	2,30	2,80	12,18	0,39
-----	--	------	------	------	------	---	-------	------	------	------	------	-------	------

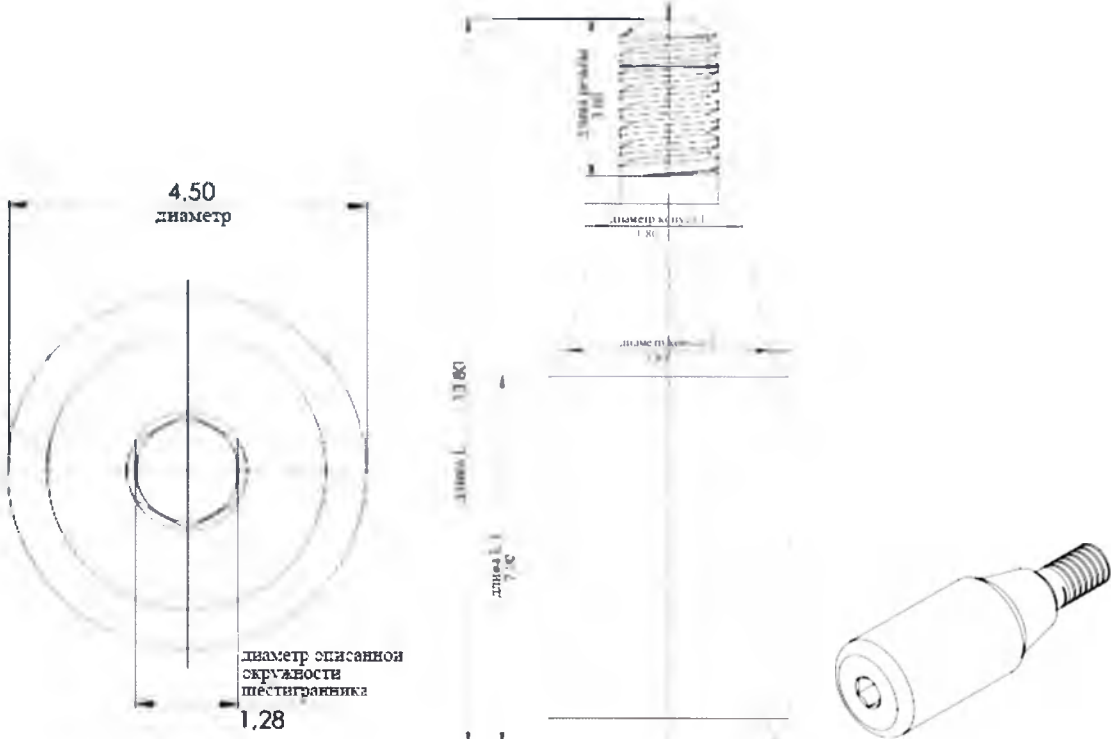Чертеж*	Описание	Изображение
Абатменты лечебные для десны (Формирователи десен) 	Необходимы для создания корректного контура десны перед установкой ортопедической конструкции	 (абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа) / S (узкая платформа))

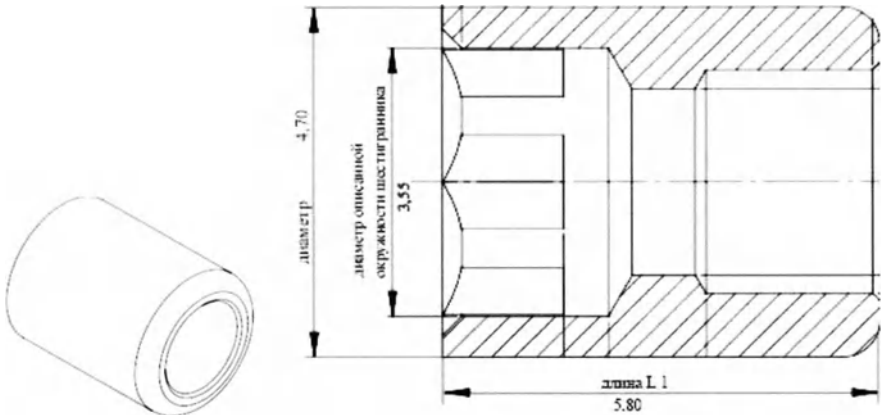	Необходимы для создания корректного контура десны перед установкой ортопедической конструкции	 (абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для эстетического абатмента)
	Необходимы для создания корректного контура десны перед установкой ортопедической конструкции	 (абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для резцов / клыков / премоляров / моляров)

диаметр 5.00 длина L 11.53 длина L 1 5.00 длина резьбы 3.00	Необходимы для создания корректного контура десны перед установкой ортопедической конструкции	(абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий)
---	--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Название на русском языке	Диаметр ($\pm 0,50$ мм)	Диаметр 2 ($\pm 0,50$ мм)	Длина L1 ($\pm 0,40$ мм)	Длина L ($\pm 0,40$ мм)	Диаметр описанной окружности шестигранника ($\pm 0,02$ мм)	Диаметр вписанной в шестигранник окружности ($\pm 0,01$ мм)	Длина резьбы ($\pm 0,10$ мм)	Шаг резьбы ($\pm 0,02$ мм)	Диаметр конуса 1 ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр конуса 2 ($\pm 0,05$ мм)	Рабочая длина ($\pm 0,40$ мм)	масса, г (не более)
GFB 2	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа) высотой 2мм	4,50	-	2,00	8,80	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,80	8,80	0,27
GFB 3	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа) высотой 3мм	4,50	-	3,00	9,80	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,80	9,80	0,37
GFB 4	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа) высотой 4 мм	4,50	-	4,00	10,80	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,80	10,80	0,43

GFB 5	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа) высотой 5мм	4,50	-	5,00	11,80	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,80	11,80	0,50
GFB 7	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) W (широкая платформа) высотой 7мм	4,50	-	7,00	13,80	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,80	13,80	0,65
GFS 2	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) S (узкая платформа) высотой 2мм	4,20	-	2,00	8,45	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,31	8,45	0,23
GFS 3	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) S (узкая платформа) высотой 3мм	4,20	-	3,00	9,45	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,31	9,45	0,29

GFS 4	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) S (узкая платформа) высотой 4мм	4,20	-	4,00	10,45	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,31	10,45	0,36
GFS 5	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) S (узкая платформа) высотой 5мм	4,20	-	5,00	11,45	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,31	11,45	0,42
GFS 7	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) S (узкая платформа) высотой 7мм	4,20	-	7,00	13,45	1,28	-	3,00	0,35	1,80	3,31	13,45	0,55
GAE S2	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для эстетического абатмента	4,70	-	5,80	-	3,55	3,30	-	-	-	-	5,80	0,31

GFIS 2.25	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для резцов S (узкая платформа) длиной 2.25 мм	6,00	5,00	2,25	6,45	2,10	1,75	3,85	0,35	2,35	3,00	6,45	0,40
GFIS 4.0	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для резцов S (узкая платформа) длиной 4 мм	6,00	5,00	4,00	8,30	2,10	1,75	3,85	0,35	2,35	3,00	8,30	0,50
GFI B 2.25	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для резцов W (широкая платформа) длиной 2.25 мм	6,00	5,00	2,25	7,50	2,50	1,95	4,05	0,35	2,77	3,77	7,50	0,47

GFI B 4.0	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для резцов W (широкая платформа) длиной 4 мм	6,00	5,00	4,00	9,30	2,50	1,95	4,05	0,35	2,77	3,77	9,30	0,60
GFC S 2.25	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для клыков S (узкая платформа) длиной 2.25 мм	6,50	5,00	2,25	6,45	2,10	1,75	3,85	0,35	2,35	4,80	6,45	0,47
GFC S 4.0	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для клыков S (узкая платформа) длиной 4 мм	6,50	5,00	4,00	8,30	2,10	1,75	3,85	0,35	2,35	5,30	8,30	0,53

GFC B 2.25	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для клыков W (широкая платформа) длиной 2.25 мм	6,50	5,00	2,25	7,45	2,50	1,95	4,05	0,35	2,77	5,30	7,45	0,51
GFC B 4.0	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для клыков W (широкая платформа) длиной 4 мм	6,50	5,00	4,00	9,30	2,50	1,95	4,05	0,35	2,77	5,60	9,30	0,67
GFP S 2.25	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для премоляров S (узкая платформа) длиной 2.25 мм	6,00	4,50	2,25	6,45	2,10	1,75	3,85	0,35	2,35	4,65	6,45	0,32


GFP S 4.0	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для премоляров S (узкая платформа) длиной 4 мм	6,00	4,50	4,00	8,30	2,10	1,75	3,85	0,35	2,35	5,00	8,30	0,42
GFP B2.2 5	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для премоляров W (широкая платформа) длиной 2.25 мм	6,00	4,50	2,25	7,45	2,50	1,95	4,05	0,35	2,77	5,00	7,45	0,45
GFP B4.0	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для премоляров W (широкая платформа) длиной 4 мм	6,00	4,50	4,00	9,30	2,50	1,95	4,05	0,35	2,77	5,30	9,30	0,55

GFM S2.2 5	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для моляров S (узкая платформа) длиной 2.25 мм	6,00	7,00	2,25	6,45	2,10	1,75	3,85	0,35	2,35	4,80	6,45	0,60
GFM S4.0	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для моляров S (узкая платформа) длиной 4 мм	6,00	7,00	4,00	8,30	2,10	1,75	3,85	0,35	2,35	5,16	8,30	0,75
GFM B2.2 5	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для моляров W (широкая платформа) длиной 2.25 мм	6,00	7,00	2,25	7,45	2,50	1,95	4,05	0,35	2,77	5,06	7,45	0,70

GFM B 4.0	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) для моляров W (широкая платформа) длиной 4 мм	6,00	7,00	4,00	9,30	2,50	1,95	4,05	0,35	2,77	5,47	9,30	0,85
GFS/ W3	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий S (узкая платформа) высотой 3 мм	5,00	-	3,00	9,45	1,28	-	3,00	0,35	2,35	3,31	9,45	0,39
GFS/ W4	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий S (узкая платформа) высотой 4 мм	5,00	-	4,00	10,45	1,28	-	3,00	0,35	2,35	3,31	10,45	0,45


GFS/ W5	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий S (узкая платформа) высотой 5 мм	5,00	-	5,00	11,45	1,28	-	3,00	0,35	2,35	3,31	11,45	0,55
GFB/ W2	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий W (широкая платформа) высотой 2 мм	5,00	-	2,00	8,53	1,28	-	3,00	0,35	2,95	3,91	8,53	0,37
GFB/ W3	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий W (широкая платформа), высотой 3 мм	5,00	-	3,00	9,53	1,28	-	3,00	0,35	2,95	3,91	9,53	0,43

GFB/ W4	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий W (широкая платформа), высотой 4 мм	5,00	-	4,00	10,53	1,28	-	3,00	0,35	2,95	3,91	10,53	0,50
GFB/ W5	Абатмент лечебный для десны (формирователь десны) широкий W (широкая платформа), высотой 5 мм	5,00	-	5,00	11,53	1,28	-	3,00	0,35	2,95	3,91	11,53	0,57

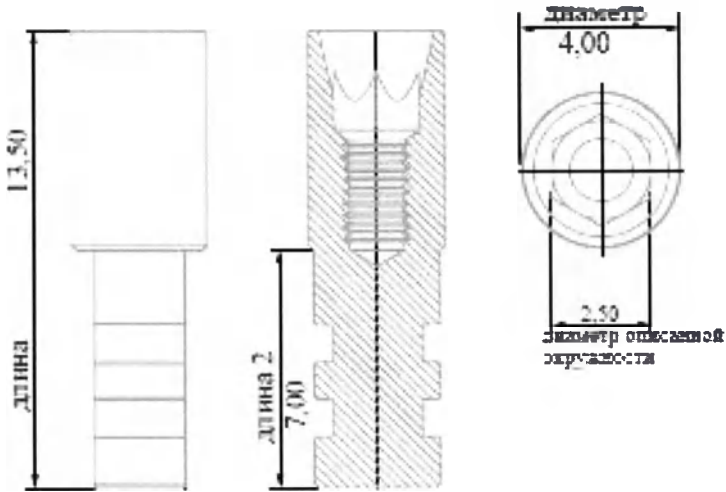Чертеж*	Описание	Изображение
Аналоги имплантата		
	Используется для изготовления модели и дальнейшей ортопедической конструкции (Перенос клинической ситуации на модель – используется при изготовлении лабораторных моделей с целью передачи формы и положения платформы имплантата)	 (аналог имплантата)  (аналог имплантата для эстетического абатмента)  (аналог имплантата для мультиюнита)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Название на русском языке	Диаметр ($\pm 0,50$ мм)	Длина ($\pm 0,40$ мм)	Длина 2 ($\pm 0,40$ мм)	Диаметр описанной окружности шестигранника ($\pm 0,01$ мм)	Диаметр вписанной в шестигранник окружности ($\pm 0,01$ мм)	Рабочая длина ($\pm 0,40$ мм)	масса, г (не более)
IAB	Аналог имплантата W (широкая платформа)	4,00	13,50	7,00	2,50	-	13,50	0,48
IAS	Аналог имплантата S (узкая платформа)	3,75	12,30	6,30	2,10	-	12,30	0,38
IAES	Аналог имплантата для эстетического абатмента	4,70	12,40	2,00	3,50	-	12,40	0,48
IAMS	Аналог имплантата для мультиюнита	4,70	12,35	2,00	3,28	-	12,35	0,42

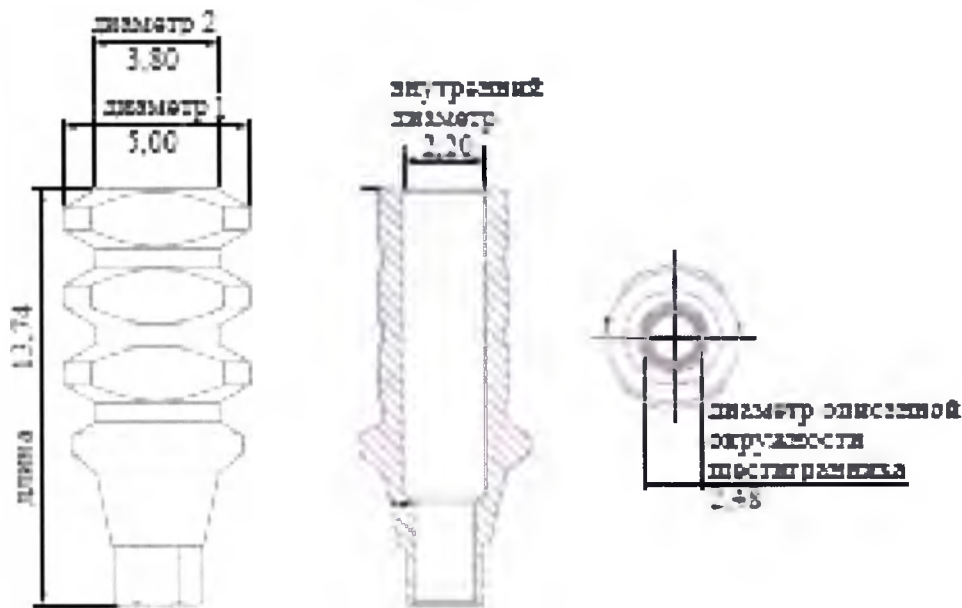
Чертеж*	Описание	Изображение
Трансферы отпечаточные		
	Используются для снятия отиска с имплантата - позволяют переносить точное положение имплантата в оттисковый материал для точного позиционирования аналога имплантата, для последующего изготовления модели и ортопедической конструкции (переходной элемент, используемый для передачи полного соответствия положения имплантата в полости рта на модель)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Название на русском языке	Диаметр 1 ($\pm 0,50$ мм)	Длина ($\pm 0,40$ мм)	Диаметр 2 ($\pm 0,50$ мм)	Диаметр описанной окружности шестигранника ($\pm 0,01$ мм)	Диаметр вписанной в шестигранник окружности ($\pm 0,01$ мм)	Внутренний диаметр ($\pm 0,01$ мм)	Рабочая длина ($\pm 0,40$ мм)	масса, г (не более)
SOLB15	Трансфер оттисковой для открытой ложки W (широкая платформа)	5,00	13,74	3,80	2,48	1,95	2,20	13,74	1,30
SOLS15	Трансфер оттисковой для открытой ложки S (узкая платформа)	5,00	13,30	3,31	2,08	1,75	2,20	13,30	1,22

SGLB9	Трансфер оттисковой для закрытой ложки W (широкая платформа)	5,00	11,66	3,80	2,48	1,95	2,20	11,66	0,98
SGLS9	Трансфер оттисковой для закрытой ложки S (узкая платформа)	5,00	11,22	3,31	2,08	1,75	2,20	11,22	0,65
SAES15	Трансфер оттисковой для эстетического абатмента	5,10	10,00	4,00	3,55	3,30	3,00	10,00	0,48
KSS	Трансфер оттисковой пластиковый	5,00	9,00	3,50	-	-	2,30	9,00	0,10

SAMS15	Трансфер оттисковой для мультиюнита	5,10	10,00	4,00	3,45	3,30	3,00	10,00	0,40
--------	---	------	-------	------	------	------	------	-------	------

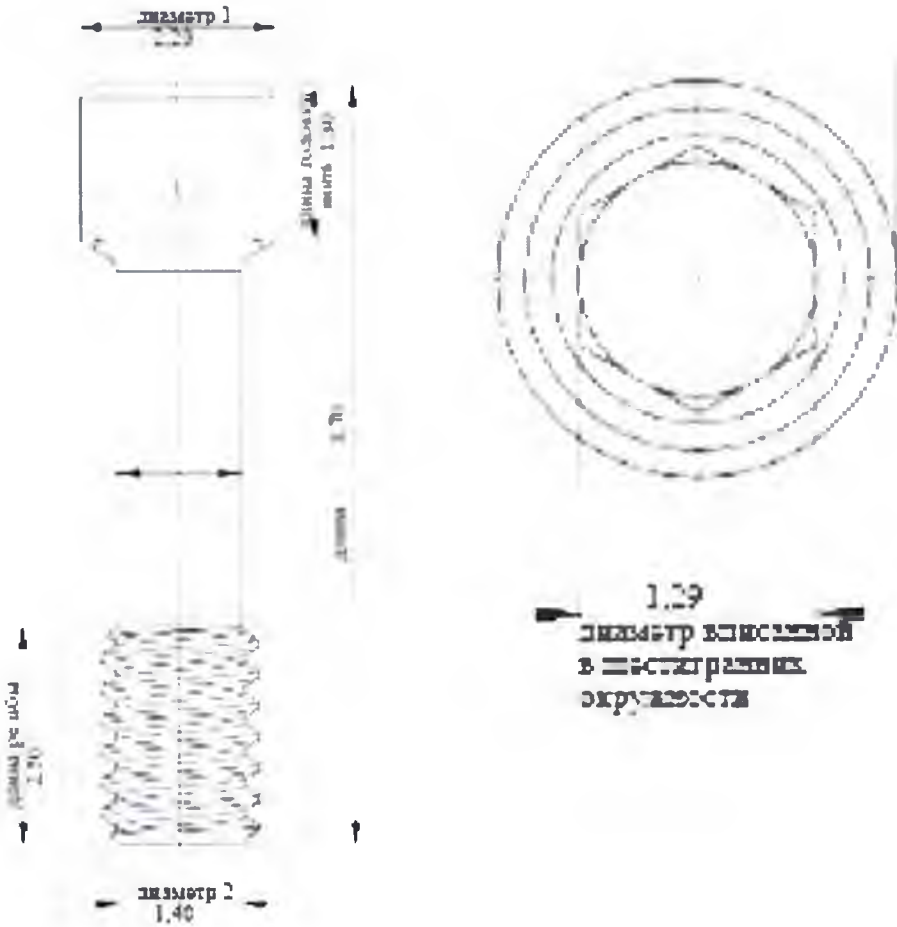Чертеж ^а	Описание	Изображение
Винты для абатмента 		
	Используются для фиксации абатмента	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Название на русском языке	Диаметр 1 ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр 2 ($\pm 0,10$ мм)	Диаметр резьбы ($\pm 0,01$ мм)	Длина ($\pm 0,05$ мм)	Длина головки винта ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр вписанной в шестигранник окружности ($\pm 0,01$ мм)	Длина резьбы ($\pm 0,05$ мм)	Шаг резьбы ($\pm 0,02$ мм)	масса, г (не более)
SW	Винт для абатмента широкая платформа	2,20	1,40	1,80	8,70	1,80	1,29	2,50	0,35	0,08
SS	Винт для абатмента узкая платформа	2,20	1,40	1,80	8,20	1,80	1,29	2,50	0,35	0,08
SSA	Винт для абатмента для эстетического	2,90	1,90	2,50	5,00	2,30	1,28	2,00	0,40	0,09

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Код	Название на русском языке	Диаметр 1 (± 0,50 мм)	Диаметр 2 (± 0,50 мм)	Длина (± 0,40 мм)	Рабочая длина (± 0,40 мм)	масса, г (не более)	Описание	Изображение
AAMps	Колпачок пластиковый для абатмента эстетического	4,70	4,00	12,00	12,00	0,10	Используется для защиты абатмента эстетического	
MKL	Колпачок для локатора металлический	5,50	4,70	2,35	2,35	0,14	Используется для защиты локатора	
SKL	Колпачок для локатора стандартный	4,78	4,00	1,83	1,83	0,01	Используется для защиты локатора	
WKL	Колпачок для локатора мягкий	4,78	4,00	1,83	1,83	0,01	Используется для защиты локатора	
FKL	Колпачок для локатора жесткий	4,78	4,00	1,83	1,83	0,01	Используется для защиты локатора	
SL	Диск защитный	8,00	3,00	0,20	0,20	0,01	Используется для защиты локатора	
MKBA	Колпачок для шаровидного абатмента металлический.	5,00	3,90	3,20	3,20	0,12	Используются для защиты шаровидного абатмента	

SKBA	Колпачок для шаровидного абатмента стандартный	4,20	2,50	2,60	2,60	0,01	Используются для защиты шаровидного абатмента	
WKBA	Колпачок для шаровидного абатмента мягкий	4,20	2,50	2,60	2,60	0,01	Используются для защиты шаровидного абатмента	
FKBA	Колпачок для шаровидного абатмента жесткий	4,20	2,50	2,60	2,60	0,01	Используются для защиты шаровидного абатмента	
KTPS	Колпачок пластиковый для абатмента титанового для CAD/CAM	4,70	4,00	11,00	11,00	0,10	Используются для защиты титанового абатмента для CAD/CAM	
STPB	Сканмаркер для CAD/CAM (широкая платформа)	9,10	5,10	18,00	18,00	0,90	Используются при изготовлении индивидуальных конструкций с абатментом титановым для CAD/CAM	
STPS	Сканмаркер для CAD/CAM (узкая платформа)	8,60	4,60	18,00	18,00	0,75	Используются при изготовлении индивидуальных конструкций с абатментом титановым для CAD/CAM	

GAVAA	Манжетка титановая для абатмента эстетического	4,70	4,00	12,00	12,00	0,87	Используется для защиты абатмента эстетического	
TGAS 1	Колпачок временный для абатмента эстетического	4,70	4,00	12,00	12,00	0,12	Используется для защиты абатмента эстетического	
Plastic VAAS	Манжетка пластиковая для абатмента эстетического	4,70	4,00	12,00	12,00	0,10	Используется для защиты абатмента эстетического	
Plastic VAAS-B non hex	Манжетка пластиковая без шестигранника для абатмента эстетического	4,70	4,00	12,00	12,00	0,09	Используется для защиты абатмента эстетического	

Компоненты системы могут быть как обычного металлического цвета, так и синего и золотого цветов. Цвет не связан с добавлением красителей, а вызван исключительно процессом анодирования при производстве. Цветное анодирование увеличивает коррозионную стойкость изделий и обеспечивает высокую светостойкость окрашенной поверхности с сохранением блеска исходной поверхности.

Инструкция к цветному анодированию

Материалы и оборудование:

1. Источник питания
2. Раствор электролита
3. Титановая деталь

Приготовление раствора электролита:

1. 98%й сухой Na_3PO_4 25 г
2. Дистиллированная вода 500 мл

Для приготовления раствора электролита, нужно дождаться полного растворения Na_3PO_4 в дистиллированной воде.

Процесс цветного анодирования

1. Готовим раствор электролита в пластмассовой ванне
2. В раствор электролита опускаем свинцовую пластину, подключенную к минусу источника питания
3. Опускаем в раствор электролита титановую деталь
4. Включаем источник питания
5. Титановым прутом, подключенным к положительному заряду источника питания, касаемся титановой детали (3 – 5 сек.)
6. После цветного анодирования достаём окрашенную деталь из ванночки с раствором электролита и промываем в проточной дистиллированной воде в течении 5 – 7 минут
7. После промывки детали, сушим ее феном, а затем оставляем на подносе до полного высыхания на 8 – 10 часов.

Цвет оксидных пленок зависит от состава титанового сплава и условий его анодирования:

1. Для получения синего цвета выставляем на источнике питания напряжение в 33 – 35 В.
2. Для получения золотого цвета выставляем на источнике питания напряжение в 63 – 64 В.

16. Гарантии производителя и рекламации

Компания Bio3 Implants GmbH / «Био3 Имплантс ГмбХ» предоставляет пожизненную гарантию на свою продукцию. По вопросам гарантии необходимо связаться с уполномоченным представителем производителя.

По вопросам качества продукции необходимо связаться с уполномоченным представителем производителя.

17. Информация о производителе медицинского изделия. Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

Производитель:

Bio3 Implants GmbH, Carl-Zeiss-Straße 4, Leonberg 71229, Germany / «Био3 Имплантс ГмбХ», ул. Карл-Цейсс 4, Леонберг 71229, Германия

Место производства:

KLINGEL medical metal GmbH, Hanauer Str. 5-7, 75181 Pforzheim, Germany / «КЛИНГЕЛ медикал метал ГмбХ», ул. Ханауэр 5-7, 75181 Пфорцхайм, Германия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Дент Имплантс.Ру» (ООО «Дент Имплантс.Ру») Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а, стр. 1

Тел.: +7 (906) 769-88-41

Электронный адрес: bio3synergy@gmail.com

[Перевод с английского и немецкого языков на русский язык]

[Перевод нотариального удостоверения, надписей, печатей и штампа на документе «Инструкция по применению. Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями», представленном на русском языке.]

B2 UZ 222 / 2017

Нотариальная контора Леонберг В2
Нотариус Вайденманн

Банхофштрассе 57 ♦ 71229 Леонберг
Тел.: 07152/93484 ♦ Факс: 07152/934888

Удостоверенная копия

Копия соответствует оригиналу.

Леонберг, 17.02.2017 г.

/подпись/
Вайденманн
Нотариус

[Печать нотариальной конторы Леонберга]

Наш номер дела: B2 UZ 222 / 2017 Нотариальная контора Леонберг В2 * Банхофштрассе 57 * 71229 Леонберг
Ваш номер дела:

«Био3 Имплантс ГмбХ»
ул. Карл-Цейсс 4
71229 Леонберг

[На бланке компании «Био3 Имплантс ГмбХ»]

«Утверждаю»

/подпись/

Борис Симановский
Генеральный директор
«Био3 Имплантс ГмбХ»,
ул. Карл-Цейсс 4,
Леонберг 71229,
Германия

Дата: 07 февраля 2017 г.

Для предъявления по месту требования,

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИИ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями

Мы, компания «Био3 Имплантс ГмбХ», адрес: ул. Карл-Цейсс 4, Леонберг 71229, Германия, настоящим заявляем, что прилагаемая Инструкция по применению является достоверной.

[Рельефная печать нотариальной конторы Леонберга]

[Штамп:

«БИО3 ИМПЛАНТС ГмбХ»

ул. Карл-Цейсс 4

71229 Леонберг, Германия

тел. +49 (7152)-3834221]

[Далее следует текст документа «Инструкция по применению. Система стоматологических имплантатов Bio3 Implants с принадлежностями», представленного на русском языке.]

766
Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Мамедовым Тимуром Джаванишировичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого февраля две тысячи семнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Мамедова Тимура Джаванишировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 7-8955.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: ----- руб.



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 227 лист(а)(ов)

Нотариус

