




«Утверждаю»
Директор ООО «Винсор»
Шестопалов Д.В.

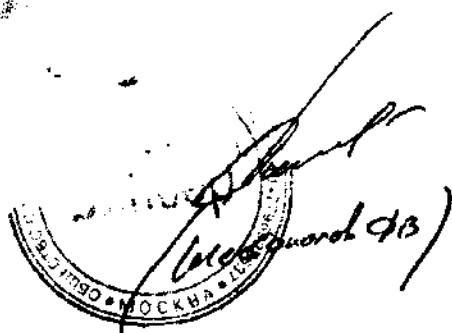

Руководство по эксплуатации

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Композит универсальный нанокерамический светового отверждения

«OliCo esthetic» в шприцах

**Производства компании: «Олидент», Польша, OLIDENT, Christo Botewa
1B,30-798 Krakow, Tel/fax:+12/29 00 502 info@olident.com,**

OliCo Esthetic

Композит универсальный нанокерамический светового отверждения в шприцах по 5,0 г. отдельных цветов: A1A2,A3,A3.5, OA2,OA3,B1,B2,OB2,C2,D2,D3,Incisal,OD2, BL.

OliCo Esthetic

Шприцы OliCo Esthetic состоят из всех компонентов необходимых для реставрации зуба.

OliCo - светоотверждаемый нанокерамический композитный материал с высокой механической прочностью, используемый для всех видов полостей. Материал основан на BIS GMA смолах и неорганических наполнителях с величиной частиц 0.05 – 0.09 микрон. Общий объем наполнителя составляет 81% от массы и 63% от объема.

OliCo соответствуют нормам DIN EN ISO 4049.

Применение

1. Изоляция

Рекомендуется применение коффердама.

2. Препарирование полости

Перед началом препарирования очистить зуб от остатков прежнего материала. Рекомендуется препарировать полость с наименьшими затратами здорового зуба. Эмалевый край препарировать наискосок (0.5 – 1.0 мм) для увеличения клеевой поверхности и прочности сцепления.

3. Защита пульпы

При глубоких полостях рекомендуется наносить на дно полости тонкий слой прокладки на основе гидроокиси кальция.

4. Кондиционирование эмали и дентина

Рекомендуется применять технику тотального протравливания: нанесите гель для протравливания на поверхности эмали и дентина, начиная с эмалевого края на 20 секунд. Для молочных

зубов и зубов высоко фторированных время протравливания увеличивается до 60 секунд. Затем в течение 20 секунд рекомендуется промыть эти поверхности струей воды и высушить струей воздуха без масла. Не пересушите дентин, т.к. наличие влажного дентина важно для функции OliBond. Протравленный эмалевый край должен иметь матово-белый цвет.

Меры предосторожности при протравливании:

Очень важно не загрязнять уже протравленные поверхности. В случае загрязнения необходимо очистить их и снова нанести протравливающий гель, как было описано выше. Избегать попадание протравливающего геля на кожу, слизистые оболочки и глаза. В случае попадания тщательно промыть большим количеством воды.

5. Выбор цвета

Следует определить расцветку на влажном зубе и подобрать соответствующий оттенок OliCo.

6. Применение OliCo

Рекомендуется накладывать материал выбранной расцветки по обычной схеме. Он легко моделируется, при этом необходимо применять неметаллический инструмент и прозрачные матрицы (полоски).

7. Отверждение OliCo

Для более светлых оттенков OliCo (например, A1, A2, C2) светоотверждение должно длиться 40 секунд, для более темных оттенков (например, A3.5, B3) – 60 секунд.

Для уменьшения усадки при полимеризации рекомендуется отверждение слоями, если реставрация толще 2 мм.

Важно:

Для уменьшения усадки при полимеризации рекомендуется отверждение слоями, если реставрация толще 2 мм.

8. Финишка / Полировка

Обработать поверхность алмазными полирами, полировочным камнем или щеточкой. Для достижения зеркальной полировки можно использовать войлочные полиры для финишной обработки.

9. Дополнительная информация

Не применять с эвгенолсодержащими препаратами, т.к эвгенол ухудшает отверждение композитов и может приводить к изменению цвета. Не хранить композитный материал вблизи эвгенолсодержащих продуктов, не допускать контакта композитного материала с эвгенолсодержащими материалами. Композитный материал не разбавлять смолами. Избегать контакта с кожей, особенно людям, подверженным аллергическим реакциям на метакрилаты. VITA ® является зарегистрированным торговым знаком.

13Хранение

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранение в прохладном помещении продлевает срок действия композита. Срок годности 5 лет.

Упаковка

Изделие доставляется в картонной упаковке поштучно

Дирктор ООО «Винсор»



Шестопалов Д.В.