

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Р.ОПТИКС»
Временов О.С.
200 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению **Инструменты зондирующие для офтальмохирургии**
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Инструменты зондирующие для офтальмохирургии предназначены для проведения офтальмологических хирургических операций факоэмульсификации и витректомии.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зонд витректор для витректомии – зонд для введения в витреоретинальную полость и извлечения патологических образований, инородного тела, рубцовой ткани или крови или части стекловидного тела из глаза.

Основные части витректора трубка и рукоятка. Трубка покрыта тонким гальваническим покрытием из хрома. Не является токсичными для организма, не вызывают аллергическую реакцию, не раздражают мускульную ткань, не вызывают повреждения живых клеток. Для того чтобы извлекать патологические ткани, попадающие внутрь полости трубки, встроен внутренний механизм, работающий по принципу гильотинной резки.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Следование инструкции по установке зонда для витректомии позволит правильно подготовить изделие к работе.

Распаковка:

1. Чтобы вынуть зонд из поддона, возьмите его за среднюю часть и поставьте вертикально вверх. *Не пытайтесь поднять его за концевую секцию или кончик иглы, так как это может привести к искривлению иглы.*

Установка:

1. Набор трубок для зонда для витректомии имеет цветную маркировку для облегчения идентификации. Трубка в СИНЮЮ полосу предназначена для активации резания, ПРОЗРАЧНАЯ трубка – для аспирации.
2. Все манипуляции и подсоединение трубок для витректомии следует проводить, соблюдая требования антисептики.
3. Подсоедините люэровский разъем на трубке в СИНЮЮ полосу к разъему активации резания на консоли аппарата.

4. Подсоедините люэровский разъем на ПРОЗРАЧНОЙ трубке к люэровскому разъему на аспирационной магистрали.

Испытание:

1. Перед применением необходимо проверить работу зонда для витректомии. Используя лупу, осмотрите порт зонда на предмет обнаружения возможных повреждений. Активируйте нож, следуя указаниям в «Инструкции по эксплуатации» используемой системы. Убедитесь в том, что при активации нож полностью перекрывает просвет порта зонда, а также в том, что между импульсами нож полностью втягивается обратно.
2. Перед применением заполните зонд и аспирационную магистраль стерильным раствором. Поместите кончик иглы зонда в стерильный раствор, активируйте аспирацию и дождитесь, пока раствор полностью заполнит аспирационную линию. Активируйте функцию резания и убедитесь в отсутствии пузырьков и протечек. При обнаружении пузырьков замените зонд.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Вводится в витреоретинальную полость и извлекает патологические образования, инородные тела, рубцовые ткани или кровь или часть стекловидного тела из глаза.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Окружающая температура -20°C... +60°C
Относительная влажность 10 %... 95 %