

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Русский медицинский
экспорт-инструментов»
Троицкая Т.Ю.
« » 200 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Микрогубки хирургические офтальмологические
Rumex (Ophthalmic Sponges)
(наименование изделия медицинского назначения)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Микрогубки хирургические офтальмологические Rumex предназначены для рефракционной хирургии и других офтальмологических операций. Микрогубка имеет разную форму для удобства применения, обеспечивает полную элиминацию жидкостей при офтальмологических операциях.

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

- Все микрогубки должны быть смочены физиологическим раствором или стерильной водой перед использованием.
- Микрогубки поставляются стерильными, прошедшими стерилизацию гамма-облучением и предназначены для одноразового использования.

Микрогубки хирургические офтальмологические Rumex
(Ophthalmic Sponges)

