


«УТВЕРЖДАЮ»

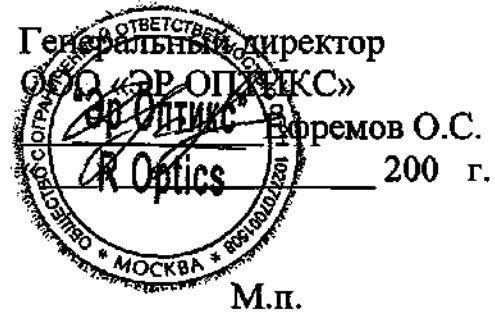

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Канюли для офтальмохирургии с принадлежностями
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Канюли для офтальмохирургии с принадлежностями предназначены для проведения офтальмологических хирургических операций, витректомии, для лечения патологии сетчатки и стекловидного тела, вызванной сосудистыми нарушениями, пролиферативными процессами при отслойке сетчатки, диабетической ретинопатией, травмой, возрастными изменениями центральных отделов глазного дна и другими патологическими изменениями заднего отрезка глаза, а также для удаления катаракты.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Канюли выполнены из нетоксичных для организма материалов, не вызывают аллергическую реакцию, не раздражают мускульную ткань, не вызывают повреждения живых клеток.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Распаковка:

Чтобы вынуть канюли из поддона, возьмите ее за среднюю часть и поставьте вертикально вверх. *Не пытайтесь поднять ее за концевую секцию или кончик иглы, так как это может привести к искривлению иглы.*

Испытание:

1. Перед применением необходимо проверить работу канюли. Используя лупу, осмотрите порт канюли на предмет обнаружения возможных повреждений.
2. Перед применением заполните канюлю и аспирационную магистраль стерильным раствором. Поместите кончик канюли в стерильный раствор, активируйте аспирацию и дождитесь, пока раствор полностью заполнит аспирационную линию. Убедитесь в отсутствии пузырьков и протечек. При обнаружении пузырьков замените канюлю.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Канюли вводятся в витреоретинальную полость (внутренняя полость глаза) и применяются в зависимости от назначения.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Окружающая температура -20°C... +60°C
Относительная влажность 10 %... 95 %

Данное изделие может использоваться только врачом.