

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ЗАО «МОНОЛИТ»



 Б.А. Борисов

« » 200__ г.
М. П.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

**«Набор офтальмологический SoftJect 2.4-1P (СофтДжект 2.4-1P) для имплантации
интраокулярных линз в составе: устройство для имплантации SoftJect, картридж
2.4-1P, толкатель, фиксатор»**

Инструкция по применению набора офтальмологического SoftJect 2.4-1P (СофтДжект 2.4-1P) для имплантации интраокулярных линз в составе: устройство для имплантации SoftJect, картридж 2.4-1P, толкатель, фиксатор», производства компании «Hanita Lenses» (Израиль).

Набор офтальмологический SoftJect 2.4-1P (СофтДжект 2.4-1P) для имплантации интраокулярных линз производства Hanita Lenses предназначен для имплантации монолитных складывающихся интраокулярных линз.

Описание:

Набор офтальмологический SoftJect 2.4-1P (СофтДжект 2.4-1P) для имплантации интраокулярных линз, изготовлен из биосовместимых материалов и предназначен для введения монолитных складывающихся гидрофильных акриловых интраокулярных линз. Набор обеспечивает безопасную имплантацию линз через малый разрез 2,4 мм.

Стерильная упаковка набора содержит:

- 1) устройства для имплантации (инжектора) SoftJect, выполненного в форме шприца и поршня с внутренней пружиной (SoftJect single use injector);
- 2) картриджа линзы, необходимого для успешной имплантации линзы через роговичный разрез 2,4 мм. (2.4-1P lens cartridge);
- 3) фиксатора - держателя картриджа (SoftJect Cartridge holder), необходимого для фиксации картриджа в момент размещения в нем интраокулярной линзы;
- 4) инструмента - толкателя, с помощью которого можно легко продвинуть интраокулярную линзу в туннель картриджа конической формы.

Применение:

- Имплантация монолитных интраокулярных линз в капсульный мешок или цилиарную борозду.

Инструкция по использованию:

1. Надорвите и откройте упаковку как показано на этикетке, находясь при этом в стерильной зоне.


Меры предосторожности:

Не используйте в случае повреждения упаковки!


Не используйте в случае истечения срока годности!

Не подвергайте повторной стерилизации!


Набор предназначен для однократного применения!

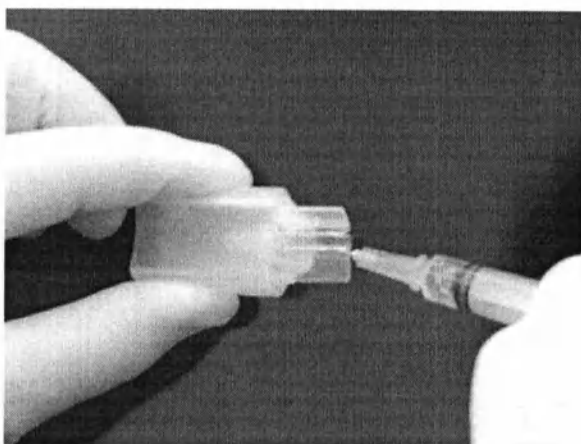

2. Закрепите картридж в держателе.

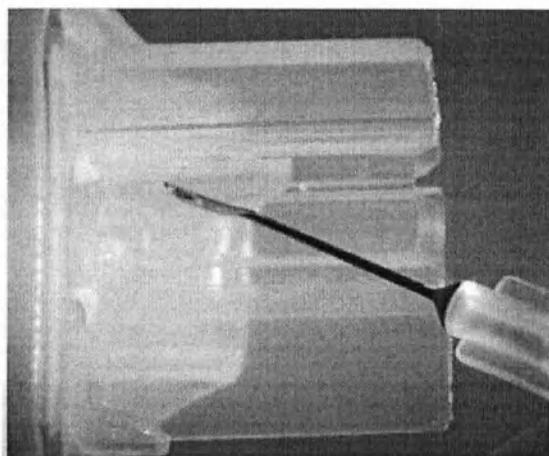


3. Заполните вязкоэластиком внутреннюю поверхность картриджа (туннель и канавки).

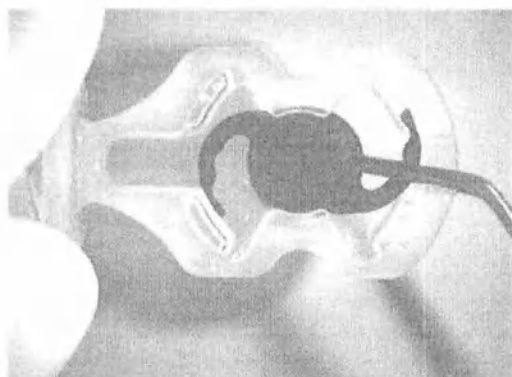


4. Достаньте держатель с линзой из флакона и захватите ее пинцетом, при этом канавка держателя линзы должна быть обращена вверх.


Внимание: чтобы не допустить дегидратации линзы, сохраняйте линзу во флаконе непосредственно до момента использования. Линза должна быть имплантирована в течение 1 – 2 минут после ее извлечения из флакона.

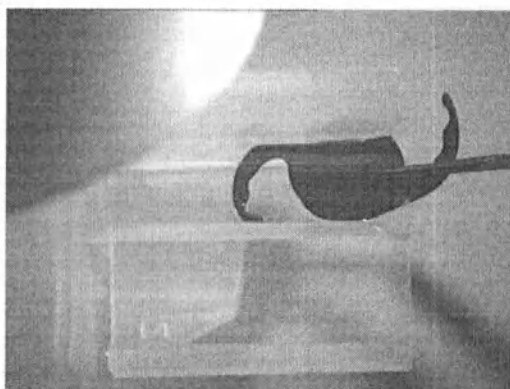


5. Поместите линзу между направляющими канавками картриджа. Все складывающиеся линзы HANITA имеют наклонную гаптику, поэтому важно правильно ориентировать линзу в картридже. Линзы B-Lens и See-Lens должны быть помещены в картридж таким образом, чтобы гаптический элемент, первым входящий в туннель картриджа, был обращен в Вашу сторону.

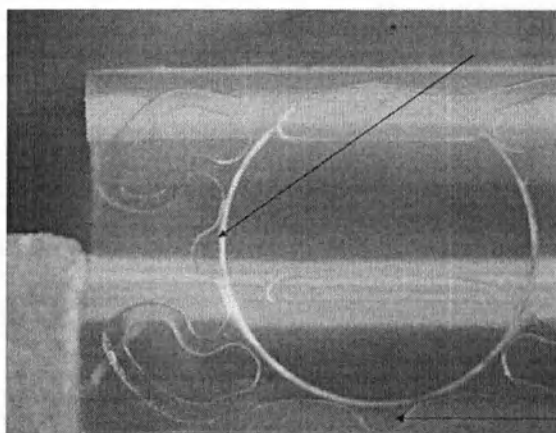


6. Линзы Bunny-Lens имеют два специальных выступа и должны быть помещены в инжектор в определенной позиции согласно рисунку.

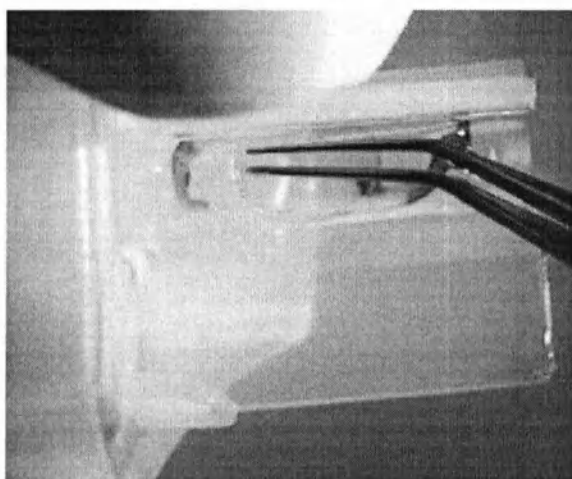


7. При помощи пинцета слегка вдавите линзу в направляющие канавки и прикройте створки картриджа.

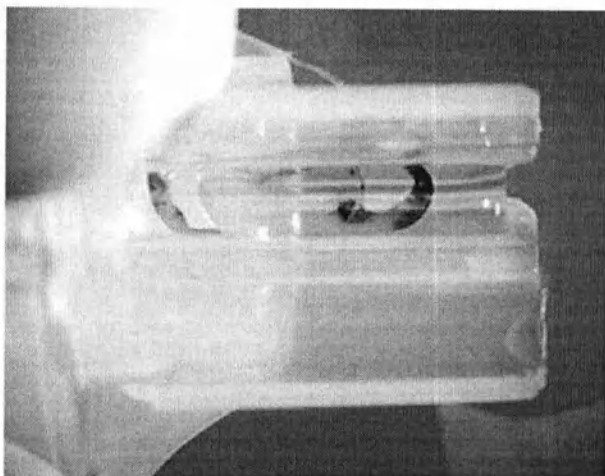


8. Убедитесь, что оптическая часть и гаптика линзы правильно расположены внутри направляющих канавок.

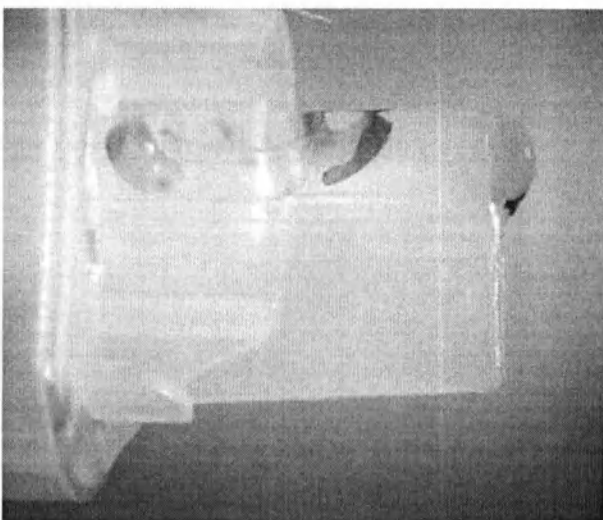


9. Закройте створки картриджа до щелчка.

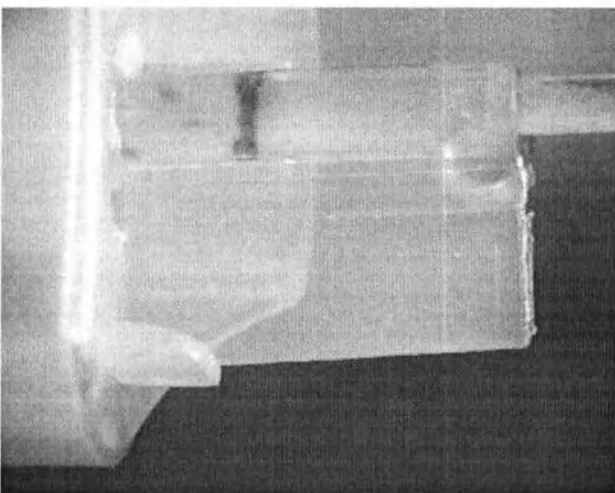


10. При помощи толкателя осторожно продвиньте линзу в тоннель картриджа. Убедитесь, что замыкающий гаптический элемент движется свободно.

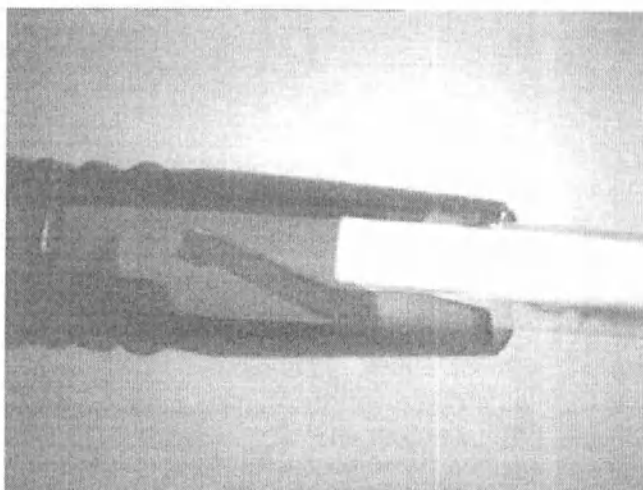

11. Выньте картридж из фиксатора и вставьте его в инжектор до щелчка.

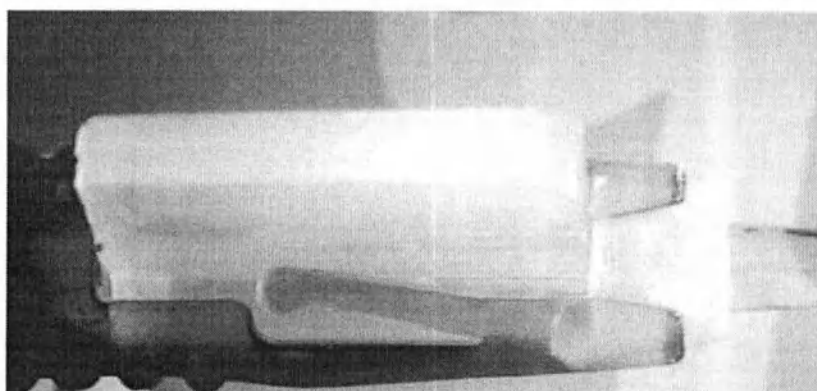

12. Введите силиконовый наконечник инжектора (плунжер) в картридж до тех пор, пока гаптический элемент линзы не достигнет конца картриджа.

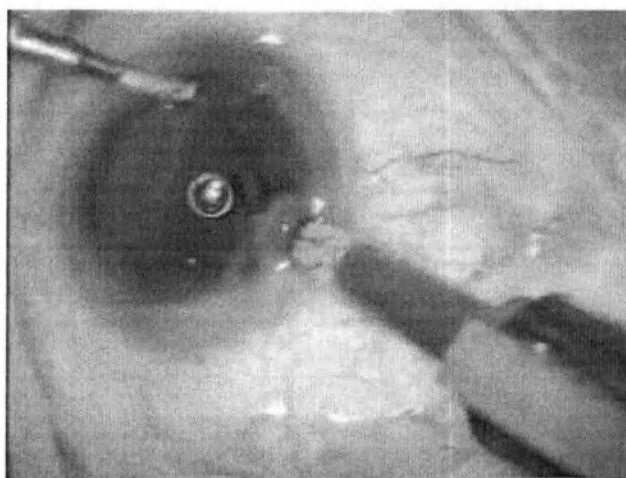

13. Введите конец картриджа в разрез.

14. Постоянным усилием вводите линзу до тех пор, пока полностью не выйдет ее оптическая часть. Выньте картридж из разреза.

15. Поместите замыкающий гаптический элемент в капсульный мешок и расположите линзу в центре капсулы.

16. Тщательно удалите вязкоэластик.