

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «МАСмедика»



М.Н. Бронников

11.08.09 2009г.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Мебель медицинская серии АТ

производства

Частного торгово-производственного унитарного предприятия «Артинокс»,
Республика Беларусь.

1. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**
2. **АССОРТИМЕНТ**
3. **ОПИСАНИЕ**
4. **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**
5. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
6. **ДЕЗИНФЕКЦИЯ**
7. **СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И
ХРАНЕНИИ**
8. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. ОПИСАНИЕ

Мебель медицинская серии АТ, предназначена для оснащения медицинских учреждений, врачебных кабинетов, лабораторий и других медицинских отделений.

Мебель медицинская может поставляться как отдельно, так и комплектно.

Мебель имеет модульную конструкцию, обладает высокой химической, механической и термической стойкостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

2. АССОРТИМЕНТ

2.1.Тумбы АТ: АТ-S21, АТ-S22, АТ-S31, АТ-S32, АТ-S33, АТ-S34, АТ-S35, АТ-S36, АТ-S37, АТ-S38, АТ-S39, АТ-S31v, АТ-S32v, АТ-S36v, АТ-S37v, АТ-S21v, АТ-S22v, АТ-T02, АТ-T04, АТ-T04Y, АТ-T04v, АТ-T04B, АТ-T04YB, АТ-T05, АТ-T05H, АТ-S1, АТ-T19, АТ-T24, АТ-T25, АТ-T26, АТ-T27, АТ-T28, АТ-T29, АТ-T29.1, АТ-TE02, АТ-TE06, АТ-DSP-T1, АТ-DSP-T2, АТ-DSP-T3, АТ-DSP-T4, АТ-DSP-T10.

2.2.Шкафы АТ: АТ-S11, АТ-S12, АТ-S13, АТ-S13v, АТ-S15, АТ-S16, АТ-S17, АТ-S18, АТ-S19, АТ-S41, АТ-S42, АТ-S43, АТ-DSP-K33, АТ-DSP-K3, АТ-DSP-K2, АТ-DSP-K22, АТ-DSP-K24, АТ-DSP-K21, АТ-DSP-K11, АТ-DSP-K1, АТ-S51, АТ-S52, АТ-SO1, АТ-SO2, АТ-SO2H, АТ-SO3, АТ-SO4, АТ-SO5, АТ-SO6, АТ-SO7, АТ-SO8, АТ-SO9, АТ-SO10, АТ-SO11, АТ-SO12, АТ-SO13, АТ-SO14, АТ-SO15, АТ-B014.

2.3.Столики АТ: АТ-B31.3, АТ-B32.3, АТ-B33.3, АТ-B44, АТ-B43, АТ-B42, АТ-B41, АТ-B21, АТ-B22, АТ-B23, АТ-B24, АТ-B20, АТ-B25, АТ-B26, АТ-B27, АТ-B28, АТ-B29, АТ-B1, АТ-B11, АТ-B12, АТ-B13, АТ-B14, АТ-B14H, АТ-B15, АТ-B16, АТ-B17, АТ-B18, АТ-B19, АТ-B21v, АТ-B22v, АТ-B20v, АТ-B31v, АТ-B32v, АТ-B33v.

2.4. Столы АТ: АТ-B51, АТ-B52, АТ-B53, АТ-B54, АТ-B55, АТ-B56, АТ-B61, АТ-B61H, АТ-B61.1, АТ-B61.2, АТ-B61.3, АТ-B61.4, АТ-B61.5, АТ-B61.6, АТ-B61.7, АТ-B61.8, АТ-B61.9, АТ-B61.10, АТ-B62, АТ-B62.1, АТ-B62.2, АТ-B62.3, АТ-B62.4, АТ-B62.5, АТ-B62.6, АТ-B62.7, АТ-B62.8, АТ-B62.9, АТ-B62.10, АТ-B63, АТ-B63H, АТ-B63.1, АТ-B63.2, АТ-B63.3, АТ-B63.4, АТ-B63.5, АТ-B63.6, АТ-B63.7, АТ-B63.8, АТ-B63.9, АТ-B63.10, АТ-B64, АТ-B64.1, АТ-B64.2, АТ-B64.3, АТ-B64.4, АТ-B64.5, АТ-B64.6, АТ-B64.7, АТ-B64.8, АТ-B64.9, АТ-B64.10, АТ-BM1, АТ-BM1.1, АТ-BM1.2, АТ-BM1.2H, АТ-BM1.3, АТ-BM1.4, АТ-BM1.5, АТ-BM1.6, АТ-BM1.7, АТ-BM1.8, АТ-BM1.9, АТ-BM1.10, АТ-BM1.11, АТ-BM2, АТ-BM2.1, АТ-BM2.2, АТ-BM2.3, АТ-BM2.4, АТ-BM2.5, АТ-BM2.6, АТ-B80, АТ-B81, АТ-B82, АТ-B83, АТ-DSP-2, АТ-DSP-14, АТ-DSP-3, АТ-DSP-11, АТ-DSP-42, АТ-DSP-41, АТ-DSP-4, АТ-DSP-6, АТ-DP-1.

2.5. Кровать АТ: АТ-K1, АТ-K1v, АТ-K2, АТ-K3, АТ-K4, АТ-K4.2, АТ-K4.3, АТ-K5, АТ-K6, АТ-K7.

2.6. Банкетки АТ: АТ-A20, АТ-DK1.

2.7. Табуреты, стулья АТ: АТ-A3, АТ-A4, АТ-A7, АТ-A8, АТ-Z64MF.

2.8. Штативы и подставки: АТ-B01, АТ-B02, АТ-B03, АТ-B04, АТ-B05, АТ-B06, АТ-B07, АТ-B08, АТ-B09, АТ-B010, АТ-B011, АТ-B012, АТ-B01v, АТ-B04v, АТ-B05v, АТ-B06v.

3. ОПИСАНИЕ

Столики, столы, шкафы, стеллажи оснащены полками и/или ящиками, что позволяет хранить в/на них медицинские инструменты, материалы, медикаменты, одежду и др. медицинские принадлежности. Тумбы могут быть покрыты столешницей, что позволяет производить на них мелкие медицинские работы, либо оснащены мойками и смесителями, что позволяет производить работы с жидкостями. Тумбы могут собираться в единые модули под общей столешницей.

Стеллажи имеют от 2 до 9 полок, покрытие – эмаль, материал – сталь, нагрузка до 100 кг на полку или 600 кг на секцию.

Мебель медицинская корпусная для больничных помещений серии АТ - разборной конструкции. Сборка производится с помощью винтов, гаек и шайб.

Сиденье кушеток, кроватей и каталок крепится к каркасу основания болтами или винтами с шайбами.

Подголовники крепятся к сиденью с помощью уголков, шурупов и винтов.

Облицовочный слой мягких сидений и спинки крепится скобами или клеем.

Для изделий применяется фурнитура, выпускаемая предприятиями РБ и соответствующая требованиям СТБ 1157-99, конструкторской документации образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке, а также фурнитура, выпускаемая иными фирмами, или по образцам ином фирм, или предприятиями стран СНГ.

Безопасность эксплуатации изделий обеспечивается применяемыми материалами, конструкцией изделий и подтверждается испытаниями, проведенными в установленном порядке.

Изделия могут поставляться потребителю в собранном или разобранном виде.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Безопасность эксплуатации изделий обеспечивается применяемыми материалами, конструкцией изделий, и подтверждается испытаниями, проведенными в установленном порядке.

4.2. Изделия должны обеспечивать гарантию эксплуатации при воздействии температуры от плюс 10 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха 80% при 25° С.

4.3. Поставщик гарантирует работоспособное состояние изделий в течение 18 месяцев эксплуатации.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Изделия должны отвечать требованиям СанПиН 2.1.2.12-25, СанПиН 1.1.12-30.

5.2 При производстве, хранении и применении изделий пожарная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 и ППБ РБ 1.01.

5.3 Помещения для производства изделий должны быть оснащены видами пожарной техники согласно ГОСТ 12.4.009. В зданиях, помещениях, на оборудовании должны быть вывешены знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026.

5.4 Требования к вентиляции производственных помещений согласно ГОСТ 12.4.021, СНБ 4.02.01.

5.5 Организация технологического процесса производства изделий должна соответствовать требованиям СанПиН 11-09.

5.6 Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны и периодичность контроля должна соответствовать требованиям СанПиН 11-19.

Контроль концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводится по методикам, вошедшим в «Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий санитарно-эпидемиологических учреждений и других предприятий и организаций Республики Беларусь», утвержденный Главным государственным санитарным врачом РБ и согласованный с Госстандартом 10.09.2002г.

Лица, занятые в производстве изделий, должны проходить предварительные при приеме на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке, а также специальный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

Медицинские осмотры персонала, занятого в производстве изделий, производятся в порядке проведения обязательных медицинских осмотров работников, установленном Постановлением Минздрава Республики Беларусь.

6. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) при температуре воздуха от -50°C до +40°C, относительной влажности не более 75% при температуре окружающего воздуха +15°C.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует работоспособное состояние изделий в течение 18 месяцев эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- ▶ несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;
- ▶ наличие внешних и внутренних механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов, царапины и т.п.);
- ▶ наличие повреждений полученных в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ и т.п.;
- ▶ наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации.

Генеральный директор ООО «МАСмедика»
М.П.

«20» июль 2009г.



Бронников М.Н.