

« Утверждаю »

Генеральный директор
ООО «Восток Трейд»

Г. П. С. Я. Н.



2008 г.

Руководство по эксплуатации

«Кресло – коляска КУ спортивная»
С принадлежностями

2008 г.

ВВЕДЕНИЕ.

Кресло-коляска КУ спортивная с принадлежностями предназначена для занятий спортом, ведения активного образа жизни, самостоятельного передвижения инвалидов, в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.

ОПИСАНИЕ

Конструкция кресла-коляски КУ спортивной представляет собой сварную раму из тонкостенных труб. Для передвижения на кресле-коляске установлены 4 колеса цельнолитые или пневматические: передние - самоориентирующиеся малого диаметра, задние — с ободами для ручного привода. Кресло-коляска имеет разновидности по типу исполнения, не влияющие на конструкцию в целом. Для всех исполнений кресла-коляски основной конструкции является единая рама. Исполнения кресла-коляски имеют следующие опции:

- подножки регулируемые;
- подлокотники откидные, различные по конфигурации;
- опоры для ног откидные;
- ремни - упоры для икроножных мышц;
- быстросъемные задние колеса;
- основания колес спицевые или сварные;
- устройства противоопрокидывания;
- мягкие съемные подушки сидение и спинки;
- привязные ремни;
- стояночные тормоза различного исполнения по конструкции и материалам.

Диапазон исполнений по ширине сидения от 33 см до 40 см.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- упаковка: картонная коробка;
- паспорт изделия;
- насос;
- велоаптечка;
- запасные покрышка, камера;
- дополнительные подушки сидения и спинки;
- запасные колеса;
- запасные держатели голени;
- чехлы на колеса;
- комплект ключей.

ПОДГОТОВКА КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достать коляску из упаковочной тары, снять защитную полиэтиленовую пленку с элементов коляски.

Установить все съемные элементы на соответствующие места.

Отрегулировать установку отдельных элементов под параметры пользователя.

Для пневматических колес: проверить давление в шинах (0,25 мПа).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

Сидение и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах колес.

Один раз в 6 месяцев необходимо произвести:

- смазку подшипников.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с ГОСТ Р 51083 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования колясок по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения колясок в упаковке предприятия – изготовителя на складах поставщика и у потребителя в части воздействия климатических факторов соответствуют группе 2 (С) ГОСТ 15150. Не допускается хранение коляски в одном помещении с химически активными и пылящими веществами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы колясок – не менее 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня приобретения коляски потребителем, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в паспорте изделия;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия высотой более 4 см без подъема передних колес;
- прокол камеры в шинах колес;
- езда на спущенных колесах и т.п.