

« Утверждаю »

Генеральный директор
ООО «Восток Трейд»

Груздев С.А.



Руководство по эксплуатации

**«Кресло – коляска КУ
с электроприводом»**
С принадлежностями

2008 г.

ВВЕДЕНИЕ.

Кресло-коляска КУ с электроприводом с принадлежностями предназначена для самостоятельного передвижения, либо сопровождающими лицами, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, повреждениями нижних конечностей и больных ЦП, в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.

ОПИСАНИЕ

Рама кресла-коляски представляет собой сварную конструкцию из тонкостенных труб. Для транспортировки на раме установлены колеса цельнолитые или пневматические - задние с электроприводом. Управление осуществляется манипулятором типа «джойстик», установленном на выдвижной штанге, или рулевым управлением. Имеется возможность установки манипулятора как слева, так и справа. Манипулятор оснащен контроллером с индикацией зарядки аккумуляторов и скорости движения, кнопочной регулировкой скоростью движения и звуковым сигналом. Отключение электропривода позволяет перемещать коляску сопровождающим лицом. Питание электропривода от двух герметичных необслуживаемых аккумуляторов по 12В. Комплектуется зарядным устройством. Снабжена электромагнитными тормозами. Кресло-коляска имеет разновидности по типу исполнения, не влияющие на конструкцию в целом. Для всех исполнений кресла-коляски основой конструкции является единая рама.

Исполнения кресла-коляски имеют следующие опции:

- подножки откидные, съемные, регулируемые;
- подлокотники откидные или съемные (дополнительно – регулируемые), различные по конфигурации;
- спинка фиксированная или с регулировкой по углу наклона и высоте (дополнительно – складная);
- сидение, регулируемое по углу наклона;
- система освещения и сигнальных огней;
- устройствами противоопрокидывания;
- опоры для ног откидные;
- ремни - упоры для икроножных мышц и стоп, или регулируемые ложементы;
- съемные, регулируемые подголовники;
- мягкие съемные подушки сидения и спинки;
- привязные ремни;
- пружинная подвеска;
- хозяйственный отсек.

Диапазон исполнений по ширине сидения от 31 см до 52 см.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- упаковка: картонная коробка;
- зарядное устройство;
- паспорт изделия;
- насос;
- велоаптечка;
- запасные покрышка, камера;
- грязезащитные подлокотники;
- дополнительные подушки сидения и спинки;
- запасные колеса;
- запасные держатели голени;
- аккумуляторы;
- чехлы на колеса;
- комплект ключей.

ПОДГОТОВКА КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достать коляску из упаковочной тары, снять защитную полиэтиленовую пленку с элементов коляски.

Установить все съемные элементы на соответствующие места.

Установить аккумуляторы, соединить их с контактами электропривода, соблюдая полярность.

Отрегулировать установку отдельных элементов под параметры пользователя.

Для пневматических колес: проверить давление в шинах (0,25 мПа).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

Сидение и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах колес.

Один раз в 6 месяцев необходимо произвести:

- смазку подшипников.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При отсутствии сопровождения запрещается использовать коляску в режиме свободного хода. Запрещается отключать сцепление с приводными двигателями при движении коляски по наклонной плоскости. После остановки коляски при передвижении свободным ходом необходимо включить редуктор.

Не оставлять зарядное устройство соединенным с контроллером после отключения зарядного устройства от питания.

В случае экстренного торможения необходимо отпустить джойстик

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с ГОСТ Р 51083 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования колясок по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения колясок в упаковке предприятия – изготовителя на складах поставщика и у потребителя в части воздействия климатических факторов соответствуют группе 2 (С) ГОСТ 15150. Не допускается хранение коляски в одном помещении с химически активными и пылящими веществами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы колясок – не менее 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня приобретения коляски потребителем, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в паспорте изделия;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия высотой более 4 см без подъема передних колес;
- прокол камеры в шинах колес;
- езда на спущенных колесах и т.п.



KY123



KY120



KY122L



KY121C



KY111A



KY140A



KY112A



KY110A