


« Утверждаю »

Генеральный директор
ООО «Восток Трейд»
Грушев С.А.

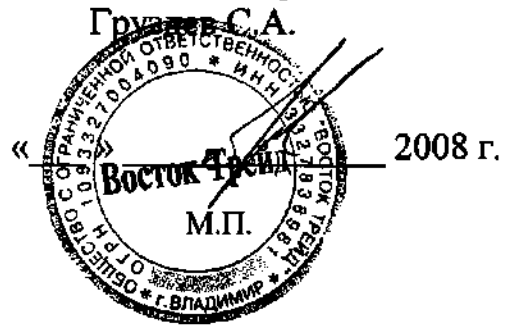

Руководство по эксплуатации

**«Кресло – стул туалетный КУ
с санитарным оснащением»
С принадлежностями**

2008 г.

ВВЕДЕНИЕ.

Кресло-стул туалетный КУ с санитарным оснащением с принадлежностями предназначен для активного или пассивного использования в помещениях или комнатах личной гигиены инвалидами, больными с нарушениями опорно-двигательного аппарата и престарелых людей.

ОПИСАНИЕ

Конструкция кресла-стула туалетного КУ с санитарным оснащением представляет собой сварную раму из тонкостенных труб. Для транспортировки на кресле-коляске установлены 4 колеса цельнолитые или пневматические: передние -самоориентирующиеся малого диаметра, задние – с ободами для ручного привода или для пассивного использования (вариант: без колес, на 4 ножках, регулируемых по высоте). Кресло-стул имеет разновидности по типу исполнения, не влияющие на конструкцию в целом. Для всех исполнений кресла-стула основой конструкции является единая рама. Исполнения кресла-стула имеют следующие опции:

- подножки откидные, съемные, регулируемые;
- подлокотники откидные или съемные (дополнительно – регулируемые), различные по конфигурации;
- спинка фиксированная или с регулировкой по углу наклона (дополнительно – складная);
- опоры для ног откидные;
- ремни - упоры для икроножных мышц и стоп, или регулируемые ложементы;
- быстроъемные задние колеса;
- основания колес спицевые или сварные;
- съемные, регулируемые подголовники;
- тросиковое управление тормозами при помощи рукояток, установленных на ручках для толкания;
- ножные упоры для удобства управления сопровождающим лицом;
- съемное судно с крышкой;
- съемное санитарное сидение (дополнительно с мягкой подушкой);
- стояночные тормоза различного исполнения по конструкции и материалам.

Диапазон исполнений по ширине сидения от 36 см до 70 см.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- упаковка: картонная коробка;
- паспорт изделия;
- насос;
- велоаптечка;
- запасные покрышка, камера;
- дополнительный стояночный тормоз;
- грязезащитные подлокотники;
- запасные колеса;

- запасные держатели голени;
- чехлы на колеса;
- комплект ключей;
- запасное пластмассовое санитарное судно.

ПОДГОТОВКА КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достать кресло-стул из упаковочной тары, снять защитную полиэтиленовую пленку с элементов коляски.

Установить все съемные элементы (подножки, санитарное судно, сидение и т.п.) на соответствующие места.

Отрегулировать установку отдельных элементов под параметры пользователя.

Для пневматических колес: проверить давление в шинах (0,25 мПа).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо очищать поверхность кресла-стула от пыли и грязи.

Металлические поверхности протирать насухо.

Сидение и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах колес.

Один раз в 6 месяцев необходимо произвести:

- смазку подшипников.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При посадке в кресло-стул и высадке из него, колеса должны быть зафиксированы тормозами.

Запрещается:

- пользоваться стулом с неисправными тормозами;
- становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении;
- использовать тормоза для торможения при движении.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с ГОСТ Р 51083 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования кресла-стула по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения кресла-стула в упаковке предприятия – изготовителя на складах поставщика и у потребителя в части воздействия климатических факторов соответствуют группе 2 (С) ГОСТ 15150. Не допускается хранение кресла-стула в одном помещении с химически активными и пылящими веществами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы кресла-стула – не менее 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня приобретения кресла-стула потребителем, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в паспорте изделия;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия высотой более 4 см без подъема передних колес;
- прокол камеры в шинах колес;
- езда на спущенных колесах и т.п.



KY683Q



KY695



KY608L



KY605C



KY607



KY693



KY699L



KY790



KY791



KY696



KY697



KY692



KY681



KY896



KY800



KY814



KY818L



KY810



KY819