



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Бином»
А.В. Чернов
«__» _____ 2017 г.

Аппарат физиотерапевтический портативный
для ультразвуковой терапии
«БИНОМ®-ФИЗИО» УЗТ

ПАСПОРТ
и
инструкция по эксплуатации

АТУД.941536.012 ПС

Калуга

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА.....	6
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	8
7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.....	10
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ.....	12
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	13
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	15
11. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	16
12. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	16
13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	16
14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	16
15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	17
16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	18
17. УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ.....	19
ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ.	

1. Общие указания

Вы приобрели аппарат физиотерапевтический портативный (АФП) для ультразвуковой физиотерапии «**БИНОМ®-ФИЗИО**» УЗТ (далее - аппарат). Перед работой с аппаратом внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, методиками лечения, показаниями и противопоказаниями, а также с указаниями по технике безопасности. Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные производителем основные параметры и технические характеристики, позволяет ознакомиться с устройством аппарата и порядком работы с ним, а также служит руководством при техническом обслуживании, ремонте, транспортировании и хранении.

2. Назначение изделия

2.1 АФП «**БИНОМ®-ФИЗИО**» УЗТ выпускается по ТУ 26.60.13-008-20734945-2017.

Декларация о соответствии № _____, зарегистрирована органом _____

Регистрационное удостоверение № _____
выдано _____

2.2 Лечебным фактором АФП «**БИНОМ®-ФИЗИО**» УЗТ является ультразвуковое излучение (УЗ) от пьезокерамического излучателя. УЗ оказывает противовоспалительное, обезболивающее, рассасывающее и десенсибилизирующее действие.

2.3 Аппарат предназначен для лечения больных с различной патологией путем воздействия высокочастотным УЗ излучением постоянного или импульсного действия. Аппарат успешно применяется при лечении заболеваний, указанных в методических рекомендациях по применению, входящих в комплект поставки.

Показания к применению аппарата:

- неврологические проявления остеохондроза позвоночника
- последствия заболеваний и травм периферической нервной системы
- травмы позвоночника
- рассеянный склероз
- заболевания и последствия травм суставов, мышц, сухожилий
- заболевания органов дыхания
- заболевания органов пищеварения
- заболевания кожи
- заболевания ЛОР-органов
- стоматологические заболевания
- хирургические заболевания (келоидные рубцы, спаечная болезнь и др.)

Противопоказания к применению аппарата:

- высокая температура
- наличие кардиостимулятора
- генерализованный туберкулёз
- инфекционные заболевания
- артериальная гипертензия III ст.
- артериальная гипотония
- ишемическая болезнь сердца с частыми приступами стенокардии и нарушением сердечного ритма
- осложненная язвенная болезнь
- остеопороз

- тромбофлебит
 - тромбозы
 - воздействие в области щитовидной железы (местное)
 - гипертиреоз
 - беременность
- а также общие противопоказания для применения физических факторов.

Применение изделия в соответствии с методическими рекомендациями и настоящим паспортом по эксплуатации безопасно для потребителя.

2.4 Аппарат предназначен для работы от электрической сети для применения в клиниках, лечебно-диагностических центрах, поликлиниках, сельских больницах, санитарных частях, госпиталях, амбулаториях, санаториях, профилакториях.

2.5 Ультразвуковая терапия может применяться как самостоятельный вид лечения, так и в сочетании с медикаментозной терапией, а также может быть использована для ввода лекарственных веществ в ткани организма (по методике фонофореза). Методы и способы лечения указаны в «Методических указаниях по применению АФП «БИНОМ®-ФИЗИО» УЗТ»

2.6 Аппарат предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре +10...+35°C и атмосферном давлении 630...800 мм рт.ст. при относительной влажности не более 80%.

2.7 Производитель оставляет за собой право дальнейшего совершенствования аппарата.

3. Технические данные и характеристики

3.1 Аппарат состоит из блока излучения с органами управления и сетевого адаптера (далее – адаптер), соединяемых между собой через разъём блока излучения. Адаптер служит для работы аппарата от сети переменного тока. Блок излучения генерирует высокочастотное УЗ излучение непрерывного или импульсного действия.

3.2 Питание аппарата от сети переменного тока:

- частота, Гц 50
- напряжение, В $198 \div 242$

3.2.1 Потребляемая мощность не более, ВА..... 18

3.3 Аппарат обеспечивает непрерывный режим работы в течение 8 часов с перерывом на 10 ± 2 мин. после каждых 20 мин. работы.

3.4 Эффективная площадь УЗ излучателя, не более, см²4

3.5 УЗ излучение:

- частота излучения, МГц*
- режим работы.....импульсный или постоянный
- частота модуляции в импульсном режиме работы, Гц.....50
- длительность пачек импульсов, мс..... 2; 4; 6 и далее до 18 с шагом 2
- глубина модуляции, %.....100
- интенсивность УЗ, регулируемая, Вт/см²0; 0,05; 0,1 и далее до 1 с шагом 0,1
- точность установки интенсивности УЗ излучения, не хуже, %..... ± 30

***Примечание:** Значения заносятся наладчиком на этапе приёмо-сдаточных испытаний при паспортизации каждого изделия

3.6 Время сеанса лечения (по таймеру), регулируемое, мин.....1 - 20

Шаг таймера обратного отсчёта, с.....1

Точность установки таймера, не хуже, %..... ± 5

3.7 Аппарат имеет встроенные лечебные программы.

Количество встроенных лечебных программ, не менее.....4

3.8 Габаритные размеры в индивидуальной упаковке, не более, мм..... 230×180×80

3.9 Масса:

- блока излучения, не более, кг0,25

- в полном комплекте поставки, не более, кг 1

3.10 Аппарат обеспечивает цифровую и (или) световую индикацию:

- включения аппарата в сеть;
- установки уровня интенсивности УЗ;
- режима работы УЗ;
- времени сеанса лечения;
- контроль контакта УЗ излучателя с телом пациента;
- визуальный тест мощности УЗ излучения;

3.11 Аппарат обеспечивает звуковую сигнализацию:

- включения аппарата,
- перебора значений параметров и режимов работы;
- начала и окончания сеанса лечения;
- отсутствия контакта УЗ излучателя с телом пациента;
- каждые 60 секунд для работы по лечебным полям.

3.12 Аппарат имеет функцию памяти параметров последнего лечебного сеанса.

3.13 По общим требованиям безопасности аппарат соответствует ГОСТ Р МЭК 60601-1 и выполнен по классу II с рабочей частью типа BF.

3.14 По требованиям безопасности в части УЗ аппарат соответствует ГОСТ 25052, ГОСТ 25053, ГОСТ Р 50267.5.

3.15 Средняя наработка на отказ не менее, час 2000

3.16 Средний срок службы, лет 5

4. Комплектность

Комплект поставки аппарата должен соответствовать табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество (шт.)
1.	Аппарат физиотерапевтический портативный «БИНОМ®-ФИЗИО» УЗТ	ТУ 26.60.13-008-0734945-2017 АТУД.941536.012	1
2.	Футляр или Чехол	АТУД.130529.001 АТУД.130528.002	1*
3.	Сетевой адаптер	IB12-1500S, ROBITON®, Россия	1
	Эксплуатационная документация		
4.	Паспорт и руководство по эксплуатации «БИНОМ®-ФИЗИО» УЗТ	АТУД.941536.012 ПС	1
5.	Методические указания по применению аппарата в медицинской практике	«Методические указания по применению АФП «БИНОМ®-ФИЗИО» УЗТ»	1

***Примечание:** Включение в комплект поставки определяется потребителем.

5. Устройство и принцип работы аппарата

5.1 АФП «БИНОМ®-ФИЗИО» УЗТ - компактный физиотерапевтический аппарат, выполненный в виде блока излучения, содержащего пьезокерамический излучатель, работающего от сетевого адаптера.

5.2 Аппарат состоит (см. рис. 1) из блока излучения 1 и сетевого адаптера 2, подключаемого непосредственно к розетке промышленной сети 220В. Лечебными факторами аппарата является УЗ излучение от пьезокерамического излучателя 3 площадью не более 4 см². Гнездо 4 служит для подключения блока излучения к сетевому адаптеру. Информация о выходных данных изделия отображена на шильдике 5.

Корпуса блоков излучения и сетевого адаптера изготовлены из ударопрочного нетоксичного ABS.

5.3 На верхней части корпуса расположена лицевая панель аппарата (см. рис. 2), содержащая:

- дисплей 1, отображающий режимы и параметры работы аппарата;
- кнопки 2 «<» и 3 «>» выбора параметра и установки его значения;
- кнопку 4 «ОК» выбора фактора и фиксации установленного значения параметра;
- кнопку 5 «▶/||» включения сеанса лечения «ПУСК», перехода в режим ожидания «ПАУЗА», а также преждевременного выхода из сеанса лечения «СТОП»;

5.4 В аппарате предусмотрен контроль контакта с телом пациента при работе УЗ (см. п. 8.5), а также визуальный тест мощности УЗ излучения (см. п. 7.6.1). Признаком включения (состояния, при котором значение мощности отлично от нуля) УЗ является отображение соответствующего мнемонического знака на дисплее в режиме излучения (сеанса лечения). При этом на дисплее в меню работы таймера обратного отсчёта, соответствующего оставшемуся времени сеанса лечения, могут отображаться знаки, которые обозначают:



- УЗ излучение включено контакт с телом пациента в норме;



- УЗ включено, нет контакта с телом пациента.

5.5 По истечении установленного значения времени сеанса лечения (меню «ТАЙМЕР») аппарат автоматически прекращает работу и переходит в режим ожидания следующего сеанса лечения. Конец режима излучения сопровождается продолжительным звуковым сигналом.

5.6 Кнопка 4 «ОК» выполняет функции:

- Выбора лечебного фактора (или меню в соответствии с рис. 3) и фиксации установленного значения параметра (или лечебной программы);

5.7 Кнопка 5 выполняет функции:

- «ПУСК»: начало сеанса лечения, сопровождаемое запуском излучения с предварительно установленными параметрами лечебных факторов и таймера обратного отсчёта времени сеанса лечения.
- «ПАУЗА»: временный останов сеанса лечения без сброса времени таймера обратного отсчёта. Режим отображается соответствующим информационным сообщением на дисплее аппарата при нажатии кнопки в режиме сеанса лечения. Для продолжения сеанса лечения повторно нажмите кнопку 5.
- «СТОП»: преждевременный выход из сеанса лечения со сбросом времени таймера обратного отсчёта. Для осуществления этой функции необходимо длительное нажатие (около 1 секунды) кнопки 5.

6. Меры безопасности

6.1 Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через сетевой адаптер. Перед каждым включением сетевого адаптера в сеть проверяйте целостность изоляции.

6.2 Не допускайте попадания влаги внутрь аппарата при его дезинфекции и санитарной обработке.

Внимание! Блок излучения аппарата частично герметичен. Аппарат предназначен только для контактной и субаквальной методик.

6.3 Запрещается устранять неисправности обслуживающему персоналу медучреждений или самостоятельно. При обнаружении неисправности аппарат сдать в ремонт.


6.4 После транспортирования в условиях отрицательных температур аппарат должен быть выдержан при нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

Внимание! Техническое обслуживание аппарата и ремонтные работы должны выполняться только после его отключения от электрической сети.


6.5 По общим требованиям безопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1, класс защиты II, рабочая часть типа BF.

6.6 По требованиям безопасности в части УЗ аппарат соответствует ГОСТ 25052, ГОСТ 25053 и ГОСТ Р 50267.5.

6.7 По электромагнитной совместимости аппарат соответствует ГОСТ Р МЭК 60601-1-2. Аппарат относится к медицинским изделиям, для которых критерии соответствия требованиям помехоустойчивости допускают любое ухудшений качества функционирования и испытаниям на устойчивость к электромагнитным помехам не подвергается.

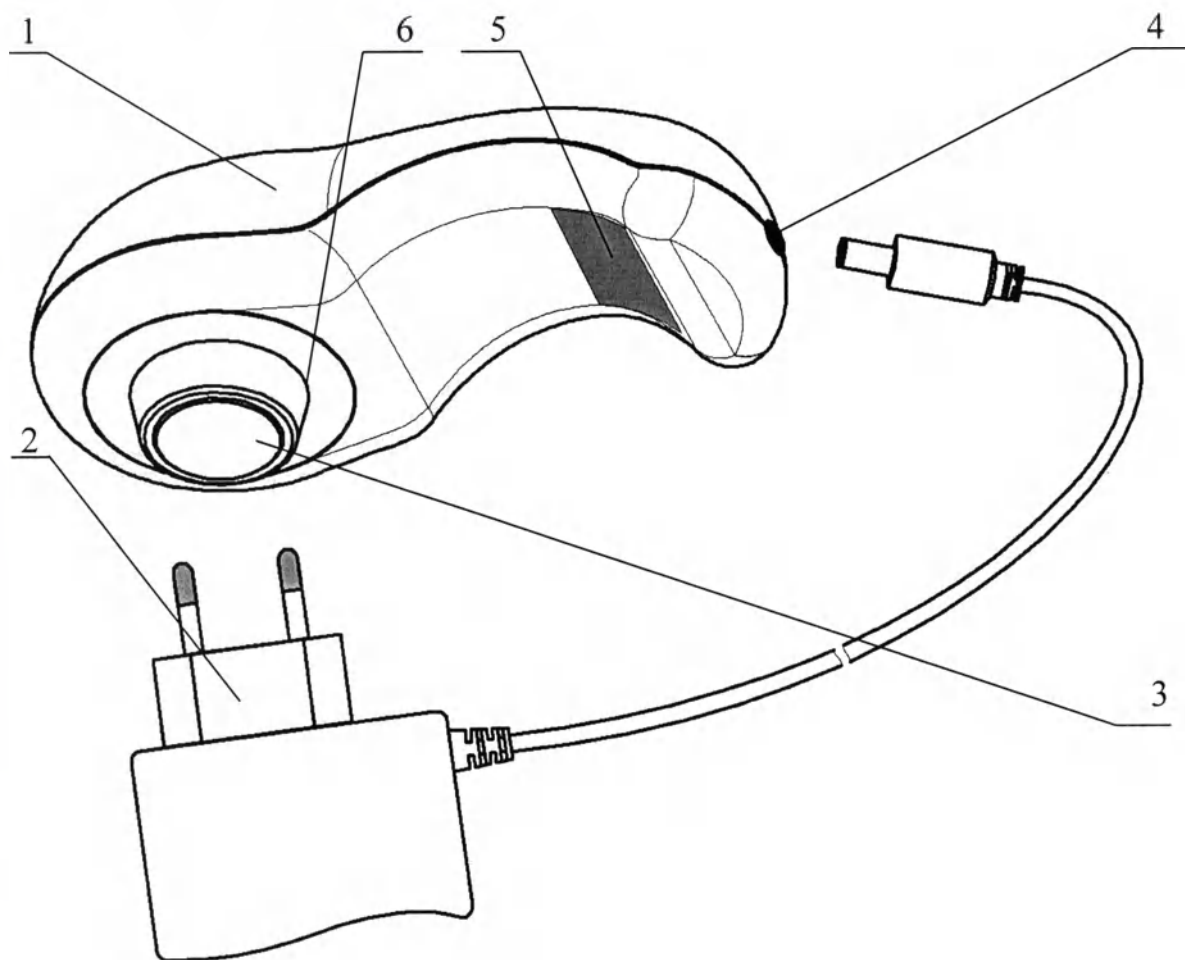

- 1 – корпус блока излучения;
- 2 – сетевой адаптер;
- 3 – пьезокерамический УЗ излучатель;
- 4 – гнездо для подключения сетевого адаптера;
- 5 – шильдик;
- 6 – линия максимально допустимого погружения в воду

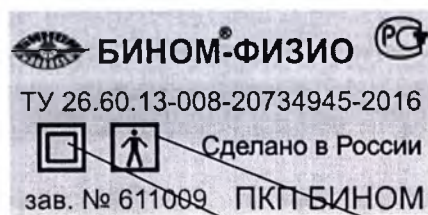

Изделие с рабочей частью типа BF

Изделие с двойной изоляцией, не требующего заземления

Первая цифра заводского номера – год выпуска

Две вторых цифры заводского номера – месяц года выпуска

Три последних цифры заводского номера – номер изделия в месяце выпуска

Рис. 1 Внешний вид аппарата и содержание информации об изделии



- 1 – дисплей блока излучения;
- 2 – кнопка выбора параметра и уменьшения его значения;
- 3 – кнопка выбора параметра и увеличения его значения;
- 4 – кнопка выбора фактора и фиксации установленного значения параметра;
- 5 – кнопка включения, временного останова и преждевременного выхода из сеанса лечения;

Рис. 2 Лицевая панель аппарата с органами управления
(дисплей находится в состоянии меню установки таймера)

7. Подготовка изделия к работе

7.1 Подготовка аппарата к эксплуатации начинается с распаковки и проверки комплектности аппарата.

7.2 Перед проведением курса физиотерапии терапии внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и методическим пособием по использованию аппарата в медицинской практике, входящим в комплект поставки, и выберите необходимую методику лечения.

7.4 Проверьте целостность изоляции на кабеле сетевого адаптера. Подключите кабель сетевого адаптера при помощи разъёма к блоку излучения и вставьте сетевой адаптер в розетку промышленной сети 220В/50Гц. При этом на дисплее блока излучения включится заставка (торговый знак завода-производителя), отображающая подключение аппарата к сети. Через 2-3 секунды заставка погаснет и на дисплее отобразится меню таймера аппарата.

Заставка также появляется, если в течение 30 секунд не производится никаких манипуляций с кнопками (кроме режима лечебного сеанса). При первом нажатии на любую из кнопок аппарат переходит в режим, соответствующей состоянию до появления заставки.

7.5 При помощи кнопок 2 - 4 произведите нужные установки таймера и лечебных факторов, последовательно выбирая их из меню, которые отображены на рис. 3. Параметры аппарата имеют заводские установки. Для удобства пользователя после первого использования при включении аппарата они автоматически будут устанавливаться в состояние, соответствующее установкам последнего сеанса лечения.



Меню выбора таймера



Меню установки таймера (времени сеанса лечения)



Меню выбора интенсивности УЗ



Меню установки значения интенсивности УЗ



Меню выбора длительности УЗ



Меню установки значения длительности УЗ в импульсном режиме и установки постоянного режима работы УЗ



Меню выбора лечебной программы

Меню установки вида лечебной программы



Меню контроля УЗ



Меню сеанса лечения. Работает таймер обратного отсчёта, ЛИ и УЗ включены.

Рис. 3 Меню аппарата

7.6 Перед лечебным сеансом рекомендуется произвести контроль интенсивности УЗ излучения.

7.6.1 Контроль интенсивности УЗ производится следующим образом;

- нажимая на клавишу 2 или 3 выберите меню «КОНТРОЛЬ УЗ»;
- произведите запуск режима контроля мощности УЗ нажатием на кнопку 5;
- переверните аппарат излучающей поверхностью вверх и нанесите несколько капель на металлическую поверхность пьезокерамического излучателя.

Водяной пузырь должен активно кипеть. Данный вид контроля является визуальным.

Через 10 секунд, или при повторном нажатии на кнопку 5 аппарат выйдет из режима контроля интенсивности УЗ.

Внимание! Аппарат имеет функцию контроля контакта с телом пациента при работе УЗ излучателя (см. п. 8.5). Это предохраняет его от перегрева и преждевременного выхода из строя пьезокерамического излучателя. Однако в процессе сеанса лечения визуальный контроль интенсивности УЗ невозможен, так как при нарушении контакта с телом пациента мощность УЗ автоматически снижается до безопасного уровня.

7.7 Если интенсивность УЗ излучения в норме, то аппарат работоспособен и готов к работе. Для выключения аппарата отключите сетевой адаптер от сети.

Внимание! При отключении сетевого адаптера от сети не прилагайте к проводу растягивающих усилий! Во избежание нарушения работоспособности аппарата категорически запрещается использование других сетевых адаптеров!

8. Порядок работы с аппаратом

Внимание! Перед применением аппарата необходимо пройти медицинское обследование для выявления противопоказаний.

8.1 Работа с аппаратом может осуществляться лицами, ознакомившимися с настоящим техническим описанием и руководством по эксплуатации.

8.2 Подготовьте аппарат к работе в соответствии с п.п. 7.1 - 7.7 раздела «Подготовка изделия к работе», установите требуемые параметры лечебных факторов. Параметры лечебных факторов устанавливаются в соответствии с методическими рекомендациями для конкретного заболевания.

8.3 Перед проведением процедуры произведите дезинфекцию наружной поверхности блока излучения. Дезинфекцию проводить 3-х процентным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644-83. Дезинфекцию производить на отключенном от сети аппарате при помощи хорошо отжатого ватного тампона.

8.4 Смазать контактным веществом необходимый участок тела пациента. В качестве контактного вещества использовать гель из комплекта поставки или другие, рекомендованные врачом мази, которые могут использоваться при различных методах фореа.

8.4 Поместите блок излучения аппарата над необходимой зоной или полем в соответствии с методическими рекомендациями по использованию, включите излучение и проведите лечебный сеанс в соответствии с выбранной методикой.

8.5 При проведении сеансов лечения необходимо следить, что бы между излучателем и телом пациента не было прослойки воздуха. Наличие прослойки воздуха даже 0,001 мм отражает УЗ колебания и препятствует их проникновению в тело пациента. Данный аппарат оснащён функцией контроля контакта с телом пациента. При наличии нормального контакта на дисплее отображается знак 

При отсутствии достаточного контакта на дисплее отображается знак  и раздаются короткие звуковые сигналы до тех пор, пока контакт не будет восстановлен.

В этом случае необходимо плотнее прижать пьезокерамический излучатель к обрабатываемому участку, или приостановить сеанс (перейти в режим «ПАУЗА», нажав кнопку 5) и дополнительно смазать обрабатываемый участок контактным веществом.

Внимание! При отсутствии контакта с телом пациента для увеличения надёжности и безопасности аппарата интенсивность УЗ излучения автоматически снижается для предохранения излучателя от перегрева. Лечебный эффект при этом отсутствует.

8.6 По окончании сеанса лечения таймер обнулится и раздастся звуковой сигнал. Сухим тампоном снять мазь с поверхности выходного окна блока излучения и протереть хорошо отжатым тампоном, смоченным в спирте.

9. Техническое обслуживание

9.1 Для обеспечения надежной работы аппарата своевременно проводите проверку технического состояния, пользуясь при этом настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

9.2 При техническом обслуживании соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе «Меры безопасности и сведения об утилизации».

9.3 Технические требования, средства и методы проведения технического обслуживания приведены в таблице 2.

9.4 В случае обнаружения при техническом обслуживании несоответствия аппарата техническим требованиям, указанным в таблице 2, дальнейшая эксплуатация аппарата не допускается, и он подлежит ремонту.

Таблица 2

Вид технического обслуживания	Кем выполняется, периодичность	Содержание работ. Методы и средства проведения проверки технического состояния	Технические требования
Проверка технического состояния аппарата	Лицами, занимающимися эксплуатацией аппарата, ежедневно перед началом работы	1. Исправность изоляции корпуса и прочность фиксации кабеля сетевого адаптера. 2. Контроль внешнего вида. 3. Наличие световой индикации аппарата.	Отсутствие повреждений и трещин в корпусе сетевого адаптера, фиксация кабеля в сетевой вилке. На корпусе не должно быть царапин, пломбы должны быть целыми. При включении должна появиться заставка логотипа производителя, каждое нажатие кнопки должно приводить к соответствующим изменениям, отображаемым на дисплее блока излучения. На дисплее должны соответствующим образом (см. п. 5.4) отображаться знаки контакта УЗ (см. п. 8.5) излучателя с телом пациента.

Периодическое техническое обслуживание аппарата	Лицами, занимающимися эксплуатацией аппарата, один раз в шесть месяцев	4. Наличие звуковой сигнализации аппарата 5. Контроль интенсивности УЗ излучения. Проверьте: 1. Отсутствие внешних повреждений, состояние пломб. 2. Соответствие технических данных и характеристик п.п. 3.2.-3.12; 4.	Должен звучать сигнал при включении аппарата и по окончании сеанса лечения при обнулении таймера: при включении – малой длительности, при окончании – большой. Каждое нажатие на кнопку должно сопровождаться звуковым сигналом. Аппарат должен работать в соответствии с п. 7.6.1. Повреждения должны отсутствовать, пломбы не должны быть нарушены. Технические данные и характеристики должны соответствовать указанным в п.п. 3.2.-3.12; 4.
---	--	---	--

10. Возможные неисправности и способы их устранения

10.1 Перечень возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранения приведены в таблице 3.

Внимание! При обнаружении нарушения изоляции кабеля сетевого адаптера или отсутствии УЗ излучения аппарат для эксплуатации непригоден до устранения указанной неисправности.

Таблица 3

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
После подключения сетевого адаптера к сети не включается дисплей.	Плохой контакт в сетевой розетке.	Проверьте надёжность подключения сетевого адаптера к розетке и к разъёму блока излучения. Если сетевой адаптер вставлен в розетку до упора, а разъёмы сетевого адаптера и блока излучения соединены надёжно, но дисплей не включается, то необходим ремонт, осуществляемый производителем.
При работе с аппаратом не происходит переключения режимов.	Некорректное нажатие на кнопку, либо нарушение нормальной работы аппарата.	После включения аппарата соответствующие кнопки нажимайте чётко, без чрезмерного усилия. Если это не помогает, то необходим ремонт, осуществляемый производителем.
Нажатие на кнопку переключает режимы, но не сопровождается звуковым сигналом.	Неисправность звукового извещателя	Необходим ремонт, осуществляемый производителем.
Аппарат не отключается при обнулении таймера.	Неисправность аппарата	Необходим ремонт, осуществляемый производителем.
При работе УЗ постоянно светится знак отсутствия контакта УЗ излучателя с телом пациента, раздаются звуковые сигналы.	Процедура проводится без контактного геля, между излучателем и телом пациента имеется воздушная прослойка.	Используйте контактный гель или плотнее прижмите УЗ излучатель всей поверхностью к обрабатываемой зоне. Если это не помогает, то необходим ремонт, осуществляемый производителем.
При работе УЗ значок наличия контакта с телом пациента есть, но при визуальном тесте контроля мощности УЗ вода не «кипит».	Неисправность пьезокерамического излучателя	Необходим ремонт, осуществляемый производителем.

11. Текущий ремонт

11.1. Общие положения.

11.1.1. Текущий ремонт производится в случае неисправности аппарата с целью восстановления его работоспособности.

11.1.2. При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего руководства по эксплуатации.

Внимание! Текущий ремонт производится только производителем аппарата или лицензированными предприятиями по ремонту соответствующей медицинской техники.

11.2. Проверка работоспособности аппарата после ремонта.

Произведите проверку работоспособности аппарата в соответствии с п.п. 7.1 - 7.7 настоящего руководства по эксплуатации.

12. Маркировка и пломбирование

12.1. На аппарате должны быть нанесены надписи: название аппарата, заводской номер аппарата и дата выпуска (или их кодировка). Маркировка соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1.

12.2. Клейкие аппликации, нанесенные на корпус аппарата, также выполняют функцию защитных пломб.

13. Правила хранения и транспортировки

13.1. Хранение аппарата производится в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре $+5...+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности не более 89% (при $t=+25^{\circ}\text{C}$), в соответствии с ГОСТ 15150-69, по группе условий хранения 1.

13.2. Транспортирование производится всеми видами закрытого транспорта в упаковке изготовителя. При транспортировании необходимо обеспечить устойчивое положение тары и отсутствие её перемещений в процессе транспортировки. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69 ($-50^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$).

14. Сведения об утилизации

По окончании срока службы, аппараты должны быть утилизированы в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. По классу опасности отходов в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания аппарат относится к классу А (ТБО). Специальных требований к утилизации аппарат не имеет.

15. Гарантии изготовителя

15.1. Производитель гарантирует соответствие АФП «Бином®-ФИЗИО» УЗТ техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

15.2. Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 24 месяца со дня продажи.

15.3. Гарантия на аппарат не распространяется в случаях:


- отсутствия паспорта при предъявлении аппарата на ремонт;
- нарушения защитных пломб (повреждения клейких аппликаций);
- механических повреждений, в том числе возникших при транспортировании;
- использования аппарата с сетевым адаптером, отличного от модели, указанной в таблице 1 и изображённого на рис.4;
- выхода из строя аппарата из-за попадания внутрь него жидкостей или других инородных предметов.

15.4. При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и печати торгующей организации гарантийный срок исчисляется от даты изготовления аппарата.

15.5. По истечении гарантийного срока ремонт аппарата производится за счёт потребителя.

15.6. По вопросам ремонта обращаться в ООО «Бином»:

248000, Россия, г. Калуга, а/я 1038
тел/факс: (4842) 57-37-99, 57-66-09.
E-mail: binom@kaluga.ru
<http://www.binom.kaluga.ru>

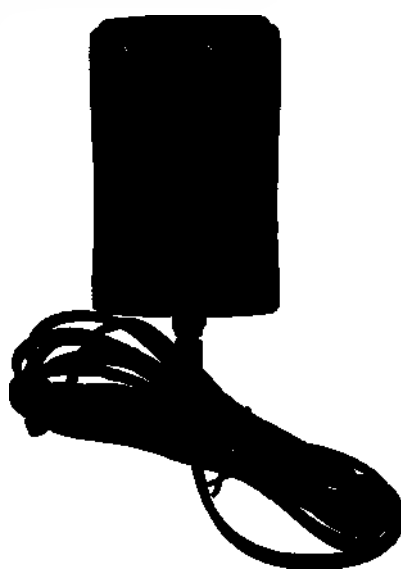

Вид со стороны маркировки



Вид сбоку

Рис. 5 Сетевой адаптер из комплекта поставки

16. Свидетельство о приёмке

16.1. АФП «Бином®-ФИЗИО» УЗТ заводской номер №_____ соответствует техническим характеристикам и признан годным для эксплуатации.

Максимальное значение интенсивности УЗ излучения,
замеренной на ПСИ, Вт/см²

Дата изготовления

Представитель ОТК

"__" _____ 20__ г.

_____/_____/_____
(подпись)
М.П.

17. **УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ.**

Таблица 4.

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия		
Аппарат «Бином®-ФИЗИО» УЗТ предназначается для применения в электромагнитной обстановке, указанной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его применение в указанной обстановке.		
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Указания по электромагнитной обстановке
ГОСТ Р 51318.11 - 2006	Группа 1	Аппарат использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведёт к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования.
ГОСТ Р 51318.11 - 2006	Класс В	Аппарат пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома.
Гармонические составляющие потребляемого тока по ГОСТ 30804.3.2-2013	Класс А	
Колебания напряжения и фликер по МЭК 610003-3	Соответствует	

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость			
Аппарат «Бином [®] -ФИЗИО» УЗТ предназначается для применения в электромагнитной обстановке, указанной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить её применение в указанной обстановке.			
Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Указания по электромагнитной обстановке
Электростатические разряды по МЭК 61000-4-2	± 6 кВ – контактный разряд ± 8 кВ – воздушный разряд	Соответствует Соответствует	Пол в помещении из дерева, бетона или керамической плитки. При полах, покрытых синтетическим материалом, относительная влажность воздуха - не менее 30%.
Наносекундные импульсы по МЭК 61000-4-4	± 2 кВ – для линий электропитания ± 1 кВ – для линий ввода/вывода	Испытания не проводились. Допускается снижение критериев качества функционирования в соответствии с п. 5.2.2.9 b) по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014	Качество электрической энергии в сети следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки. Рекомендуется использовать сетевой фильтр с защитой от наносекундных импульсных помех.

Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	± 1 кВ – при подаче помехи по схеме «провод-провод»	Соответствует	Качество электрической энергии в сети следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки.
	± 2 кВ – при подаче помехи по схеме «провод-земля»	Соответствует	
Провалы напряжения, кратковременные прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11	Провал напряжения более 95% U_n в течение 0,5 периода	Соответствует	Качество электрической энергии в сети следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки.
	Провал напряжения 60% U_n в течение 5 периодов	Соответствует	
	Провал напряжения 30% U_n в течение 25 периодов	Соответствует	
	Провал напряжения более 95% U_n в течение 5 сек	Соответствует	
Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) по МЭК 61000-4-8	3 А/м	Соответствует	Уровни магнитного поля следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки
U_n - уровень напряжения в электрической сети до момента подачи испытательного воздействия.			

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт АФП «Бином®-ФИЗИО» УЗТ

талон изъят « ____ » ____ 20 ____ г.

Ответственное лицо ремонтного предприятия

(подпись, фамилия)

(линия отреза)

ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт аппарата физиотерапевтического
портативного
«Бином®-ФИЗИО» УЗТ

Заводской номер _____

Изготовлен « ____ » ____ 20 ____ г.

Продан организацией _____
(наименование)

Дата продажи « ____ » ____ 20 ____ г.

Штамп и подпись продавца _____

Владелец: адрес, телефон _____

Содержание работ по устранению неисправностей

Ответственное лицо _____

« ____ » ____ 20 ____ г.

Штамп

(подпись)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт АФП «Бином®-ФИЗИО» УЗТ
талон изъят « » 20 г.

Ответственное лицо ремонтного предприятия
(подпись, фамилия)

(линия отреза)

ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт аппарата физиотерапевтического
портативного
«Бином®-ФИЗИО» УЗТ

Заводской номер _____

Изготовлен « » 20 г.

Продан организацией _____

(наименование)

Дата продажи « » 20 г.

Штамп и подпись продавца _____

Владелец: адрес, телефон _____

Содержание работ по устранению неисправностей

Ответственное лицо _____

« » 20 г.

Штамп

(подпись)

Корешок талона №3
на гарантийный ремонт АФП «Бином®-ФИЗИО» УЗТ

талон изъят « ____ » ____ 20 ____ г.

Ответственное лицо ремонтного предприятия

(подпись, фамилия)

(линия отреза)

ТАЛОН №3
на гарантийный ремонт аппарата физиотерапевтического
портативного
«Бином®-ФИЗИО» УЗТ

Заводской номер _____

Изготовлен « ____ » ____ 20 ____ г.

Продан организацией _____

(наименование)

Дата продажи « ____ » ____ 20 ____ г.

Штамп и подпись продавца _____

Владелец: адрес, телефон _____

Содержание работ по устранению неисправностей


Ответственное лицо _____

« ____ » ____ 20 ____ г.

Штамп

(подпись)

печатью лист
ООО «БИНОМ»
Директор Чернов А.В.

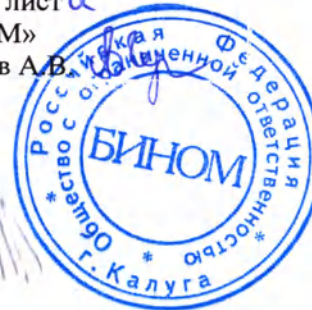



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Бином»
А.В. Чернов

«30» августа 2017 г.



Аппарат физиотерапевтический портативный
для лазерно-ультразвуковой терапии
«БИНОМ®-ФИЗИО» ЛУЗТ

ПАСПОРТ
и
инструкция по эксплуатации

АТУД.941536.012-01 ПС

Калуга

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	7
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА.....	7
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	9
7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.....	11
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ.....	14
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	15
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	17
11. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	18
12. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	18
13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	18
14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	18
15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	19
16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	20
17. УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ.....	21
ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ.	

1. Общие указания

Вы приобрели аппарат физиотерапевтический портативный (АФП) для лазерно-ультразвуковой терапии «**БИНОМ®-ФИЗИО**» ЛУЗТ (далее - аппарат). Перед работой с аппаратом внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, методиками лечения, показаниями и противопоказаниями, а также с указаниями по технике безопасности. Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные производителем основные параметры и технические характеристики, позволяет ознакомиться с устройством аппарата и порядком работы с ним, а также служит руководством при техническом обслуживании, ремонте, транспортировании и хранении.

Аппарат имеет патент на полезную модель: патент № 105832, приоритет от 24.02.11 г.

2. Назначение изделия

2.1 **АФП «БИНОМ®-ФИЗИО» ЛУЗТ** выпускается по ТУ 26.60.13-008-20734945-2017.

Декларация о соответствии № _____, зарегистрирована органом _____

Регистрационное удостоверение № _____
выдано _____

2.2 Лечебными факторами **АФП «БИНОМ®-ФИЗИО» ЛУЗТ** являются импульсное инфракрасное лазерное излучение (ЛИ) и ультразвуковое излучение (УЗ) от источников, расположенных в матричном блоке излучения.

2.3 Аппарат предназначен для лечения больных с различной патологией путем отдельного комбинированного или сочетанного воздействия импульсным ЛИ ближнего инфракрасного (ИК) диапазона и (или) высокочастотным УЗ излучением постоянного или импульсного действия. Аппарат успешно применяется при лечении заболеваний, указанных в методических рекомендациях по применению, входящих в комплект поставки.

Основные показания к применению аппарата:

- болевые синдромы нейрогенного и органического характера
- нарушение микроциркуляции
- нарушение иммунного статуса
- аллергические заболевания
- заболевания воспалительного характера
- стимуляция репаративных регенераторных процессов
- необходимость стимуляции систем регуляции гомеостаза
- неврологические проявления остеохондроза позвоночника
- последствия заболеваний и травм периферической нервной системы
- травмы позвоночника
- рассеянный склероз
- заболевания и последствия травм суставов, мышц, сухожилий
- заболевания органов дыхания
- заболевания органов пищеварения
- заболевания кожи
- заболевания ЛОР-органов
- стоматологические заболевания
- хирургические заболевания (келоидные рубцы, спаечная болезнь и др.)

Основные противопоказания к применению аппарата:

- высокая температура
- сердечно-сосудистые заболевания в фазе декомпенсации
- артериальная гипертензия III ст.
- артериальная гипотония
- ишемическая болезнь сердца с частыми приступами стенокардии и нарушением сердечного ритма
- наличие кардиостимулятора
- нарушение мозгового кровообращения II степени
- легочная и сердечно-легочная недостаточность в фазе декомпенсации
- злокачественные новообразования
- доброкачественные новообразования с склонностью к росту
- заболевания нервной системы с резко повышенной возбудимостью
- заболевания кровеносной системы
- повышенная кровоточивость
- печеночная и почечная недостаточность в стадии декомпенсации
- генерализованный туберкулёз
- сахарный диабет
- психические заболевания
- повышенная чувствительность к светолечению (фотодерматит, порфириновая болезнь, дискоидная и системная красная волчанка)
- осложненная язвенная болезнь
- инфекционные заболевания
- остеопороз
- тромбоз
- тромбозы
- воздействие в области щитовидной железы (местное)
- гипертиреоз
- беременность

Применение изделия в соответствии с методическими рекомендациями и настоящим паспортом по эксплуатации безопасно для потребителя.

2.4 Аппарат предназначен для работы от электрической сети для применения в клиниках, лечебно-диагностических центрах, поликлиниках, сельских больницах, санитарных частях, госпиталях, амбулаториях, санаториях, профилакториях.

2.5 Лазерная и ультразвуковая виды терапии применяются как самостоятельные виды лечения, так и в сочетании с медикаментозной терапией, а также могут быть использованы для методик фонофореза, лазерофореза и фонолазерофореза. Методы и способы лечения указаны в «Методических указаниях по применению АФП «БИНOM®-ФИЗИО» ЛУЗТ».

2.6 Аппарат предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре +10...+35°C и атмосферном давлении 630...800 мм рт.ст. при относительной влажности не более 80%.

2.7 Производитель оставляет за собой право дальнейшего совершенствования аппарата.

3. Технические данные и характеристики

3.1 Аппарат состоит из блока излучения с органами управления и сетевого адаптера (далее – адаптер), соединяемых между собой через разъём блока излучения. Адаптер служит для работы аппарата от сети переменного тока. Блок излучения генерирует импульсное ЛИ ближней ИК области спектра и (или) высокочастотное УЗ излучение непрерывного или импульсного действия.

3.2 Питание аппарата от сети переменного тока:

- частота, Гц 50
- напряжение, В 198 ± 242

3.2.1 Потребляемая мощность не более, ВА..... 18

3.3 Аппарат обеспечивает непрерывный режим работы в течение 8 часов с перерывом на 10 ± 2 мин. после каждых 20 мин. работы.

3.4 Площадь выходной апертуры аппарата:

- в части лазерного излучения, не менее, см² 20
- в части УЗ излучателя, не более, см² 4

3.5 Лазерное излучение:

- тип излучателя..... лазерная матрица
- длина волны, мкм*
- режим работы..... импульсный
- частота следования импульсов, Гц..... 80; 150; 300; 600; 1500; 3000; 5000
- точность установки частоты, не хуже, %..... ± 5
- длительность импульсов лазерного излучения, нс..... 50 – 120
- максимальная импульсная мощность ЛИ, регулируемая с шагом 5 Вт..... 0 – 60
- точность установки мощности ЛИ, не хуже, %..... ± 30

3.6 УЗ излучение:

- частота излучения, МГц*
- режим работы..... импульсный или постоянный
- частота модуляции в импульсном режиме работы, Гц..... 50
- длительность пачек импульсов, мс..... 2; 4; 6 и далее до 18 с шагом 2
- глубина модуляции, %..... 100
- интенсивность УЗ, регулируемая, Вт/см² 0; 0,05; 0,1 и далее до 1 с шагом 0,1
- точность установки интенсивности УЗ излучения, не хуже, %..... ± 30

***Примечание:** Значения заносятся наладчиком на этапе приёмо-сдаточных испытаний при паспортизации каждого изделия

3.7 Время сеанса лечения (по таймеру), регулируемое, мин..... 1 - 20

Шаг таймера обратного отсчёта, с..... 1

Точность установки таймера, не хуже, %..... ± 5

3.8 Аппарат имеет встроенные лечебные программы.

Количество встроенных лечебных программ, не менее..... 4

3.9 Габаритные размеры в индивидуальной упаковке, не более, мм..... 230×180×80

3.10 Масса:

- блока излучения, не более, кг 0,25
- в полном комплекте поставки, не более, кг 1

3.11 Аппарат обеспечивает цифровую и (или) световую индикацию:

- включения аппарата в сеть;
- установки уровня мощности ЛИ и интенсивности УЗ;
- режима работы УЗ;
- времени сеанса лечения;
- включения ЛИ и УЗ;
- контроля контакта УЗ излучателя с телом пациента;
- контроля мощности ЛИ по отражённому излучению;
- визуальный тест мощности УЗ излучения;

3.12 Аппарат обеспечивает звуковую сигнализацию:

- включения аппарата,
- перебора значений параметров и режимов работы;
- начала и окончания сеанса лечения;
- отсутствия контакта УЗ излучателя с телом пациента;
- каждые 60 секунд для работы по лечебным полям.

3.13 Аппарат имеет функцию памяти параметров последнего лечебного сеанса.

3.14 По общим требованиям безопасности аппарат соответствует ГОСТ Р МЭК 60601-1 и выполнен по классу II с рабочей частью типа BF.

3.15 По требованиям лазерной безопасности аппарат соответствует ГОСТ ИЕС 60825-1 и по лазерной опасности относится к классу 1M.

3.16 По требованиям безопасности в части УЗ аппарат соответствует ГОСТ 25052, ГОСТ 25053 и ГОСТ Р 50267.5.

3.17 Средняя наработка на отказ не менее, час 2000

3.18 Средний срок службы, лет 5

4. Комплектность

Комплект поставки аппарата должен соответствовать табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество (шт.)
1.	Аппарат физиотерапевтический портативный «БИНОМ®-ФИЗИО» ЛУЗТ	ТУ 26.60.13-008-0734945-2017 АТУД.941536.012-01	1
2.	Футляр или Чехол	АТУД.130529.001 АТУД.130528.002	1*
3.	Сетевой адаптер	IB12-1500S, ROBITON®, Россия	1
	Эксплуатационная документация		
4.	Паспорт и руководство по эксплуатации «БИНОМ®-ФИЗИО» ЛУЗТ	АТУД.941536.012-01 ПС	1
5.	Методические указания по применению аппарата в медицинской практике	«Методические указания по применению АФП «БИНОМ®-ФИЗИО» ЛУЗТ»	1

Примечание:

* включение в комплект поставки определяется потребителем.

Также по желанию потребителя в комплект поставки могут быть включены очки защитные противолазерные ЗН22-72-СЗС-22 (ПУ № ФСР 2011/12523 от 12.12.2011).

5. Устройство и принцип работы аппарата

5.1 АФП «БИНОМ®-ФИЗИО» ЛУЗТ - компактный физиотерапевтический аппарат, выполненный в виде блока излучения, содержащего пьезокерамический излучатель и матрицу лазерных диодов для генерации УЗ и ЛИ, соответственно, работающего от сетевого адаптера.

5.2 Аппарат состоит (см. рис. 1) из блока излучения 1 и сетевого адаптера 2, подключаемого непосредственно к розетке промышленной сети 220В. Лечебными факторами аппарата является сочетанное или раздельное импульсное ЛИ ближнего инфракрасного спектра излучения от матрицы лазерных диодов, расположенных в выходном окне 3 блока излучения на плоскости площадью 20 см² и УЗ излучение от пьезокерамического УЗ излучателя 4 площадью не более 4 см². Лазерные диоды закрыты защитным ИК прозрачным фильтром, в центре которого расположен пьезокерамический УЗ излучатель. Гнездо 5 служит для подключения блока излучения к сетевому адаптеру. Корпуса блоков излучения и сетевого адаптера изготовлены из ударопрочного нетоксичного ABS. Блок излучения содержит также знак лазерной опасности 6 и шильдик 7, необходимые, соответственно, для информирования потребителя о потенциальной опасности и выходных данных изделия.

5.3 На верхней части корпуса расположена лицевая панель аппарата (см. рис. 2), содержащая:

- дисплей 1, отображающий режимы и параметры работы аппарата;
- кнопки 2 «<» и 3 «>» выбора параметра и установки его значения;
- кнопку 4 «ОК» выбора фактора и фиксации установленного значения параметра;
- кнопку 5 «▶/||» включения сеанса лечения «ПУСК», перехода в режим ожидания «ПАУЗА», а также преждевременного выхода из сеанса лечения «СТОП»;

5.4 В аппарате предусмотрен контроль контакта с телом пациента при работе УЗ (см. п. 8.5), контроль мощности ЛИ по отражённому излучению (см. п. 7.6.1), а также визуальный тест мощности УЗ излучения (см. п. 7.6.2). Признаком включения (состояния, при котором значение мощности отлично от нуля) ЛИ или УЗ является отображение соответствующего мнемонического знака на дисплее в режиме излучения (сеанса лечения). При этом на дисплее в меню работы таймера обратного отсчёта, соответствующего оставшемуся времени сеанса лечения, могут отображаться знаки, которые обозначают:

 - ЛИ включено, есть отражённый сигнал (при направлении излучения на лист белой бумаги);

 - ЛИ включено, нет отражённого сигнала (при направлении излучения в «пустое пространство»);

 - УЗ излучение включено, контакт с телом пациента в норме;

 - УЗ включено, нет контакта с телом пациента.

5.5 По истечении установленного значения времени сеанса лечения (меню «ТАЙМЕР») аппарат автоматически прекращает работу и переходит в режим ожидания следующего сеанса лечения. Конец режима излучения сопровождается продолжительным звуковым сигналом.

5.6 Кнопка 4 «ОК» выполняет функции:

- Выбора лечебного фактора (или меню в соответствии с рис. 3) и фиксации установленного значения параметра (или лечебной программы);
- «СТОП»: преждевременный выход из сеанса лечения со сбросом времени таймера обратного отсчёта. Для осуществления этой функции необходимо длительное нажатие (около 1 секунды) кнопки 4 «ОК».

5.7 Кнопка 5 выполняет функции:

- «ПУСК»: начало сеанса лечения, сопровождаемое запуском излучения с предварительно установленными параметрами лечебных факторов и таймера обратного отсчёта времени сеанса лечения.
- «ПАУЗА»: временный останов сеанса лечения без сброса времени таймера обратного отсчёта. Режим отображается соответствующим информационным сообщением на дисплее аппарата при нажатии кнопки в режиме сеанса лечения. Для продолжения сеанса лечения повторно нажмите кнопку 5.
- «СТОП»: преждевременный выход из сеанса лечения со сбросом времени таймера обратного отсчёта. Для осуществления этой функции необходимо длительное нажатие (около 1 секунды) кнопки 5.

6. Меры безопасности

6.1 Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц через сетевой адаптер. Перед каждым включением сетевого адаптера в сеть проверяйте целостность изоляции.

6.2 Не допускайте попадания влаги внутрь аппарата при его дезинфекции и санитарной обработке.

Внимание! Блок излучения аппарата частично герметичен. Аппарат предназначен только для контактной и субкавальной методик.

6.3 Запрещается устранять неисправности обслуживающему персоналу медучреждений или самостоятельно. При обнаружении неисправности аппарат сдать в ремонт.

6.4 После транспортирования в условиях отрицательных температур аппарат должен быть выдержан при нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

Внимание! Техническое обслуживание аппарата и ремонтные работы должны выполняться только после его отключения от электрической сети.

6.5 По общим требованиям безопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1, класс защиты II, рабочая часть типа BF.

6.6 По лазерной безопасности аппарат соответствует классу 1М по ГОСТ IEC 60825-1.

Внимание! Невидимое лазерное излучение!


Не смотрите в пучок и не проводите непосредственных наблюдений с помощью оптических приборов (увеличительное стекло). Лазерная аппаратура класса 1М.

При включении ЛИ, невидимого невооружённым глазом, на дисплее аппарата отображается соответствующий значок (см. п. 5.4). При наличии такого знака запрещается смотреть в выходное окно блока излучения.

6.7 Аппараты должны эксплуатироваться при соблюдении правил безопасности согласно ГОСТ IEC 60825-1 и «Санитарным нормам и правилам устройства и эксплуатации лазеров» №5804. Необходимо принять меры по исключению попадания прямого или зеркально-отраженного излучения на работающий персонал и пациента. В обоснованных случаях: при воздействии на лицо и околоушные зоны, т.е. когда прямое излучение может попасть в глаза, необходимо применение защитных противолазерных очков со степенью защиты не менее L1 в соответствии с ГОСТ Р 12.4.254-2010. По желанию потребителя в комплект поставки аппарата могут быть включены очки ЗН22-72-СЗС-22 (ПУ № ФСР 2011/12523 от 12.12.2011).


6.8 По требованиям безопасности в части УЗ аппарат соответствует ГОСТ 25052, ГОСТ 25053 и ГОСТ Р 50267.5.

6.9 По электромагнитной совместимости аппарат соответствует ГОСТ Р МЭК 60601-1-2. Аппарат относится к медицинским изделиям, для которых критерии соответствия требованиям помехоустойчивости допускают любое ухудшений качества функционирования и испытаниям на устойчивость к электромагнитным помехам не подвергается.

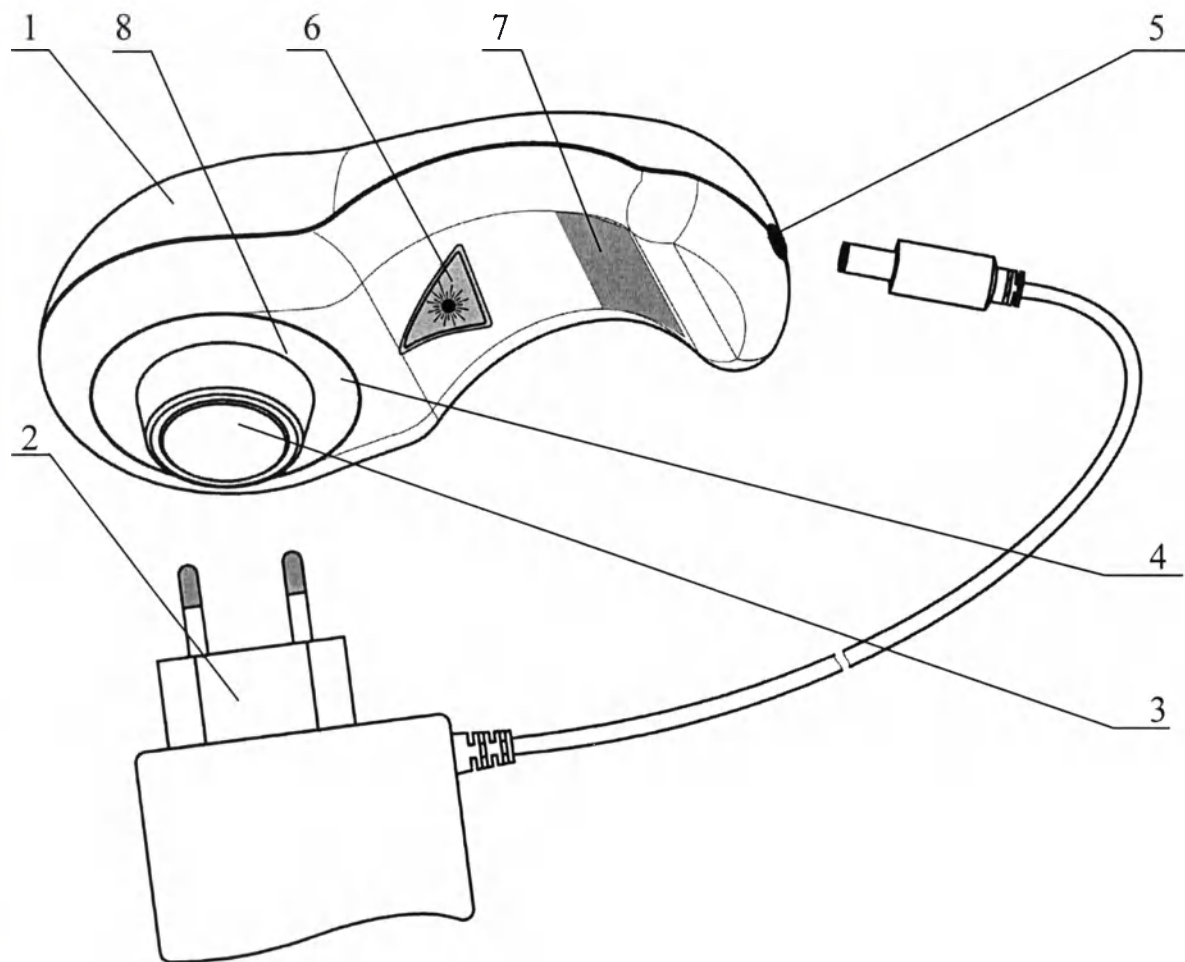

- 1 – корпус блока излучения;
- 2 – сетевой адаптер;
- 3 – пьезокерамический УЗ излучатель;
- 4 – выходное окно с установленными лазерными диодами за защитным фильтром;
- 5 – гнездо для подключения сетевого адаптера;
- 6 – знак лазерной опасности;
- 8 – линия максимально допустимого погружения в воду;

7 – шильдик;

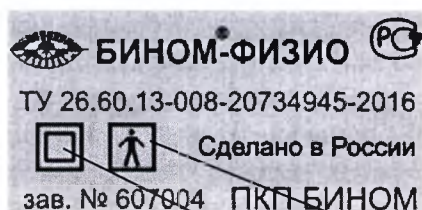

Изделие с рабочей частью типа BF

Изделие с двойной изоляцией, не требующего заземления

Первая цифра заводского номера – год выпуска

Две вторых цифры заводского номера – месяц года выпуска

Три последних цифры заводского номера – номер изделия в месяце выпуска

Рис. 1 Внешний вид аппарата и содержание информации об изделии



- 1 – дисплей блока излучения;
- 2 – кнопка выбора параметра и уменьшения его значения;
- 3 – кнопка выбора параметра и увеличения его значения;
- 4 – кнопка выбора фактора и фиксации установленного значения параметра;
- 5 – кнопка включения, временного останова и преждевременного выхода из сеанса лечения;

Рис. 2 Лицевая панель аппарата с органами управления
(дисплей – в состоянии меню установки времени таймера)

7. Подготовка изделия к работе

7.1 Подготовка аппарата к эксплуатации начинается с распаковки и проверки комплектности аппарата.


7.2 Перед проведением курса физиотерапии, терапии внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и методическим пособием по использованию аппарата в медицинской практике, входящим в комплект поставки, и выберите необходимую методику лечения.

7.4 Проверьте целостность изоляции на кабеле сетевого адаптера. Подключите кабель сетевого адаптера при помощи разъёма к блоку излучения и вставьте сетевой адаптер в розетку промышленной сети 220В/50Гц. При этом на дисплее блока излучения включится заставка (торговый знак завода-производителя), отображающая подключение аппарата к сети. Через 2-3 секунды заставка погаснет и на дисплее отобразится меню таймера аппарата.

Заставка также появляется, если в течение 30 секунд не производится никаких манипуляций с кнопками (кроме режима лечебного сеанса). При первом нажатии на любую из кнопок аппарат переходит в режим, соответствующий состоянию до появления заставки.

7.5 При помощи кнопок 2 - 4 произведите нужные установки таймера и лечебных факторов, последовательно выбирая их из меню, которые отображены на рис. 3. Параметры аппарата имеют заводские установки. Для удобства пользователя после первого использования при включении аппарата они автоматически будут устанавливаться в состояние, соответствующее установкам последнего сеанса лечения.

Внимание! Аппарат позволяет производить как сочетанное, так и раздельное воздействия двумя лечебными факторами. Однако невозможно установить оба лечебных фактора в нулевые значения: если мощность одного лечебного фактора установлена в нулевое значение, то при попытке установки мощности второго лечебного фактора в нулевое значение, предыдущий лечебный фактор автоматически установится в минимально возможное для него значение.

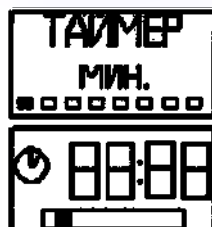

Меню выбора таймера



Меню выбора интенсивности УЗ



Меню установки значения интенсивности УЗ



Меню выбора длительности УЗ



Меню установки значения длительности УЗ в импульсном режиме и установки постоянного режима работы УЗ



Меню выбора мощности ЛИ



Меню установки значения импульсной мощности ЛИ



Меню выбора установки частоты ЛИ





Меню установки значения частоты ЛИ



Меню выбора лечебной программы

Меню установки вида лечебной программы

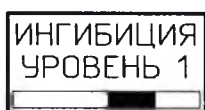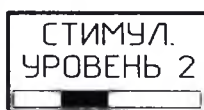

Меню контроля УЗ



Меню контроля ЛИ



Меню сеанса лечения. Работает таймер обратного отсчёта, ЛИ и УЗ включены, контакт УЗ излучателя с телом пациента и мощность ЛИ в норме.

Рис. 3 Меню аппарата

7.6 Перед лечебным сеансом рекомендуется произвести контроль мощности излучения лечебных факторов.

7.6.1 Контроль ЛИ производится следующим образом (см. рис. 2):

- нажимая на кнопку **2** или **3** выберите меню «КОНТРОЛЬ ЛИ»;
- установите выходное окно блока излучения на белый лист бумаги;
- произведите запуск излучения кнопкой ;

На дисплее должен появиться знак  , что говорит о нормальной мощности ЛИ. Если на дисплее отображается знак  , то это говорит о низкой мощности ЛИ. При отнесении от отражающей поверхности расходящиеся лучи пропадут – это нормально. Через 10 секунд, или при повторном нажатии на кнопку **5** аппарат выйдет из режима контроля мощности ЛИ.

Внимание! В процессе сеанса лечения может отображаться тот или иной знак работы ЛИ. Это нормально и не является неисправностью, так как связано лишь с возможным низким значением коэффициента отражения обрабатываемой поверхности.

7.6.2 Контроль интенсивности УЗ производится следующим образом;

- нажимая на клавишу **2** или **3** выберите меню «КОНТРОЛЬ УЗ»;
- произведите запуск режима контроля мощности УЗ нажатием на кнопку **5**;
- переверните аппарат излучающей поверхностью вверх и нанесите несколько капель на металлическую поверхность пьезокерамического излучателя.

Водяной пузырь должен активно кипеть. Данный вид контроля является визуальным.

Через 10 секунд, или при повторном нажатии на кнопку **5** аппарат выйдет из режима контроля интенсивности УЗ.

Внимание! Аппарат имеет функцию контроля контакта с телом пациента при работе УЗ излучателя (см. п. 8.5). Это предохраняет его от перегрева и преждевременного выхода из строя пьезокерамического излучателя. Однако в процессе сеанса лечения визуальный контроль интенсивности УЗ невозможен, так как при нарушении контакта с телом пациента мощность УЗ автоматически снижается до безопасного уровня.

7.7 Если мощность излучения ЛИ и интенсивность УЗ в норме, то аппарат работоспособен и готов к работе. Для выключения аппарата отключите сетевой адаптер от сети.

Внимание! При отключении сетевого адаптера от сети не прилагайте к проводу растягивающих усилий! Во избежание нарушения работоспособности аппарата категорически запрещается использование других сетевых адаптеров!

7.8 По дополнительной просьбе Заказчика аппарат может быть укомплектован кронштейном с держателем блока излучения (рис. 4), удобного при использовании методик лазерной терапии.

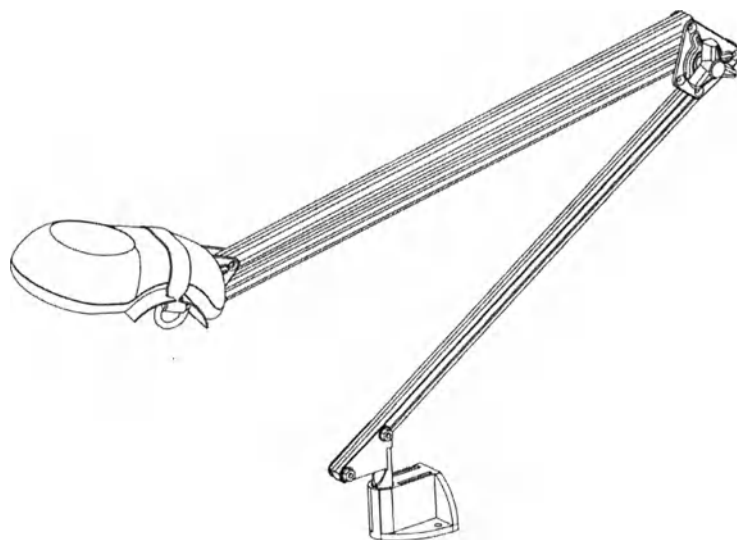


Рис. 4 Держатель блока излучения АЛУЗТ

8. Порядок работы с аппаратом

Внимание! Перед применением аппарата необходимо пройти медицинское обследование для выявления противопоказаний.

8.1 Работа с аппаратом может осуществляться лицами, ознакомившимися с настоящим техническим описанием и руководством по эксплуатации.

8.2 Подготовьте аппарат к работе в соответствии с п.п. 7.1 - 7.7 раздела «Подготовка изделия к работе», установите требуемые параметры лечебных факторов. Параметры лечебных факторов устанавливаются в соответствии с методическими рекомендациями для конкретного заболевания.

8.3 Перед проведением процедуры произведите дезинфекцию наружной поверхности блока излучения. Дезинфекцию проводить 3-х процентным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644-83. Дезинфекцию производить на отключенном от сети аппарате при помощи хорошо отжатого ватного тампона.

8.4 При использовании в качестве одного из лечебных факторов УЗ или при сочетанном воздействии ЛИ и УЗ излучения смазать контактным веществом необходимый участок тела пациента. В качестве контактного вещества использовать рекомендованные врачом мази, которые могут использоваться при различных методах фореа.

8.4 Поместите блок излучения аппарата над необходимой зоной или полем в соответствии с методическими рекомендациями по использованию, включите излучение и проведите лечебный сеанс в соответствии с выбранной методикой.

8.5 При проведении сеансов лечения с использованием УЗ в качестве одного из лечебных факторов необходимо следить, что бы между излучателем и телом пациента не было прослойки воздуха. Наличие прослойки воздуха даже 0,001 мм отражает УЗ колебания и препятствует их проникновению в тело пациента. Данный аппарат оснащён функцией контроля контакта с телом пациента.

При наличии такого контакта на дисплее отображается знак .

При отсутствии достаточного контакта на дисплее отображается знак  и раздаются короткие звуковые сигналы до тех пор, пока контакт не будет восстановлен.

В этом случае необходимо плотнее прижать пьезокерамический излучатель к обрабатываемому участку, или приостановить сеанс (перейти в режим «ПАУЗА», нажав кнопку 5) и дополнительно смазать обрабатываемый участок контактным веществом. Для продолжения сеанса лечения повторно нажмите кнопку 5.

Внимание! При отсутствии контакта с телом пациента для увеличения надёжности и безопасности аппарата интенсивность УЗ излучения автоматически снижается для предохранения излучателя от перегрева. Лечебный эффект при этом отсутствует.

8.6 По окончании сеанса лечения таймер обнулится и раздастся звуковой сигнал. Сухим тампоном снять мазь с поверхности выходного окна блока излучения и протереть хорошо отжатым тампоном, смоченным в спирте.

9. Техническое обслуживание

9.1 Для обеспечения надежной работы аппарата своевременно проводите проверку технического состояния, пользуясь при этом настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

9.2 При техническом обслуживании соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе «Меры безопасности и сведения об утилизации».

9.3 Технические требования, средства и методы проведения технического обслуживания приведены в таблице 2.

9.4 В случае обнаружения при техническом обслуживании несоответствия аппарата техническим требованиям, указанным в таблице 2, дальнейшая эксплуатация аппарата не допускается, и он подлежит ремонту.

Таблица 2

Вид технического обслуживания	Кем выполняется, периодичность	Содержание работ. Методы и средства проведения проверки технического состояния	Технические требования
Проверка технического состояния аппарата	Лицами, занимающимися эксплуатацией аппарата, ежедневно перед началом работы	1. Исправность изоляции корпуса и прочность фиксации кабеля сетевого адаптера. 2. Контроль внешнего вида. 3. Наличие световой индикации аппарата.	Отсутствие повреждений и трещин в корпусе сетевого адаптера, фиксация кабеля в сетевой вилке. На корпусе не должно быть царапин, пломбы должны быть целыми. При включении должна появиться заставка логотипа производителя, каждое нажатие кнопки должно приводить к соответствующим изменениям, отображаемым на дисплее блока излучения. На дисплее должны соответствующим образом (см. п. 5.4) отображаться знаки контакта УЗ (см. п. 8.5) излучателя с телом пациента и отражения ЛИ от белой поверхности.

Периодическое техническое обслуживание аппарата	Лицами, занимающимися эксплуатацией аппарата, один раз в шесть месяцев	4. Наличие звуковой сигнализации аппарата	Должен звучать сигнал при включении аппарата и по окончании сеанса лечения при обнулении таймера: при включении – малой длительности, при окончании – большой. Каждое нажатие на кнопку должно сопровождаться звуковым сигналом.
		5. Контроль мощности ЛИ.	Аппарат должен работать в соответствии с п. 7.6.1.
		6. Контроль интенсивности УЗ излучения.	Аппарат должен работать в соответствии с п. 7.6.2.
		Проверьте: 1. Отсутствие внешних повреждений, состояние пломб. 2. Соответствие технических данных и характеристик п.п. 3.2.-3.13; 4.	Повреждения должны отсутствовать, пломбы не должны быть нарушены. Технические данные и характеристики должны соответствовать указанным в п.п. 3.2.-3.13; 4.

10. Возможные неисправности и способы их устранения

10.1 Перечень возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранения приведены в таблице 3.

Внимание! При обнаружении нарушения изоляции кабеля сетевого адаптера, а также при отсутствии ультразвукового и лазерного излучения аппарат для эксплуатации непригоден до устранения указанных неисправностей.

Таблица 3

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
После подключения сетевого адаптера к сети не включается дисплей.	Плохой контакт в сетевой розетке.	Проверьте надёжность подключения сетевого адаптера к розетке и к разъёму блока излучения. Если сетевой адаптер вставлен в розетку до упора, а разъёмы сетевого адаптера и блока излучения соединены надёжно, но дисплей не включается, то необходим ремонт, осуществляемый производителем.
При работе с аппаратом не происходит переключения режимов.	Некорректное нажатие на кнопку, либо нарушение нормальной работы аппарата.	После включения аппарата соответствующие кнопки нажимайте чётко, без чрезмерного усилия. Если это не помогает, то необходим ремонт, осуществляемый производителем.
Нажатие на кнопку переключает режимы, но не сопровождается звуковым сигналом.	Неисправность звукового извещателя	Необходим ремонт, осуществляемый производителем.
Аппарат не отключается при обнулении таймера.	Неисправность аппарата	Необходим ремонт, осуществляемый производителем.
При проверке наличия лазерного излучения по отражённому лучу не изменяется вид соответствующего знака на дисплее блока излучения с  на  .	Отсутствует лазерное излучения, либо лазерное излучение ниже нормы.	Лист, на который направлено излучение, должен быть белого цвета. Поднесите выходное окно излучателя ближе к листу. Белой бумаги, отнесите подальше. Если это не помогает, то необходим ремонт, осуществляемый производителем.
После запуска ЛИ в режиме сеанса лечения постоянно светится знак  .	Загрязнено или поцарапано стекло выходного окна блока излучения.	Протрите окно спиртом. Если это не помогает, то необходим ремонт, осуществляемый производителем.
При работе УЗ постоянно светится знак отсутствия контакта УЗ излучателя с телом пациента.	Процедура проводится без контактного геля, между излучателем и телом пациента имеется воздушная прослойка.	Используйте контактный гель или плотнее прижмите УЗ излучатель всей поверхностью к обрабатываемой зоне. Если это не помогает, то необходим ремонт, осуществляемый производителем.
При работе УЗ значок наличия контакта с телом пациента есть, но при	Неисправность пьезокерамического излучателя.	Необходим ремонт, осуществляемый производителем.

визуальном тесте контроля мощности УЗ вода не «кипит».		
--	--	--

11. Текущий ремонт

11.1. Общие положения.

11.1.1. Текущий ремонт производится в случае неисправности аппарата с целью восстановления его работоспособности.

11.1.2. При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего руководства по эксплуатации.

Внимание! Текущий ремонт производится только производителем аппарата или лицензированными предприятиями по ремонту соответствующей медицинской техники.

11.2. Проверка работоспособности аппарата после ремонта.

Произведите проверку работоспособности аппарата в соответствии с п.п. 7.1 - 7.7 настоящего руководства по эксплуатации.

12. Маркировка и пломбирование

12.1. На аппарате должны быть нанесены надписи: название аппарата, знак лазерной опасности по ГОСТ IEC 60825-1, а также заводской номер аппарата и дата выпуска (или их кодировка). Маркировка соответствует требованиям ГОСТ IEC 60825-1 и ГОСТ Р МЭК 60601-1.

12.2. Клейкие аппликации, нанесенные на корпус аппарата, также выполняют функцию защитных пломб.

13. Правила хранения и транспортировки

13.1. Хранение аппарата производится в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре +5...+40°C, относительной влажности не более 89% (при t=+25°C), в соответствии с ГОСТ 15150-69, по группе условий хранения 1.

13.2. Транспортирование производится всеми видами закрытого транспорта в упаковке изготовителя. При транспортировании необходимо обеспечить устойчивое положение тары и отсутствие её перемещений в процессе транспортировки. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69 (-50°C ÷ +50°C).

14. Сведения об утилизации

По окончании срока службы, аппараты должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. По классу опасности отходов в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания аппарат относится к классу А (ТБО). Специальных требований к утилизации аппарат не имеет.

15. Гарантии изготовителя

15.1. Производитель гарантирует соответствие АФП «Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

15.2. Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 24 месяца со дня продажи.

15.3. Гарантия на аппарат не распространяется в случаях:

- отсутствия паспорта при предъявлении аппарата на ремонт;
- нарушения защитных пломб (повреждения клейких аппликаций);
- механических повреждений, в том числе возникших при транспортировании;
- использования аппарата с сетевым адаптером, отличного от модели, указанной в таблице 1 и изображённого на рис.5;
- выхода из строя аппарата из-за попадания внутрь него жидкостей или других инородных предметов.

15.4. При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и печати торгующей организации гарантийный срок исчисляется от даты изготовления аппарата.

15.5. По истечении гарантийного срока ремонт аппарата производится за счёт потребителя.

15.6. По вопросам ремонта обращаться в ООО «Бином»:

248000, Россия, г. Калуга, а/я 1038

тел/факс: (4842) 57-37-99, 57-66-09.

E-mail: binom@kaluga.ru

<http://www.binom.kaluga.ru>



Вид со стороны маркировки



Вид сбоку

Рис. 5 Сетевой адаптер из комплекта поставки

16. Свидетельство о приёмке

16.1. АФП «Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ заводской номер №_____ соответствует
техническим характеристикам и признан годным для эксплуатации.

Максимальное значение импульсной мощности лазерного излучения,
замеренной на ПСИ, Вт

Максимальное значение интенсивности УЗ излучения,
замеренной на ПСИ, Вт/см²

Дата изготовления

Представитель ОТК

"__" ____ 20__ г.

_____/_____/_____
(подпись)
М.П.

17. **УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ.**

Таблица 4.

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия		
Аппарат «Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ предназначается для применения в электромагнитной обстановке, указанной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его применение в указанной обстановке.		
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Указания по электромагнитной обстановке
ГОСТ Р 51318.11 - 2006	Группа 1	Аппарат использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведёт к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования.
ГОСТ Р 51318.11 - 2006	Класс В	Аппарат пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома.
Гармонические составляющие потребляемого тока по ГОСТ 30804.3.2-2013	Класс А	
Колебания напряжения и фликер по МЭК 610003-3	Соответствует	

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость			
Аппарат «Бином [®] -ФИЗИО» ЛУЗТ предназначается для применения в электромагнитной обстановке, указанной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить её применение в указанной обстановке.			
Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Указания по электромагнитной обстановке
Электростатические разряды по МЭК 61000-4-2	± 6 кВ – контактный разряд ± 8 кВ – воздушный разряд	Соответствует Соответствует	Пол в помещении из дерева, бетона или керамической плитки. При полах, покрытых синтетическим материалом, относительная влажность воздуха - не менее 30%.
Наносекундные импульсы по МЭК 61000-4-4	± 2 кВ – для линий электропитания ± 1 кВ – для линий ввода/вывода	Испытания не проводились. Допускается снижение критериев качества функционирования в соответствии с п. 5.2.2.9 b) по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014	Качество электрической энергии в сети следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больницы обстановки. Рекомендуется использовать сетевой фильтр с защитой от наносекундных импульсных помех.

Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	± 1 кВ – при подаче помехи по схеме «провод-провод»	Соответствует	Качество электрической энергии в сети следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки.
	± 2 кВ – при подаче помехи по схеме «провод-земля»	Соответствует	
Провалы напряжения, кратковременные прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11	Провал напряжения более 95% U_n в течение 0,5 периода	Соответствует	Качество электрической энергии в сети следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки.
	Провал напряжения 60% U_n в течение 5 периодов	Соответствует	
	Провал напряжения 30% U_n в течение 25 периодов	Соответствует	
	Провал напряжения более 95% U_n в течение 5 сек	Соответствует	
Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) по МЭК 61000-4-8	3 А/м	Соответствует	Уровни магнитного поля следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки
У _н - уровень напряжения в электрической сети до момента подачи испытательного воздействия.			

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт АФП «Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ

талон изъят « » 20 г.

Ответственное лицо ремонтного предприятия

(подпись, фамилия)

(линия отреза)

ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт аппарата физиотерапевтического
портативного
«Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ

Заводской номер _____

Изготовлен « » 20 г.

Продан организацией _____
(наименование)

Дата продажи « » 20 г.

Штамп и подпись продавца _____

Владелец: адрес, телефон _____

Содержание работ по устранению неисправностей

Ответственное лицо _____

« » 20 г.

Штамп

(подпись)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт АФП «Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ
талон изъят « » 20 г.

Ответственное лицо ремонтного предприятия
(подпись, фамилия)
(линия отреза)

ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт аппарата физиотерапевтического
портативного
«Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ

Заводской номер _____

Изготовлен « » 20 г.

Продан организацией _____

(наименование)

Дата продажи « » 20 г.

Штамп и подпись продавца _____

Владелец: адрес, телефон _____

Содержание работ по устранению неисправностей

Ответственное лицо _____

« » 20 г.

Штамп

(подпись)

Корешок талона №3
на гарантийный ремонт АФП «Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ»

талон изъят « » 20 г.

Ответственное лицо ремонтного предприятия

(подпись, фамилия)

(линия отреза)

ТАЛОН №3
на гарантийный ремонт аппарата физиотерапевтического
портативного
«Бином®-ФИЗИО» ЛУЗТ

Заводской номер _____

Изготовлен « » 20 г.

Продан организацией _____

(наименование)

Дата продажи « » 20 г.

Штамп и подпись продавца _____

Владелец: адрес, телефон _____

Содержание работ по устранению неисправностей

Ответственное лицо _____

« » 20 г.

Штамп

(подпись)

печатью 26 лист 8
ООО «БИНОМ»
Директор Чернов А.В.

