

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ . ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИКРОСФЕР.

ОПИСАНИЕ. Изделие представляет собой подушку, состоящую из двух наволочек: внешней с вшитым по периметру кантом и пришитой к ней внутренней наволочкой из водонепроницаемой ткани с заклеенными герметичной лентой швами и наполненной натриевоборосиликатными микросферами размером от 15 до 200 мкм.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Наполнитель легко подтекает под все, располагающиеся на нем части тела человека и способен оказывать пассивную ортопедическую поддержку - под шеей автоматически образуется валик, «запоминающий» контур головы шеи и других частей тела. Благодаря же независимому движению микросфер относительно друг друга, подушка принимает индивидуальную для каждого анатомическую форму.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначенна для размещения под голову и шею для снятия нагрузки на позвоночник и улучшения кровообращения. Рекомендуются для профилактики остеохондроза и, связанных с ним головных болей и головокружений. При этом не происходит деформации позвоночника и сдавливание мягких тканей и сосудов. Профилактика патологического развития черепа и позвоночника у младенцев. Сокращаются сроки лечения и реабилитация имеющих заболевания. Используются для профилактики и лечения заболеваний поясничного отдела позвоночника, тяжести и боли в спине, радикулита. Рекомендуются для снижения статической нагрузки в положении "сидя". При размещении под ноги рекомендуется для профилактики заболевания ног: варикозного расширения вен нижних конечностей; хронической сосудистой недостаточности, артрозов и артритов суставов нижних конечностей; боли, спазмов и судорог в мышцах нижних конечностей; отеков ног во время беременности, после длительной и утомительной ходьбы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Перед применением встряхнуть, равномерно разгладить изделие, либо придать необходимую форму. В процессе эксплуатации, при необходимости, возможно просушивание изделия для поддержания нормальной влажности. При использовании подушек для сна рекомендуется применение наволочки. Для большего срока службы изделия — необходимо бережное отношение.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

- разрешена сухая чистка
- разрешена только деликатная стирка с большим количеством воды
- стирать можно в теплой воде (до 40 градусов C)
- гладить запрещается

Генеральный директор
ООО «Альсария плюс»



Л.В. Животова

Л.В. Животова

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Не рвать, не колоть, не подвергать резким нагрузкам для сохранения целостности шва.

ХРАНЕНИЕ. Транспортировку подушек и их хранение допускается производить при температуре от минус 20 до плюс 30 °С

УТИЛИЗАЦИЯ. Утилизация обычным способом в контейнеры для сбора мусора, на свалку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Средний срок службы изделия не менее двух лет.


Генеральный директор
ООО «Альсария плюс»



Л.В.Животова

В пачке прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2/96а листов.

ин. директор

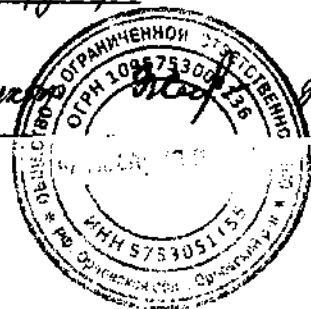

Милосердие Н.В.