

Инструкция по применению

Перчатки хирургические латексные DONA 410 PF

He 164
15.02.2017
 Helm Medical GmbH
Nordkanalstr. 28, 20397 Hamburg
Telefon: 040 / 23 75 - 0

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перчатки хирургические латексные DONA 410 PF

Вариант исполнения изделия:

- Small (6 ½)
- Medium (7 ½)
- Large (8 ½)

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

Для однократного применения в акушерстве и гинекологии для защиты пациента и пользователя от перекрестной контаминации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Любое применение, не соответствующее назначению.

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Этот продукт содержит натуральный латекс, который может вызывать аллергические реакции, включая анафилактические реакции у некоторых людей
- Не рекомендуется длительное ношение перчаток (использовать менее одного часа)
- Не используйте перчатки в случае их повреждения
- Стерильно, если упаковка не повреждена или не вскрыта
- Для однократного применения
- Хранить в сухом месте при температуре между 15-30° С. Избегать воздействия горюче-смазочных материалов, растворителей, озона и прямых солнечных лучей
- Утилизировать с бытовым мусором
- Не стерилизовать повторно
- Не использовать повторно
- Не использовать при повреждении упаковки

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать с бытовым мусором

СРОК ГОДНОСТИ / ХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить при температуре 10-35 °С и влажности не более 80% (хранить в сухом месте). Защищать от солнечных лучей.

Срок годности 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Размеры	Минимальная длина, мм	Номинальная ширина ладони, мм	Минимальная толщина, мм		
				Манжета	Ладонь	Палец
Неопудренные	Small (6 ½)	410	83 ± 5	0,17	0,20	0,20
	Medium (7 ½)		95 ± 5			
	Large (8 ½)		108 ± 6			

МАТЕРИАЛЫ

Основной компонент: Латекс натуральный каучуковый центрифугированный

Прочие компоненты: сера, цинк диэтилдитиокарбамат, цинк диэтилдibuтилкарбамат, гидроксид калия, нитрат кальция, продукт конденсации п-крезола, карбонат кальция

Краситель зеленый 84 Sudafine™

УПАКОВКА

Первичная упаковка: пакет с 1 парой перчаток

Вторичная упаковка: клиническая коробка с 25 пакетами

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не применимо

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продукты, на которые направляются обоснованные рекламации на протяжении их срока годности, будут отозваны с рынка и заменены за счет производителя


Уполномоченный представитель: ООО «Рашен Медикал Трейдинг» (ООО «РМТ»), 109004, Россия, Москва, ул.Николаямская, д. 43, корп.4, комн.6

**FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG, FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY**

**This is to certify, that the foregoing is a true and correct copy of the
original, submitted to me today.**

Witness my hand and seal.

Hamburg, Germany, this 14th day of February 2017.

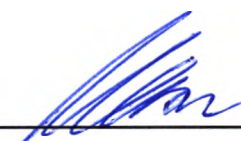

Dr. Jan Christoph Wolters
Notary Public
Bergstraße 11, 20095 Hamburg



Стр. 1

/Штамп: Заверенная копия/

/Штамп: «Хельм Медикал ГмбХ» (Helm Medical GmbH)
Нордканалштр. 28, 20097 Гамбург (Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg)
Телефон: 040/23 75-0/

Последняя страница

**ВОЛЬНЫЙ И ГАНЗЕЙСКИЙ ГОРОД ГАМБУРГ, ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ**

Настоящим удостоверяется, что документ, приведенный выше, является верной копией оригинала, представленного мне сегодня.

Удостоверено моей подписью и печатью.

Гамбург, Германия, сегодня, 14 февраля 2017 г.

/Подпись/

**Д-р Ян Кристоф Вольтерс
(Dr. Jan Christoph Wolters)
Государственный нотариус
Бергштрассе 11, 20095 Гамбург
(Bergstraß 11, 20095 Hamburg)**

/Рельефный оттиск на самоклеящемся лейбле: Д-р Ян Кристоф Вольтерс * Печать нотариуса *
Гамбург/

Переводчик



Коновалов Сергей Георгиевич

Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого февраля две тысячи семнадцатого года

Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Коновалова Сергея Георгиевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 1-2-2805

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: -----



[Handwritten signature]

В.Г. Милевский



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 5 лист(-а, -ов).

[Handwritten signature]