

УДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Веста»



Вакицкас Дарюс

2011 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

«Соски молочные латексные для детского питания с антиколиковой системой Lovi и «Canpol babies» для стимуляции носового дыхания»»»

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед первым и каждым последующим применением, тщательно промыть и продезинфицировать (подходящим для изделия способом)

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Мягкий латексный сосок обеспечивает комфорт и успокаивает малыша во время кормления, благодаря чему ребенок лучше усваивает пищу.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности: 2 года с даты изготовления, смотреть упаковку (при условии хранения бутылочки в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, температура 5-28С).

Соски ~~стерилизуются~~ кипятятся в течение 2-5х мин. Можно использовать в паровом стерилизаторе. Не кипятить в СВЧ-печи.

Поврежденную соску следует немедленно выбросить.

Данное изделие использовать только под присмотром взрослых. Мойте и стерилизуйте соски перед первым применением и после каждого дальнейшего использования.

Чтобы соски оставались гигиеничными, стерилизуйте их в паровом стерилизаторе. Во избежание повреждения сосок при кипячении, следите, чтобы в емкости было достаточное количество воды (кипятить не более 5 минут).

Можно безопасно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. При выборе размера и формы соски, необходимо учитывать индивидуальное развитие ребенка.

