

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО Результат-Аудит»

Г.В. Родина

2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Протектор для защиты глаз Natus Biliband

производства

«Натус Медикал Инк.», США (Natus Medical Inc., USA)

1. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2. ВНИМАНИЕ

Исключительная защита глаз для фототерапии новорожденных

1. Указания по применению

Стандартный размер (окружность головы 30–38 см) - biliband Regular.

Размер для недоношенных новорожденных (окружность головы 24–33 см) - biliband Premature.

Размер «микро» (окружность головы 20–28 см) - biliband Micro.

- 1) Разместите накладки для глаз над глазами.
- 2) Верхняя лента должна охватывать лоб.
- 3) Пропустите ленту Biliband вокруг головы и ПОД затылочным выступом, чтобы она располагалась напротив ленты, находящейся на лбу.




- 4) Закрепите при помощи участка с крючком. (Примечание: плотное крепление не требуется).
- 5) Если лента стала чрезмерно растянутой, замените Biliband на новую.
- 6) Расположенные посередине язычки служат для коррекции ленты Biliband после фиксации.

** Только для размера Микро*

Пропустите ленту Biliband ВОКРУГ ГОЛОВЫ и ПОД затылочным выступом так, чтобы она располагалась напротив ленты, находящейся на лбу.

Внимание

- Избегайте перекрытия носа и выполняйте регулярный контроль во избежание его перекрытия.
- Ленту Biliband не следует сильно растягивать. Она должна плотно и удобно прилегать к голове ребенка.

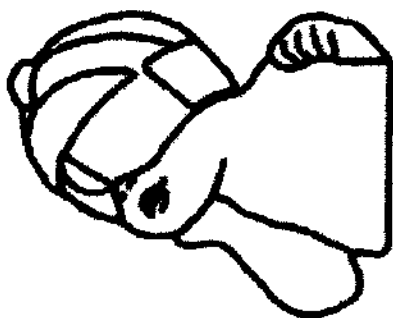

Генеральный директор
ООО «Результат Аудит»



Г.В.Родина