


КОД ОКП 93 9863

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор
ООО «Альфа МедРеЛис»

 Губирухина Е.В.
2011 г.

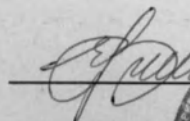

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Шприцы инъекционные одноразовые MEDICARE с иглами

Соответствует требованиям международных стандартов:
EN ISO 9001:2008, EC Directive 93/42/EEC (MDD)

Соответствует требованиям национальных стандартов:
ГОСТ 24861-91; ГОСТ 25046-81; ГОСТ 19126-2007; ГОСТ Р 51609

2011

Шприцы инъекционные одноразовые MEDICARE с иглами

1. Назначение

Используется в лечебно-профилактических учреждениях для внутримышечного, внутривенного и подкожного введения лекарственных средств.

Шприцы инъекционные одноразовые MEDICARE с иглами, двухкомпонентные, трехкомпонентные, предназначены для точного дозирования лекарственных препаратов, назначаемых врачом. Применяются в эндокринологии, фтизиатрии, неонтологии для проведения аллергологических внутрикожных проб, а так же, в ситуациях, где необходимо медленное внутривенное введение препаратов (анестезиология, интенсивная терапия, служба скорой и неотложной медицинской помощи, медицина катастроф).

Соединение Луер ценно при введении препарата в плотные ткани (под надхрящницу, под надкостницу), при заборе биологического материала, а также при введении препаратов с помощью инфузионных насосов (перфузоров, инфузоматов).

В шприцах инъекционных одноразовых MEDICARE с иглами достигнута высокая степень плавности движения поршня, введение лекарственного препарата проводится без «рывков».

Прозрачный цилиндр и четкая, устойчивая к стиранию шкала позволяют точно дозировать и визуально контролировать качество раствора; стопорное кольцо предотвращает возможность случайного извлечения поршня из цилиндра и не допускает утечки медикаментов, площадки для фиксации имеют специальную форму, это позволяет надежно удерживать шприц во время его использования.

Трехкомпонентные шприцы MEDICARE имеют некоторые особенности. MEDICARE — это безлатексный трехкомпонентный шприц, то есть поршень в этом шприце изготовлен не из натуральной резины, а из специального синтетического материала. Это позволяет полностью исключить возможность развития аллергических реакций на латекс, которые протекают особенно тяжело после проведения внутривенных инъекций.

Качество шприцов инъекционных одноразовых MEDICARE с иглами подтверждено сертификатами ISO, CE.

Иглы, которыми укомплектованы шприцы MEDICARE, атравматичны, благодаря оригинальной технологии обработки. Игла изготовлена из специальной стали, что позволяет сохранить прочность и эластичность при минимальной толщине стенки. Острые иглы имеет трехгранную заточку, что обеспечивает безболезненный укол.

Ультразвуком с поверхности иглы удаляются микрочастицы металла, и производится шлифовка.

Все это делает инъекцию практически атравматичной и безболезненной (ткани не разрезаются, а раздвигаются).

2. Противопоказания к применению

Противопоказания отсутствуют.

3. Порядок работы изделия

- Осмотреть упаковку шприца на герметичность.
- Убедиться в действии срока годности шприца.
- Вскрыть упаковку и извлечь шприц.
- Снять колпачок с иглы и набрать лекарственное средство.
- Удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх.
- После проведения инъекции шприц уничтожить согласно инструкции Минздрава по утилизации

4. Правила хранения и использования

Хранить при температуре 0 – +30°C и относительной влажности не более 85%.

Срок годности 3 года с момента производства.

Генеральный Директор
ООО «Альфа МедРелиС»



Побирухина Е.В.