

КОД ОКП 25 1460

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор

ООО «Альфа МедРелиС»

Побирухина Е.В.

2011 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Перчатки медицинские MEDICARE

**Соответствует требованиям международных стандартов:
EN ISO 9001:2008, EC Directive 93/42/EEC (MDD)**

**Соответствует требованиям национальных стандартов
ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р ИСО 11193-2-2009**

2011

Перчатки медицинские MEDICARE
производства «Medicare Trade» Ltd.), Великобритания
30 Cumberland Street, London, SW1V4LX, United Kingdom

Назначение:

Перчатки медицинские являются ИМН для обеспечения безопасности медицинского персонала. Перчатки служат для защиты медицинских работников от заболеваний в случае контакта с кожей или жидкостями организма человека.

Используются для работы в хирургическом отделении, стоматологии, лаборатории, для проведения дооперационных процедур и других врачебных манипуляций медицинским персоналом, также для научно-исследовательской деятельности.

Технические характеристики:

Перчатки изготавливаются из следующих материалов:

- ✓ Натуральный латекс
- ✓ Винил
- ✓ Нитрил

Перчатки изготовленные из латекса выпускаются стерильные и нестерильные.

При выпуске допускается две модификации:

- ✓ Хирургические
- ✓ Смотровые
- Перчатки хирургические, стерильные и нестерильные изготовлены из натурального латекса, выпускаются в анатомической форме (для правой и левой руки).
- Длина перчатки не менее 285 мм;
- Толщина перчатки не менее 0,19 мм; толщина: палец – не более 0,15 мм; ладонь – не более 0,13 мм; манжета – не более 0,11 мм.
- Валик на манжете для более удобного одевания.
- Хирургические перчатки выпускаются в следующих размерах: 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
- Перчатки смотровые стерильные и нестерильные изготовлены из натурального латекса.
- Толщина перчатки не менее 0,18 мм; толщина: палец – не более 0,16 мм; ладонь – не более 0,18 мм; манжета – не более 0,13 мм.
- Длина смотровых перчаток не менее 237 мм
- Ширина смотровых перчаток не менее 237 мм
- Перчатки имеют валик на манжете.

- Смотровые перчатки выпускаются в следующих размерах: L (большой), M (средний), S (маленький).
- Перчатки смотровые виниловые состоят из 100% синтетического пластифицированного ПВХ (поливинилхлорид), (100% poly vinyl chloride (PVC) дающего растяжимость по длине до 350%,
- Перчатки из винила не содержит латекс натурального каучука, не содержат DOP/DEHP (диоктилфталат / диэтигексилфталат).
- Перчатки имеют валик на манжете; ширина перчатки не менее 80 мм; длина перчатки не менее 239 мм.
- Толщина: палец – не более 0,15 мм; ладонь – не более 0,16 мм; манжета – не более 0,12 мм.
- Размерный ряд: L (большой), M (средний), S (маленький).
- Перчатки смотровые нитриловые изготовлены из гипоаллергенного 100% синтетического материала нитрила (без примесей), не содержат натуральный латекс, и другие белковые составляющие, что устраняет риск аллергических реакций.
- Перчатки имеют валик на манжете; ширина перчатки не менее 70мм; длина перчатки не менее 237 мм; толщина перчатки: манжета (25 мм от валика) - 0,10 мм; ладонь (центр) - 0,16 мм; палец (13 мм от кончика) - 0,18 мм.
- Размерный ряд: L (большой), M (средний), S (маленький).

Инструкция по использованию:

- Открыть упаковку
- Не спеша, надеть перчатку на руку таким образом, чтобы она плотно прилегала к руке
- После проведения манипуляций, снять перчатки и утилизировать должным образом.

Перчатки медицинские MEDICARE соответствуют ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р ИСО 11193-2-2009, международным стандартам EN ISO 9001:2008, EC Directive 93/42/EEC (MDD)

Предупреждения:

- Только для одноразового применения
- Срок годности 5 лет от даты указанной на упаковке
- Использование латексных перчаток может вызвать аллергическую реакцию.

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

3 (три) ЛИСТОВ

