

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СтомАтриум»



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «СтомАтриум»
Голубцова Л.А.

«10» октября 2016 г.

**БАХИЛЫ
ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
«ПРЕПАДЕНТ»**

Руководство по эксплуатации

РЭ 9398-005-37278196-2016

Дата введения в действие
« 10 » октября 2016 г.

РАЗРАБОТАНО
ООО «СтомАтриум»

г. Москва
2016 г.

Рекомендации по эксплуатации предназначены для наиболее эффективного использования БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ «ПРЕПАДЕНТ».

1. Описание

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ «ПРЕПАДЕНТ» (далее «бахилы медицинские») – защитные чехлы из цельного полиэтилена, которые одеваются поверх обуви и широко применяются в медицинских учреждениях. Бахилы медицинские имеют универсальный размер 400 (± 10) мм x 135 (± 10) мм, 375 (± 10) мм x 135 (± 10) и подходят для посетителей разного возраста. Бахилы медицинские предназначены для уменьшения риска распространения инфекций, а также количества бактерий на полах медицинских учреждений. Также они защищают обувь и ноги от контакта с кровью или другой жидкостью. Бахилы медицинские не пропускают влагу и грязь, выдерживают как минимум несколько часов носки и значительно облегчают поддержание стерильности и чистоты в помещениях. Используются посетителями и медицинским персоналом в операционных залах, отделениях интенсивной терапии, смотровых кабинетах, лабораториях и фармацевтике, а также в помещениях, где необходимо сохранять чистоту при большом количестве посетителей в целях соблюдения гигиены и чистоты.

Бахилы медицинские рекомендованы для однократного использования, при выходе из помещения они снимаются и утилизируются.

По времени эксплуатации производитель рекомендует:

- Бахилы медицинские ЛЕГКИЕ предназначены для недолговременного использования (до 1 часа).
- Бахилы медицинские СТАНДАРТНЫЕ рассчитаны на 3-4 часа использования.

					РЭ 9398-005-37278196-2016	Лист
						2
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Бахилы медицинские СТАНДАРТНЫЕ ПЛЮС (с двойной подошвой) рассчитаны на 4-6 часов использования.
- Бахилы медицинские ПРОЧНЫЕ рассчитаны на 5-8 часов использования.
- Бахилы медицинские ОСОБО ПРОЧНЫЕ выдерживают нагрузку в обуви до 10-ти часов.

2. Правила эксплуатации

Бахилы медицинские крайне простые в использовании, при их применении следует придерживаться следующих простых правил:

2.1. Распаковать изделие, разъединить края чехла и надеть поверх обуви.

2.2. Бахилы медицинские следует надеть поверх обуви, таким образом, чтобы они полностью закрывали подошву, носок и пятку. Резинка на бахилах должна плотно прилегать к обуви и не позволять им спадать при ходьбе.

2.3. Использовать бахилы медицинские можно до тех пор, пока в этом есть необходимость или до того момента, пока они не порвутся. В таком случае их необходимо заменить на новые.

2.4. После их применения руки стоит вымыть с мылом, чтобы избежать контакта с патогенными микроорганизмами.

2.5. До первого использования хранить изделия в оригинальной упаковке при комнатной температуре.

					РЭ 9398-005-37278196-2016	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2.6. Необходимо защищать бахилы медицинские от воздействия высоких температур. Рекомендуется использовать и хранить бахилы при температуре от -5°C до + 40°C, относительная влажность воздуха - не более 95%.

3. Ремонт

3.1. Бахилы медицинские предназначены для однократного применения, поэтому ремонту не подлежат.

3.2. Не рекомендуется использовать бахилы повторно, сразу же после использования, их необходимо выбросить, как бытового мусора.

3.3. Бахилы медицинские не подлежат ремонту, но имеют срок хранения - 5 лет.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Бахилы медицинские перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

4.2. Хранить бахилы медицинские необходимо вдали от влаги и открытого огня. Не допускается хранение совместно с кислотами, щелочами и другими химическими активными веществами.

4.3. Изделия должны храниться в закрытых, чистых, вентилируемых складских помещениях с предохранением их от прямого попадания солнечных лучей, а также на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температура хранения от -5°C до + 40°C, относительная влажность воздуха - не более 95%.

					РЭ 9398-005-37278196-2016	Лист
						4
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4.4. При транспортировании бахилы медицинские должны быть упакованы в соответствии техническими условиями, чтобы исключить возможность повреждения при их транспортировании и хранении. Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от внешних воздействий при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.

5. Утилизация

5.1. БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ «ПРЕПАДЕНТ» не являются взрывоопасными продуктами. После использования бахилы медицинские утилизируются обычным способом.

6. Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие Бахил одноразовых медицинских «ПРЕПАДЕНТ» действующей технической документации при соблюдении условий хранения, транспортировании и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет.

6.3 Все претензии по качеству товара направляются в письменном виде на почтовый адрес изготовителя.

6.4. Все претензии по качеству товара рассматриваются в сроки, установленные Законом РФ «О защите прав потребителей».

6.5 Адрес изготовителя:

ООО «СтомАтриум»

Россия, 105264, г. Москва, Измайловский бульвар, д.43

Телефон: Тел. +7 499 714 29 47,

Факс +7 499 372 04 47

E-mail: info@stomatrium.ru

<http://www.stomatrium.ru/>

					РЭ 9398-005-37278196-2016	Лист
						5
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Всего прошнуровано и
пронумеровано

5 (Пять) листов

«26» сентября 2006 г.

