



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «СтомДент»

Добровольский П.В.
« 10 » 05 2006г.

Инструкция по применению временного пломбировочного материала "ФторДентин"

НАЗНАЧЕНИЕ.

Временный пломбировочный материал "ФторДентин" применяется в терапевтической и ортопедической стоматологии для временного закрытия полостей зубов и снижения гиперестезии.

СВОЙСТВА.

Временный пломбировочный материал "ФторДентин" - приготовлен на основе цинксульфатного цемента в виде пасты, не содержащей эвгенол в составе которой 4 – 4,3% фторида натрия .

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.

Временный пломбировочный материал "ФторДентин" помещают в подготовленную полость гладилкой слоем 1-2 мм. Твердение пасты происходит в течении 2-3 часов, поэтому пациенту не рекомендуется принимать пищу в этот период времени.

Выводится паста из полости экскаватором или зондом. Допускается удаление временной пломбы с применением ультразвука.

Банку с пастой после взятия материала для наложения пломбы необходимо плотно закрыть крышкой, для предотвращения твердения пасты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Временный пломбировочный материал "ФторДентин" рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре +18÷23°C.

Избегать при хранении повышенной влажности воздуха и контакта с влагой.

Срок годности - 2 года.