

## Инструкция по применению одноразовых электродов для ЭКГ SWAROMED

Одноразовые электроды для ЭКГ SWAROMED предназначены для использования с широким спектром мониторирующего оборудования (электрокардиографы, холтеровские мониторы, прикроватные мониторы пациента и т.п.) При выборе типа и размера электродов необходимо руководствоваться инструкцией к оборудованию, с которым они используются.

Установка электродов на пациенте должна осуществляться квалифицированным медицинским персоналом в следующем порядке:

1. Необходимо убедиться, что поверхность кожи пациента на месте установки электрода является сухой, нежирной, без излишнего волосяного покрова. Для получения наилучших результатов измерений при стресс-тестах рекомендуется легкая абразивная подготовка и удаление волос с помощью бритвы.
2. Соединить фиксирующее устройство отведения измерительного прибора с кнопкой электрода.
3. Снять с рабочей поверхности электрода защитную прозрачную пленку и установить электрод на подготовленное место.
4. Расправить пальцем возможные складки и неровности для обеспечения максимальной фиксации электрода на пациенте и получения сигнала наилучшего качества.
5. Начать измерительную процедуру. Хранить при температуре 0-40 градусов по Цельсию. Срок годности указан на каждой вакуумной упаковке. Не содержат латекса.

Электроды являются одноразовыми и их повторное использование запрещено.

Генеральный директор ООО «Гала-Оптика»



Соловьев С.А.