


Содержание

1. Назначение изделия	3
2. Особые свойства изделия.....	3
3. Техническая спецификация.....	3
4. Упаковка.....	3
5. Транспортировка.....	4
6. Хранение и срок годности.....	4
7. Сведения об аналогах.....	4

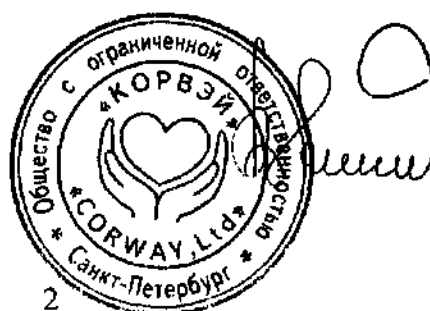

1. Назначение изделия:

Ланцет (скарификатор) Acti-lance, Prolance однократного применения был разработан для взятия капиллярной крови.



2. Особые свойства изделия:

Ланцет (скарификатор) Acti-lance, Prolance разработан специально для предотвращения сильной травматизации пациентов, нуждающихся в многократных взятиях крови из пальца ежедневно. Устройство гарантирует наиболее оптимальное расстояние между ланцетом и пальцем в момент прокола. Равномерное давление иглы сводит болевые ощущения к минимуму. Эта особенность гарантирует контроль глубины прокола и получение необходимого объема крови. В больницах, клиниках, лабораториях пациенты и медперсонал должны чувствовать себя защищенными от вероятности заражения заболеваниями, передающимися через кровь.

3. Техническая спецификация:

Применяемые материалы: Сталь с силиконовым покрытием (игла), пластик (корпус)
Длина иглы (лезвия) от 1,2мм до 2,00мм.

Изделия стерилизованы радиационным методом.

Ассортимент:

Ланцет (скарификатор) Acti-lance, Prolance однократного применения:

1. Ланцет (скарификатор) Acti-lance Lite однократного применения (28 G, 1.5 мм игла).
2. Ланцет (скарификатор) Acti-lance Universal однократного применения (23 G, 1.8 мм игла).
3. Ланцет (скарификатор) Acti-lance Special однократного применения (17 G, 2.0 мм лезвие).
4. Ланцет (скарификатор) Prolance Pediatric однократного применения (1,2 мм лезвие).
5. Ланцет (скарификатор) Prolance Max Flow однократного применения (1,6 мм лезвие).
6. Ланцет (скарификатор) Prolance High Flow однократного применения (18 G, 1.4 мм игла).
7. Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow однократного применения (21 G, 1.8 мм игла).
8. Ланцет (скарификатор) Prolance Low Flow однократного применения (25 G, 1.4 мм игла).
9. Ланцет (скарификатор) Prolance Micro Flow однократного применения (28 G, 1.6 мм игла).

4. Упаковка:

Изделие упаковано в упаковку с полезной информацией и инструкцией по применению.



5. Транспортировка:

Транспортировка должны осуществляться в упаковке производителя, защищающей от нарушения товарного вида изделий. Допускается транспортировка всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температурном режиме -25°C до +55°C и относительной влажности воздуха до 75%.

6. Хранение и срок годности:

Температура хранения от -25°C до + 55°C

Относительная влажность воздуха до 75% (без образования конденсата)

Атмосферное давление: от 700 мм рт. ст. до 1060 мм рт. ст.

Срок хранения 5 лет.

7. Сведения об аналогах

В Российской Федерации зарегистрированы аналог:

«Ланцет (скарификатор) Acti-lance однократного применения»

Производства HTL-STREFA S.A., Польша. РУ ФСЗ 2009/04308 от 14 мая 2009г.

Основные данные	Аналог, зарегистрированный в Российской Федерации	Регистрируемое изделие
Наименование	Ланцет (скарификатор) Acti-lance однократного применения	Ланцет (скарификатор) Acti-lance, Prolance однократного применения
Наименование производителя	HTL-STREFA S.A., Польша	HTL-STREFA S.A., Польша; HT Lancet Sp. Z o.o., Польша
Исполнения	Acti-lance Lite, Acti-lance Universal, Acti-lance Special	Acti-lance Lite, Acti-lance Universal, Acti-lance Special, Prolance Pediatric, Prolance Max Flow, Prolance High Flow, Prolance Normal Flow, Prolance Low Flow, Prolance Micro Flow
Длина иглы (лезвия)	от 1,5мм до 2,00мм.	от 1,2мм до 2,00мм.
Материал	Сталь с силиконовым покрытием (игла), пластик (корпус)	Сталь с силиконовым покрытием (игла), пластик (корпус)
Условия хранения	от -25°C до + 55°C, относительная влажность до 75%	от -25°C до + 55°C, относительная влажность до 75%




«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «КОРВЭЙ»



В.А.Линд

Инструкция по применению
«Ланцет (скарификатор) Acti-lance, Prolance однократного применения»



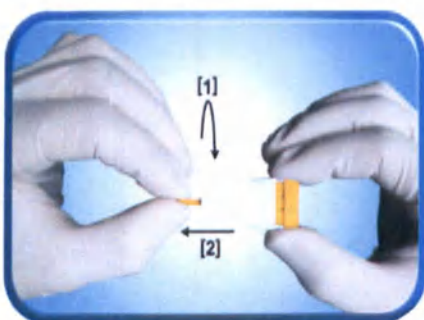

1.Открутите защитный колпачок и извлеките его.



2.Плотно прижмите корпус ланцета к месту прокола и нажмите на кнопку для активации ланцета.



3.Мягко нажимая на место рядом с проколом возьмите необходимое количество крови.

