

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Название изделия медицинского назначения

Клеенка подкладная резинотканевая вид А

Размерами: отрезы по 1м; 1,5м; 2м; рулоны по 45м, 50м.

Состав и описание изделия

Клеенка подкладная резинотканевая предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала и служит многократно. Клеенка вида А изготовлена на основе хлопчатобумажных тканей.

Область применения

Медицинские учреждения и для индивидуального применения для санитарно-гигиенических целей.

Способ применения

Перед применением клеенку промывают в теплой мыльной воде, ополаскивают проточной водой. Затем высушивают при комнатной температуре. После применения клеенку подвергают дезинфекции указанным ниже способом и высушивают.

Не рекомендуется для сушки клеенки использовать теплоизлучающие приборы или прямые солнечные лучи.

Дезинфекцию клеенки в лечебных учреждениях проводят в 1% по массе растворе хлорамина по методике и режимам в соответствии с действующими нормативными документами. В домашних условиях дезинфекция изделия после применения заключается в тщательной промывке клеенки горячей водой с мылом или мыльным порошком.

Условия хранения и транспортирования

Клеенку транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -50° до +50°С в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Упакованную клеенку хранят в закрытом складском помещении при температуре от 0° до +25°С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей. При хранении клеенка не должна подвергаться действию масел, бензина и других веществ, разрушающих резину.

Срок годности

Изготовитель гарантирует качество клеенки при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения клеенки вида А - 24 месяца со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации клеенки вида А - 1 месяц в лечебных учреждениях и 6 месяцев индивидуально со дня получения потребителем.

Изготовлена по ГОСТ 3251-91

МАКЕТ ИНСТРУКЦИИ
на клеенку подкладную резинотканевую вида А

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ПЛАСТ МО»

Адрес: 199155, г.Санкт-Петербург,
ул.Одоевского, д.27, литер А, пом.423

ИНН 7801175742 КПП 780101001

р/с 40702810990190000570

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

г.Санкт-Петербург

к/с 30101810900000000790 БИК 044030790

ОГРН 1037800052927

ОКПО 56170926 ОКВЭД 46.46

тел./ ф. (812) 446-87-01

Генеральный директор

Давыдов Э.З.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «ЯРТ»

Адрес: 150036, Россия, г.Ярославль
ул. Спартаковская, 1Д

ИНН 7603024491 КПП 760301001

р/с 40702810602000031577

в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»

г. Ярославль

к/с 30101810300000000760 БИК 047888760

ОГРН 1037600203277

ОКПО 13935488

т/ф. (4852) 222 -002

Генеральный директор

Шабанов М.А.

