

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинт медицинский эластичный

Назначение

Бинт предназначен для профилактики варикозного расширения вен, хронических тромбофлебитов, вывихов, растяжений, отеков и других травматических осложнений.

Медицинские показания:

В профилактических целях для избавления от перегрузки и переутомления при физической нагрузке; для профилактики растяжений и травм при занятиях спортом.

Состав сырья

хлопок, полиэфир, латекс

Срок годности изделия указан на упаковке.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.

Санитарно-гигиеническая обработка

Бинт следует обрабатывать в мыльном растворе ручной стиркой при температуре 30°C без использования средств, содержащих отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами. Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания и сушка в расправленном виде. Запрещено глажение.


Хранение: в сухом помещении, при комнатной температуре.

Упаковка: 1 штука.

Ваши отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу производителя.

Производитель ООО «АЛЬМЕД» РФ., г.Москва, Старокалужское шоссе , д.62 стр.1 тел. 8 (4967) 50-81-80

E-mail: almedru@almed.ru

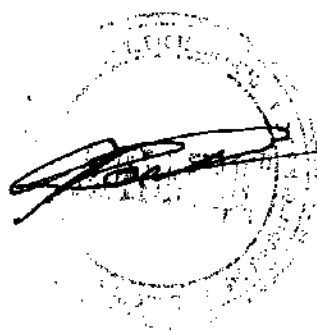

Голышев А.П.