

Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство и работу кушетки, назначение и работу составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте



КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ КМ

Паспорт

Кушетка медицинская КМ - ____ (в дальнейшем - кушетка) предназначена для проведения общих осмотров в медицинских учреждениях.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (Таблица 1)

Таблица 1

Наименование параметра	Значение для исполнений			
	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
Высота кушетки, мм	650	830	650	830
Длина панели кушеток, мм	1950	1950	1950	1950
Ширина панели кушеток, мм	650	650	800	800
Наклон головной секции кушеток:				
- вверх	40°	40°	40°	40°
- вниз	30°	30°	30°	30°
Масса кушеток, кг, не более	32	34	36	38

1.1 Кушетка изготовлена из конструкционной стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками, устойчивыми к обработке водными растворами дезинфицирующих средств на альдегидной основе.

1.2 Основание кушетки разборное. Ложе двухсекционное, обито искусственной кожей, бесшовное. Наклон головной секции регулируется с помощью встроенной пневмопружины рукояткой (см. рисунок).

1.4 Кушетка при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

Температура хранения от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

1.5 Кушетка при эксплуатации обладает виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.

1.6 Кушетка драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки кушетки медицинской КМ соответствует таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт
Кушетка медицинская в составе:	1
- рама	1
- рама подъемная	1
- лежанка	1
- подушка	1
- стойка	4
- пружина газовая	1
-паспорт	1
<i>Примечание : Рама , рама подъемная , лежанки и подушка поставляются в сборе.</i>	
<i>Стойки укомплектовываются деталями для крепления к раме:</i>	
<i>-винт M12x60 ГОСТ 11738-84</i>	4
<i>-шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70</i>	4

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Кушетку транспортируют в крытых транспортных средствах.

3.2 Транспортирование кушетки осуществляют по группе условий хранения 5(ОЖ 4) ГОСТ 15150-69 (Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%).

3.3 Хранение кушетки осуществляется по группе условий хранения 2(С) ГОСТ 15150-69 (Температура хранения от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%).

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Средний срок службы кушетки до списания составляет 7 лет. Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технической документации, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня ее изготовления.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка медицинская КМ-_____ зав. № _____ изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ ВУ 800003039.030 – 2013.

Контролер ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

«_____» _____ 20__ г.


6 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данное медицинское изделие при использовании, хранении и транспортировке безопасно для окружающей среды.

Металлы и пластмассы

При утилизации кушетки или замены его частей проверьте пригодность каждой из них к утилизации. Большинство металлических деталей кушетки сделано из черной и нержавеющей стали. Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.

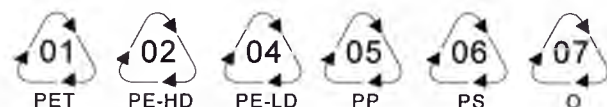

Пневмопружины

Пневмопружины могут быть утилизированы следующим образом:

Сбросьте давление из газовой пружины, просверлив отверстие 3 мм на расстоянии 20 мм от конца трубы, закрепленной в вертикальном положении стержнем поршня вниз в максимально растянутом положении.

Примечание. Наденьте защитные очки, одежду и наушники при выполнении этой операции, поскольку при перфорации пружины возникает шум, а из отверстия вылетают маленькие частицы масла и металла.

Слейте масло через просверленное отверстие, при необходимости несколько раз выполнив рабочий ход поршня. Утилизируйте отработанное масло в соответствии с местными правилами.

Теперь газовую пружину можно сдать в пункт приема металлолома в соответствии с местными правилами

7 Адрес изготовителя

Иностранное унитарное предприятие

«Мединдустрия Сервис»

223043, Республика Беларусь, Минский р-н, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны, Производственная база ООО «Датума», каб. №35.

Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

med@medin.by

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:

ООО «Евромед», Российская Федерация

121357, г. Москва, ул. Вереysкая, д.29, стр. 133

Тел./факс: (495)651-59-08, тел.8-916-133-62-28

e-mail:

evro-med@inbox.ru

8 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КУШЕТКИ

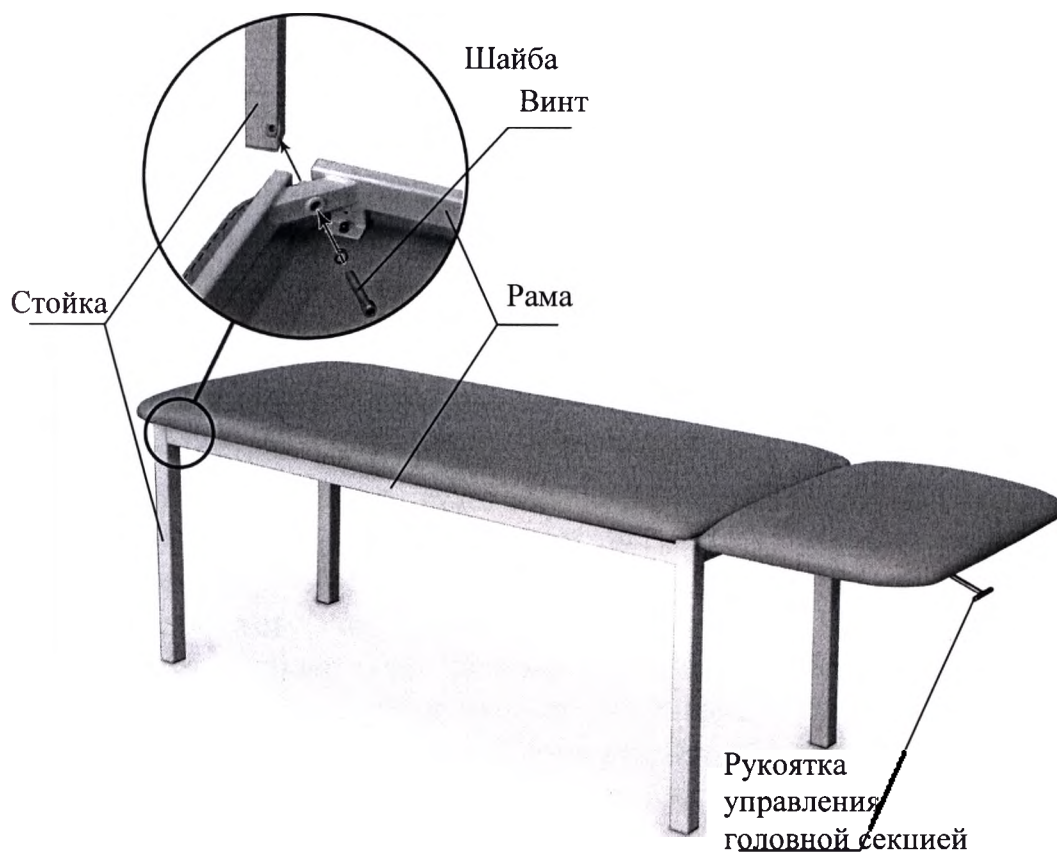


Рисунок 1
Схема сборки кушетки

- 8.1 Совместить раму и стойку как показано на рисунке 1.
- 8.2 Закрепить стойку на раме с помощью винта М12х60 с шайбой 12.65Г.
- 8.3 Повторить п.7.1 и п.7.2 со всеми остальными стойками.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

Дезинфекцию кушетки следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами обязательно протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Применение дезинфицирующих средств, содержащих хлор или активный (растворенный) кислород, а также веществ, способных выделять их в процессе применения, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Это может привести к коррозии даже элементов, изготовленных из нержавеющей сталей.

Кроме того, не допускается применение чистящих веществ, содержащих спирт (таких как дезинфицирующие растворы для мытья рук), либо использование распылителей дезинфицирующих растворов. Их применение может вызвать вымывание смазки в местах сочленения и привести к коррозии механических элементов. Применение спирта может повредить пластмассовые детали, эмалированные поверхности и матрасы.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину установленную в инструкции по применению.
- превышать рекомендуемое время экспозиции.

При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия изготовителем не принимаются.

В конструкции кушетки используются газовые пружины. **Запрещается разбирать, нагревать и подвергать корпуса пружин механическим воздействиям (ударам)**

Не передвигайте кушетку по электрическим кабелям

Символы

Особенно важная информация обозначена следующими символами

	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
SN	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
	БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ
	ПРЕДЕЛ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЯРУСОВ В ШТАБЕЛЕ
	ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО
	ВЕРХ

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Директор

Иностранного унитарного предприятия

«Мединдустрия Сервис»

Должность

Подпись

Мельченко К.В.

ФИО

« »

20

