

R-Оптикс

г.Москва, ул. Живописная д.46, тел 190-93-50, 190-95-69, 190-95-85,
факс: 741-59-09, e-mail: roptics@garnet.ru

Руководство Пользователя

Кресла медицинские специализированные с
принадлежностями, Кресла и скамейки операционные с
принадлежностями, Кресла медицинские с
принадлежностями

КОПИЯ ВЕРНА
подпись
ген. директор
Яковлев А.М.



Руководство по эксплуатации

Мягкий подголовник с регулируемой высотой и углом наклона

- Пластмассовый корпус
- Направляющая для подсоединения дополнительных приспособлений
- Рукоятка для транспортировки
- Педаль для блокировки колес
- Стопорное устройство для горизонтального положения
- Джойстик
- Ручной прибор контроля с функциями памяти
- Перезаряжаемая батарея
- Механизм безопасности для положения Тренделенбурга
- Контрольный рычаг для положения Тренделенбурга
- Кнопка остановки (Перед началом операции перевести в нижнее положение)

Электромотор и аккумуляторная батарея

Стол оснащен батареей, питаемой электромотором. Один мотор регулирует вертикальное положение стола, а другой - синхронно поднимает и опускает сидение и спинку стола. Они объединены в контрольное устройство, снабженное аккумуляторной батареей на 24В. Операционный стол оснащен аккумуляторной батареей и внешним зарядным устройством. Рекомендуется ежедневная зарядка батареи. Когда батарея полностью заряжена, процесс зарядки прекращается автоматически. При разрядке батареи раздается звуковой сигнал. Максимальная нагрузка на стол 150кг.

Шасси

Шасси стола изготовлены из металла и покрыты лаком.

Поверхность стола

Поверхность стола состоит из трех частей: спинка, сидение и упор для ног. При переводе стола из положения «сидя» в положение «лежа», сидение плавно поднимается по направляющим, предотвращая выпадение пациента. Подушки стола изготовлены из высококачественной стали.

Колеса

Колеса стола поворачиваются на 360 градусов. Колеса блокируются одновременно.

Ручки для транспортировки

Ручки для транспортировки стола расположены сзади.

Подголовник

Подвижный подголовник регулируется по высоте.

Противошоковое положение

В случае необходимости стол может быть переведен в противошоковое положение Тренделенбурга.

Достоинства операционного стола RI-EYE E650033

- Быстрая и удобная транспортировка пациента.

- Безопасность и стабильность нахождения в горизонтальном положении, благодаря специальной конструкции спинки.
- Мягкий регулируемый подголовник.
- V-форма задних шасси обеспечивает более удобную транспортировку.
- Жесткая форма и бесшовное покрытие подушек сидения и спинки.
- Удобный доступ хирурга и ассистента к пациенту во время операции.
- Возможность установки трех позиций.
- Ножное управление с джойстиком.
- Направляющие для подсоединения дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование

- Направляющие для капельницы.
- Капельница.
- Эластичная дуга
- Подлокотник для анестезии.
- Левый и правый подлокотники.
- Дополнительная батарея.
- Джойстик/Ножное управление.

Функции памяти

Возможна установка и запоминание трех положений стола. Установите стол в нужное положение, нажмите кнопку S и удерживайте кнопку 1, 2 или 3 до появления звукового сигнала. Запомненное положение стола может быть установлено в любое время.

Благодаря наличию ножного управляющего джойстика возможна регулировка высоты и угла наклона стола даже во время операции. Перемещайте джойстик по горизонтали для позиции «сидя» или «лежа» и по вертикали для регулировки высоты стола.

Внимание!

Первоначальные установки памяти следующие:

1. Положение для помещения пациента на стол.
2. Положение подготовки к операции.
3. Положение проведения операции.

Противошоковое положение

Для приведения стола в противошоковое положение используются 2 педали. Нажмите и отпустите красную педаль, блокирующую это положение. Затем, нажав серую педаль, вручную приведите стол в требуемое положение и отпустите педаль. Стол возвращается в нормальное положение при установке серой педали в нижнее положение. Во время проведения этой процедуры ноги пациента должны быть жестко зафиксированы на подушке для ног.

Если стол находится в нормальном положении, красная педаль должна находиться в нижнем положении.

E650033P содержит:

Подголовник, направляющие на задней стороне спинки, одна батарея, ручной прибор контроля, ножной управляющий джойстик для регулировки положения

стола, зарядное устройство, запоминающее устройство, центральной устройство блокировки колес.

При обращении в компанию RINI, пожалуйста, указывайте серийный номер вашего операционного стола.

ГАРАНТИЯ

Компания RINI Ergoteknik AB гарантирует исправность работы механических частей и электронного оборудования в течение одного года с момента доставки. При возможности устранения дефекта с помощью замены частей, компания вышлет необходимые части дистрибьютору, который в свою очередь должен произвести ремонт. Если требуется замена всего прибора, все расходы по транспортировке должен взять на себя покупатель.

ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ RI-EYE 650033 И 650033P

Благодарим Вас за выбор продукции компании RINI Ergoteknik AB. Надеемся, наша продукция отвечает вашим требованиям. Мы стараемся сделать Вашу жизнь и жизнь Ваших коллег более удобной. Обращайтесь к нам по любым вопросам, связанным с нашей продукцией. За более подробной информацией обращайтесь на сайт: www.rini.se.

Контроль работы прибора

Оборудование было тщательно проверено компанией RINI Ergoteknik AB.

Контролируемые части	Проверенная функция/качество	Состояние
Подголовник	Пластмассовые части/Крепления	Норма
Подушка спинки	Штамп/Стальная рама/Комплектация	Норма
Пластиковое покрытие спинки	Штамп/Соответствие	Норма
Подушка сидения	Штамп/ Стальная рама/Комплектация	Норма
Подушка для ног	Штамп/ Стальная рама/Комплектация	Норма
Электронные приборы	Память/Состояние батарей/Ручной контроль/Соединения/Функции	Норма
Штатив	Покраска/Колеса/Система центрального тормоза/Противошочковая функция	Норма

Главные рабочие функции

Стабильность	Норма
Центральный тормоз	Норма
Противошочковая функция	Норма
Функции мотора	Норма

Упаковка

Очистка перед упаковкой	Норма
Крепление	Норма
Внешнее зарядное устройство EFCH2JUMBO	Норма

Дополнительные части

	Серийный номер
Подлокотник для анестезии	652053
Капельница	770059
Система ножного контроля	1433
Направляющие для дополнительного оборудования	1330
Дополнительная батарея	FBATTJUMBO
Левый подлокотник	532030L
Правый подлокотник	532030R
Верхняя дуга	770060
Держатель ручного прибора контроля	770062
Левая направляющая	770064L
Правая направляющая	770064R
Упор для кисти	500013
Упор для ног	770063

Следующая информация содержит инструкции относительно:

- Функций памяти для разных положений стола
- Кнопки срочной остановки

ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОЛА!!!

Функции памяти

Операционный стол RI-EYE оснащен электронным устройством для программирования трех положений стола. Ручной прибор контроля имеет 8 кнопок: 4 верхние кнопки используются для регулировки высоты и угла наклона стола, кнопки 1, 2, 3 служат для выбора нужного положения стола, кнопка S сохраняет выбранное положение.

1. Установите нужное положение стола с помощью верхних кнопок.
2. Выберите кнопку 1, 2 или 3 для сохранения на этой кнопке выбранного положения и нажмите кнопку S.
3. При сохранении положения раздается звуковой сигнал.
4. Повторите процедуру для двух других кнопок.

Для изменения сохраненных положений повторите процедуры 1-3.

Кнопка срочной остановки

Обслуживание и меры безопасности

Операционный стол изготовлен из твердых стальных конструкций. Следующие части должны контролироваться и обслуживаться:

Для предотвращения риска попадания жидкости (NaCl) на крепления, раз в месяц необходимо снимать подголовник с операционного стола.

Необходимо регулярно притирать стальные конструкции и смазывать их тонким слоем смазки. Рекомендуется использовать прозрачную универсальную смазку.

Необходимо контролировать жесткость крепления подголовника, для удержания твердого положения головы во время операции. Крепление регулируется винтом, с помощью специального инструмента, входящего в комплект.

Необходимо контролировать все винты и крепления и поршень газа в положении Тренделенбурга. Рекомендуется раз в неделю переводить стол в положение Тренделенбурга.