

## ИНСТРУКЦИЯ

### по применению медицинского изделия

**«Губка стоматологическая «Стимул-Осс» (по ТУ 9398-004-16794798-2013),  
варианты исполнения (см. Приложение на 1 листе)»**

#### **Основные технические характеристики**

«Губка стоматологическая «Стимул-Осс» (в дальнейшем – «Стимул-Осс»), изготовлена из вспененного коллагена животного происхождения и гидроксиапатита, предназначена для заполнения послеоперационных костных полостей, костных лунок после удаления зубов, пародонтальных карманов.

«Стимул-Осс» выпускается стерильным.

Для создания в ране бактерицидной среды добавлен хлоргексидин в разовой терапевтической дозе.

«Стимул-Осс» используется в амбулаторных и стационарных условиях медицинских учреждений и предназначен для заполнения костного дефекта в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.

#### **Техническая характеристика**

«Стимул-Осс» представляет собой сухой пористый материал с основанием в форме круга или квадрата мягко-эластичной консистенции, содержание влаги – не более 18%.

«Стимул-Осс» имеет следующие размеры:

*Таблица 1*

| Размеры основания |                      | Предельное отклонение, мм |
|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Диаметр круга, мм | Сторона квадрата, мм |                           |
| 11                | -                    | ±1                        |
| -                 | 50                   | ±5                        |

Губка «Стимул-Осс» стерильна радиационным методом.

Материалы, применяемые для изготовления «Стимул-Осс»:

- гидроксиапатит по ТУ 9391-004-77330104-2006
- раствор коллагена 2 % по ТУ 9389-010-16794798-2013
- 20% раствор хлоргексидина биглюконата по ТУ 9392-001-18885462-99

### **Комплектность**

В комплект «Стимул-Осс» размером (50х50) мм должно входить:

- губка в индивидуальной упаковке - 1 шт
- инструкция по применению - 1 экз
- пачка картонная - 1 шт

В комплект «Стимул-Осс» диаметром 11 мм должно входить:

- губка в индивидуальной упаковке - 1 шт. или 20 шт
- инструкция по применению - 1 экз
- пачка картонная - 1 шт

### **Показания для использования изделия**

«Стимул-Осс» предназначен для заполнения послеоперационных костных полостей, костных лунок после удаления зубов, пародонтальных карманов.

### **Противопоказания к применению**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

### **Порядок работы с изделием**

После удаления зуба, оболочки кисты, секвестра, доброкачественной опухоли или другой патологической ткани из возникшего костного дефекта удаляют кровяные сгустки струей физиологического раствора, кюретажной ложкой или марлевым тампоном.

Упаковку вскрывают ножницами и извлекают стерильным пинцетом малый упаковочный пакет, содержащий губку стоматологическую, вскрывают стерильными ножницами малый пакет, извлекают пинцетом блок нужного размера и вводят его в дефект костной ткани. Количество используемых блоков определяется объемом костного дефекта.

Убедившись в гемостазе, сближают швами края раны мягких тканей над костным дефектом. Лунку зуба после его удаления заполняют 1-2 губками «Стимул-Осс» на 3/4 ее глубины. Края десны над лункой сближают швами или накладывают на 20-30 мин. марлевый тампон. Больному не рекомендуют в течение 4-х часов принимать пищу.

### **Побочное действие изделия**

Возможны аллергические реакции.

### **Условия хранения**

Губки хранят в упаковке предприятия – изготовителя в условиях хранения по группе ГОСТ 15150 1(Л) при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, в сухом, защищенном от света месте. Не использовать после окончания срока хранения или повреждения в упаковке.

Губки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования губок 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

### **Срок годности**

3 года со дня стерилизации при целостности упаковки и правильных условиях хранения.

### **Инструкции по утилизации**

Утилизация остатков изделия должна проводиться согласно документов, регламентирующих обращение с медицинскими отходами (СанПин 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами).

### **Производитель/организация, принимающая претензии потребителей:**

ЗАО «Фармацевтический научно-производственный центр «Белкозин»

194292, Россия, г.Санкт-Петербург

8-ой Верхний переулок, д.4

Тел.:+7(812)2446438, факс:+7(812)2446132

Генеральный директор

ЗАО «Фармацевтический


научно-производственный центр «Белкозин»



О.Г. Щербинин

«Губка стоматологическая «Стимул-Осс» (по ТУ 9398-004-16794798-2013),  
варианты исполнения»:

1. Губка стоматологическая «Стимул-Осс», ø 11 мм.
2. Губка стоматологическая «Стимул-Осс», 50x50 мм.

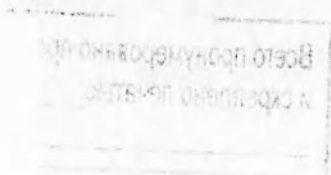

Генеральный директор ЗАО  
«Фармацевтический научно-производственный центр»



Мербинин

Всего пронумеровано прошнуровано  
и скреплено печатью 2 42  
2 2271/2 7(-a;ob)

