

«Воск стоматологический для изготовления зубных протезов»



2. Необходимо опереться хорошо опереться рукой о воскотопку.



3. Быстрым вращательным движением (для премоляров/моляров с апроксимальной стороны) погрузить ниже границы препарирования.



4. Штампик медленно и равномерно вынуть вновь в том же направлении вращения и непосредственно перед выходом штампа немного подержать, чтобы стек лишний воск.



5. Результат: точный колпачок одинаковой толщины. Тонкие места при необходимости подкорректировать моделировочным воском.




Моделирование коронок


1. Нанесение воска с мезио-буккального бугоркового конуса толстым или средним зондом.



2. Нанесение дисто-буккального конуса бугорка.

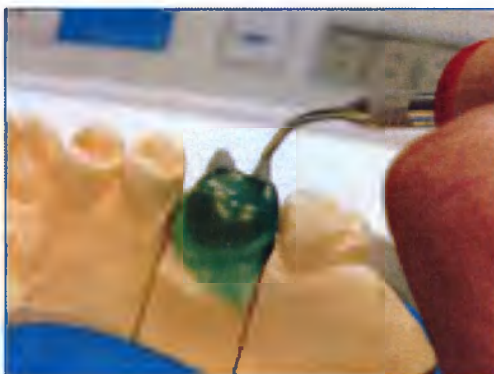

3. Модель контролируется на артикуляторе на возможные балансные контакты. Также контролируется интерокклюзионное расстояние. По необходимости оно корректируется.

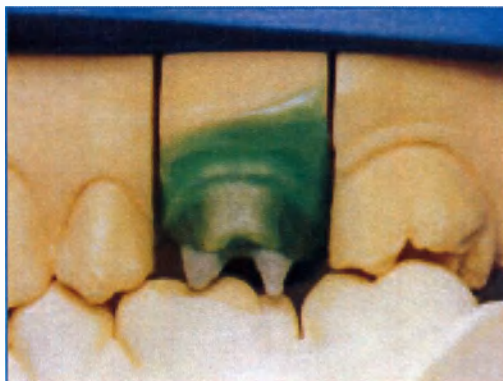

4. Добавляется краевая планка буккальных бугорков.



5. Создание палатинальных рабочих бугорков из воска. Положение кончиков конусов определяется с помощью функциональных движений нижней челюсти и необходимой окклюзионной опоры.




6. Контроль зубов палатинальной стороны.



7. Добавление мезиальных и дистальных краевых планок.




8. Приплавление краевых планок с окклюзионной стороны.

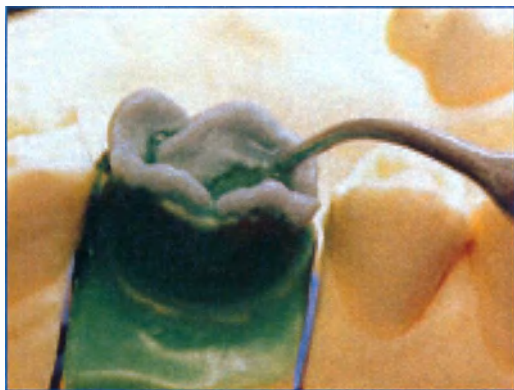

9. Добавление дистальной поверхности. Формирование выпуклой точки контакта.



10. Мезиальная контактная точка формируется вогнутой. Контроль с применением копирки.

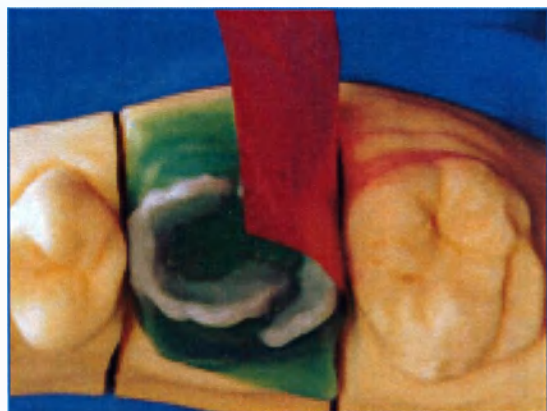

11. Моделирование буккальных и палатинальных контуров бугорков.



12. Добавление оставшихся контуров



13. С помощью клинка корректируется и точно формируется буккальный и палатинальный внешний контур.




14. Готовый смоделированный внешний контур с окклюзионной стороны.



15. Контроль медиотрузии с буккальной и латеротрузии стороны.



16. Моделирование треугольного выступа мезио-буккального бугорка. Используется маленький зонд или зонд mini, с углом.

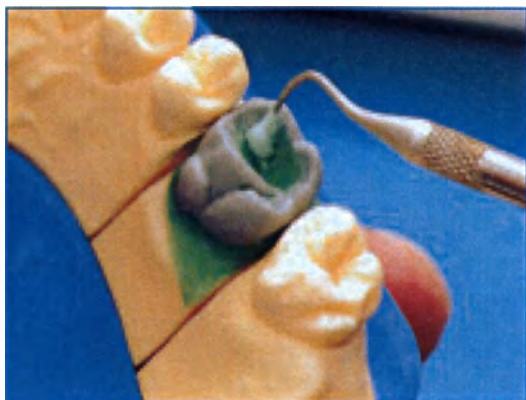

17. Контроль с помощью окклюзионной пленки, который отмечает первый ступор за счет мезио-буккального откоса. Контактная точка обозначается дисто-буккальным бугорком зуба нижней челюсти.



18. Мезио-латеральный бугорок получает треугольный выступ по прямой линии к центральной ямке.



19. Резко выделенная дистальная планка переходит в Crista transversa.




20. Второй сильный стопор получается внизу мезио-палатинальной вершины бугорка. Его нужно слегка уменьшить с помощью маленькой ложечки.



21. Дисто-буккальный бугорок получает треугольный выступ от кончика конуса к Crista transversa.



22. После контроля с помощью окклюзионной пленки становится четко виден предлежащий элемент в нижней области треугольного выступа.

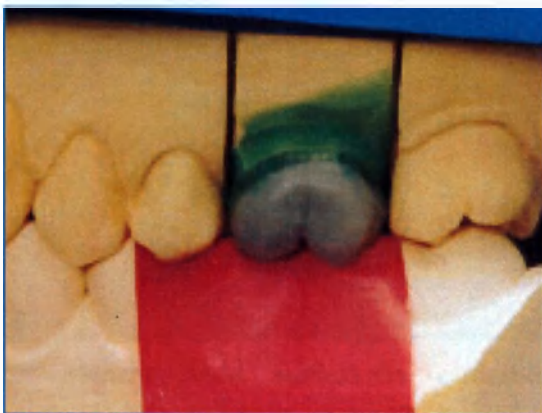

23. Четко выраженная вспомогательная планка дополняет дистобуккальный бугорок.




24. От вершины дистобуккального бугорка делается небольшой откос.



25. После этого проводится вспомогательная планка до апроксимального пространства к зубу 27.



26. Накладывается мезиальная вспомогательная планка мезиопалатиального бугорка.

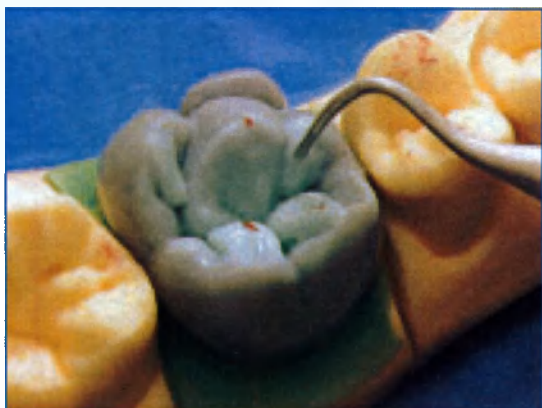


27. Моделируется дистальная вспомогательная планка на мезио-буккальном бугорке и дополняется мезиальной краевой планкой.



28. Результат - готовая коронка со всеми контактными точками.



29. Последний раз контролируется латеротрузия и медиотрузия.

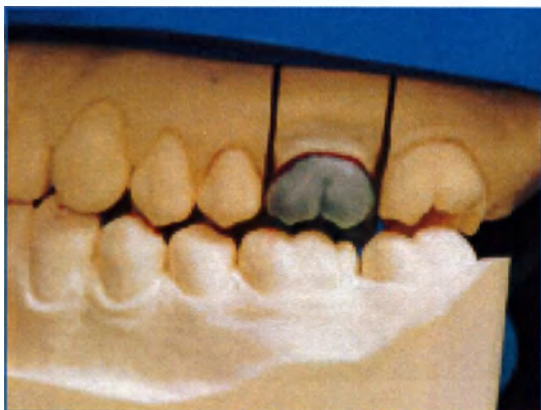

30. Отрезается и удаляется лишний погружной воск



31. Универсальным инструментом укорачивается цервикальный край.




32. По краю коронки по кругу наносится пришеечный воск.



33. Излишки воска удаляются клинком. Край прижимается и выравнивается.

34. Результат – готовая смоделированная коронка.

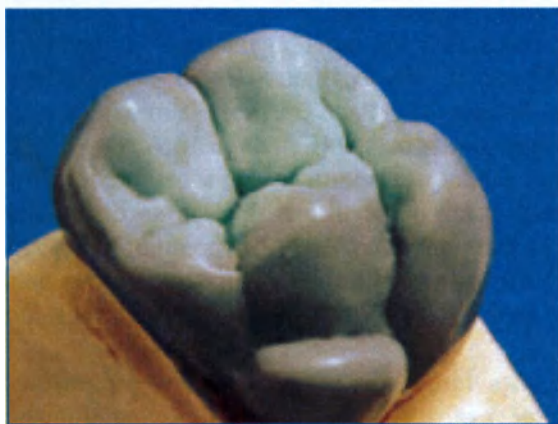

После этого восковая модель помещается в кювету, в которую заливается подготовленная паковочная масса. После затвердения паковочной массы муфель вынимается из кюветы и помещается в муфельную печь. Восковая модель полностью выгорает. В полученную форму заливается металл или запрессовывается керамика.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОСКОВ

Функциональное моделирование с помощью восков GEO Classic, GEO Classic Avantgarde, GEO Crowax



Функциональное моделирование - стандартный метод воскового моделирования для создания анатомически правильной формы протеза. В зависимости от собственных предпочтений и целей зубной техник может выбирать наиболее подходящий цвет воска (бежевый, серый, мята, синий, белый, дентин, зеленый, красный). Опаковые воски служат для моделирования опакowych слоев протеза, а прозрачные – для прозрачных слоев. Воски цвета дентин (Воск моделировочный дентин, опак GEO Classic Natural, Воск моделировочный дентин, прозрачный GEO Classic Natural) позволяют создавать натурально выглядящие модели.

Монолитное моделирование с помощью восков GEO Expert A. Bruguera

Моделировочные воска GEO Expert A. Bruguera специально разработаны для моделирования монолитных восковых моделей при изготовлении коронок и мостов. Воска были разработаны при содействии зубного техника Августа Бругуеры в соответствии с его философией создания восковых моделей.

При монолитном моделировании воспроизводится точная анатомическая форма, но не воспроизводятся цветовая гамма и прозрачность естественных зубов.

Эстетическое моделирование с помощью восков GEO Expert A. Bruguera

Помимо обычного монолитного моделирования моделировочные воски GEO Expert A. Bruguera применяются для эстетического моделирования.

Целью эстетического моделирования является создание модели визуально близкой к естественным зубам. Это позволяет зубному технику, врачу-стоматологу и пациенту точно представить, оценить будущую реставрацию и при необходимости произвести корректировку восковой модели до ее перевода в керамику. При изготовлении восковой модели для достижения естественной морфологии зуба используются воски цветов дентин, эмаль и прозрачный воск: Воск моделировочный дентин, opak GEO Expert A. Bruguera; Воск моделировочный эмаль, прозрачный GEO Expert A. Bruguera; Воск моделировочный прозрачный GEO Expert translucent A. Bruguera.

Для придания модели индивидуальных цветовых особенностей, характерных для пациента, используются эффектные воски разных цветов: Воск моделировочный белый, opak GEO Expert effect A. Bruguera; Воск моделировочный оранжевый, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera; Воск моделировочный синий, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera; Воск моделировочный коричневый, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera.

С помощью восков GEO Expert Gingiva A. Bruguera с целью более эффективного эстетического моделирования можно создать восковую модель десны.





9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Воски моделировочные GEO Classic Avantgarde



— Узкий диапазон температуры плавления идеально соответствуют требованиям моделирования при помощи электрошпателя;


- Матовость для максимально четких контуров и контроля;
- Отлично подходит для скобления.

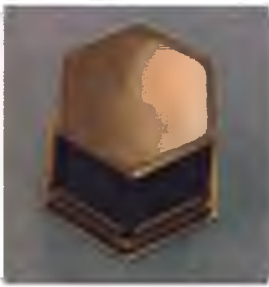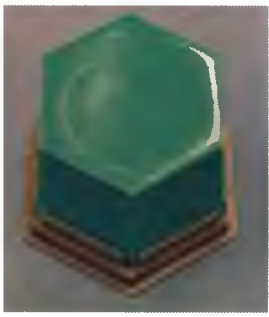Воск моделировочный бежевый, opak GEO Classic Avantgarde, 75 гр.		Состав: парафин – 87% микрокристаллический воск – 12% красители: Азокраситель - 0,05%, CI 77891 – 0,95%
Воск моделировочный серый, opak GEO Classic Avantgarde, 75 гр.		Состав: парафин – 87% микрокристаллический воск – 12% красители: carbon black - 0,1%, CI 77891 – 0,85%, Антрахиноновый краситель – 0,05%
Воск моделировочный мята, opak GEO Classic Avantgarde, 75 гр.		Состав: парафин – 87% микрокристаллический воск – 12% флуоресцентный пигмент – 0,05% краситель: CI 77891 – 0,95%

Размеры (мм):



62

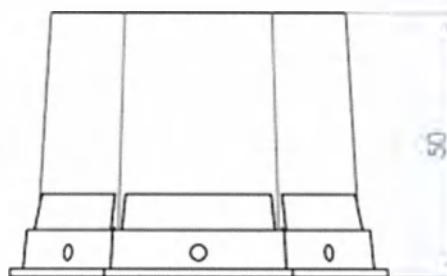

Температура применения восков GEO Classic Avantgarde: 125-140°C

Температура каплепадения (плавления): 61-63 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2


Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,7-1,0 мм.

Масса воска: 75 гр.



Упаковка: Пластиковое основание с прозрачной пластиковой крышкой.

Размеры упаковки (мм): 62*71,6*57

Воски моделировочные GEO Classic

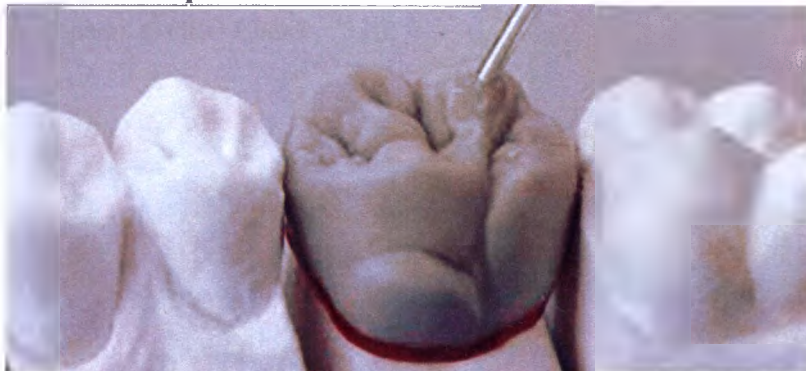


- Широкий диапазон плавления облегчает быстрое нанесение и охлаждение без внутреннего напряжения;
- Высокая точность припасовки;
- Прозрачные воски сгорают без остатка;
- Опаковые моделировочные воски лучше всего подходят для изготовления обычных реставраций посредством литья;
- Очень хорошие качества для скобления обеспечивают простое и быстрое моделирование;
- Оптимально подходят для формирования жевательных поверхностей.

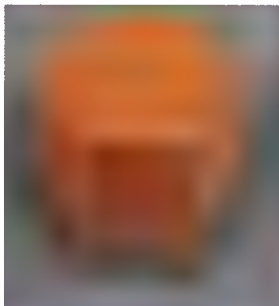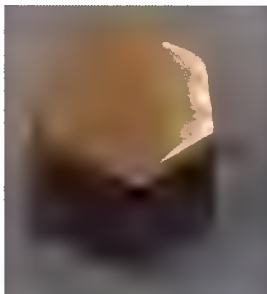Воск моделировочный бежевый, opak GEO Classic, 75 гр.		Состав: парафин – 60% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: CI 77891 – 0,95%, Антрахиноновый краситель – 0,05%
Воск моделировочный серый, opak GEO Classic, 75 гр.		Состав: парафин – 60% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: CI 77891 – 0,95%, carbon black – 0,05%
Воск моделировочный мята, opak GEO Classic, 75 гр.		Состав: парафин – 60% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: CI 77891 – 0,95%, CI 625580 – 0,05%

Воск моделировочный синий, прозрачный GEO Classic, 75 гр.		Состав: парафин – 60% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% краситель: Антрахиноновый краситель – 1%
Воск моделировочный мята, прозрачный GEO Classic, 75 гр.		Состав: парафин – 60% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: Антрахиноновый краситель – 0,85% Пиразолон – 0,15%

Размеры (мм):

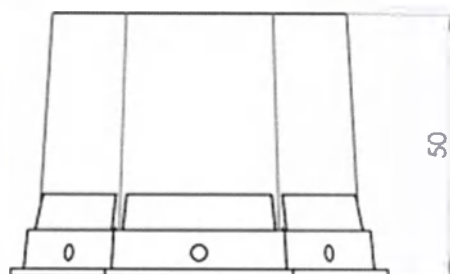

Размеры блоков воска массой 20 гр. (мм): 50*44*15,5

Температура применения восков GEO Classic: 120-135°C

Температура каплепадения (плавления): 74-80 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,7-1,0 мм.

Масса воска: 75 гр.

Упаковка: Пластиковое основание с прозрачной пластиковой крышкой.

Размеры упаковки (мм): 62*71,6*57


Воски моделировочные GEO Classic Snow-white



- Быстрое и точное изготовление белых восковых моделей Wax-up для функционального планирования на диагностических и рабочих моделях.;
- Отлично поддается моделированию и скоблению;
- Матовость – хорошо покрывает при нанесении тонким слоем.

Воск моделировочный белый, опак GEO Classic Snow-white, 75 гр.		Состав: парафин – 63,5% микрокристаллический воск – 35% краситель: CI 77891 – 1,5%
Воск моделировочный белый, прозрачный GEO Classic Snow-white, 75 гр.		Состав: парафин – 64,5% микрокристаллический воск – 35% краситель: CI 77891 – 0,5%

Размеры (мм):

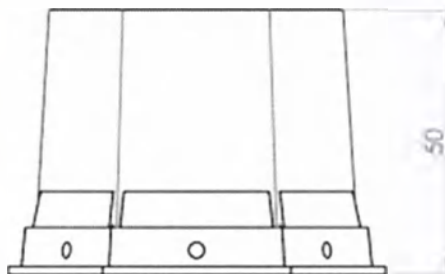

Температура применения восков GEO Classic Snow-white: 110-140°C

Температура каплепадения (плавления): 74-78 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2


Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,7-1,1 мм.

Масса воска: 75 гр.


Упаковка: Пластиковое основание с прозрачной пластиковой крышкой.

Размеры упаковки (мм): 62*71,6*57


Воски моделировочные GEO Classic Natural

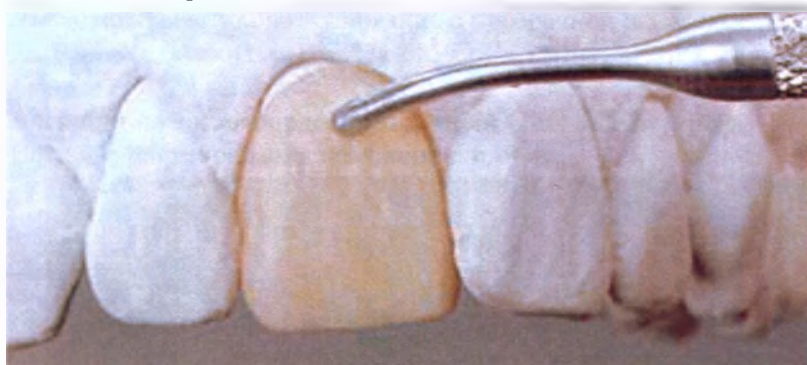

- Простое изготовление натурально выглядящих моделей с помощью прозрачного или opakового моделировочного воска, имеющего цвет дентина;
- Широкий диапазон плавления облегчает быстрое нанесение;
- Высокая точность припасовки.

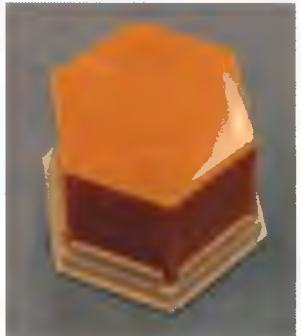
Воск моделировочный дентин, opak GEO Classic Natural, 75 гр.		Состав: парафин – 59,95% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: CI 77891 – 1%, Азокраситель - 0,04%, CI 564100 – 0,01%
Воск моделировочный дентин, прозрачный GEO Classic Natural, 75 гр.		Состав: парафин – 60,47% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: CI 77891 – 0,5%, Азокраситель - 0,03%

Размеры (мм):

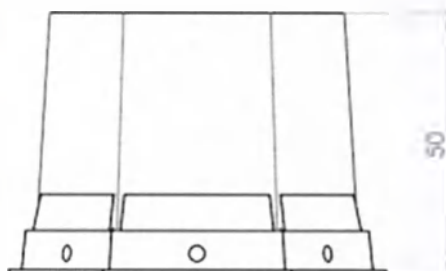

Температура применения восков GEO Classic Natural: 120-135°C
 Температура каплепадения (плавления): 74-80 °C
 Тип воска по характеристикам текучести - 2
 Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,5-1,1 мм.
 Масса воска: 75 гр.
 Упаковка: Пластиковое основание с прозрачной пластиковой крышкой.
 Размеры упаковки (мм): 62*71,6*57


Воск пришеечный бордо, прозрачный GEO Classic, 75 гр.
 Воск для формирования края коронки.

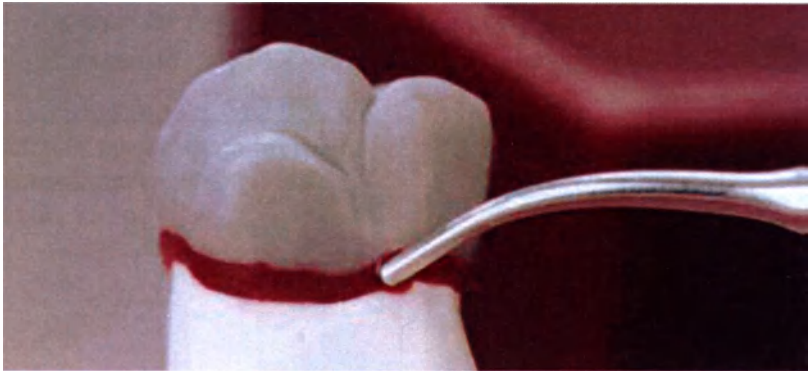

- Позволяет создать точную и тонкую границу препарирования;
- Высокая точность припасовки;
- Очень хорошие качества для скобления;
- Сгорает без остатка.

Воск пришеечный бордо, прозрачный GEO Classic, 75 гр.		Состав: парафин – 39,6% микрокристаллический воск – 13% эфирный воск – 25% полиэтиленовый воск – 16% пальмовый воск – 6% краситель: Азокраситель - 0,4%
--	--	--

Размеры (мм):

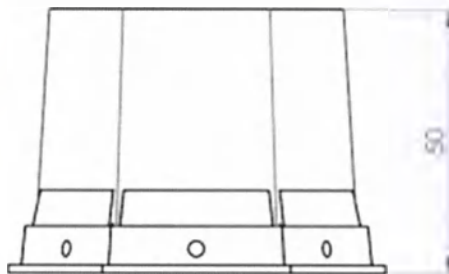

Температура применения Воска пришеечного бордо, прозрачный GEO Classic, 75 гр.: 125-150°C
 Температура каплепадения (плавления): 68-71 °C
 Тип воска по характеристикам текучести - 2
 Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,5-0,9 мм.

Масса воска: 75 гр.

Упаковка: Пластиковое основание с прозрачной пластиковой крышкой.

Размеры упаковки (мм): 62*71,6*57

Воск для закрытия поднутрений красный, прозрачный GEO Classic, 75 гр.

Этот воск предназначен для блокирования поднутрений, полостей или неровностей на гипсовых моделях в технике модельного литья и коронок.


- Не меняет размеров при термической нагрузке;
- Идеален при дублировании с помощью дублировочного геля и агар-агар;
- Прекрасно сочетается с обычными силиконами;
- Идеальные качества для скобления позволяют легко проводить удаление материала.

Воск для закрытия поднутрений
красный, прозрачный GEO
Classic, 75 гр.



Состав:
парафин – 36,8%
микрокристаллический воск – 35%
эфирный воск – 14%
полиэтиленовый воск – 6%
пальмовый воск – 8%
краситель:
CI26125 - 0,2%

Размеры (мм):

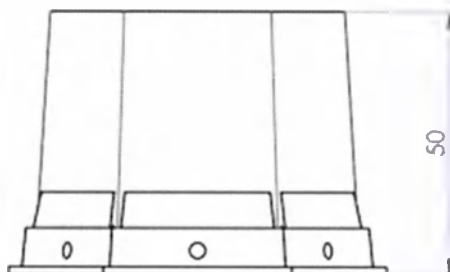

Температура применения Воска для закрытия поднутрений красный, прозрачный GEO Classic, 75 гр.: 120-155°C

Температура каплепадения (плавления): 63-67 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,9-1,2 мм.

Масса воска: 75 гр.

Упаковка: Пластиковое основание с прозрачной пластиковой крышкой.

Размеры упаковки (мм): 62*71,6*57

Воск фрезерный синий, опак GEO Classic, 75 гр.

Фрезерный воск подходит для моделирования телескопических или конусных коронок и замковых креплений.

- Идеально подходит для механической обработки фрезами или инструментами для скобления;
- Незначительное образование стружки;


- При обработке с рекомендуемым числом оборотов между 2500 и 5000 об/мин восковая стружка не мажется и не прилипает к твердосплавным фрезам и к фрезам и скребкам для воска;
- Гладкая, с четко выраженными гранями, поверхность и воска.

Воск фрезерный синий, opak GEO Classic, 75 гр.



Состав:
парафин – 65,35%
микрокристаллический воск – 18%
эфирный воск – 6,5%
полиэтиленовый воск – 9%
красители:
CI74160 - 0,25%,
CI77891 - 0,9%

Размеры (мм):

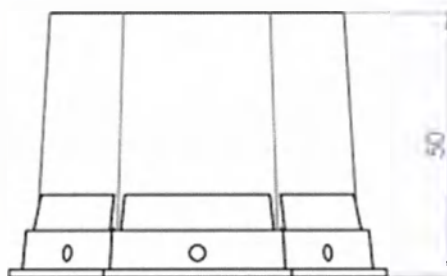

Температура применения Воска фрезерного синий, opak GEO Classic, 75 гр.: 125-155°C

Температура каплепадения (плавления): 65-68 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,4-0,8 мм.

Масса воска: 75 гр.



Упаковка: Пластиковое основание с прозрачной пластиковой крышкой.

Размеры упаковки (мм): 62*71,6*57

Воски моделировочные GEO Crowax

С помощью экономичных моделировочных восков линии Geo Crowax можно выполнять любые реставрации в технике изготовления коронок и мостовидных протезов, а также бюгелей.

- Свойства воска соответствуют самому широкому спектру применения;
- Идеален для прецизионных работ, например, при изготовлении частичных коронок, вкладок, накладок, больших мостовидных протезов;
- Прозрачный воск сгорает без остатка.

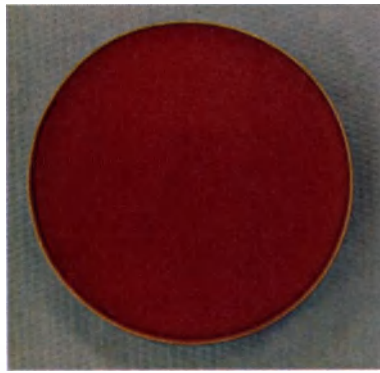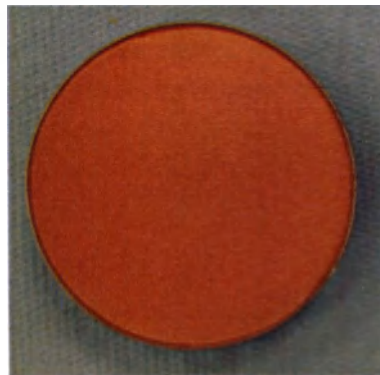Воск моделировочный зеленый, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.		Состав: парафин – 69,97% микрокристаллический воск – 30% красители: Пиразолон – 0,05%, Азокраситель - 0,01%, Антрахиноновый краситель – 0,27%
Воск моделировочный синий, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.		Состав: парафин – 69,77% микрокристаллический воск – 30% красители: Пиразолон – 0,02%, CI 74160 - 0,2%, Антрахиноновый краситель – 0,01%
Воск моделировочный красный, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.		Состав: парафин – 69,2% микрокристаллический воск – 30% краситель: Азокраситель - 0,8%,
Воск моделировочный бежевый, опак GEO Crowax, 80 гр.		Состав: парафин – 69,32% микрокристаллический воск – 30% красители: Пиразолон – 0,02%, Азокраситель - 0,02%, CI 74160 – 0,01% CI 77891 – 0,65%


Воск моделировочный серый,
опак GEO Crowax, 80 гр.



Состав:
парафин – 68%
микрокристаллический воск – 30%
красители:
CI 74160 – 0,5%
CI 77891 – 1%

Упаковка: жестяная банка с крышкой.

Размеры упаковки (мм):

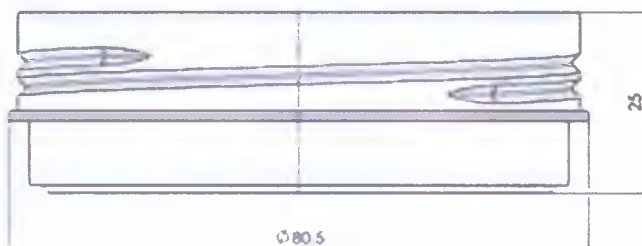

Температура применения восков GEO Crowax: 115-135°C

Температура каплепадения (плавления): 70-76 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,9-1,3 мм.

Масса воска: 80 гр.

Воск для закрытия поднутрений красный, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.

Этот воск предназначен для блокирования поднутрений, полостей или неровностей на гипсовых моделях в технике модельного литья и коронок.

- Не меняет размеров при термической нагрузке;
- Идеален при дублировании с помощью дублировочного геля и агар-агар;
- Прекрасно сочетается с обычными силиконами;
- Идеальные качества для скобления позволяют легко проводить удаление материала.


Воск для закрытия поднутрений
красный, прозрачный GEO
Crowax, 80 гр.



Состав:
парафин – 36,7%
микрокристаллический воск – 35%
эфирный воск – 14%
полиэтиленовый воск – 6%
пальмовый воск – 8%
краситель:
CI26125 - 0,3%

Упаковка: жестяная банка с крышкой.

Размеры упаковки (мм):

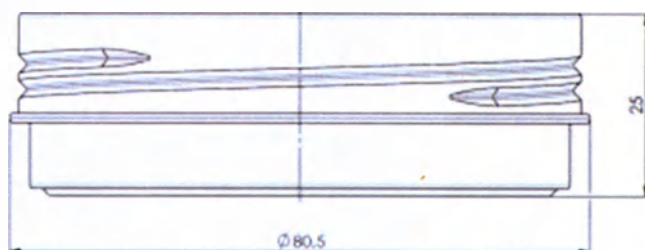

Температура применения Воска для закрытия поднутрений красный, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.: 120-155°C

Температура каплепадения (плавления): 63-67 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,9-1,2 мм.

Масса воска: 80 гр.

Воски моделировочные GEO Expert A. Bruguera


Благодаря эстетическому моделированию (wax-up) восками GEO Expert A. Bruguera, пациент, зубной врач и зубной техник могут точно представить себе и оценить будущую реставрацию. Такое моделирование помогает достичь оптимальной согласованности между пациентом, стоматологическим кабинетом и зуботехнической лабораторией. Данные воски также можно использовать при монолитном и обычном моделировании.

- Простое воспроизведение естественных форм и оттенков зубов с помощью инструкции Августа Бругуеры. Создание идентичной натуральной, реалистичной модели wax-up;
- Быстрое и чистое моделирование восковой модели (wax-up) с помощью моделировочных и эффектных восков, обладающих превосходными свойствами для моделирования и скобления;
- Прецизионное моделирование даже самых мелких структур, как бугры и мамелоны.

Воск моделировочный дентин, opak GEO Expert A. Bruguera, 40 гр.		Состав: парафин – 59,93% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: Perinon – 0,01%, CI 77891 – 1,0%, Пиразолон – 0,05% Антрахиноновый краситель - 0,01%
Воск моделировочный эмаль, прозрачный GEO Expert A. Bruguera, 40 гр.		Состав: парафин – 60,9% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% краситель: CI 77891 – 0,1%

Воск моделировочный opak GEO Expert sculpture A. Bruguera, 40 гр.		Состав: парафин – 59,5% микрористаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: CI 77891 – 1,0%, carbon black – 0,5%
Воск моделировочный прозрачный GEO Expert translucent A. Bruguera, 40 гр.		Состав: парафин – 60,95% микрористаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% краситель: CI 77891 – 0,05%

Размеры (мм):

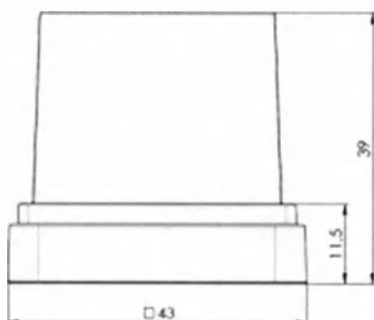




Масса воска: 40 гр.

Упаковка: Пластиковое основание в картонной коробке

Размеры упаковки (мм): 50*50*50

Эффектные воски GEO Expert A. Bruguera для придания модели индивидуальных особенностей и еще большей естественности:

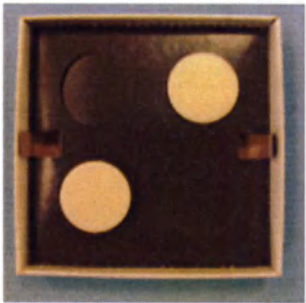Воск моделировочный белый, opak GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр, 2 шт/уп.		Состав: парафин – 59,25% микрористаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% краситель: CI 77891 – 1,75%
---	---	--

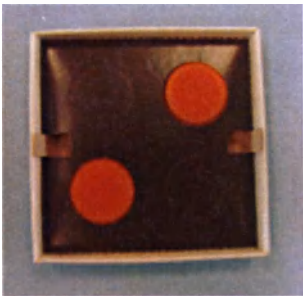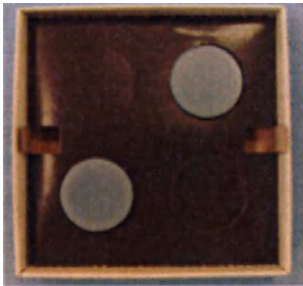Воск моделировочный оранжевый, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр, 2 шт/уп.		Состав: парафин – 60,93% микrokристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% краситель: Азокраситель – 0,07%
Воск моделировочный синий, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр, 2 шт/уп.		Состав: парафин – 60,97% микrokристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: Азокраситель – 0,01%, Антрахиноновый краситель – 0,02%
Воск моделировочный коричневый, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр, 2 шт/уп.		Состав: парафин – 57,8% микrokристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: Азокраситель – 2,1% carbon black – 1,1%

Размеры (мм):



Масса элемента воска: 4 гр. Упаковка содержит 2 элемента.

Упаковка: Картонная коробка

Размеры упаковки (мм): 85*85*20

Температура применения восков GEO Expert A. Bruguera: 115-140°C

Температура каплепадения (плавления): 74-80 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,5-1,1 мм.

Воск пришеечный красно-оранжевый GEO Expert Cervical A. Bruguera, 40 гр.


Воск для формирования края коронки.

- Позволяет создать точную и тонкую границу препарирования;
- Высокая точность припасовки;
- Очень хорошие качества для скобления;

– Сгорает без остатка.

Воск пришеечный красно-оранжевый GEO Expert Cervical A. Bruguera, 40 гр.		Состав: парафин – 36,3% микрокристаллический воск – 35% эфирный воск – 14% полиэтиленовый воск – 6% пальмовый воск – 8% красители: Perinon -1,6%, CI12475 - 0,12% Антрахиноновый краситель – 0,02%
---	---	---

Размеры (мм):

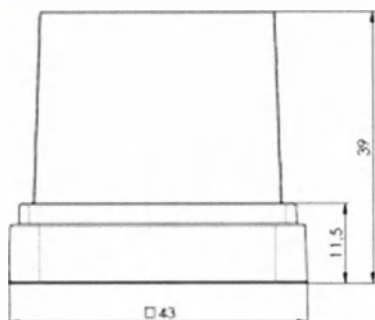

Масса воска: 40 гр.

Упаковка: Пластиковое основание в картонной коробке

Размеры упаковки (мм): 50*50*50

Температура применения Воска пришеечного красно-оранжевый GEO Expert Cervical A. Bruguera: 120-155°C

Температура каплепадения (плавления): 63-67 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,5-0,9 мм.

Воски моделировочные GEO Expert Gingiva A. Bruguera, 40 гр.

Воски предназначены для эстетического моделирования десны.

- Простое воспроизведение естественных форм и оттенков десны с помощью инструкции Августа Бругуеры. Создание идентичной натуральной, реалистичной модели wax-up;
- Быстрое и чистое моделирование восковой модели (wax-up).


Воск моделировочный красный GEO Expert Gingiva A. Bruguera, 40 гр.		Состав: парафин – 60,8% микрокристаллический воск – 30% воск Монтан – 5% пальмовый воск – 4% красители: Perinon – 0,09%, Азокраситель – 0,03%, Антрахиноновый краситель - 0,08%
---	---	--

Воск моделировочный розовый
GEO Expert Gingiva A. Bruguera,
40 гр.



Состав:
парафин – 60,7%
микрокристаллический воск
– 30%
воск Монтан – 5%
пальмовый воск – 4%
краситель:
СП12475 - 0,3%

Размеры (мм):

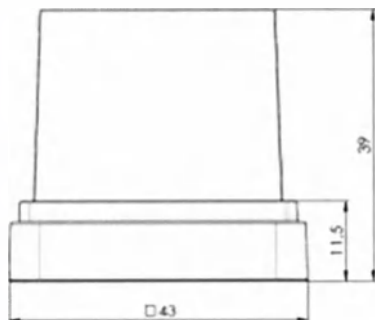

Масса воска: 40 гр.

Упаковка: Пластиковое основание в картонной коробке.

Размеры упаковки (мм): 50*50*50

Температура применения восков GEO Expert Gingiva A. Bruguera: 115-140°C

Температура каплепадения (плавления): 74-80 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,5-1,1 мм.

Воск погружной желтый GEO Rewax, 210 гр.

Твердый, неэластичный погружной воск с отличными формовочными качествами. Служит для создания основы для воскового моделирования. Используется с электрическими воскотопками.



Температура применения воска погружного желтый GEO Rewax: 91-93°C

Температура каплепадения (плавления): 81-83 °C

Тип воска по характеристикам текучести - 2

Пенетрация согласно DIN 51579 – 0,7-1,2 мм.

Масса воска в упаковке: 210 гр.

Состав:

парафин – 41,85%

микрокристаллический воск – 58%

красители:

Perinon - 0,05%

Пиразолон – 0,1%

Упаковка – пластиковая.

Размеры упаковки (мм):



10. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Медицинское изделие «Воск стоматологический для изготовления зубных протезов», производства Renfert GmbH, Германия безопасно для окружающей среды.

11. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами при температуре от -10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

12. МАРКИРОВКА

Этикетка на упаковке содержит следующую информацию:

- Наименование медицинского изделия;
- Каталожный номер;
- Номер и срок действия регистрационного удостоверения медицинского изделия;
- Количество штук в упаковке;
- Штрих-код;
- Наименование фирмы-производителя;
- Логотип фирмы-производителя;
- Адрес фирмы-производителя;
- Температура при транспортировке и хранении;
- Относительная влажность воздуха при транспортировке и хранении.

13. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить изделия следует закрытыми в оригинальной упаковке производителя в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре от +15°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Срок годности изделий – не ограничен.

14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Остатки воска могут быть утилизированы с обычным мусором.

Категория опасности – класс А.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На территории Российской Федерации претензии по гарантии и качеству продукции направляются:

1. ООО «Дентал АВ», Россия, 191014, г. Санкт-Петербург, Коневский пер.,9, тел.: +7(812) 2757585 , факс: +7(812) 6470611, email: info@dentalav.ru, сайт: www.dentalav.ru
2. ООО «Рокада-Дент» , Россия, 420107 ,г.Казань, ул.Петербургская,26 . тел. +7(843)5706880, факс: +7(843)5706882, email: mail@rocadamed.ru, сайт: www.rocadamed.ru
3. Группа компаний СИМКО, Россия, 105064 , Москва, Нижний Сусальный пер., 7 кор. 7, тел.: +7(495)7378003, факс: +7(495)7373826, email: orders@simkodent.ru, сайт: www.simkodent.ru
4. ООО «МайДент24», Россия, 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, 7, кор. 2., тел./факс +7(495)5105624, email: info@mydent24.ru, сайт: www.mydent24.ru
5. ООО «УралКвадромед», Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 64-10, тел.: +7 343 2047337, факс: +7 343 2627160, email: ved@uqm.ru, сайт: <http://uqm.ru/>
6. ООО ПВП «Контакт», Россия, 662521 п. Березовка, Красноярск. кр., ул. Солнечная 1а/3, e-mail: info@contact-kr.ru
7. (ООО «МедТехКомплект»), Россия, 125252, г. Москва, улица Куусинена, д. 19А, оф. 118 Тел. +7 (499) 530-12-24, +7 (499) 198-81-09; medkomplekt@bk.ru.

16. ОРГАНИЗАЦИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Данное изделие производится: Renfert GmbH, Germany, 78247 Hilzingen, Untere Gießwiesen 2, Tel: 00 49 77 31/ 82 08 0, Fax: 00 49 77 31/ 82 08 70, e-mail : info@renfert.com.

17. СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1. Воск моделировочный бежевый, opak GEO Classic Avantgarde, 75 гр.
2. Воск моделировочный серый, opak GEO Classic Avantgarde, 75 гр.
3. Воск моделировочный мята, opak GEO Classic Avantgarde, 75 гр.
4. Воск моделировочный бежевый, opak GEO Classic, 75 гр.
5. Воск моделировочный серый, opak GEO Classic, 75 гр.
6. Воск моделировочный мята, opak GEO Classic, 75 гр.
7. Воск моделировочный синий, прозрачный GEO Classic, 75 гр.
8. Воск моделировочный мята, прозрачный GEO Classic, 75 гр.
9. Воск моделировочный белый, opak GEO Classic Snow-white, 75 гр.
10. Воск моделировочный белый, прозрачный GEO Classic Snow-white, 75 гр.
11. Воск моделировочный дентин, opak GEO Classic Natural, 75 гр.

12. Воск моделировочный дентин, прозрачный GEO Classic Natural, 75 гр.
13. Воск GEO Classic (фрезерный синий, opak GEO Classic, 20 гр.; для закрытия поднутрений красный, прозрачный GEO Classic, 20 гр.; моделировочный мята, прозрачный GEO Classic, 20 гр.; моделировочный белый, прозрачный GEO Classic Snow-white, 20 гр.; моделировочный дентин, opak GEO Classic Natural, 20 гр.; моделировочный серый, opak GEO Classic Avantgarde, 20 гр.)
14. Воск пришеечный бордо, прозрачный GEO Classic, 75 гр.
15. Воск для закрытия поднутрений красный, прозрачный GEO Classic, 75 гр.
16. Воск фрезерный синий, opak GEO Classic, 75 гр.
17. Воск моделировочный зеленый, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.
18. Воск моделировочный синий, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.
19. Воск моделировочный красный, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.
20. Воск моделировочный бежевый, opak GEO Crowax, 80 гр.
21. Воск моделировочный серый, opak GEO Crowax, 80 гр.
22. Воск для закрытия поднутрений красный, прозрачный GEO Crowax, 80 гр.
23. Воск моделировочный дентин, opak GEO Expert A. Bruguera, 40 гр.
24. Воск моделировочный эмаль, прозрачный GEO Expert A. Bruguera, 40 гр.
25. Воск моделировочный opak GEO Expert sculpture A. Bruguera, 40 гр.
26. Воск моделировочный прозрачный GEO Expert translucent A. Bruguera, 40 гр.
27. Воск пришеечный красно-оранжевый GEO Expert Cervical A. Bruguera, 40 гр.
28. Воск моделировочный белый, opak GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр, 2 шт/уп.
29. Воск моделировочный оранжевый, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр, 2 шт/уп.
30. Воск моделировочный синий, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр, 2 шт/уп.
31. Воск моделировочный коричневый, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр, 2 шт/уп.
32. Воск моделировочный GEO Expert A. Bruguera (дентин, opak GEO Expert A. Bruguera, 40 гр.; эмаль, прозрачный GEO Expert A. Bruguera, 40 гр.; opak GEO Expert sculpture A. Bruguera, 40 гр.; прозрачный GEO Expert translucent A. Bruguera, 40 гр.; белый, opak GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр.; оранжевый, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр.; синий, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр.; коричневый, прозрачный GEO Expert effect A. Bruguera, 4 гр.)
33. Воск моделировочный красный GEO Expert Gingiva A. Bruguera, 40 гр.
34. Воск моделировочный розовый GEO Expert Gingiva A. Bruguera, 40 гр.
35. Воск моделировочный GEO Expert Gingiva A. Bruguera (красный GEO Expert Gingiva A. Bruguera, 40 гр.; розовый GEO Expert Gingiva A. Bruguera, 40 гр.)
36. Воск погружной желтый GEO Rewax, 210 гр.

Зорен Хуг (Sören Hug)

Sören Hug

Управляющий Директор (Geschäftsführer)
Ренферт ГмбХ (Renfert GmbH)

RENFERT GmbH
Untere Gießwiesen 2
78247 Hitzingen
www.renferf.com

Unterschriftsbeglaubigung

Ich beglaubige hiermit öffentlich die Echtheit der vorseitigen heute vor mir eigenhändig vollzogenen Unterschrift von

Herrn Sören Sven **Hug**, geb. am 29.12.1983,
geschäftsansässig Untere Gießwiesen 2, 78247 Hilzingen
- persönlich bekannt -

Die Notarin ist der verwendeten ausländischen Sprache nicht mächtig.

Singen, den 27.03.2017

Notariat II Singen

Strommaier
Notarin





В конце документа:

Печать: Ренферт ГмбХ (Renfert GmbH)

Унтере Гисвизен 2, 78247, г. Хильцинген, Германия

www.renfert.com

Зорен Хуг /Подпись/

II UR 346/2017

Подтверждение подлинности подписи

Настоящим я подтверждаю подлинность подписи, поставленной сегодня в моем присутствии собственноручно

г-ном Зёрен Свен **Хуг**, дата рождения: 29.12.1983, рабочий адрес: Унтере Гисвизен 2, 78247 г. Хильцинген, представившего свое удостоверение личности.

Г. Зинген, 27/03/ 2017 г.

Нотариат II Зинген

/Подпись/

Штромайер

Нотариус

Печать нотариуса: Нотариат Зинген (Хоэнтвиль)

Нотариус: Штромайер /подпись/

Печать на марке сшития на обороте: Печать нотариуса: Нотариат Зинген (Хоэнтвиль)

Переводчик

Краплин Денис Александрович

Российская Федерация

Город Москва.

Тридцать первого марта две тысячи семнадцатого года.

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность, подписи переводчика Краплина Дениса Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: №

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:---

Е.Е. Прокошенкова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 33 лист(а, ов).

Е.Е. Прокошенкова