

УТВЕРЖДЕН

Приказом Росздравнадзора

от _____ № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «АМТ трейд»

А.Ю. Пучков
2008г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению МОЧЕПРИЕМНИКА МУЖСКОГО ЛАТЕКСНОГО «ММ-АМТ»

Мочеприемник предназначен для мужчин, страдающих недержанием мочи в ночное время.

Мочеприемник состоит из мочеулавливателя, клапана, резервуара со сливным устройством, фиксирующих колец.

Комплектность:

1. Мочеприемник в сборе

(мочеулавливатель, клапан, резервуар, трубка с пробкой)

- 1 шт

2. Мочеулавливатель

- 9 шт

3. Кольцо

- 4 шт

Комплект рассчитан на эксплуатацию в течение 10 суток, мочеулавливатель – однократного применения в течение 1-х суток.

Применение

Мочеприемник со скатанным мочеулавливателем плотно приставить к головке полового члена и, раскатывая край, надеть его до основания полового члена, за петли прикрепить мочеприемник к индивидуальному поясу.

Для опорожнения мочеприемника необходимо вынуть пробку и слить содержимое.

Ежедневно необходимо производить замену мочеулавливателя, для этого снять фиксирующее кольцо с мочеулавливателем и клапаном, промыть клапан и резервуар кипяченой водой (30°-40°С), высушить на воздухе, опудрить внутреннюю поверхность резервуара тальком во избежание слипания, затем надеть новый мочеулавливатель на клапан и зафиксировать его кольцом.

За время эксплуатации допускается 3-кратная дезинфекция мочеприемника 1-% раствором хлорамина в течение 30 минут при комнатной температуре.

Запрещается

Обрабатывать мочеприемники спиртовыми растворами, маслами, кислотами, растворителями.

Подвергать мочеприемник кипячению.


Сушить мочеприемник при прямом воздействии солнечных лучей и вблизи отопительных приборов.

Хранение

Мочеприемник должен храниться в закрытом помещении при температуре от 15° до 25°С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок хранения – 2 года.


Технолог

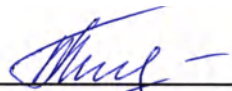
(подпись)

Тюрина Г.В.

Генеральный директор

ООО «АМТ трейд»

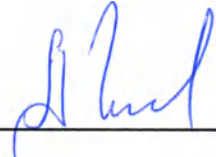

Пучков А.Ю.