

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО "Медиа"



З. В. Казиненко

"

1994 г.

ЗОНД СИЛИКОНОВЫЕ ДЛЯ ОСТАНОВКИ
КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВЕН ПИЩЕВОДА

Этикетка

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИ

Минздрава



З. В. Казиненко
"14"

1994

№ подл. Подп. и дата Взам. инв. № инв. № подл. и дата

Перв. примен.

13

Подп. и дата
Взвешив. и дата
Изм. и дата
Изм. и дата

Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом (исполнение - У, категория размещения - 6).

Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода предназначены для обеспечения лечения больных с кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода при портальной гипертензии в хирургических отделениях клиник и больниц.

Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода изготовлены из силиконовой резины и представляют собой трубку, имеющую с одного конца два фиксированно раздувающихся баллона, а с другого конца - узел разведения каналов зонда; выпускаются шести маркоразмеров

Марка	Наружный диаметр по шкале Шарьера	Длина
ЗСКП-18-I	18	1000
ЗСКП-24-I	24	1000
ЗСКП-30-I	30	1000
ЗСКП-18-I,5	18	1500
ЗСКП-24-I,5	24	1500
ЗСКП-30-I,5	30	1500

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Зонды устойчивы к пяти циклам стерилизации химическим методом (6 % перекись водорода) согласно ОСТ 42-21-2-85.

				Этикетка		
Изм. и дата	Подп.	Изм. и дата	Подп.	Изм. и дата	Подп.	Изм. и дата
Разраб.	Валетова	Проф.	Горшков	Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода		
И.контр.	Засухина				Лист 1	Лист 2
				Лист 3		
				АО "МедСил"		

ХРАНЕНИЕ

Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 2(С).

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода соответствует ТУ 9436-005-18037666-94 и признаны годными для эксплуатации.

Количество комплектов в одной упаковке - I шт.

Дата выпуска _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения зондов - I год с момента изготовления.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты зондов от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

При работе с зондами не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации.

У. № подл. Подп. и дата
взоп. инв. инв. № дубл. одп. и дата

Этикетка

