




ЗОНДЫ СИЛИКОНОВЫЕ
ДЛЯ ДЕКОМПРЕССИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА

Этикетка

СОГЛАСОВАНО

/Директор ВНИИМТ АООТ

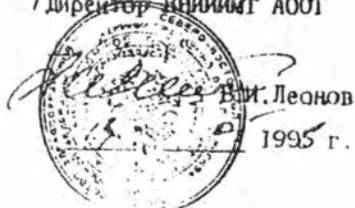

1995

Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом (исполнение - У, категория - 6).

Зонды предназначены для лечения различных контингентов больных при неотложных состояниях и хронических заболеваниях в хирургических отделениях клиник и больниц.

Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта выпускаются маркоразмеров, приведенных в табл. I.

Таблица I

Марка	Наружный диаметр, Д, мм	Внутренний диаметр, д, мм	Общая длина, Л, мм
ЗДС Б 9	3,0 $\pm$ 0,2	1,5 $\pm$ 0,1	1400 $\pm$ 50
ЗДС Б 12	4,0 $\pm$ 0,1	2,0 $\pm$ 0,1	400 $\pm$ 10
ЗДС Б 12	4,0 $\pm$ 0,2	2,0 $\pm$ 0,1	1400 $\pm$ 50
ЗДС Б 14	4,6 $\pm$ 0,1	2,6 $\pm$ 0,1	400 $\pm$ 10
ЗДС Б 15	5,0 $\pm$ 0,2	3,0 $\pm$ 0,2	1400 $\pm$ 50
ЗДС Б 16	5,3 $\pm$ 0,1	3,3 $\pm$ 0,1	400 $\pm$ 10
ЗДС Б 18	6,0 $\pm$ 0,2	3,5 $\pm$ 0,2	1400 $\pm$ 50
ЗДС Б 18	6,0 $\pm$ 0,1	4,0 $\pm$ 0,1	400 $\pm$ 10
ЗДС Б 24	8,0 $\pm$ 0,2	5,0 $\pm$ 0,2	1400 $\pm$ 50
ЗДС Б 33	11,0 $\pm$ 0,2	8,0 $\pm$ 0,2	1400 $\pm$ 50
ЗДС Б 24	8,0 $\pm$ 0,2	5,0 $\pm$ 0,2	3000 $\pm$ 50
ЗДС Б 33	11,0 $\pm$ 0,2	8,0 $\pm$ 0,2	3000 $\pm$ 50
ЗДСК Б 24	8,0 $\pm$ 0,2	5,0 $\pm$ 0,2	3000 $\pm$ 50
ЗДСК Б 33	11,0 $\pm$ 0,2	8,0 $\pm$ 0,2	3000 $\pm$ 50
ЗДСУ Б 24	8,0 $\pm$ 0,2	5,0 $\pm$ 0,2	3000 $\pm$ 50
ЗДСУ Б 33	11,0 $\pm$ 0,2	8,0 $\pm$ 0,2	3000 $\pm$ 50

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта

Этикетка						
И.М.Ант.	С.А.Акут.	П.В.А.	Л.С.А.	Л.И.Т.	Л.И.С.У.	Л.И.С.А.К.
Резав	Валетова	Зав.		Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракта		
Р.А.	Голышев	Зав.				
Л.И.А.	С.А.С.А.	Зав.		АО "МедСил"		
				1	2	3

та устойчивость к 5-ти циклам обработки, состоящим из дезинфекции 3 % перекисью водорода, предстерилизационной очистки ручьями способом и стерилизации химическим способом (6 % перекисью водорода) согласно ОСТ 42-21-2-85.

ХРАНЕНИЕ

Зонды силиконовые в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 2(С).

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Зонды силиконовые для декомпрессии желудочно-кишечного тракт. соответствуют ТУ 9436-012-18037666-96 и признаны годными для эксплуатации.


Количество комплектов в одной упаковке - 1 шт.

ДАТА ВЫПУСКА _____

КОНТРОЛЕР ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения - 1,5 года с момента изготовления.

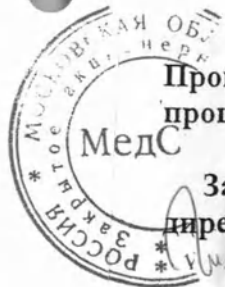

Пронумеровано и
проспуровано 2 листов

Зам. генерального
директора ЗАО «МедСил»
А. В. Горшков