


УТВЕРЖДАЮ

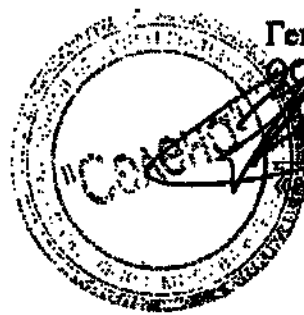

Генеральный директор
ООО «Селена»

С.Н. Белов

«23» ноября 2009 г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тест для определения беременности

(«ЕВА» (EVA), «Первый ответ» (First Reply), модели: мидстрим, стрип (midstream, strip)).



зарегистрирован ФС № 2005/677

Инструкция

Пожалуйста, прочитайте всю информацию перед использованием теста.

Для наружной диагностики.
Не подходит
для внутреннего применения.

- не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке из фольги
- хранить в сухом месте при $t +4-30^{\circ}\text{C}$
- не замораживать
- хранить в недоступном для детей месте
- перед вскрытием упаковка должна быть комнатной температуры

Как использовать



- 1 - колпачок
- 2 - ввинчивающаяся часть
- 3 - держатель
- 4 - тестовое окно (Т)
- 5 - контрольное окно (С)

- выньте тест из упаковки и снимите колпачок
- возьмите за держатель так, чтобы ввинчивающаяся часть была направлена вниз, подставьте ее под струю мочи как минимум на 10 секунд и держите до тех пор, пока она не намочится в достаточной степени
- не допускать попадания мочи на тестовое и контрольное окна! по желанию можно собрать мочу в чистую сухую емкость, затем опустить ввинчивающую часть теста в мочу как минимум на 10 секунд
- сразу после извлечения теста положите его на ровную поверхность контрольными окнами вверх и засеките время
- как только тест начнет работать, Вы заметите светло-красный поток, идущий через тест и контрольное окно

Если две линии (линии) должны появиться максимум через 1 минуту, если ни одной красной линии не появилось, подождите еще одну минуту, иногда результаты видны уже через одну минуту или раньше, в зависимости от концентрации ХГЧ. Нельзя рече интерпретировать результаты теста по прошествии 10 минут

Для проведения теста рекомендуется сократить количество употребляемой жидкости. Вода разбавляет мочу и это может повлиять на выявление ХГЧ

Что означает
полученный результат

Т С
Вы беременны

две красные линии: одна – в тестовом окне (Т), другая – в контрольном окне (С) означает, что Вы вероятно беременны, одна линия может быть темнее другой, совпадение цвета не обязательно.

Т С
Вы не беременны

присутствие одной красной линии в контрольном окне (С) означает, что Вы вероятно не беременны.

Т С
Неверный результат

результат является неверным, если в контрольном окне (С) не появилось красной линии, даже в том случае, если в тестовом окне (Т) линия все же появилась. в этом случае следует повторить проведение теста, купив новый тест для определения беременности.





Первый ответ тест на беременность

● оптимальной для анализа является первая утренняя моча

● достоверность 99,9%

● не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке из фольги

● использовать только при температуре от +4 до +30°C

● хранить в недоступном для детей месте

● для максимальной точности должна быть комнатная температура

Инструкция

Пожалуйста, прочитайте всю информацию перед использованием теста.

Для наружной диагностики

Не подходит для внутреннего применения.

Как использовать

● вскройте пакет и извлеките тест-полоску, держа ее за окрашенный конец

● погружите тест-полоску вертикально в емкость с мочой так, чтобы впитывающая часть была направлена стрелочками вниз, до отметки «А», указанной стрелочками

● через 20-30 секунд выньте тест-полоску из емкости с мочой

● сразу после извлечения теста положите его на горизонтальную сухую поверхность впитывающей частью вверх и засекайте время

● как только тест начнет работать, Вы заметите слабое красное пятно, идущий через тест-полоску

красная линия (линии) должны появиться в течение 1-3 минут.

иногда результаты видны уже через одну минуту или раньше, в зависимости от концентрации ХГЧ.

нельзя расшифровывать результаты теста по прошествии 10 минут

Что означает полученный результат (Результат) - как интерпретировать результат теста



Одна линия:
в зоне контроля – Вы не беременны.



Две линии:
в зоне контроля и в тестовой зоне – Вы беременны.
Одна линия может быть бледнее, даже слабая тестовая линия свидетельствует о положительном результате.



Нет ни одной линии – неверный результат.
Повторить с новым тестом.

До проведения теста рекомендуется сократить количество употребляемой жидкости.

Вода разбавляет мочу и это может повлиять на выявление ХГЧ





EVA pregnancy test EVA

тест на беременность

- оптимальной для анализа является первая утренняя моча
- достоверность 99,9%
- не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке из фольги
- хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C
- хранить в недоступном для детей месте
- при вскрытии упаковки должна быть комнатной температуры

Инструкция

Пожалуйста, прочитайте всю информацию перед использованием теста.

Для наружной диагностики.

Не подходит для внутреннего применения.

Прочитайте инструкцию
Ознакомьтесь с рисунками
и иллюстрациями


Как использовать

- вскройте пакет и извлеките тест-полоску, держа ее за окрашенный конец
- погрузите тест-полоску вертикально в емкость с мочой так, чтобы впитывающая часть была направлена стрелочками вниз, до отметки «max», указанной стрелочками
- через 20-30 секунд выньте тест-полоску из емкости с мочой
- сразу после извлечения теста положите его на горизонтальную сухую поверхность впитывающей частью вверх и засекайте время
- как только тест начнет работать, Вы заметите светло-красный поток, идущий через тест-полоску

красная линия (линии) должна появиться в течение 1-5 минут.
иногда результаты видны уже через одну минуту или раньше,
в зависимости от концентрации ХГЧ.

нельзя расшифровывать результаты теста по прошествии 10 минут


Что означает полученный результат (10 минут после погружения в мочу)

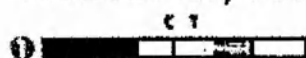


Одна линия:
в зоне контроля – Вы не беременны.



Две линии:
в зоне контроля и в тестовой зоне – Вы беременны.
Одна линия может быть бледнее, даже слабая тестовая
линия свидетельствует о положительном результате.

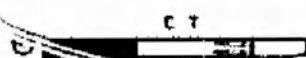

Нет одной линии – неверный результат.
Повторите с новым тестом.

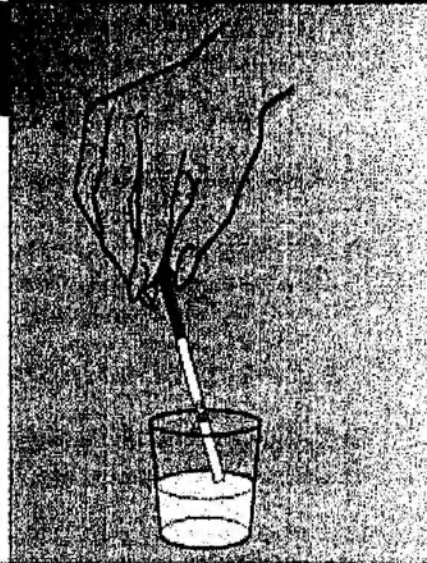

До проведения теста
рекомендуется
сократить количество
употребляемой
жидкости.

Вода разбавляет мочу
и это может повлиять
на выявление ХГЧ

В каждой упаковке 5 тест-полосок. Срок годности 12 месяцев. Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C.

