

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ**

ул. Электrozаводская, д. 46,  
Москва, 107023

тел.: (495) 963-57-18,  
факс: (495) 963-62-81  
e-mail: info@mfoo.ru

**Памятка потребителю**

**Руководство по эксплуатации**

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ НАШЕГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ.**

Для того, чтобы стелька ортопедическая длительное время сохраняла потребительские свойства, оказывала лечебный эффект, следует соблюдать следующие условия:

1. Эксплуатация ортопедических стелек должна производиться в строгом соответствии с назначением врача.
2. Сушка стелек ортопедических должна производиться ежедневно при комнатной температуре. Не допускается сушить стельки ортопедические на нагревательных поверхностях, радиаторах отопления.
3. При необходимости должна производиться санитарная обработка стелек ортопедических с применением мягкой ткани, смоченной теплой водой с детским мылом.
4. Не допускается прикосновение стелек с острыми предметами, красящими веществами, растворителями.
5. Срок хранения стельки ортопедической не более 1 года.

**Гарантии изготовителя**

1. При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения изготовитель гарантирует соответствие стельки ортопедической требованиям ТУ 9397-002-04535525-98
2. Гарантийный срок эксплуатации 30 дней с момента выдачи потребителю готовых изделий.  
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству стельки ортопедической и производит ремонт или безвозмездную замену стельки ортопедической, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

*Желаем Вам здоровья!*

И.о. директор



В.С. Титова