

CERTIFICATION OF COPY

אישור העתק

No. 102/17

מס' 102/17

I, the under- signed, **Gedalia Zisquit**, Notary  
at 5 Eliash Street Jerusalem, Israel

אני הח"מ, **גדליה זיסקוויט**, נטריון  
מרח' עליאש 5, ירושלים 9458605

hereby certify that the attached document  
marked "A" is an exact copy of the original  
document which was drawn up in the  
English language and has been produced to  
me.

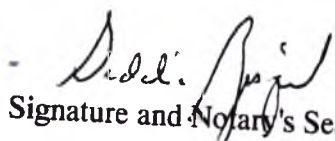
מאשר כי המסמך שלעיל המצורף והמסומן  
באות "A" הוא העתק מדוייק של המסמך  
המקורי שנערך בשפה האנגלית ושהוצג בפני.

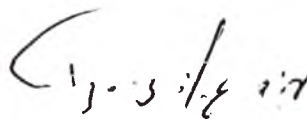
In witness whereof I certify the exactness  
of the attached copy and set my signature  
and seal, this 17th day of August , 2017

ולראייה הנני מאשר את דיוק ההעתק הנ"ל,  
בחתמת ידי ובחותמי היום 7 בפברואר, 2017

Fee in the amount of **306.00 N.I.S**  
including V.A.T. fees

שכר בסך **306.00 ₪** כולל מע"מ

  
Signature and Notary's Seal

  
חתימה וחותם נטריוני



אפרת כהן  
Efrat Cohen

אפרת כהן  
Efrat Cohen

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

## 1. STATE OF ISRAEL

This public document

2. Has been signed by

Advocate GEDALIA ZISOUIT

3. Acting in capacity of Notary

4. Bears the seal/stamp of the  
the above Notary

**Certified**

18-08-2017

5. At the Magistrates Court of Jerusalem

6. Date \_\_\_\_\_

7. By an official appointed by

Minister of Justice under the  
Notaries Law, 1976.

8. Serial number \_\_\_\_\_

9. Seal/Stamp \_\_\_\_\_

10. Signature \_\_\_\_\_



## 1. מדינת ישראל

מסמך ציבורי זה

2. נחתם בידי

עו"ד גדליה זיסוויט

3. המכהן בתור נוטריון.

4. נושא את החותם/החותמת

של הנוטריון הנ"ל

**אושר**

5. בבית משפט השלום בירושלים

6. ביום \_\_\_\_\_

7. על ידי מי שמונה בידי שר

המשטחים לפי חוק הנוטריונים,

התשל"ו - 1976

8. מס' סידורי 227

9. החותם / החותמת

10. חתימה

אפרת כהן  
Efrat Cohen

אפרת כהן  
Efrat Cohen

"A"

APPROVED BY

Managing Director

Barak Lavi

« 14 » August 2017

Biometrix Ltd  
Kiryat Mada 4  
Jerusalem 91450 Israel

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наборы для кардиохирургических операций  
(Biometrix Ltd («Биометрикс Лтд»), Израиль)

Версия 2.0

2017

70  
ליה  
7017  
EDA  
ISO  
\*

**Наименование изделия**

«Наборы для кардиоторакальных операций».

Производитель: Biometrix Ltd («Биометрикс Лтд»), Израиль.

Kiryat Mada 4, PO Box 45057, Jerusalem 91450, Israel.

Место производства:

Biometrix Ltd («Биометрикс Лтд»), Израиль.

Kiryat Mada 4, PO Box 45057, Jerusalem 91450, Israel.

Разработка, производство и продажа изделия соответствует требованиям EN ISO 13485:2012 (номер сертификата: 242В, дата выдачи – 24/03/2015, дата истечения действия – 23/03/2018, нотифицированный орган: AMTAC Certification Services Limited).

Код изделия по классификатору продукции ОКПД2: 32.50.13.190.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н – 2а.

Классификация изделия в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н – 327760.

Вид контакта с организмом человека – см. Таблица 1

Условия применения: лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения, только по назначению врача-специалиста.

**Область применения**

Наборы предназначены для проведения целого ряда кардиоторакальных хирургических процедур. Наборы не содержат лекарственных средства. Наборы предназначены для использования только в кардиоторакальной хирургии, но область его применения не ограничивается какими-то конкретными видами кардиоторакальных процедур.

**Техническая спецификация**

Применение готового медицинского набора сокращает время подготовки и ускоряет ход процедуры, облегчая тем самым выполнение работы персоналу, сводит к минимуму расходы на промежуточные упаковки и позволяет избежать открытия большого количества одноразовых упаковок — с каждой очередной упаковкой возрастает риск инфицирования стерильных материалов

**Материалы, из которого изготовлено изделие:**

**Таблица 1 - Материалы, из которого изготовлено изделие, вид контакта с организмом человека**

| Наименование                | Материал                                                                                                                                                                                                                                    | Вид контакта с организмом                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Банка дренажная Thorametrix | Трубки: Поливинилхлорид CAS #9002-86-2<br>Наконечник трубки: Силикон CAS# 7440-21-3, Краситель B8 (Blue)<br>Подставка, задняя часть: полистирол (ZUP)<br>Передняя часть: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)<br>Уплотнительные кольца: Силикон CAS# | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |

|                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               |       | 7440-21-3<br>Крючок: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель B8 (Blue)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| Бахилы хирургические                          |       | Двухслойный нетканый материал<br>1 слой – нетканое полотно из полипропиленовых волокон (Полипропилен (CAS: 9003-07-0))<br>Краситель B091 (Blue)<br>2 слой – Полиэтиленовая пленка (WEC-098)<br>Краситель B091 (Blue)                                                                                                          | Кратковременный контакт с неповрежденной кожей        |
| Выкусыватель аортальный                       |       | Нержавеющая сталь (AISI420)<br>Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)<br>Краситель W09 (white)<br>Колпачок: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель B1-1 (blue)<br>Индивидуальная упаковка: 70г медицинская бумага, ПЭТ 12мкм/ ПЭНП 60мкм                                                                                                 | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
| Губка для обработки операционного поля        |       | Полипропилен KongT CF031<br>Полиуретан (марка: 80A) CAS# 53504-41-9                                                                                                                                                                                                                                                           | Кратковременный контакт с раневой поверхностью        |
| Держатель трубок                              |       | Нейлон (марка B7soi)<br>краситель ru- A-15 (purple)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Опосредованный контакт                                |
| Держатель аспирационных трубок и катетеров    |       | Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)<br>Краситель B8 (Blue)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Опосредованный контакт                                |
| Держатель для электрохирургического карандаша |       | Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Опосредованный контакт                                |
| Игла инъекционная                             | 18 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ<br>УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>Игла: Нержавеющая сталь AISI304<br>Канюля: Полипропилен Purell HP37IP<br>Краситель: Pi16 (Pink)<br>Индивидуальная упаковка: медицинская немелованная бумага 60 г/см <sup>2</sup> и прозрачная пленка ПЭ/ПА   | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
|                                               | 21 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ<br>УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>Игла: Нержавеющая сталь AISI304<br>Канюля: Полипропилен Purell HP37IP<br>Краситель: Gr109 (Green)<br>Индивидуальная упаковка: медицинская немелованная бумага 60 г/см <sup>2</sup> и прозрачная пленка ПЭ/ПА |                                                       |

|                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                  | 22 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ<br>УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС<br>IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>Игла: Нержавеющая сталь AISI304<br>Канюля: Полипропилен Purell HP37IP<br>Краситель: Blck6 (Black)<br>Индивидуальная упаковка: медицинская<br>немелованная бумага 60 г/см2 и<br>прозрачная пленка ПЭ/ПА                                                        |                                                             |
|                                                  | 23 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ<br>УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС<br>IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>Игла: Нержавеющая сталь AISI304<br>Канюля: Полипропилен Purell HP37IP<br>Краситель: Bl6 (Blue)<br>Индивидуальная упаковка: медицинская<br>немелованная бумага 60 г/см2 и<br>прозрачная пленка ПЭ/ПА                                                           |                                                             |
|                                                  | 27 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ<br>УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС<br>IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>Игла: Нержавеющая сталь AISI304<br>Канюля: Полипропилен Purell HP37IP<br>Краситель: GR0g (Gray)<br>Индивидуальная упаковка: медицинская<br>немелованная бумага 60 г/см2 и<br>прозрачная пленка ПЭ/ПА                                                          |                                                             |
| Капельница для<br>внутривенных<br><b>инфузий</b> |       | Поливинилхлорид CAS #9002-86-2<br>100% Полиэтилен (CAS: · 9002-88-4)<br>Пластик АБС (CYCOLAC EX58F),                                                                                                                                                                                                                                                                              | Опосредованный контакт                                      |
| Катетер Фолея<br>силиконовый                     |       | Силикон CAS# 7440-21-3<br>Коннектор порта для раздувания: Пластик<br>АБС (CYCOLAC EX58F), краситель pink<br>(Pi16)/black (blc00)/gray (GR0g)/white<br>(W09)/green (Gr109)/orange (o-1-m)<br>Коннектор датчика температуры: Пластик<br>АБС (CYCOLAC EX58F), силикон CAS#<br>7440-21-3, краситель white (W09)<br><br>Индивидуальная упаковка: полиэтилен<br>низкой плотности (LLDE) | Постоянный контакт с<br>внутренней средой<br>организма      |
| Катетер<br>торакальный                           |       | Поливинилхлорид CAS #9002-86-2,<br>Рентгеноконтрастная линия: Платино-<br>иридиевый сплав (платина (CAS No.7440-<br>06-4)– 90%, иридий (CAS No. 7439-88-5) –<br>10%)<br>Коннектор: Поливинилхлорид CAS #9002-<br>86-2, краситель Bl-1 (blue)<br>Наконечник: Пластик АБС (CYCOLAC<br>EX58F), краситель Bl-1 (blue)                                                                 | Кратковременный контакт с<br>внутренней средой<br>организма |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            | Индивидуальная упаковка: медицинская немелованная бумага 60 г/см <sup>2</sup> и прозрачная пленка ПЭТ 12мкм/ПЭ 50 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| Коннектор Y-образный       | Поликарбонат CAS#25766-59-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Опосредованный контакт                                |
| Лезвие                     | Нержавеющая сталь (AISI420)<br>Индивидуальная упаковка: алюминиевая фольга 30 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
| Лента клейкая операционная | Основа: 100% полиэстер (CAS 113669-97-9)<br>Липкое покрытие: полиакрилатный клей (марка RA&K)<br>Силиконизированная бумага-подложка (060/AL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Опосредованный контакт                                |
| Лоток для инструментов     | Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель B1-1 (blue) или бесцветный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Опосредованный контакт                                |
| Лоток почкообразный        | Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель B1-1 (blue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Опосредованный контакт                                |
| Мешок для отходов          | 100% Полиэтилен (CAS: · 9002-88-4)<br>Липучка: синтетический каучук (CAS: 26702-92-1)<br>Силиконизированная бумага-подложка (060/AL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Опосредованный контакт                                |
| Мешок для диатермии        | 100% Полиэтилен (CAS: · 9002-88-4)<br>Краситель B091 (Blue)<br>Липучка: синтетический каучук (CAS: 26702-92-1)<br>Силиконизированная бумага-подложка (060/AL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Опосредованный контакт                                |
| Мочеприемник Urimetrix     | Корпус: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)<br>Шкала: краситель lpo (black)<br>Крышка корпуса: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель: bl14 (blue)<br><br>Краник, спираль, зажим: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель: bl30 (blue)<br><br>Фиксатор: полиэтилен высокой плотности (HDPE), марка: LM6007<br>краситель: bl30 (blue)<br><br>Трубка: поливинилхлорид CAS #9002-86-2<br>Колпачок: поливинилхлорид CAS #9002-86-2, краситель: bl30 (blue)<br><br>Наконечник: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель W09 (white) | Кратковременный контакт с неповрежденной кожей        |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <p>Емкость: Полиэтилен CAS# 9002-88-4<br/>Краситель (задняя часть) W09 (white)</p> <p>Индивидуальная упаковка: пленка ПЭТ 12 мкм \ПЭ 60 мкм и медицинская бумага (Tyvek 1073B)</p>                                                                                        |                                                                        |
| Организатор для игл и лезвий магнитный                          | <p>Корпус:<br/>Пластик АБС (CYCOLAC EX58F),<br/>краситель: oploN (red)<br/>Подушечка: Пенополиэтилен (PE-F)<br/>Надписи: краситель B6 (Black).<br/>Липкое покрытие: полиакрилатный клей (марка RA&amp;K)<br/>Магнитная подложка: феррит (BaO-6 (Fe2O3).) (марка PC01)</p> | Опосредованный контакт                                                 |
| Организатор для инструментов                                    | Пластик АБС (CYCOLAC EX58F),<br>краситель B1-1 (blue)                                                                                                                                                                                                                     | Опосредованный контакт                                                 |
| Отсос Yankauer                                                  | Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)                                                                                                                                                                                                                                               | Кратковременный контакт с кровью и лимфой                              |
| Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша    | Полипропилен cas: 9003-07-0)                                                                                                                                                                                                                                              | Опосредованный контакт                                                 |
| Перчатки хирургические                                          | <p>Натуральный каучук (LA-1)</p> <p>Индивидуальная упаковка: медицинская бумага</p>                                                                                                                                                                                       | Кратковременный контакт с неповрежденной кожей, с раневой поверхностью |
| Пленка хирургическая клейкая                                    | <p>Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07270<br/>Декларация о соответствии РОСС US.ИМ22.Д01096 от 21.07.2015</p>                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Пленка кардиохирургическая Ioban                                | РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/09345                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| Покрытие одноразовое для стола Mayo                             | <p>Полиэтилен (cas 9002-88-4)<br/>Краситель B091 (Blue))<br/>Усиливающий слой:<br/>вискоза (80%), полиэфир (20%) (Fibrella)<br/>Краситель B091 (Blue)</p>                                                                                                                 | Опосредованный контакт                                                 |
| Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария | <p>Двухслойный нетканый материал<br/>1 слой – нетканое полотно из полипропиленовых волокон (Полипропилен (CAS: 9003-07-0))<br/>Краситель B091 (Blue)<br/>2 слой – Полиэтиленовая пленка (WEC-098)<br/>Краситель B091 (Blue)</p>                                           | Опосредованный контакт                                                 |
| Полотенце хирургическое                                         | <p>100% хлопок<br/>Краситель: Краситель B091 (Blue)</p>                                                                                                                                                                                                                   | Кратковременный контакт с неповрежденной кожей                         |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>Простыня<br/>кардиохирургическая</p>    | <p>Основная часть: 55% - целлюлозы (CAS 9004-34-6) и 45% - полиэстера (CAS 113669-97-9)<br/>Накладка:<br/>1 слой: нетканое полотно из полипропиленовых волокон (Полипропилен (CAS: 9003-07-0)), Краситель B091 (Blue))<br/>2 слой: полиэтилен (cas 9002-88-4) краситель B091 (Blue)<br/>Инцизная плёнка (Полиуретановая пленка CAS NO:9009-54-5, покрытая полиакрилатным клеем (марка PA&amp;K)<br/>Липучка: синтетический каучук (CAS: 26702-92-1)<br/>Силиконизированная бумага-подложка (060/AL)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Кратковременный контакт с неповрежденной кожей</p> |
| <p>Простыня<br/>одноразовая с липучкой</p> | <p>50x75 см, 75x100 см, 100x100 см:<br/>Двухслойный нетканый материал<br/>1 слой – вискоза (80%), полиэфир (20%) (Fibrella)<br/>Краситель B091 (Blue)<br/>2 слой – Полиэтиленовая пленка (WEC-098)<br/>Краситель B091 (Blue)<br/>Липучка: синтетический каучук (CAS: 26702-92-1)<br/>Силиконизированная бумага-подложка (060/AL)</p> <p>200x160 см:<br/>SMS (нетканое полотно из полипропиленовых волокон (100% Полипропилен (CAS: 9003-07-0)) Краситель B091 (Blue)<br/>Усиление:<br/>1 слой – нетканое полотно из полипропиленовых волокон (100% Полипропилен (CAS: 9003-07-0)) Краситель B091 (Blue)<br/>2 слой – спанлейс (вискоза (70%), полиэфир (30%)) марка Sontara<br/>3 слой - Полиэтиленовая пленка (WEC-098)<br/>Краситель B091 (Blue)<br/>Липучка: синтетический каучук (CAS: 26702-92-1)<br/>Силиконизированная бумага-подложка (060/AL)</p> <p>90x160 см:<br/>55% - целлюлозы (CAS · 9004-34-6) и 45% - полиэстера (CAS 113669-97-9)<br/>Краситель B091 (Blue)</p> | <p>Кратковременный контакт с неповрежденной кожей</p> |

|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                      | Липучка: синтетический каучук (CAS: 26702-92-1)<br>Силиконизированная бумага-подложка (060/AL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Простыня одноразовая                              |                      | 1 слой: нетканое полотно из полипропиленовых волокон (Полипропилен (CAS: 9003-07-0)), Краситель B091 (Blue))<br>2 слой: полиэтилен (cas 9002-88-4) краситель B091 (Blue)                                                                                                                                                                                                                                        | Кратковременный контакт с неповрежденной кожей        |
| Ручка-держатель с электродом электрохирургическим |                      | Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07652<br>Декларация о соответствии РОСС IT.AB57.Д01901 от 25.02.2016<br><br>Корпус: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)<br>Кнопки: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель Bl-1 (blue) и Y10 (yellow)<br>Электрод: Нержавеющая сталь AISI302<br>Кабель: Поливинилхлорид CAS #9002-86-2, краситель Bl-1 (blue)<br>Колпачок: Поливинилхлорид CAS #9002-86-2, краситель Y10 (yellow) | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
| Салфетки впитывающие шарикообразные               |                      | Отбеленное хлопковое волокно (100% хлопок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
| Салфетка впитывающая                              |                      | Вискоза (90%), пропилен (10%) (TNT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кратковременный контакт с раневой поверхностью        |
| Салфетки и впитывающие многослойные               | рентгенконтрастные   | Отбеленное хлопковое волокно (100% хлопок)<br>Рентгенконтрастная нить: Полипропилен-филаменты, содержащие сульфат бария (мин. 60%) и обшитые полиэстеровой нитью (марка: Micropake 632). Окрашены красителем Ultramarine Blau C1.77007                                                                                                                                                                          | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
|                                                   | нерентгенконтрастные | Отбеленное хлопковое волокно (100% хлопок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| Салфетки рентгенконтрастные                       |                      | Хлопковая марля (100% хлопок)<br>Рентгенконтрастная петля: Полипропилен-филаменты, содержащие сульфат бария (мин. 60%) и обшитые полиэстеровой нитью (марка: Micropake 632). Окрашены красителем Ultramarine Blau C1.77007                                                                                                                                                                                      | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
| Скальпель с рукояткой                             |                      | Лезвие: Нержавеющая сталь (AISI420)<br>Рукоятка: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F), краситель Bl-1 (blue)<br>Защитный колпачок: Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)                                                                                                                                                                                                                                                           | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
| Турникет                                          |                      | Силикон CAS# 7440-21-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| Трубка аспирационная                              |                      | поливинилхлорид CAS #9002-86-2<br>Коннектор: поливинилхлорид CAS #9002-86-2, краситель W09 (white)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Опосредованный контакт                                |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем | SMS (нетканое полотно из полипропиленовых волокон (100% Полипропилен (CAS: 9003-07-0))<br>Краситель B091 (Blue)<br>Манжеты: полиэстер (CAS 113669-97-9)<br>Усиление: нетканое полотно из полипропиленовых волокон (Полипропилен (CAS: 9003-07-0))<br>ламинированный полиэтиленовой пленкой (cas 9002-88-4)<br>Полотенце: 55% - целлюлозы (CAS · 9004-34-6) и 45% - полиэстера (CAS 113669-97-9) | Кратковременный контакт с неповрежденной кожей        |
| Халат хирургический стандартный                   | SMS (нетканое полотно из полипропиленовых волокон (100% Полипропилен (CAS: 9003-07-0))<br>Краситель B091 (Blue)<br>Манжеты: полиэстер (CAS 113669-97-9)                                                                                                                                                                                                                                         | Кратковременный контакт с неповрежденной кожей        |
| Чаша                                              | Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)<br>Краситель B3 (Blue)/без красителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Опосредованный контакт                                |
| Шприцы                                            | Цилиндр: Полипропилен (PP, CAS №: 9003-07-0).<br>Поршень: полиэтилен высокой плотности (марка LM6007)<br>Уплотнитель шприца: АБС-смола (YIMENGL/C)<br>Краситель - B6 (Black).<br>Градировка – Краситель B6 (Black).                                                                                                                                                                             | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
| Шприцы для промывания                             | Цилиндр: Полипропилен (PP, CAS №: 9003-07-0).<br>Поршень: полиэтилен высокой плотности (марка LM6007)<br>Уплотнитель шприца: АБС-смола (YIMENGL/C)<br>Краситель - B6 (Black).<br><br>Градировка – Краситель B6 (Black).                                                                                                                                                                         | Кратковременный контакт с внутренней средой организма |
| Чехол на аппаратуру                               | 100% Полиэтилен (CAS: · 9002-88-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Опосредованный контакт                                |

Комплект поставки изделия приведен в таблице 2

Таблица 2- Комплект поставки

| Наименование набора                              | Состав набора                                                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                  | Комплектующие                                                                                                                                                                      | Количество    |
| Набор для операции аортокоронарного шунтирования | Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт          |
|                                                  | Высасыватель аортальный                                                                                                                                                            | Не более 3 шт |
|                                                  | Держатель трубок                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт |
|                                                  | Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA)                                                                                                                              | Не более 5 шт |
|                                                  | Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36                                                                                                                                     | Не более 5 шт |

|                                        |                                                                                                                                                                                   |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                        | Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                                                                                                                                                   |                 |
|                                        | Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr)                                                                                                         | Не более 3 шт   |
|                                        | Лезвие (№11, №15, №20, №22)                                                                                                                                                       | Не более 5 шт   |
|                                        | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                        | Не более 5 шт   |
|                                        | Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                               | Не более 5 шт   |
|                                        | Лоток почкообразный (700 мл, 3000 мл)                                                                                                                                             | Не более 4 шт   |
|                                        | Мешок для отходов                                                                                                                                                                 | Не более 5 шт   |
|                                        | Мочеприемник Urimetrix.                                                                                                                                                           | Не более 1 шт   |
|                                        | Организатор для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                            | Не более 3 шт   |
|                                        | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                    | Не более 3 шт   |
|                                        | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                      | Не более 2 шт   |
|                                        | Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                   | Не более 15 пар |
|                                        | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, <b>150 x 250 см</b> , 137 x 150 см)                                                               | Не более 4 шт   |
|                                        | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                                                                                              | Не более 4 шт   |
|                                        | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                           | Не более 15 шт  |
|                                        | Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                           | Не более 5 шт   |
|                                        | Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                | Не более 15 шт  |
|                                        | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                 | Не более 2 шт   |
|                                        | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                                                                                      | Не более 400 шт |
|                                        | Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                              | Не более 400 шт |
|                                        | Турникет                                                                                                                                                                          | Не более 15 шт  |
|                                        | Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                     | Не более 4 шт   |
|                                        | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL)                                                                                                                   | Не более 10 шт  |
|                                        | Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL)                                                                                                                                     | Не более 6 шт   |
|                                        | Чаши (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл)                                                                                          | Не более 15 шт  |
|                                        | Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                                          | Не более 10 шт  |
| Набор для пластики митрального клапана | Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл) | 1 шт            |
|                                        | Держатель для электрохирургического карандаша                                                                                                                                     | Не более 2 шт   |
|                                        | Держатель трубок                                                                                                                                                                  | Не более 5 шт   |
|                                        | Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA)                                                                                                                             | Не более 5 шт   |
|                                        | Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32Fr, 36 Fr, <b>прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr</b> )                                                                                             | Не более 5 шт   |
|                                        | Лоток для инструментов (с одним отделением, с                                                                                                                                     | Не более 5 шт   |

|                                           |                                                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                           | четырьмя отделениями)                                                                                                                                                               |                 |
|                                           | Лоток почкообразный (700 мл, 3000 мл)                                                                                                                                               | Не более 4 шт   |
|                                           | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                           | Мочеприемник Urimetrix.                                                                                                                                                             | 1 шт            |
|                                           | Организер для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                                | Не более 3 шт   |
|                                           | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3 шт   |
|                                           | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                           | Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                     | Не более 15 пар |
|                                           | Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см)                                                                                                                                | Не более 5 шт   |
|                                           | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                         | Не более 5 шт   |
|                                           | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                                                                                                | Не более 4 шт   |
|                                           | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                           | Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                             | Не более 5 шт   |
|                                           | Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                  | Не более 5 шт   |
|                                           | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |
|                                           | Салфетки впитывающие шарикообразные (45 мм, 50 мм)                                                                                                                                  | Не более 100 шт |
|                                           | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                                                                                        | Не более 400 шт |
|                                           | Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                                | Не более 100 шт |
|                                           | Скальпель с рукояткой (№11, №15, № 23)                                                                                                                                              | Не более 6 шт   |
|                                           | Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                       | Не более 4 шт   |
|                                           | Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL)                                                                                                                                       | Не более 6 шт   |
|                                           | Чашки (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл)                                                                                           | Не более 15 шт  |
|                                           | Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                                            | Не более 10 шт  |
|                                           | Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                          | Не более 10 шт  |
| Набор для имплантации митрального клапана | Банка дренажная Thorametrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                           | Бахилы хирургические (8 x 27 см, 45 x 100 см, 30 x 60 см)                                                                                                                           | Не более 4 пар  |
|                                           | Держатель аспирационных трубок и катетеров                                                                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                           | Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA)                                                                                                                               | Не более 5 шт   |
|                                           | Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                                                                                                      | Не более 5 шт   |
|                                           | Катетер Фолея силиконовый (6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr)                                                                                                                  | Не более 3 шт   |

|                                                            |                                                                                                                                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                            | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                                                                                        | Не более 10 шт  |
|                                                            | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                                            | Лоток почкообразный (700 мл, 3000 мл)                                                                                                                                               | Не более 4      |
|                                                            | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                                            | Мочеприемник Urimetrix                                                                                                                                                              | 1 шт            |
|                                                            | Органайзер для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                            | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3 шт   |
|                                                            | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                                            | Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                     | Не более 15 пар |
|                                                            | Пленка кардиохирургическая Ioban (90 x 45 см, 60 x 35 см)                                                                                                                           | Не более 3 шт   |
|                                                            | Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9x 35 см)                                                                                                                                 | Не более 4 шт   |
|                                                            | Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)-                                                                         | Не более 3 шт   |
|                                                            | Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                             | Не более 5 шт   |
|                                                            | Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                  | Не более 20 шт  |
|                                                            | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |
|                                                            | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                                                                                        | Не более 400 шт |
|                                                            | Салфетки впитывающие шарикообразные (45 мм, 50 мм)                                                                                                                                  | Не более 100 шт |
|                                                            | Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                                | Не более 100 шт |
|                                                            | Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                       | Не более 4 шт   |
|                                                            | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL)                                                                                                                     | Не более 10 шт  |
|                                                            | Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL)                                                                                                                                       | Не более 6 шт   |
|                                                            | Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                                            | Не более 10 шт  |
|                                                            | Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                          | Не более 10 шт  |
| Набор для операции аортокоронарного шунтирования – 2 шунта | Банка дренажная Thorametrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                                            | Выкусыватель аортальный                                                                                                                                                             | Не более 3 шт   |
|                                                            | Держатель трубок                                                                                                                                                                    | Не более 5 шт   |
|                                                            | Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA)                                                                                                                               | Не более 5 шт   |
|                                                            | Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32Fr, 36 Fr)                                                                                                        | Не более 5 шт   |
|                                                            | Катетер Фолея силиконовый ( 6Fr, 8Fr, 10 Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr)                                                                                                                | Не более 3 шт   |
|                                                            | Коннектор Y-образный                                                                                                                                                                | Не более 2 шт   |
|                                                            | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                                                                                        | Не более 5 шт   |

|                                        |                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                        | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                        | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                                | Не более 5 шт   |
|                                        | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                        | Мочеприемник Urimetrix.                                                                                                                                                             | 1 шт            |
|                                        | Организер для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                                | Не более 3 шт   |
|                                        | Организер для инструментов                                                                                                                                                          | Не более 2 шт   |
|                                        | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3 шт   |
|                                        | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                        | Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                     | Не более 15 пар |
|                                        | Пленка хирургическая клейкая                                                                                                                                                        | Не более 4 шт   |
|                                        | Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                          | Не более 4 шт   |
|                                        | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                        | Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                             | Не более 5 шт   |
|                                        | Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                  | Не более 20 шт  |
|                                        | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |
|                                        | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                                                                                                       | Не более 400 шт |
|                                        | Салфетки рентгенконтрастные (размер 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                         | Не более 100 шт |
|                                        | Трубка аспирационная                                                                                                                                                                | Не более 4 шт   |
|                                        | Турникет                                                                                                                                                                            | Не более 15 шт  |
|                                        | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                        | Халат хирургический стандартный ( S, M, L, XL)                                                                                                                                      | Не более 6 шт   |
|                                        | Чаша ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                                                                                          | Не более 15 шт  |
|                                        | Шприцы ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                                           | Не более 10 шт  |
|                                        | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                         | Не более 10 шт  |
| Набор для операции аортального клапана | Банка дренажная Thorametrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                        | Бахилы хирургические ( 8 x 27 см, 45 x 100 см, 30 x 60 см)                                                                                                                          | Не более 4 пар  |
|                                        | Держатель трубок                                                                                                                                                                    | Не более 5 шт   |
|                                        | Катетер Фолея силиконовый ( 6Fr, 8Fr, 10 Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr)                                                                                                                | Не более 3 шт   |
|                                        | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                                                                                        | Не более 12     |
|                                        | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                        | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                                | Не более 5 шт   |
|                                        | Лоток почкообразный ( 700 мл, 3000 мл)                                                                                                                                              | Не более 4 шт   |

|                                                    |                                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                    | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                | Не более 4 шт   |
|                                                    | Мешок для отходов                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                                    | Мочеприемник Urimetrix.                                                                                      | 1 шт            |
|                                                    | Организер для игл и лезвий магнитный                                                                         | Не более 3 шт   |
|                                                    | Отсос Yankauer                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                    | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                 | Не более 2 шт   |
|                                                    | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                             | Не более 20 пар |
|                                                    | Пленка хирургическая клейкая                                                                                 | Не более 4 пар  |
|                                                    | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) | Не более 5 шт   |
|                                                    | Полотенце хирургическое                                                                                      | Не более 15 шт  |
|                                                    | Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                      | Не более 5      |
|                                                    | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)          | Не более 20 шт  |
|                                                    | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                            | Не более 2 шт   |
|                                                    | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                                | Не более 400 шт |
|                                                    | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                        | Не более 200 шт |
|                                                    | Трубка аспирационная                                                                                         | Не более 4 шт   |
|                                                    | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                             | Не более 10 шт  |
|                                                    | Халат хирургический стандартный ( S, M, L, XL)                                                               | Не более 6 шт   |
|                                                    | Чашки ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                  | Не более 15 шт  |
|                                                    | Шприцы ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                                    | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                  | Не более 10 шт  |
| Набор для интраоперационной радиочастотной абляции | Лента клейкая операционная                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                                    | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                         | Не более 5 шт   |
|                                                    | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                | Не более 3 шт   |
|                                                    | Мешок для отходов                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                                    | Организер для игл и лезвий магнитный                                                                         | Не более 3 шт   |
|                                                    | Отсос Yankauer                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                    | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                 | Не более 2 шт   |
|                                                    | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) | Не более 4 шт   |
|                                                    | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                     | Не более 5 шт   |
|                                                    | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)          | Не более 20 шт  |
|                                                    | Ручка-держатель с электродом                                                                                 | Не более 2 шт   |

|                                      |                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                      | электрохирургическим                                                                                         |                 |
|                                      | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                                | Не более 400 шт |
|                                      | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                        | Не более 400 шт |
|                                      | Трубка аспирационная                                                                                         | Не более 4 шт   |
|                                      | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                             | Не более 10 шт  |
|                                      | Чашы ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                   | Не более 15 шт  |
|                                      | Чашы ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                   | Не более 15 шт  |
| Набор для повторного вмешательства   | Лента клейкая операционная                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                      | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                         | Не более 5 шт   |
|                                      | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                | Не более 4 шт   |
|                                      | Мешок для отходов                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                      | Организатор для игл и лезвий магнитный                                                                       | Не более 3 шт   |
|                                      | Отсос Yankauer                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                      | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                 | Не более 2 шт   |
|                                      | Покрывало для камеры                                                                                         | Не более 4 шт   |
|                                      | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) | Не более 3 шт   |
|                                      | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                     | Не более 5 шт   |
|                                      | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)          | Не более 20 шт  |
|                                      | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                            | Не более 2 шт   |
|                                      | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                                | Не более 400 шт |
|                                      | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                        | Не более 100 шт |
|                                      | Трубка аспирационная                                                                                         | Не более 4 шт   |
|                                      | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                             | Не более 10 шт  |
|                                      | Чашы ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                   | Не более 15 шт  |
|                                      | Чашы ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                   | Не более 15 шт  |
| Набор для миниинвазивной торакотомии | Лента клейкая операционная                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                      | Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                          | Не более 5 шт   |
|                                      | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                | Не более 4 шт   |
|                                      | Мешок для отходов                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                      | Организатор для игл и лезвий магнитный                                                                       | Не более 3 шт   |
|                                      | Организатор для инструментов                                                                                 | Не более 2 шт   |
|                                      | Отсос Yankauer                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                      | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                 | Не более 2 шт   |
|                                      | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) | Не более 3 шт   |

|                                                 |                                                                                                          |                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                 | Полотенце хирургическое                                                                                  | Не более 15 шт  |
|                                                 | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                     | Не более 4 шт   |
|                                                 | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                 | Не более 5 шт   |
|                                                 | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)      | Не более 20 шт  |
|                                                 | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                        | Не более 2 шт   |
|                                                 | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                            | Не более 400 шт |
|                                                 | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                    | Не более 100 шт |
|                                                 | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                           | Не более 4 шт   |
|                                                 | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, <b>XL</b> )                                 | Не более 10 шт  |
|                                                 | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, <b>XL</b> )                                 | Не более 10 шт  |
| Набор для протезирования аорты                  | Катетер торакальный ( загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                          | Не более 5 шт   |
|                                                 | Лента клейкая операционная                                                                               | Не более 5 шт   |
|                                                 | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                     | Не более 5 шт   |
|                                                 | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                            | Не более 4 шт   |
|                                                 | Мешок для отходов                                                                                        | Не более 5 шт   |
|                                                 | Органайзер для инструментов                                                                              | Не более 2 шт   |
|                                                 | Органайзер для игл и лезвий магнитный                                                                    | Не более 3 шт   |
|                                                 | Отсос Yankauer                                                                                           | Не более 3 шт   |
|                                                 | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                             | Не более 2 шт   |
|                                                 | Покрывало для камеры                                                                                     | Не более 4 шт   |
|                                                 | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137x180 см, 150x250 см, 137 x 150 см) | Не более 3 шт   |
|                                                 | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                     | Не более 4 шт   |
|                                                 | Полотенце хирургическое                                                                                  | Не более 15 шт  |
|                                                 | Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                  | Не более 5 шт   |
|                                                 | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)      | Не более 20 шт  |
|                                                 | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                        | Не более 2 шт   |
|                                                 | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                             | Не более 400 шт |
|                                                 | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                    | Не более 100 шт |
|                                                 | Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см)                                                            | Не более 4 шт   |
|                                                 | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, <b>XL</b> )                                 | Не более 10 шт  |
| Набор для закрытия межпредсердной перегородки I | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                             | Не более 4 шт   |
|                                                 | Лента клейкая операционная                                                                               | Не более 5 шт   |
|                                                 | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                     | Не более 5 шт   |

|                                                  |                                                                                                                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                  | Лоток почкообразный ( 3000 мл, 700 мл)                                                                                                                                              | Не более 3 шт   |
|                                                  | Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                                                                                        | Не более 4 шт   |
|                                                  | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 3 шт   |
|                                                  | Органайзер для инструментов                                                                                                                                                         | Не более 2 шт   |
|                                                  | Органайзер для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                  | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3 шт   |
|                                                  | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                                  | Пленка кардиохирургическая Ioban ( 90 x 45 см, 60 x 35 см)                                                                                                                          | Не более 4 шт   |
|                                                  | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137x180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                          | Не более 3 шт   |
|                                                  | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                                                                                                | Не более 4 шт   |
|                                                  | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                                  | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                                  | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                 | Не более 20 шт  |
|                                                  | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |
|                                                  | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                                                                                        | Не более 400    |
|                                                  | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                               | Не более 100 шт |
|                                                  | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                      | Не более 4 шт   |
|                                                  | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                                  | Чаша (объем: 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл)                                                                                                      | Не более 15 шт  |
|                                                  | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                         | Не более 10 шт  |
| Набор для закрытия межпредсердной перегородки II | Банка дренажная Thorametrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                                  | Катетер торакальный ( загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                                                                                                     | Не более 5 шт   |
|                                                  | Катетер Фолея силиконовый ( 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr)                                                                                                          | Не более 3 шт   |
|                                                  | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                                                                                        | Не более 5 шт   |
|                                                  | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                                  | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                                | Не более 5 шт   |
|                                                  | Лоток почкообразный ( 3000 мл, 700 мл)                                                                                                                                              | Не более 2 шт   |
|                                                  | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                                                                                       | Не более 4 шт   |
|                                                  | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                                  | Органайзер для инструментов                                                                                                                                                         | Не более 2 шт   |
|                                                  | Органайзер для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                  | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3 шт   |

|                                  |                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                  | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                  | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                        | Не более 4 шт   |
|                                  | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                                                                                                | Не более 4 шт   |
|                                  | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                  | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                  | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                 | Не более 20 шт  |
|                                  | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |
|                                  | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                                                                                        | Не более 400 шт |
|                                  | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                               | Не более 100 шт |
|                                  | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                      | Не более 4 шт   |
|                                  | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                  | Чаша ( 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл)                                                                                                            | Не более 15 шт  |
|                                  | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                         | Не более 10 шт  |
| Набор для операции на дуге аорты | Банка дренажная Thorametrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                  | Держатель трубок                                                                                                                                                                    | Не более 5 шт   |
|                                  | Катетер Фолея силиконовый ( 6Fr, 8Fr, 10 Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr)                                                                                                                | Не более 3 шт   |
|                                  | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                                                                                        | Не более 10 шт  |
|                                  | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                  | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                                | Не более 5 шт   |
|                                  | Лоток почкообразный ( 700 мл, 3000 мл)                                                                                                                                              | Не более 4 шт   |
|                                  | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                                                                                       | Не более 4 шт   |
|                                  | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                  | Мочеприемник Urimetrix                                                                                                                                                              | 1 шт            |
|                                  | Организатор для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                              | Не более 3 шт   |
|                                  | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3 шт   |
|                                  | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                  | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                    | Не более 15 пар |
|                                  | Пленка хирургическая клейкая ( 10 x 25 см, 9 x 35 см)                                                                                                                               | Не более 2 шт   |
|                                  | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                        | Не более 5 шт   |
|                                  | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                                          | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                 | Не более 20 шт  |
|                                                          | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |
|                                                          | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                                                                                        | Не более 400 шт |
|                                                          | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                               | Не более 100 шт |
|                                                          | Трубка аспирационная                                                                                                                                                                | Не более 4 шт   |
|                                                          | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                                          | Халат хирургический стандартный ( S, M, L, XL)                                                                                                                                      | Не более 6 шт   |
|                                                          | Чашы ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                                                                                          | Не более 15 шт  |
|                                                          | Шприцы ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                                           | Не более 10 шт  |
|                                                          | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                         | Не более 10 шт  |
| Набор для оперативного лечения врожденных пороков сердца | Банка дренажная Thorametrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                                          | Держатель трубок                                                                                                                                                                    | Не более 5 шт   |
|                                                          | Катетер Фолея силиконовый ( 6Fr, 8Fr, 10 Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr)                                                                                                                | Не более 3 шт   |
|                                                          | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                                                                                        | Не более 10 шт  |
|                                                          | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                                          | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                                | Не более 5 шт   |
|                                                          | Лоток почкообразный ( 700 мл, 3000 мл)                                                                                                                                              | Не более 4 шт   |
|                                                          | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                                                                                       | Не более 4 шт   |
|                                                          | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                                          | Мочеприемник Urimetrix.                                                                                                                                                             | 1 шт            |
|                                                          | Органайзер для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                          | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3 шт   |
|                                                          | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                                          | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                    | Не более 15 пар |
|                                                          | Пленка кардиохирургическая Ioban ( 90 x 45 см, 60 x 35 см)                                                                                                                          | Не более 4 шт   |
|                                                          | Пленка хирургическая клейкая ( 10 x 25 см, 9 x 35 см)                                                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                          | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                        | Не более 4 шт   |
|                                                          | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                                          | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                                          | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см,                                                                                                                                       | Не более 20 шт  |

|                                         |                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                         | 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                                                               |                 |
|                                         | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |
|                                         | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                                                                                                       | Не более 400 шт |
|                                         | Салфетки рентгенконтрастные (размер 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                         | Не более 100 шт |
|                                         | Скальпель с рукояткой ( №11, №15, № 23)                                                                                                                                             | Не более 8 шт   |
|                                         | Трубка аспирационная                                                                                                                                                                | Не более 4 шт   |
|                                         | Турникет                                                                                                                                                                            | Не более 15 шт  |
|                                         | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                         | Чашы ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                                                                                          | Не более 15 шт  |
|                                         | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл                                                                                                                          | Не более 10 шт  |
| Набор для операции на работающем сердце | Банка дренажная Thorametrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                         | Выкусыватель аортальный                                                                                                                                                             | Не более 3 шт   |
|                                         | Катетер торакальный ( загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                                                                                                     | Не более 5 шт   |
|                                         | Катетер Фолея силиконовый ( 6Fr, 8Fr, 10 Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr)                                                                                                                | Не более 3 шт   |
|                                         | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                         | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                                | Не более 5 шт   |
|                                         | Лоток почкообразный ( 700 мл, 3000 мл)                                                                                                                                              | Не более 3 шт   |
|                                         | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                                                                                       | Не более 4 шт   |
|                                         | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                         | Мочеприемник Urimetrix.                                                                                                                                                             | 1 шт            |
|                                         | Органайзер для инструментов                                                                                                                                                         | Не более 2 шт   |
|                                         | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3 шт   |
|                                         | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                         | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                    | Не более 15 пар |
|                                         | Пленка хирургическая клейкая ( 10 x 25 см, 9 x 35 см)                                                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                         | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                        | Не более 5 шт   |
|                                         | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                         | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                         | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                 | Не более 20 шт  |
|                                         | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |

|                                            |                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                            | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                                | Не более 400 шт |
|                                            | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                        | Не более 100 шт |
|                                            | Скальпель с рукояткой ( №11, №15, № 23)                                                                      | Не более 5 шт   |
|                                            | Трубка аспирационная                                                                                         | Не более 4 шт   |
|                                            | Турникет                                                                                                     | Не более 15 шт  |
|                                            | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                             | Не более 10 шт  |
|                                            | Чашы ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл).                   | Не более 10 шт  |
|                                            | Шприцы ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                            | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                  | Не более 10 шт  |
| Набор для аортобифemorального шунтирования | Держатель трубок                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                            | Лента клейкая операционная                                                                                   | Не более 3 шт   |
|                                            | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                         | Не более 5 шт   |
|                                            | Мешок для отходов                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                            | Организатор для игл и лезвий магнитный                                                                       | Не более 3 шт   |
|                                            | Отсос Yankauer                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                            | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                             | Не более 15 пар |
|                                            | Пленка хирургическая клейкая ( 10 x 25 см, 9 x 35 см)                                                        | Не более 3 шт   |
|                                            | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) | Не более 4 шт   |
|                                            | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                     | Не более 5 шт   |
|                                            | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)          | Не более 20 шт  |
|                                            | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                            | Не более 2 шт   |
|                                            | Салфетки впитывающие шарикообразные ( 45 мм, 50 мм)                                                          | Не более 50 шт  |
|                                            | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                                | Не более 400 шт |
|                                            | Салфетки рентгенконтрастные ( 30x30 см, 45x45 см)                                                            | Не более 100 шт |
|                                            | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                             | Не более 10 шт  |
|                                            | Халат хирургический стандартный ( S, M, L, XL)                                                               | Не более 6 шт   |
|                                            | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                  | Не более 10 шт  |
| Набор для пластики трехстворчатого клапана | Бахилы хирургические ( 8 x 27 см, 45 x 100 см, 30 x 60 см)                                                   | Не более 4пар   |
|                                            | Катетер торакальный ( загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                              | Не более 5 шт   |
|                                            | Катетер Фолея силиконовый ( 6Fr, 8Fr, 10Fr,                                                                  | Не более 3 шт   |

|                                         |                                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                         | 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr)                                                                                       |                 |
|                                         | Коннектор Y-образный                                                                                          | Не более 2 шт   |
|                                         | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                  | Не более 5 шт   |
|                                         | Лента клейкая операционная                                                                                    | Не более 3 шт   |
|                                         | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                          | Не более 5 шт   |
|                                         | Мешок для отходов                                                                                             | Не более 5 шт   |
|                                         | Мочеприемник Urimetrix                                                                                        | 1 шт            |
|                                         | Организер для игл и лезвий магнитный                                                                          | Не более 3      |
|                                         | Отсос Yankauer                                                                                                | Не более 3      |
|                                         | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                  | Не более 2 шт   |
|                                         | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                              | Не более 15 пар |
|                                         | Пленка хирургическая клейкая ( 10 x 25 см, 9 x 35 см)                                                         | Не более 3 шт   |
|                                         | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)- | Не более 3 шт   |
|                                         | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                          | Не более 4 шт   |
|                                         | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                      | Не более 5 шт   |
|                                         | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)           | Не более 20 шт  |
|                                         | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                             | Не более 2 шт   |
|                                         | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                  | Не более 400 шт |
|                                         | Салфетки впитывающие шарикообразные ( 45 мм, 50 мм)                                                           | Не более 100 шт |
|                                         | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                         | Не более 100 шт |
|                                         | Турникет                                                                                                      | Не более 15 шт  |
|                                         | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                                | Не более 4 шт   |
|                                         | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                              | Не более 10 шт  |
|                                         | Халат хирургический стандартный ( S, M, L, XL)                                                                | Не более 6 шт   |
|                                         | Чаши ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл)                     | Не более 15 шт  |
| Набор для имплантации кардиостимулятора | Губка на палочке                                                                                              | Не более 5 шт   |
|                                         | Игла инъекционная ( 18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA)                                                        | Не более 5 шт   |
|                                         | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                          | Не более 5 шт   |
|                                         | Организер для игл и лезвий магнитный                                                                          | Не более 3 шт   |
|                                         | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                  | Не более 2 шт   |
|                                         | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                              | Не более 15 пар |
|                                         | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180                                  | Не более 4 шт   |

|                                                                         |                                                                                                              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                         | см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                              |                 |
|                                                                         | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                     | Не более 5 шт   |
|                                                                         | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                            | Не более 2 шт   |
|                                                                         | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные).                                | Не более 400 шт |
|                                                                         | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                             | Не более 10 шт  |
|                                                                         | Чаши ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл)                    | Не более 15 шт  |
|                                                                         | Чехол на аппаратуру                                                                                          | Не более 5 шт   |
|                                                                         | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл                                                   | Не более 10 шт  |
| Набор для операции аортокоронарного шунтирования на работающем сердце I | Выкусыватель аортальный                                                                                      | Не более 3 шт   |
|                                                                         | Игла инъекционная ( 18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA)                                                       | Не более 5 шт   |
|                                                                         | Катетер торакальный ( 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                                       | Не более 5 шт   |
|                                                                         | Катетер Фолея силиконовый ( 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr)                                          | Не более 3 шт   |
|                                                                         | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                 | Не более 4 шт   |
|                                                                         | Лента клейкая операционная                                                                                   | Не более 3 шт   |
|                                                                         | Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                          | Не более 5 шт   |
|                                                                         | Лоток почкообразный ( 3000 мл, 700 мл)                                                                       | Не более 3 шт   |
|                                                                         | Мешок для отходов                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                                                         | Мочеприемник Urimetrix                                                                                       | Не более 1 шт   |
|                                                                         | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                 | Не более 2 шт   |
|                                                                         | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                             | Не более 15 пар |
|                                                                         | Пленка кардиохирургическая Ioban ( 90 x 45 см, 60 x 35 см)                                                   | Не более 4 шт   |
|                                                                         | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) | Не более 4 шт   |
|                                                                         | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                         | Не более 4 шт   |
|                                                                         | Полотенце хирургическое                                                                                      | Не более 15 шт  |
|                                                                         | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                     | Не более 5 шт   |
|                                                                         | Простыня одноразовая ( 90 x 100 см, 100 x 120см)                                                             | Не более 6 шт   |
|                                                                         | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)          | Не более 20 шт  |
|                                                                         | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                            | Не более 2 шт   |
|                                                                         | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                 | Не более 400 шт |
|                                                                         | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                        | Не более 100 шт |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                          | Турникет                                                                                                                                                                            | Не более 15 шт  |
|                                                                          | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                      | Не более 4 шт   |
|                                                                          | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                                                          | Чаша ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл)                                                                                           | Не более 15 шт  |
|                                                                          | Шприцы ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                                           | Не более 10 шт  |
| Набор для операции аортокоронарного шунтирования на работающем сердце II | Банка дренажная Thorametrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                                                          | Держатель трубок                                                                                                                                                                    | Не более 5 шт   |
|                                                                          | Капельница для внутривенных инфузий                                                                                                                                                 | 1 шт            |
|                                                                          | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                                | Не более 8 шт   |
|                                                                          | Мешок для диатермии ( 35 x 43 см, 35 x 45 см)                                                                                                                                       | Не более 4 шт   |
|                                                                          | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                                                          | Мочеприемник Urimetrix                                                                                                                                                              | 1 шт шт         |
|                                                                          | Органайзер для игл и лезвий магнитный                                                                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                                          | Органайзер для инструментов                                                                                                                                                         | Не более 2 шт   |
|                                                                          | Отсос Yankauer                                                                                                                                                                      | Не более 3      |
|                                                                          | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                                                          | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                    | Не более 15 пар |
|                                                                          | Пленка кардиохирургическая Ioban ( 90 x 45 см, 60 x 35 см)                                                                                                                          | Не более 4 шт   |
|                                                                          | Пленка хирургическая клейкая ( 10 x 25 см, 9 x 35 см)                                                                                                                               | Не более 3 шт   |
|                                                                          | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                        | Не более 4 шт   |
|                                                                          | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                                                                                                | Не более 4 шт   |
|                                                                          | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                                                          | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                                                          | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                 | Не более 20 шт  |
|                                                                          | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                                                                                                   | Не более 2 шт   |
|                                                                          | Салфетка впитывающая                                                                                                                                                                | Не более 100 шт |
|                                                                          | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                                                                                        | Не более 400 шт |
|                                                                          | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                               | Не более 100 шт |
|                                                                          | Скальпель с рукояткой ( №11, №15, № 23)                                                                                                                                             | Не более 6 шт   |
|                                                                          | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                      | Не более 4 шт   |
|                                                                          | Халат хирургический стандартный ( S, M, L, XL)                                                                                                                                      | Не более 10м    |
|                                                                          | Чаша ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл)                                                                                           | Не более 15 шт  |

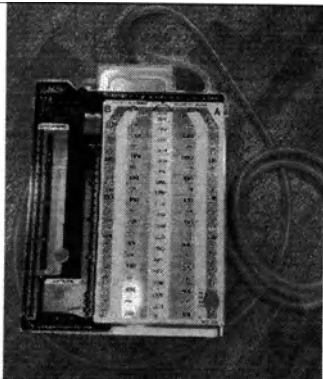
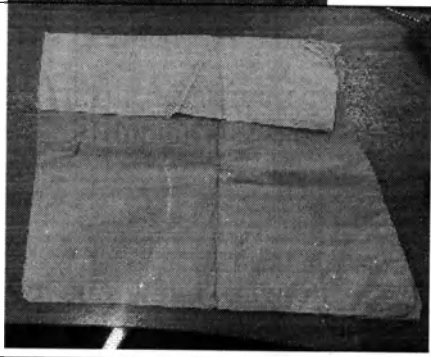
|                                                    |                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                    | Шприцы ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                    | Не более 10 шт |
| Набор для торакотомии                              | Бахилы хирургические ( 8 х 27 см, 45 х 100 см, 30 х 60 см)                                                   | Не более 4 пар |
|                                                    | Катетер торакальный ( загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                              | Не более 5 шт  |
|                                                    | Лента клейкая операционная                                                                                   | Не более 2 шт  |
|                                                    | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                         | Не более 5 шт  |
|                                                    | Мешок для отходов                                                                                            | Не более 5 шт  |
|                                                    | Организатор для игл и лезвий магнитный                                                                       | Не более 3 шт  |
|                                                    | Отсос Yankauer                                                                                               | Не более 3 шт  |
|                                                    | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                 | Не более 2 шт  |
|                                                    | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 х 180 см, 150 х 250 см, 137 х 150 см) | Не более 3 шт  |
|                                                    | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                         | Не более 4 шт  |
|                                                    | Простыня кардиохирургическая ( 274 х 320 см, 270 х 310 см, 240 х 355 см)                                     | Не более 5 шт  |
|                                                    | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 х 75 см, 75 х 100 см, 100 х 100 см, 90 х 160 см, 200 х 160 см)          | Не более 20 шт |
|                                                    | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                            | 2 шт           |
|                                                    | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 х 30 см, 45 х 45 см)                                                        | 100 шт         |
|                                                    | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                               | 4 шт           |
|                                                    | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                             | 10 шт          |
| Набор для проведения операций при расслоении аорты | Бахилы хирургические ( 8 х 27 см, 45 х 100 см, 30 х 60 см)                                                   | Не более 4 пар |
|                                                    | Катетер торакальный ( загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr)                              | Не более 5 шт  |
|                                                    | Лента клейкая операционная                                                                                   | Не более 2 шт  |
|                                                    | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                         | Не более 5 шт  |
|                                                    | Мешок для отходов                                                                                            | 5 шт           |
|                                                    | Организатор для игл и лезвий магнитный                                                                       | 3 шт           |
|                                                    | Отсос Yankauer                                                                                               | Не более 3 шт  |
|                                                    | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                 | Не более 2 шт  |
|                                                    | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 х 180 см, 150 х 250 см, 137 х 150 см) | Не более 5 шт  |
|                                                    | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                         | Не более 4 шт  |
|                                                    | Простыня кардиохирургическая ( 274 х 320 см, 270 х 310 см, 240 х 355 см)                                     | Не более 5 шт  |
|                                                    | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 х 75 см, 75 х 100 см, 100 х 100 см, 90 х 160 см, 200 х 160 см)          | Не более 20 шт |
|                                                    | Ручка-держатель с электродом электрохирургическим                                                            | Не более 2 шт  |

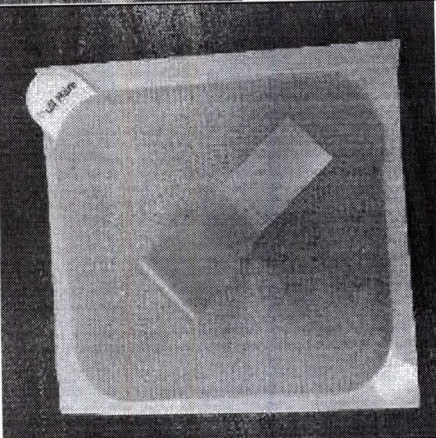
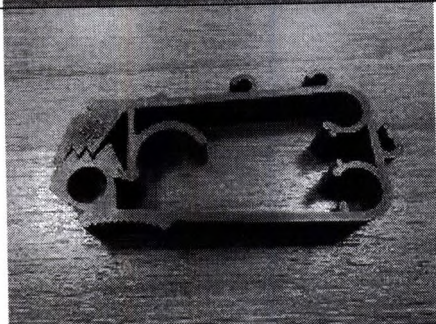
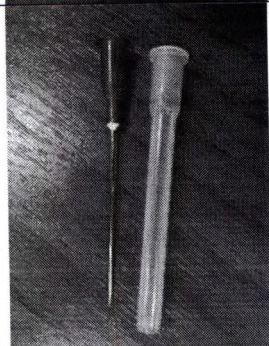
|                                                          |                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                               | Не более 100 шт |
|                                                          | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                      | Не более 4 шт   |
|                                                          | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
| Набор для имплантации клапана и коронарного шунтирования | Банка дренажная Thoramatrix ( High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл). | 1 шт            |
|                                                          | Держатель трубок                                                                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                                          | Игла инъекционная ( 18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA)                                                                                                                              | Не более 10 шт  |
|                                                          | Катетер Фолея силиконовый ( 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr)                                                                                                          | Не более 3 шт   |
|                                                          | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 2 шт   |
|                                                          | Лоток для инструментов ( с одним отделением, с четырьмя отделениями)                                                                                                                | Не более 5 шт   |
|                                                          | Лоток почкообразный ( 3000 мл, 700 мл)                                                                                                                                              | Не более 3 шт   |
|                                                          | Мешок для отходов                                                                                                                                                                   | Не более 5 шт   |
|                                                          | Мочеприемник Urimetrix                                                                                                                                                              | 1 шт            |
|                                                          | Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                        | Не более 2 шт   |
|                                                          | Перчатки хирургические ( №6, №6.5, №7, №7.5, №8)                                                                                                                                    | Не более 15 пар |
|                                                          | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)                                                                        | Не более 5 шт   |
|                                                          | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                                                                                                | Не более 4 шт   |
|                                                          | Полотенце хирургическое                                                                                                                                                             | Не более 15 шт  |
|                                                          | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                                                                                            | Не более 5 шт   |
|                                                          | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)                                                                                 | Не более 20 шт  |
|                                                          | Салфетки впитывающие многослойные ( рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                                                                                       | Не более 400 шт |
|                                                          | Салфетки рентгенконтрастные ( 30 x 30 см, 45 x 45 см)                                                                                                                               | Не более 100 шт |
|                                                          | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                                                                                                      | Не более 4 шт   |
|                                                          | Турникет                                                                                                                                                                            | Не более 15 шт  |
|                                                          | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                                                                                                    | Не более 10 шт  |
|                                                          | Халат хирургический стандартный ( S, M, L, XL)                                                                                                                                      | Не более 6 шт   |
|                                                          | Чаша ( 60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл)                                                                                           | Не более 15 шт  |
|                                                          | Шприцы ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                                           | Не более 10 шт  |
|                                                          | Шприцы для промывания LL ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                                                                         | Не более 10 шт  |
| Набор для детской кардиохирургической операции           | Катетер Фолея силиконовый ( 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr)                                                                                                          | Не более 3 шт   |
|                                                          | Лезвие ( №11, №15, №20, №22)                                                                                                                                                        | Не более 3 шт   |
|                                                          | Лента клейкая операционная                                                                                                                                                          | Не более 4 шт   |

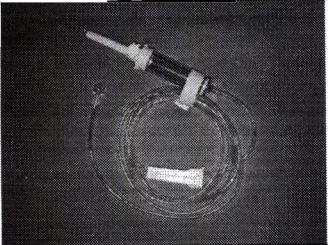
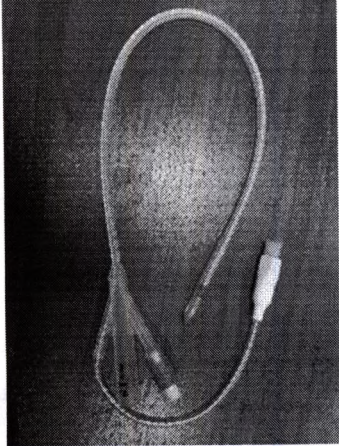
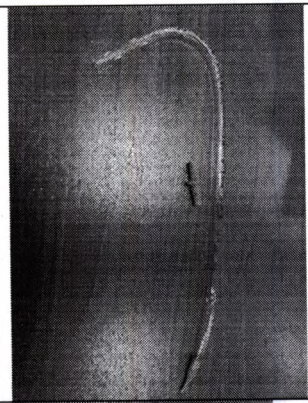
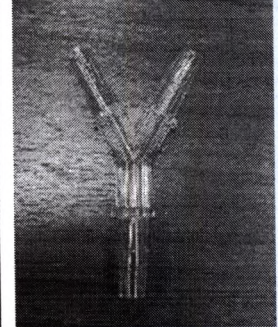
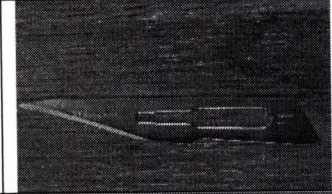
|  |                                                                                                              |                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Мочеприемник Urimetrix                                                                                       | 1 шт            |
|  | Отсос Yankauer                                                                                               | Не более 3 шт   |
|  | Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария ( 137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) | Не более 3 шт   |
|  | Покрывало одноразовое для стола Mayo                                                                         | Не более 4 шт   |
|  | Полотенце хирургическое                                                                                      | Не более 15 шт  |
|  | Простыня кардиохирургическая ( 274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см)                                     | Не более 5 шт   |
|  | Простыня одноразовая с липучкой ( 50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см)          | Не более 20 шт  |
|  | Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные)                                 | Не более 400 шт |
|  | Трубка аспирационная ( 200 см, 250 см, 350 см)                                                               | Не более 4 шт   |
|  | Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем ( S, M, L, XL)                                             | Не более 10 шт  |
|  | Шприцы ( 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл)                                                                    | Не более 10 шт  |

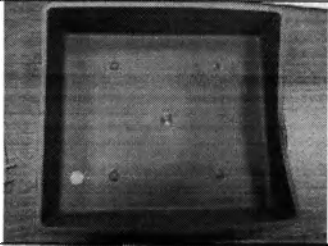
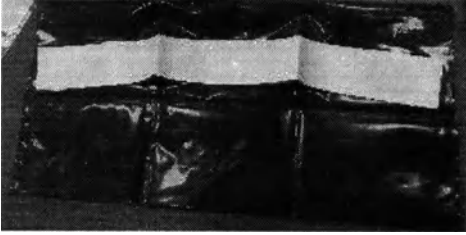
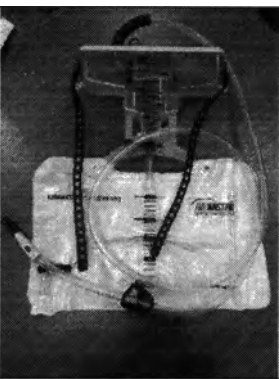
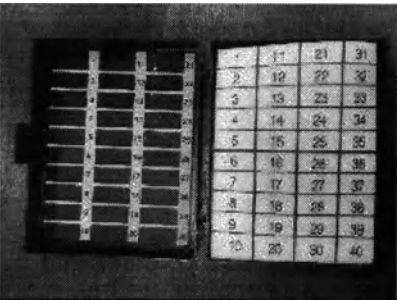
Внешний вид комплектующих наборов и их назначение приведены в таблице 3.

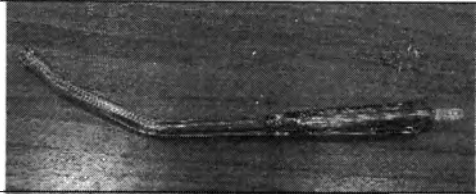
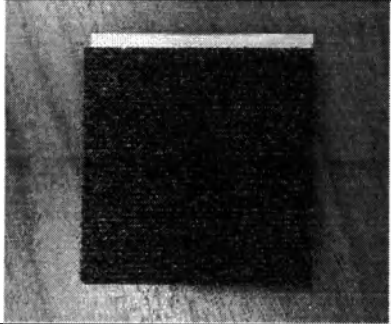
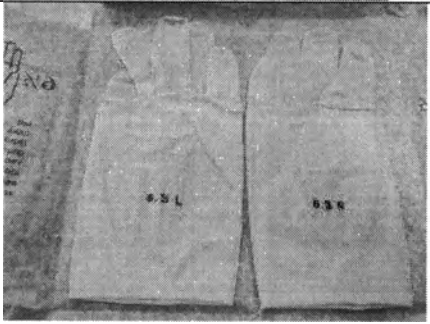
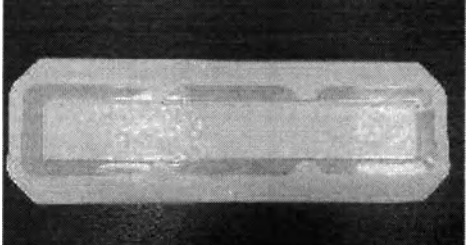
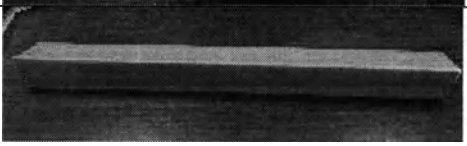
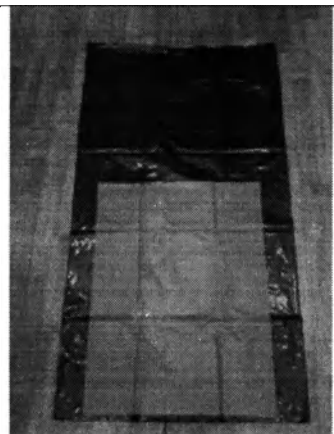
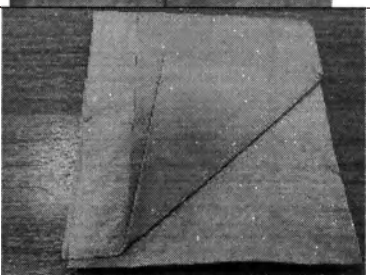
**Таблица 3 – Описание изделия**

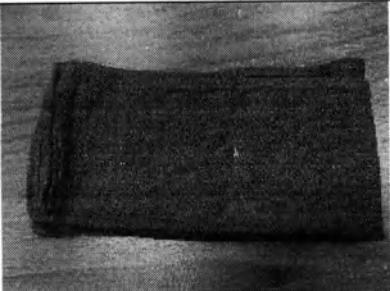
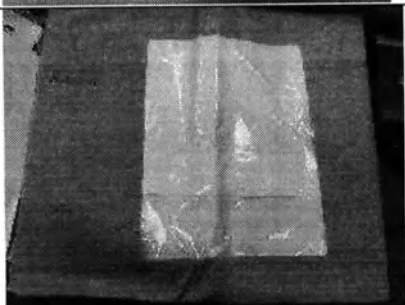
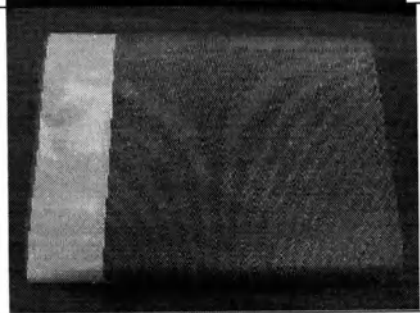
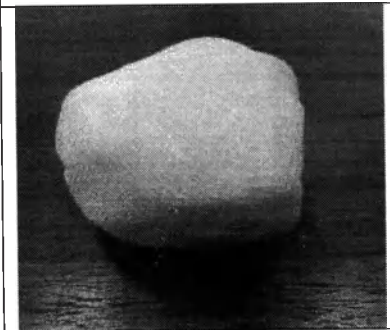
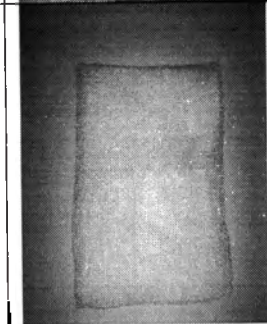
| Наименование изделия        | Внешний вид изделия                                                                 | Назначение                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Банка дренажная Thorametrix |  | Изделие предназначено для слива воздуха и / или жидкости из плевральной полости   |
| Бахилы хирургические        |  | предназначены для защиты одежды врача во время проведения хирургических операций. |

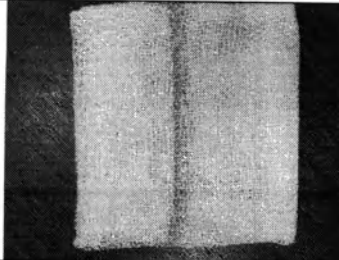
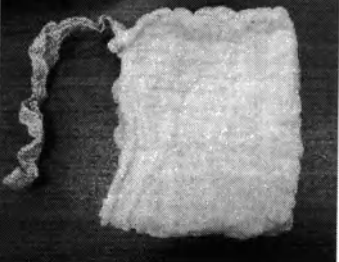
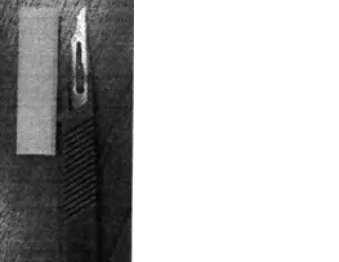
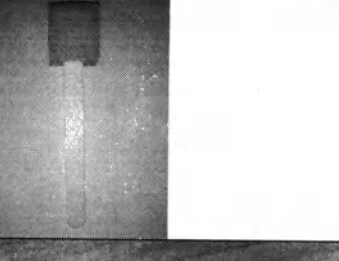
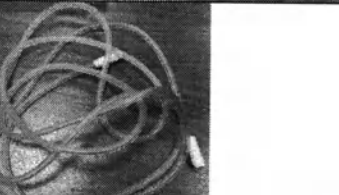
|                                                         |                                                                                     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выкусыватель<br>аортальный                              |    | Предназначен для создания<br>круглого отверстия в стенке аорты<br>для наложения сосудистого<br>анастомоза                 |
| Держатель<br>трубок                                     |   | Предназначен для фиксации<br>аспирационных трубок во время<br>операции                                                    |
| Держатель<br>аспирационных<br>трубок и<br>катетеров     |  | Предназначен для фиксации<br>аспирационных трубок и катетеров<br>во время операции                                        |
| Держатель для<br>электрохирургич<br>еского<br>карандаша |  | Предназначен для фиксации ручки<br>электрохирургического карандаша                                                        |
| Игла<br>инъекционная                                    |  | предназначена для введения<br>растворов лекарственных средств,<br>забора крови из вены или артерии,<br>переливания крови. |

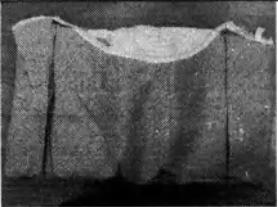
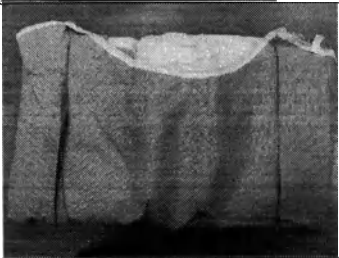
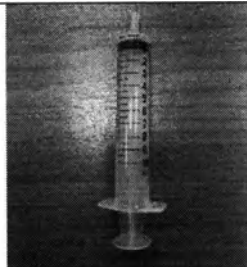
|                                     |                                                                                     |  |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | *Разный цвет канюли в зависимости от калибра иглы                                   |  |                                                                                                                                              |
| Капельница для внутривенных инфузий |    |  | Предназначена для переливания инфузионных растворов                                                                                          |
| Катетер Фолея силиконовый           |    |  | предназначен для использования при мочевыводящем дренировании и одновременного контроля температуры мочевого пузыря (внутренней температуры) |
| Катетер торакальный                 |   |  | Предназначен для интраоперационной установки дренажа в грудной полости в торакальной и кардиохирургии.                                       |
| Коннектор Y-образный                |  |  | Предназначен для соединения инструментов дренажных систем                                                                                    |
| Лезвие                              |  |  | предназначено для разрезания или иссечения тканей                                                                                            |
| Лента клейкая операционная          |  |  | Предназначена для изоляции операционного поля                                                                                                |

|                                       |                                                                                     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лоток для инструментов                |    | Предназначен для хранения и размещения хирургических инструментов                                                         |
| Лоток почкообразный                   |    | Предназначен для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур |
| Мешок для отходов                     |    | Предназначены для сбора отходов после проведения хирургических процедур                                                   |
| Мешок для диатермии                   |   | Предназначены для сбора отходов диатермии                                                                                 |
| Мочеприемник Urimetrix                |  | Предназначен для сбора мочи                                                                                               |
| Органайзер для игл и лезвий магнитный |  | Предназначен для хранения и подсчета игл и лезвий                                                                         |
| Органайзер для инструментов           |  | Предназначен для размещения хирургических инструментов                                                                    |

|                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсос Yankauer                                                  |    | Предназначен для удаления крови и выделения во время операции                                                                                                                                                    |
| Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша    |    | Предназначен для чистки наконечника хирургического электронного карандаша                                                                                                                                        |
| Перчатки хирургические                                          |    | используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле                                                                                                                            |
| Пленка хирургическая клейкая                                    |   | предназначена для качественного покрытия сухих и неинфицированных ран с небольшим отделением.                                                                                                                    |
| Пленка кардиохирургическая Ioban                                |  | покрытие зоны операционного разреза для повышения уровня асептики.                                                                                                                                               |
| Покрытие Мауо                                                   |  | Предназначено для использования в качестве покрытия для инструментального стола (стола Мейо), выполнено в виде чехла (мешка) непроницаемого для жидкостей и бактерий, имеет усиление в критической зоне изделия. |
| Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария |  | Предназначено для покрытия операционного стола                                                                                                                                                                   |

|                                                             |                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полотенце<br>хирургическое                                  |    | Применяется для высушивания рук<br>хирургов                                                                   |
| Простыня<br>кардиохирургич<br>еская                         |    | Предназначена для изоляция<br>операционного поля                                                              |
| Простыня<br>одноразовая с<br>липучкой                       |   | Используется в качестве покрытий<br>во время операций                                                         |
| Ручка-держатель<br>с электродом<br>электрохирургич<br>еским |  | Предназначена для разрезания и<br>коагуляции тканей<br>Регистрационное удостоверение<br>ФСЗ 2010/07652        |
| Салфетки<br>впитывающие,<br>шарикообразные                  |  | Предназначена для использования в<br>условиях операционной для<br>впитывания посторонних<br>жидкостей и крови |
| Салфетка<br>впитывающая                                     |  | Предназначена для использования в<br>условиях операционной для<br>впитывания посторонних<br>жидкостей и крови |

|                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Салфетки<br>впитывающие<br>многослойные         |    | Предназначена для использования в условиях операционной для впитывания посторонних жидкостей и крови                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 |    | Предназначена для использования в условиях операционной для впитывания посторонних жидкостей и крови                                                                                                                                                                                                                                    |
| Салфетки<br>рентгенконтраст<br>ные              |  | Предназначена для использования в условиях операционной для впитывания посторонних жидкостей и крови. Изготавливается с петлей. Она служит для фиксации салфетки к операционному белью или покрытию, для контроля количества салфеток, используемых в оперируемой полости. Также петля нужна для удобного удаления салфетки из полости. |
| Скальпель с<br>рукояткой                        |  | предназначен для разрезания или иссечения тканей                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Губка для<br>обработки<br>операционного<br>поля |  | Предназначена для использования в условиях операционной для впитывания посторонних жидкостей и крови                                                                                                                                                                                                                                    |
| Турникет                                        |  | Предназначен для фиксации канюль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Трубка<br>аспирационная                         |  | Используется совместно с отсосом Yankauer для удаления крови и выделений при операции                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем |    | Предназначен для использования во время хирургических процедур с большим объемом жидкостей и высоким риском инфицирования.                                      |
| Халат хирургический стандартный                   |    | Предназначен для использования во время хирургических процедур с целью защиты как пациента, так и персонала операционной от переноса микроорганизмов            |
| Чаши                                              |    | Предназначены для смешивания медицинских растворов                                                                                                              |
| Шприцы                                            |   | Предназначен для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применен |
| Шприцы для промывания                             |  | Предназначен для отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора                                                                                     |
| Чехол на аппаратуру                               |  | Предназначен для защиты медицинской аппаратуры от загрязнений                                                                                                   |

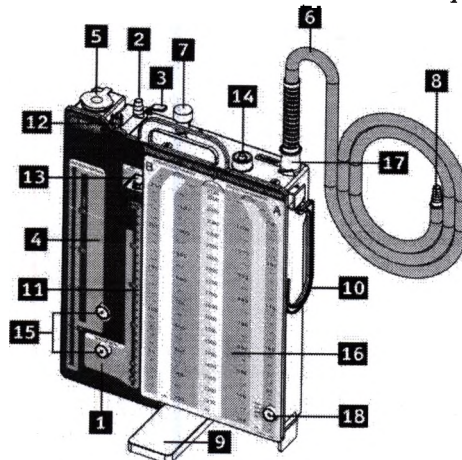
Технические характеристики изделия приведены в таблице 4.

**Таблица 4 – Технические характеристики изделия**

| Наименование изделия        | Исполнение изделия       | Технические характеристики изделия                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Банка дренажная Thorametriх | High Capacity<br>2300 мл | Габаритные размеры: 27 см x 35 см x 6 см, $\pm 1\%$<br>Количество трубок: 2<br>Объем банки: 2300 мл, $\pm 1\%$<br>Градировка: каждые 50 мл |

Трубка: длина 150 см,  $\pm 1\%$   
 Внутренний диаметр трубки:  $9.0 \pm 0.5$  мм

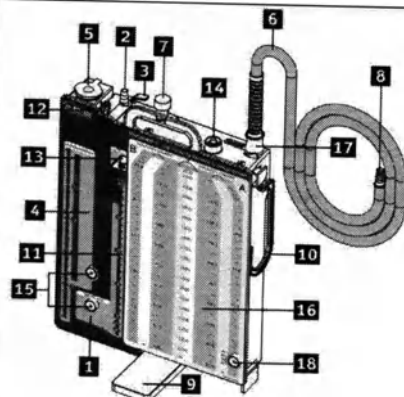
Банка дренажная Thorametrix представляет собой дренажную систему для грудной клетки одноразового использования для одного пациента. В состав системы входят 3 камеры: сборная камера, камера подводного дренирования (плевральной полости) и камера управления отсасыванием жидкости (контроля отсоса). Данная система предназначена для простого и безопасного откачивания воздуха и/или жидкости из плевральной полости



- 1 – Камера подводного дренирования
- 2 – Отверстие отсоса
- 3- Ручка регулятора отсоса
- 4- Камера управления отсосом
- 5-Сливное отверстие
- 6-Дренажная трубка
- 7-Второе отверстие отсоса порт «В»
- 8 -Адаптер
- 9-Поворотная стойка
- 10-Держатель
- 11-Стойка камеры подводного дренирования
- 12-Предохранительный клапан избыточного давления
- 13-Индикатор чрезмерного отрицательного давления
- 14-Предохранительный клапан отрицательного давления с фильтром
- 15-Инжекционное отверстие
- 16-Сборная камера
- 17-Отверстие отсоса порт «А»
- 8-Проботборное отверстие

High  
Capacity  
Dry  
Suction  
2300 мл

Предназначена для осуществления одностороннего или двустороннего дренажа грудной полости, имеет идентичные входы, которые действуют параллельно друг другу.  
 Габаритные размеры: 27 см х 35 см х 6 см,  $\pm 1\%$   
 Количество трубок: 2  
 Объем банки: 2300 мл,  $\pm 1\%$   
 Градуировка: каждые 50 мл  
 Трубка: длина 150 см,  $\pm 1\%$   
 Внутренний диаметр трубки:  $9.0 \pm 0.5$  мм



- 1 – Камера подводного дренирования
- 2 – Отверстие отсоса
- 3- Ручка регулятора отсоса
- 4- Камера управления отсосом
- 5-Сливное отверстие
- 6-Дренажная трубка
- 7-Второе отверстие отсоса порт «В»
- 8 -Адаптер
- 9-Поворотная стойка
- 10-Держатель
- 11-Стойка камеры подводного дренирования
- 12-Предохранительный клапан избыточного давления
- 13-Индикатор чрезмерного отрицательного давления
- 14-Предохранительный клапан отрицательного давления с фильтром
- 15-Инжекционное отверстие
- 16-Сборная камера
- 17-Отверстие отсоса порт «А»
- 8-Проботборное отверстие

Compact  
1150 мл

предназначена для осуществления одностороннего дренижа грудной полости.  
Габаритные размеры: 20 см х 35 см х 6 см,  $\pm 1\%$   
Количество трубок: 1  
Объем: 1150 мл,  $\pm 1\%$   
Градуировка: каждые 50 мл  
Трубка: длина 150 см,  $\pm 1\%$   
Внутренний диаметр трубки:  $9.0 \pm 0.5$  мм

Compact  
Dry  
Suction  
1150 мл

предназначена для осуществления сухого одностороннего дренижа грудной полости.  
Габаритные размеры: 20 см х 35 см х 6 см,  $\pm 1\%$   
Количество трубок: 1  
Объем: 1150 мл,  $\pm 1\%$   
Градуировка: каждые 50 мл  
Трубка: длина 150 см,  $\pm 1\%$   
Внутренний диаметр трубки:  $9.0 \pm 0.5$  мм

Single  
Bottle  
Chest  
Drainage  
System  
1100 мл

предназначена для осуществления одностороннего дренижа грудной полости.  
Количество трубок: 1  
Объем: 1100 мл,  $\pm 1\%$   
Градуировка: каждые 50 мл  
Трубка: длина 150 см,  $\pm 1\%$   
Внутренний диаметр трубки:  $9.0 \pm 0.5$  мм  
Есть встроенный автоматический клапан ограничения вакуума -40см  
**Н°О**

Бахилы

8 x 27 см

Габаритные размеры: 8 x 27 см,  $\pm 1\%$

|                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| хирургические                              |             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Микробная проницаемость в сухом состоянии: Не требуется</li> <li>2. Микробная проницаемость во влажном состоянии: <math>\geq 2,8</math> BI</li> <li>3. Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Log}_{10} \text{ (CFU/дм}^2\text{)}</math></li> <li>4. Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></li> <li>5. Пылеворсоотделение :<math>&lt; 4,0 \text{ Lg}^e</math></li> <li>6. Водоупорность не менее 150 см. H<sub>2</sub>O</li> <li>7. Прочность на разрыв в сухом состоянии в области критической зоны: <math>\geq 40 \text{ кПа}</math></li> <li>8. Прочность на разрыв во влажном состоянии в области критической зоны: <math>\geq 40 \text{ кПа}</math></li> <li>9. Прочность на растяжение в сухом состоянии в области критической зоны: <math>\geq 15 \text{ Н}</math></li> <li>10. Прочность на растяжение во влажном состоянии в области критической зоны: <math>\geq 15 \text{ Н}</math></li> </ol>                                                              |
|                                            | 45 x 100 см | <p>Габаритные размеры: 45 x 100 см, <math>\pm 1\%</math></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Микробная проницаемость в сухом состоянии: Не требуется</li> <li>2. Микробная проницаемость во влажном состоянии: <math>\geq 2,8</math> BI</li> <li>3. Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Log}_{10} \text{ (CFU/дм}^2\text{)}</math></li> <li>4. Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></li> <li>5. Пылеворсоотделение :<math>&lt; 4,0 \text{ Lg}^e</math></li> <li>6. Водоупорность не менее 150 см. H<sub>2</sub>O</li> <li>7. Прочность на разрыв в сухом состоянии в области критической зоны: <math>\geq 40 \text{ кПа}</math></li> <li>8. Прочность на разрыв во влажном состоянии в области критической зоны: <math>\geq 40 \text{ кПа}</math></li> <li>9. Прочность на растяжение в сухом состоянии в области критической зоны: <math>\geq 15 \text{ Н}</math></li> <li>10. Прочность на растяжение во влажном состоянии в области критической зоны: <math>\geq 15 \text{ Н}</math></li> </ol> |
|                                            | 30 x 60 см  | <p>Габаритные размеры: 30 x 60 см, <math>\pm 1\%</math></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Микробная проницаемость в сухом состоянии: Не требуется</li> <li>2. Микробная проницаемость во влажном состоянии: <math>\geq 2,8</math> BI</li> <li>3. Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Log}_{10} \text{ (CFU/дм}^2\text{)}</math></li> <li>4. Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></li> <li>5. Пылеворсоотделение :<math>&lt; 4,0 \text{ Lg}^e</math></li> <li>6. Водоупорность не менее 150 см. H<sub>2</sub>O</li> <li>7. Прочность на разрыв в сухом состоянии в области критической зоны: <math>\geq 40 \text{ кПа}</math></li> <li>8. Прочность на разрыв во влажном состоянии в области критической зоны: <math>\geq 40 \text{ кПа}</math></li> <li>9. Прочность на растяжение в сухом состоянии в области критической зоны: <math>\geq 15 \text{ Н}</math></li> <li>10. Прочность на растяжение во влажном состоянии в области критической зоны: <math>\geq 15 \text{ Н}</math></li> </ol>  |
| <b>Выкусыватель</b><br>аортальный          |             | <p>Общая длина: 205 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Диаметр наконечника (отверстия): 4 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Усилие нажатия на рукоятку: не более 290 Н</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Держатель трубок                           |             | <p>Размер подушечки: 75 x 75 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Держатель: 100 мм x 15 мм, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Держатель аспирационных трубок и катетеров |             | <p>Размер: 75 x 38 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>3 крючка диаметра 3 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>2 крючка диаметром 9 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>1 крючок диаметром 15 мм, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Держатель для                              |             | Габаритные размеры:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| электрохирургического карандаша |       | Длина узкой части: 40 мм, $\pm 1\%$<br>Длина широкой части: 58 мм, $\pm 1\%$<br>Высота: 140 мм, $\pm 1\%$<br>Ширина узкой части: 20мм, $\pm 1\%$<br>Ширина широкой части: 35мм, $\pm 1\%$<br>Отверстие для фиксации держателя: 26 x 18 мм ( $\pm 1\%$ )<br>Масса: 25 г, $\pm 1\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Игла инъекционная               | 18 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>18Ga x 1/2" (1.25 x 40 мм)<br>Длина: 40 мм +0/-4 мм<br>Наружный диаметр: 1.25 $\pm$ 0,1 мм<br>Внутренний диаметр: 0,8 $\pm$ 0,1 мм<br>Шероховатость: не более 0.16 мкм<br>Твердость: 51-58 HRC<br>Радиус притупления рабочей части: не более 0.3 мм<br>Прочность соединения трубки иглы с головкой иглы: не менее 70 Н<br>Угол заточки: (17 $\pm$ 2) $^\circ$<br>Трубка иглы должна соответствовать ISO 9626. Фактическая длина трубки иглы должна равняться номинальной длине с допусками |
|                                 | 21 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>21Ga x 1/2 (0.8 x 40мм)<br>Длина: 40 мм +0/-4 мм<br>Наружный диаметр: 0,8 $\pm$ 0,1 мм<br>Внутренний диаметр: 0,5 $\pm$ 0,1 мм<br>Шероховатость: не более 0.16 мкм<br>Твердость: 51-58 HRC<br>Радиус притупления рабочей части: не более 0.3 мм<br>Прочность соединения трубки иглы с головкой иглы: не менее 44 Н<br>Угол заточки: (17 $\pm$ 2) $^\circ$<br>Трубка иглы должна соответствовать ISO 9626. Фактическая длина трубки иглы должна равняться номинальной длине с допусками     |
|                                 | 22 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>22Ga x 3/2" (0.7 x 40 мм)<br>Длина: 40 мм +0/-4 мм<br>Наружный диаметр: 0,7 $\pm$ 0,1мм<br>Внутренний диаметр: 0,4 $\pm$ 0,1 мм<br>Шероховатость: не более 0.16 мкм<br>Твердость: 51-58 HRC<br>Радиус притупления рабочей части: не более 0.3 мм<br>Прочность соединения трубки иглы с головкой иглы: не менее 40 Н<br>Угол заточки: (17 $\pm$ 2) $^\circ$<br>Трубка иглы должна соответствовать ISO 9626. Фактическая длина трубки иглы должна равняться номинальной длине с допусками    |
|                                 | 23 GA | РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br>Декларация о соответствии РОСС IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br>23Ga x 3/4" (0.6 x 30 мм)<br>Длина: 30 мм +1/-2 мм<br>Наружный диаметр: 0,6 $\pm$ 0,1 мм<br>Внутренний диаметр: 0,3 $\pm$ 0,05 мм<br>Внутренний диаметр:<br>Шероховатость: не более 0.16 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

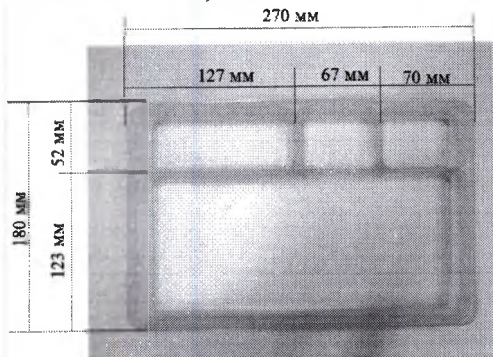
|                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |       | <p>Твердость: 51-58 HRC<br/>         Радиус притупления рабочей части: не более 0.3 мм<br/>         Прочность соединения трубки иглы с головкой иглы: не менее 34 Н<br/>         Угол заточки: <math>(17 \pm 2)^\circ</math><br/>         Трубка иглы должна соответствовать ISO 9626. Фактическая длина трубки иглы должна равняться номинальной длине с допусками.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | 27 GA | <p>РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/08975<br/>         Декларация о соответствии РОСС IE.ИМ04.Д00247 (06.06.2016)<br/>         27 GA x 1/2" (0.4 x 13 мм)<br/>         Длина: 13 мм <math>\pm 1/-2</math> мм<br/>         Наружный диаметр: <math>0,6 \pm 0,1</math> мм<br/>         Наружный диаметр: <math>0,2 \pm 0,05</math> мм<br/>         Шероховатость: не более 0.16 мкм<br/>         Твердость: 51-58 HRC<br/>         Радиус притупления рабочей части: не более 0.3 мм<br/>         Прочность соединения трубки иглы с головкой иглы: не менее 22 Н<br/>         Угол заточки: <math>(17 \pm 2)^\circ</math><br/>         Трубка иглы должна соответствовать ISO 9626. Фактическая длина трубки иглы должна равняться номинальной длине с допусками</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ручка-держатель с электродом электрохирургическим |       | <p>Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07652<br/>         Декларация о соответствии РОСС IT.AB57.Д01901 от 25.02.2016<br/>         Оснащена двумя ручными выключателями. выключатель, расположенный ближе к электроду, имеет режим РЕЗАНИЕ, а выключатель, расположенный дальше от электрода, имеет режим КОАГУЛЯЦИЯ.<br/>         Масса: 70 г, <math>\pm 3\%</math><br/>         Длина ручки: 145 мм, <math>\pm 1\%</math><br/>         Имеет разъем с шестигранным фиксатором для электродов (диаметр 2.4 мм)<br/>         Разъем к ВЧ блоку трехпиновый с ассиметричным расположением пинов. Диаметр их 4 мм, расстояние между крайними пинами 32 мм, <math>\pm 1\%</math><br/>         Безопасность напряжения не менее 6 000 В.<br/>         Длина кабеля 500 см, <math>\pm 1\%</math><br/>         Тип электрода: электрод-нож<br/>         Длина электрода: 27 мм, <math>\pm 1\%</math><br/>         Сечение электрода: длина 2 мм, <math>\pm 1\%</math>; толщина 0,5 мм, <math>\pm 1\%</math><br/>         Совместима со всеми устоями «Valleylab», имеющими стандартный трехпиновый коннектор<br/>         Температура наружных частей изделий, не имеющих контакта с пациентом, доступных для прикосновения: не более 75 °C</p> |
| Капельница для внутривенных инфузий               |       | <p>Тип изделия -инфузионное<br/>         Трубка:<br/>         Внутренний диаметр: 2.9 мм <math>\pm 0.05</math> мм<br/>         Внешний диаметр: 4.1 мм <math>\pm 0.05</math> мм<br/>         Длина: 1800<math>\pm</math>30 мм<br/>         Длина капельной камеры: 60 мм, <math>\pm 1\%</math><br/>         Изделие имеет полужесткую прозрачную капельную камеру с фильтром, предназначенным для фильтрования крови и растворов в процессе переливания.<br/>         Капельная камераобеспечивает образование 20 капель из <math>(1,0 \pm 0,1)</math> г воды при скорости потока <math>(50 \pm 5)</math> капель в минуту.<br/>         Фильтр позволяет задерживать микросгустки размером <math>15 \times 10^{-6}</math> мм.<br/>         Роликовыйзажим должен обеспечивать регулирование тока жидкости</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |       | <p>от полного перекрытия до струйного истечения.<br/> Соединение деталей устройства выдерживает избыточное давление 40 кПа<br/> Детали изделия не должны иметь механических повреждений и посторонних включений, влияющих на функциональные свойства<br/> Изделие не должно иметь перегибов и слипшихся участков трубок, которые могут препятствовать нормальному току жидкости</p>  <p>1 – Капельная камера<br/> 2 – Трубка<br/> 3 – Роликовый зажим<br/> 4 – Коннектор<br/> 5 – Вентилируемый колпачок</p>                                                                                                                                                        |
| Катетер<br>Фолея<br>силиконовый | 6 Fr  | <p>Размер: 6 Fr<br/> Цветовая маркировка: розовый<br/> Внешний диаметр: 2.0 мм <math>\pm 1\%</math><br/> Внутренний диаметр: 1.1 мм, <math>\pm 1\%</math><br/> Емкость баллона: 3 мл, <math>\pm 1\%</math><br/> Длина: 30 см, <math>\pm 1\%</math><br/> Максимальное давление баллона – 2 атмосферы (0,203 МПа)<br/> Внешний вид катетеров не должен иметь дефектов.<br/> Усилие на разрыв катетеров не менее 15 Н<br/> Все соединения катетеров должны быть герметичны.<br/> Порт для надувания баллона должен соответствовать ISO 594-2 (Луер-лок), остальные порты должны обладать конусностью 6%.<br/> Измерения температуры: 25 °С - 45 °С (точность <math>\pm 0.1^\circ\text{C}</math>)<br/> Датчик: Термисторный преобразователь 400 пробы</p> |
|                                 | 8 Fr  | <p>Размер: 8 Fr<br/> Цветовая маркировка: черный<br/> Внешний диаметр: 2.7мм <math>\pm 1\%</math><br/> Внутренний диаметр: 1.7 мм, <math>\pm 1\%</math><br/> Емкость баллона: 3 мл, <math>\pm 1\%</math><br/> Длина: 30 см, <math>\pm 1\%</math><br/> Максимальное давление баллона – 2 атмосферы (0,203 МПа)<br/> Внешний вид катетеров не должен иметь дефектов.<br/> Усилие на разрыв катетеров не менее 15 Н<br/> Все соединения катетеров должны быть герметичны.<br/> Порт для надувания баллона должен соответствовать ISO 594-2 (Луер-лок), остальные порты должны обладать конусностью 6%<br/> Измерения температуры: 25 °С - 45 °С (точность <math>\pm 0.1^\circ\text{C}</math>)<br/> Датчик: Термисторный преобразователь 400 пробы.</p>   |
|                                 | 10 Fr | <p>Размер: 6 Fr<br/> Цветовая маркировка: серый<br/> Внешний диаметр: 2.3мм <math>\pm 1\%</math><br/> Внутренний диаметр: 3.3 мм, <math>\pm 1\%</math><br/> Емкость баллона: 3-5 мл, <math>\pm 1\%</math><br/> Длина: 30 см, <math>\pm 1\%</math><br/> Максимальное давление баллона – 2 атмосферы (0,203 МПа)<br/> Внешний вид катетеров не должен иметь дефектов.<br/> Усилие на разрыв катетеров не менее 15 Н<br/> Все соединения катетеров должны быть герметичны.<br/> Порт для надувания баллона должен соответствовать ISO 594-2</p>                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(Луер-лок), остальные порты должны обладать конусностью 6%.</p> <p>Измерения температуры: 25 °C - 45 °C (точность <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>)</p> <p>Датчик: Термисторный преобразователь 400 пробы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 Fr | <p>Размер: 12 Fr</p> <p>Цветовая маркировка: белый</p> <p>Внешний диаметр: 2.8 мм <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внутренний диаметр: 4.0 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Емкость баллона: 5-10 мл, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 40 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Максимальное давление баллона – 2 атмосферы (0,203 МПа)</p> <p>Внешний вид катетеров не должен иметь дефектов.</p> <p>Усилие на разрыв катетеров не менее 15 Н</p> <p>Все соединения катетеров должны быть герметичны.</p> <p>Порт для надувания баллона должен соответствовать ISO 594-2 (Луер-лок), остальные порты должны обладать конусностью 6%.</p> <p>Измерения температуры: 25 °C - 45 °C (точность <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>)</p> <p>Датчик: Термисторный преобразователь 400 пробы</p>     |
| 14 Fr | <p>Размер: 14 Fr</p> <p>Цветовая маркировка: зеленый</p> <p>Внешний диаметр: 4.7 мм <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внутренний диаметр: 3.3 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Емкость баллона: 5-10 мл, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 40 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Максимальное давление баллона – 2 атмосферы (0,203 МПа)</p> <p>Внешний вид катетеров не должен иметь дефектов.</p> <p>Усилие на разрыв катетеров не менее 15 Н</p> <p>Все соединения катетеров должны быть герметичны.</p> <p>Порт для надувания баллона должен соответствовать ISO 594-2 (Луер-лок), остальные порты должны обладать конусностью 6%.</p> <p>Измерения температуры: 25 °C - 45 °C (точность <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>)</p> <p>Датчик: Термисторный преобразователь 400 пробы</p>   |
| 16Fr  | <p>Размер: 16 Fr</p> <p>Цветовая маркировка: оранжевый</p> <p>Внешний диаметр: 5.3 мм <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внутренний диаметр: 3.8 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Емкость баллона: 5-10 мл, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 40 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Максимальное давление баллона – 2 атмосферы (0,203 МПа)</p> <p>Внешний вид катетеров не должен иметь дефектов.</p> <p>Усилие на разрыв катетеров не менее 15 Н</p> <p>Все соединения катетеров должны быть герметичны.</p> <p>Порт для надувания баллона должен соответствовать ISO 594-2 (Луер-лок), остальные порты должны обладать конусностью 6%.</p> <p>Измерения температуры: 25 °C - 45 °C (точность <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>)</p> <p>Датчик: Термисторный преобразователь 400 пробы</p> |
| 18Fr  | <p>Размер: 18 Fr</p> <p>Цветовая маркировка: красный</p> <p>Внешний диаметр: 6.0 мм <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внутренний диаметр: 4.5 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Емкость баллона: 5-10 мл, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 40 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Максимальное давление баллона – 2 атмосферы (0,203 МПа)</p> <p>Усилие на разрыв катетеров не менее 15 Н</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

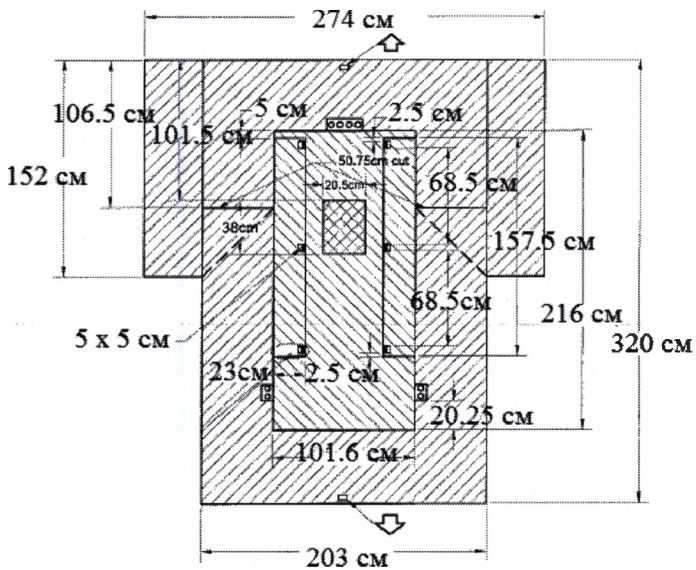
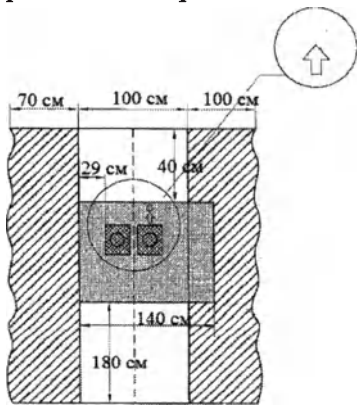
|                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                | <p>Все соединения катетеров должны быть герметичны.</p> <p>Порт для надувания баллона должен соответствовать ISO 594-2 (Луер-лок), остальные порты должны обладать конусностью 6%.</p> <p>Измерения температуры: 25 °C - 45 °C (точность <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>)</p> <p>Датчик: Термисторный преобразователь 400 пробы</p>                                                                                                                                    |
| Катетер торакальный | загнутый 28 Fr | <p>Размер: 28 Fr Загнутый</p> <p>Внутренний диаметр: 7,5 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр: 9,3 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 50 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Количество дренажных отверстий: 6</p> <p>Размер дренажных отверстий: 10 x 4 мм</p> <p>Метки: с шагом 2 см, до 20 см</p> <p>усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером: не менее 20 Н</p> <p>Остаточный вакуум: не более 0.33 кПа</p>   |
|                     | загнутый 32 Fr | <p>Размер: 32 Fr Загнутый</p> <p>Внутренний диаметр: 8,7 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр: 10,7 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 50 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Количество дренажных отверстий: 6</p> <p>Размер дренажных отверстий: 10 x 4 мм</p> <p>Метки: с шагом 2 см, до 20 см</p> <p>усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером: не менее 20 Н</p> <p>Остаточный вакуум: не более 0.33 кПа</p>  |
|                     | загнутый 36 Fr | <p>Размер: 36 Fr Загнутый</p> <p>Внутренний диаметр: 10,0 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр: 12,0 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 50 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Количество дренажных отверстий: 6</p> <p>Размер дренажных отверстий: 10 x 4 мм</p> <p>Метки: с шагом 2 см, до 20 см</p> <p>усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером: не менее 20 Н</p> <p>Остаточный вакуум: не более 0.33 кПа</p> |
|                     | прямой 28 Fr   | <p>Размер: 28 Fr Прямой</p> <p>Внутренний диаметр: 7,5 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр: 9,3 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 50 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Количество дренажных отверстий: 6</p> <p>Размер дренажных отверстий: 10 x 4 мм</p> <p>Метки: с шагом 2 см, до 20 см</p> <p>усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером: не менее 20 Н</p> <p>Остаточный вакуум: не более 0.33 кПа</p>     |
|                     | прямой 32 Fr   | <p>Размер: 32 Fr Прямой</p> <p>Внутренний диаметр: 8,7 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр: 10,7 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 50 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Количество дренажных отверстий: 6</p> <p>Размер дренажных отверстий: 10 x 4 мм</p> <p>Метки: с шагом 2 см, до 20 см</p> <p>усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером: не менее 20 Н</p>                                                |

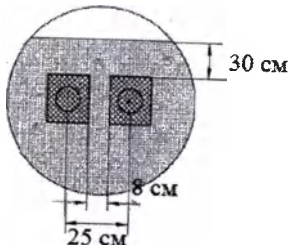
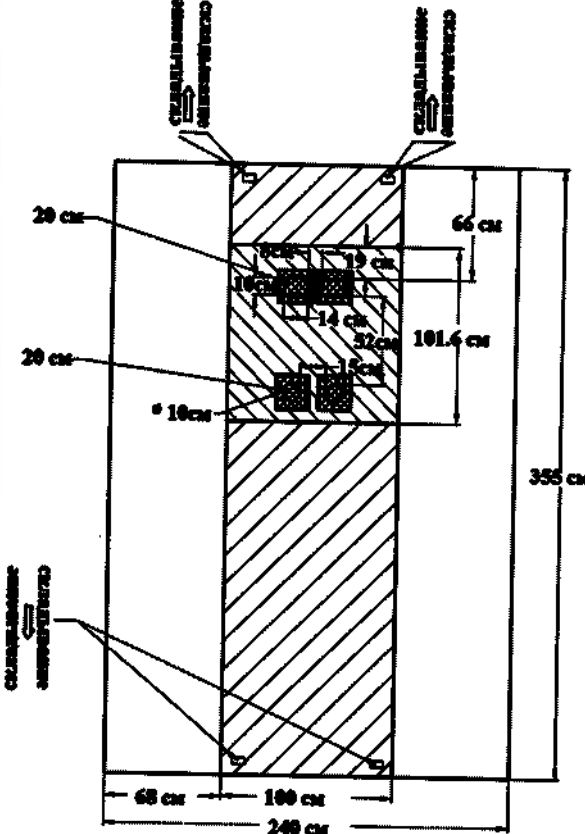
|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |              | Остаточный вакуум: не более 0.33 кПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | прямой 36 Fr | <p>Размер: 36 Fr Прямой</p> <p>Внутренний диаметр: 10,0 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр: 12,0 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина: 50 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Количество дренажных отверстий: 6</p> <p>Размер дренажных отверстий: 10 x 4 мм</p> <p>Метки: с шагом 2 см, до 20 см</p> <p>усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером: не менее 20 Н</p> <p>Остаточный вакуум: не более 0.33 кПа</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| Коннектор Y-образный |              | Диаметр $\frac{1}{4}$ " (6.35 мм, $\pm 1\%$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Лезвие               | №11          | <p>Тип: остроконечное</p> <p>Форма режущей кромки: прямолинейная</p> <p>Размер: 11</p> <p>Длина: 40 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Твердость по Роквеллу 51...58;</li> <li>- Шероховатость режущих кромок менее Ra 0.63 мкм. Параметр шероховатости остальных поверхностей Ra 1,25 мкм.</li> <li>- Ширина режущей кромки не более 3 мкм.</li> </ul> <p>Режущие кромки должны быть острыми по всей длине и не должны иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест.</p> <p>Поверхность изделия: блестящая</p> <p>На поверхности изделий не должно быть вмятин, трещин, царапин, заусенцев и раковин.</p> <p>Острие остроконечных изделий должно быть острым.</p> |
|                      | №15          | <p>Тип: брюшистое</p> <p>Форма режущей кромки: дугообразная</p> <p>Размер: 15</p> <p>Длина: 37 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Твердость по Роквеллу 51...58;</li> <li>- Шероховатость режущих кромок менее Ra 0.63 мкм. Параметр шероховатости остальных поверхностей Ra 1,25 мкм.</li> <li>- Ширина режущей кромки не более 3 мкм.</li> </ul> <p>Режущие кромки должны быть острыми по всей длине и не должны иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест.</p> <p>Поверхность изделия: блестящая</p> <p>На поверхности изделий не должно быть вмятин, трещин, царапин, заусенцев и раковин.</p>                                                              |
|                      | №20          | <p>Тип: радиусное</p> <p>Форма режущей кромки: дугообразная</p> <p>Размер: 20</p> <p>Длина: 50 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Твердость по Роквеллу 51...58;</li> <li>- Шероховатость режущих кромок менее Ra 0.63 мкм. Параметр шероховатости остальных поверхностей Ra 1,25 мкм.</li> <li>- Ширина режущей кромки не более 3 мкм.</li> </ul> <p>Режущие кромки должны быть острыми по всей длине и не должны иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест.</p> <p>Поверхность изделия: блестящая</p> <p>На поверхности изделий не должно быть вмятин, трещин, царапин, заусенцев и раковин.</p>                                                              |
|                      | №22          | <p>Тип: радиусное</p> <p>Форма режущей кромки: дугообразная</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                  | <p>Размер: 22</p> <p>Длина: 58 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>- Твердость по Роквеллу 51...58;</p> <p>- Шероховатость режущих кромок менее Ra 0.63мкм. Параметр шероховатости остальных поверхностей Ra 1,25 мкм.</p> <p>- Ширина режущей кромки не более 3 мкм.</p> <p>Режущие кромки должны быть острыми по всей длине и не должны иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест.</p> <p>Поверхность изделия: блестящая</p> <p>На поверхности изделий не должно быть вмятин, трещин, царапин, заусенцев и раковин.</p> |
| Лента клейкая<br>операционная |                                  | <p>Длина: 50 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Ширина: 10 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина бумажной полосы превышает длину нанесенного клея на 2 см с двух сторон</p> <p>Прочность на разрыв: не менее 30Н/см</p> <p>Сила адгезии: не менее 0,8 Н/см</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Лоток для<br>инструмен<br>тов | С одним<br>отделением            | <p>Длина: 285 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Ширина: 250 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Высота: 55 мм, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | С<br>четырьмя<br>отделения<br>ми | <p>Длина: 270 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Ширина: 180 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Высота: 42 мм, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Лоток<br>почкообра<br>зный    | 700 мл                           | Объем 700 мл, $\pm 1\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | 3000 мл                          | Объем 3000 мл, $\pm 1\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мешок для отходов             |                                  | <p>50 x 60 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Ширина липкой ленты: 5 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Размер кармана: 50 x 60 см, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Мешок для<br>диатермии        | 35 x 43 см                       | <p>35 x 43 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Ширина липкой ленты: 5 см, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | 35 x 45 см                       | <p>35 x 45 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Ширина липкой ленты: 5 см, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | 35 x 45 см                       | <p>35 x 45 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Ширина липкой ленты: 5 см, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Мочеприемник<br>Urimetrix     |                                  | <p>Мочеприемник: объем 500 мл, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Шкала: 0-30 мл <math>\pm 1</math> мл</p> <p>30-100 мл <math>\pm 5</math> мл</p> <p>100-150 мл <math>\pm 10</math> мл</p> <p>150-500мл <math>\pm 25</math> мл</p> <p>Объем мешка: 2000 мл, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Градуировка мешка: каждые 500 мл</p> <p>Длина трубки: 150 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внутренний диаметр трубки: 9 мм, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                  |

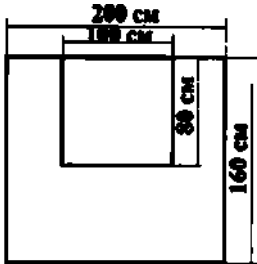
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организатор для игл и лезвий магнитный                       |            | Размеры одной половины: 90 x 120 мм, ±1%<br>Размеры ячеек: 10 x 20 мм, ±1%<br>Количество ячеек: 30+40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Организатор для инструментов                                 |            | Размеры в собранном состоянии:<br>17 x 7 см, ±1%<br>Размеры в разложенном состоянии:<br>29,5 x 7 см, ±1% (широкая часть)<br>29,5 x 6,5 см, ±1% (узкая часть)<br>Количество отделений: 13+14<br>Масса: 18 г, ±1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Отсос Yankauer                                               |            | Внутренний диаметр коннектора: 7 мм, ±1%<br>Общая длина: 26 см, ±1%<br>Шаровидный кончик<br>Диаметр шаровидного кончика: 4 мм, ±1%<br>Должна сохранять не менее 50 % внутреннего диаметра по всей длине при вакууме минус 60 кПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша |            | Габаритные размеры: 7 см x 7 см, ±1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Перчатки хирургические                                       | №6         | См. Табл 4.1-4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              | №6.5       | См. Табл 4.1-4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              | №7         | См. Табл 4.1-4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              | №7.5       | См. Табл 4.1-4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              | №8         | См. Табл 4.1-4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Пленка хирургическая клейкая                                 | 10 x 25 см | Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07270<br>Декларация о соответствии РОСС US.ИМ22.Д01096 от 21.07.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | 9 x 35 см  | Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07270<br>Декларация о соответствии РОСС US.ИМ22.Д01096 от 21.07.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Пленка кардиохирургическая Ioban                             | 90 x 45    | РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/09345<br>Декларация о соответствии РОСС US.МГ11.Д02762 от 25.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | 60 x 35    | РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФСЗ 2011/09345<br>Декларация о соответствии РОСС US.МГ11.Д02762 от 25.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Покрывало одноразовое для стола Mayo                         |            | 80 x 140 см, ±1%<br>Плотность: не менее 55 грамм на 1 кв. м<br>Усиливающий слой: 60 x 76 см, ±1%<br>Плотность: не менее 30 грамм на м <sup>2</sup> , с впитывающей способностью <div data-bbox="468 1543 777 1871" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Микробная проницаемость в сухом состоянии: Log 10 (CFU)<br/>Не требуется</li> <li>2. Микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI (непроницаем)</li> <li>3. Чистота микробная: не более 2 Log10(CFU) / .дм2</li> <li>4. Чистота в части инородных частиц не более 2,5 IPM</li> </ol> |

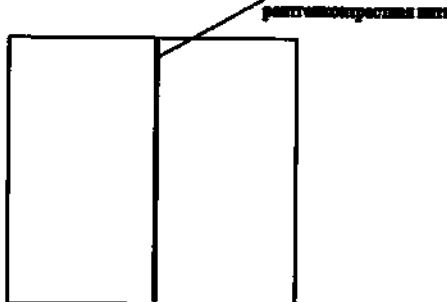
|                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |              | <p>5. Пылеворсоотделение не более 3,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>6. Водоупорность не менее 150 см. H2O</p> <p>7. Прочность на разрыв в сухом состоянии в области критической зоны не менее 180 кПа</p> <p>8. Прочность на разрыв во влажном состоянии в области критической зоны не менее 180 кПа</p> <p>9. Прочность на растяжение в сухом состоянии в области критической зоны не менее 55 Н</p> <p>10. Прочность на растяжение во влажном состоянии в области критической зоны не менее 55 Н</p>                                                                                                                                                                                        |
| Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария | 137x180 см   | <p>137 x 180 см, ±</p> <p>Плотность полотна: не менее 54г/м2</p> <p>Впитывающий слой: 28 г/м2, ПЭ пленка 26 г/м2.</p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)</p> <p>Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 IPM</p> <p>Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н</p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p>   |
|                                                                 | 150x250 см   | <p>150 x 250 см, ±1%</p> <p>Плотность полотна: не менее 54г/м2</p> <p>Впитывающий слой: 28 г/м2, ПЭ пленка 26 г/м2.</p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)</p> <p>Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 IPM</p> <p>Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н</p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p> |
|                                                                 | 137 x 150 см | <p>137 x 150 см, ±1%</p> <p>Плотность полотна: не менее 54г/м2</p> <p>Впитывающий слой: 28 г/м2, ПЭ пленка 26 г/м2.</p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)</p> <p>Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 IPM</p> <p>Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н</p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p> |
| Полотенце хирургическое                                         |              | <p>Габаритные размеры: 42 x 60 см, ±1%</p> <p>Плотность ткани: 150 г/ кв.м</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Простыня                                                        | 274 x 320    | Габаритные размеры: 274 x 320 см, ±1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кардиохирургическая | см           | <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется<br/> Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ<br/> Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)<br/> Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 ІРМ<br/> Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)<br/> Водоупорность: 100 см Н20<br/> Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н<br/> Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p>                                             |
| 270 x 310 см        | 270 x 310 см | <p>Габаритные размеры: 270 x 310 см, ±1%<br/> Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется<br/> Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ<br/> Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)<br/> Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 ІРМ<br/> Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)<br/> Водоупорность: 100 см Н20<br/> Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н<br/> Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p>  |

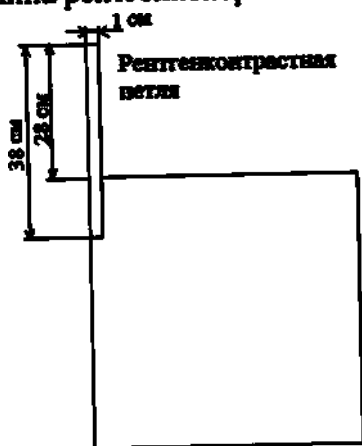
|                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | 240 x 355 см | <p>Габаритные размеры: 240 x 355 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ</p> <p>Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}</math></p> <p>Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></p> <p>Пыле-, ворсоотделение: <math>&lt; 4,0 \text{ Lg (от подсчитанных частиц корпии)}</math></p> <p>Водоупорность: 100 см Н20</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p><b>Прочность на разрыв во влажном состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></b></p> <p><b>Прочность на растяжение в сухом состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></b></p> <p><b>Прочность на растяжение во влажном состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></b></p>  |
| Простыня одноразовая с липучкой | 50x75 см     | <p>50 x 75 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Ширина липкой полосы: 5 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>По краю клейкого края находится участок не менее 0,5 см свободный от адгезива.</p> <p>Плотность полотна: не менее 54 г/м<sup>2</sup></p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ</p> <p>Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}</math></p> <p>Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></p> <p>Пыле-, ворсоотделение: <math>&lt; 4,0 \text{ Lg (от подсчитанных частиц корпии)}</math></p> <p>Водоупорность: 100 см Н20</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p><b>Прочность на разрыв во влажном состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></b></p>                                                                                          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Прочность на растяжение в сухом состоянии: >20 Н<br>Прочность на растяжение во влажном состоянии: >20 Н<br>Впитываемость: не более 600%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75x100 см  | 75 x 100 см, ±1%<br>Ширина липкой полосы: 5 см, ±1%<br>По краю клейкого края находится участок не менее 0,5см свободный от адгезива.<br>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется<br>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ<br>Чистота микробная: <2 Lg (CFU/дм2)<br>Чистота в части инородных частиц: <3,5 ІРМ<br>Пыле-, ворсоотделение: <4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)<br>Водоупорность: 100 см Н20<br>Прочность на разрыв в сухом состоянии: >40 кПа<br>Прочность на разрыв во влажном состоянии: >40 кПа<br>Прочность на растяжение в сухом состоянии: >20 Н<br>Прочность на растяжение во влажном состоянии: >20 Н<br>Впитываемость: не более 600%                                                                                         |
| 100x100 см | 100 x 100 см, ±1%<br>Ширина липкой полосы: 5 см, ±1%<br>По краю клейкого края находится участок не менее 0,5см свободный от адгезива.<br>Плотность полотна: не менее 54г/м2<br>Впитывающий слой: 28 г/м2, ПЭ пленка 26 г/м2.<br>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется<br>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ<br>Чистота микробная: <2 Lg (CFU/дм2)<br>Чистота в части инородных частиц: <3,5 ІРМ<br>Пыле-, ворсоотделение: <4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)<br>Водоупорность: 100 см Н20<br>Прочность на разрыв в сухом состоянии: >40 кПа<br>Прочность на разрыв во влажном состоянии: >40 кПа<br>Прочность на растяжение в сухом состоянии: >20 Н<br>Прочность на растяжение во влажном состоянии: >20 Н<br>Впитываемость: не более 600% |
| 90x160 см  | 90 x 160 см, ±1%<br>Ширина липкой полосы: 5 см, ±1%<br>По краю клейкого края находится участок не менее 0,5см свободный от адгезива.<br>Плотность полотна: не менее 54г/м2<br>Впитывающий слой: 28 г/м2, ПЭ пленка 26 г/м2.<br>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется<br>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ<br>Чистота микробная: <2 Lg (CFU/дм2)<br>Чистота в части инородных частиц: <3,5 ІРМ<br>Пыле-, ворсоотделение: <4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)<br>Водоупорность: 100 см Н20<br>Прочность на разрыв в сухом состоянии: >40 кПа<br>Прочность на разрыв во влажном состоянии: >40 кПа<br>Прочность на растяжение в сухом состоянии: >20 Н<br>Прочность на растяжение во влажном состоянии: >20 Н                                  |
| 200x160 см | 200 x 160 см, ±1%<br>Ширина липкой полосы: 5 см, ±1%<br>По краю клейкого края находится участок не менее 0,5см свободный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |         | <p>от адгезива.</p> <p>Усиление: 100 x 80 см, ±1%</p>  <p>Плотность полотна: не менее 42г/м2<br/> Усиливающий слой: 65 г/м2.<br/> Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется<br/> Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ<br/> Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)<br/> Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 ІРМ<br/> Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)<br/> Водоупорность: 100 см Н20<br/> Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н<br/> Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p> |
| Простыня одноразовая                 | 90x100  | <p>90 x 100 см, ±1%</p> <p>Плотность полотна: не менее 54г/м2<br/> Впитывающий слой: 28 г/м2, ПЭ пленка 26 г/м2.<br/> Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется<br/> Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ<br/> Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)<br/> Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 ІРМ<br/> Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)<br/> Водоупорность: 100 см Н20<br/> Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н<br/> Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p>                                                                                              |
|                                      | 100x120 | <p>100 x 120 см, ±1%</p> <p>Плотность полотна: не менее 54г/м2<br/> Впитывающий слой: 28 г/м2, ПЭ пленка 26 г/м2.<br/> Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется<br/> Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ<br/> Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)<br/> Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 ІРМ<br/> Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)<br/> Водоупорность: 100 см Н20<br/> Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа<br/> Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н<br/> Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p>                                                                                             |
| Салфетки впитывающие, шарикообразные | 45 мм   | <p>Размеры в развёрнутом виде: 45x45 см, ±1%</p> <p>Края марли находятся внутри шарика.</p> <p>метод отбеливания – безхлорный (3 % перекисью водорода).</p> <p>Поверхностная масса - не менее 23 г/м2.</p> <p>Диаметр шара: 45мм±5%</p> <p>плотность плетения не менее 17 нитей на 1 см2</p> <p>Плетение: Простая сетка 1/1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                            | <p>Сила разрыва:<br/>         -основа не менее 50 Н/5 см<br/>         -уток не менее 30 Н/5 см<br/>         Смачиваемость, с, не более: 10<br/>         РН: 6.5-7.5<br/>         водопоглотительная способность: не менее 11 г/г<br/>         Капиллярность, см/ч, не менее:10<br/>         Влажность, %, не более: 8<br/>         Зольность, %, не более: 0.4<br/>         сульфатная зольность, %, не более: 0.4<br/>         Белизна, %, не менее: 80<br/>         Степень устойчивости белизны, %, не более: 10<br/>         потеря в массе при высушивании: менее 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | 50 мм                      | <p>Размеры в развёрнутом виде: 50 x50 см, <math>\pm 1\%</math><br/>         Края марли находятся внутри шарика.<br/>         метод отбеливания – безхлорный (3 % перекисью водорода).<br/>         Поверхностная масса - не менее 24 г/м<sup>2</sup>.<br/>         Диаметр шара: 50 мм<math>\pm 5\%</math><br/>         плотность плетения не менее 17 нитей на 1 см<sup>2</sup><br/>         Плетение: Простая сетка 1/1<br/>         Сила разрыва:<br/>         -основа не менее 50 Н/5 см<br/>         -уток не менее 30 Н/5 см<br/>         Смачиваемость, с, не более: 10<br/>         РН: 6.5-7.5<br/>         водопоглотительная способность: не менее 11 г/г<br/>         Капиллярность, см/ч, не менее:10<br/>         Влажность, %, не более: 8<br/>         Зольность, %, не более: 0.4<br/>         сульфатная зольность, %, не более: 0.4<br/>         Белизна, %, не менее: 80<br/>         Степень устойчивости белизны, %, не более: 10<br/>         потеря в массе при высушивании: менее 8</p> |
| Салфетка<br>впитывающая                         |                            | <p>Плотность: 160<math>\pm</math>16 г/м<sup>2</sup><br/>         Толщина: 1,68 <math>\pm</math>0,17 мм<br/>         Габаритные размеры: 10 x 8 см, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Салфетки<br>впитываю<br>щие<br>многослой<br>ные | рентгенко<br>нтрастны<br>е | <p>Размер 10 x 10 см, <math>\pm 1\%</math>, с подвернутыми внутрь кромками, с<br/>         вплетенной рентгенконтрастной нитью<br/>         Нить проходит по центру салфетки в направлении уток</p>  <p>Ширина нити: 0.3 мм, <math>\pm 1\%</math>,<br/>         Размеры в развёрнутом виде: 35 x32 см, <math>\pm 1\%</math><br/>         Количество слоев: 12.<br/>         метод отбеливания – безхлорный (3 % перекисью водорода).<br/>         Поверхностная масса - не менее 23 г/м<sup>2</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

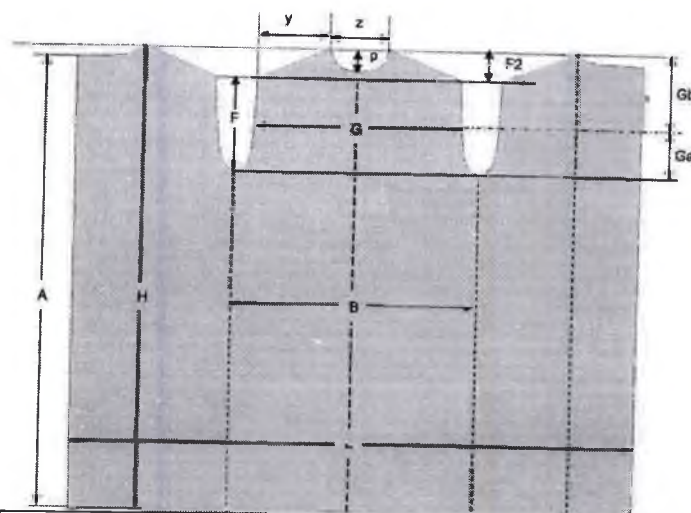
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                              | <p>плотность плетения не менее 17 нитей на 1 см<sup>2</sup></p> <p>Плетение: Простая сетка 1/1</p> <p>Сила разрыва:</p> <p>-основа не менее 50 Н/5 см</p> <p>-уток не менее 30 Н/5 см</p> <p>Смачиваемость, с, не более: 10</p> <p>РН: 6.5-7.5</p> <p>водопоглотительная способность: не менее 11 г/г</p> <p>Капиллярность, см/ч, не менее:10</p> <p>Влажность, %, не более: 8</p> <p>Зольность, %, не более: 0.4</p> <p>сульфатная зольность, %, не более: 0.4</p> <p>Белизна, %, не менее: 80</p> <p>Степень устойчивости белизны, %, не более: 10</p> <p>потеря в массе при высушивании: менее 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | нерентген<br>контрастн<br>ые | <p>Размер 10 x 10 см, <math>\pm 1\%</math>, с подвернутыми внутрь кромками,</p> <p>Размеры в развёрнутом виде: 35 x32 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Количество слоев: 12.</p> <p>метод отбеливания – безхлорный (3 % перекисью водорода).</p> <p>Поверхностная масса - не менее 23 г/м<sup>2</sup>.</p> <p>плотность плетения не менее 17 нитей на 1 см<sup>2</sup></p> <p>Плетение: Простая сетка 1/1</p> <p>Сила разрыва:</p> <p>-основа не менее 50 Н/5 см</p> <p>-уток не менее 30 Н/5 см</p> <p>Смачиваемость, с, не более: 10</p> <p>РН: 6.5-7.5</p> <p>водопоглотительная способность: не менее 11 г/г</p> <p>Капиллярность, см/ч, не менее:10</p> <p>Влажность, %, не более: 8</p> <p>Зольность, %, не более: 0.4</p> <p>сульфатная зольность, %, не более: 0.4</p> <p>Белизна, %, не менее: 80</p> <p>Степень устойчивости белизны, %, не более: 10</p> <p>потеря в массе при высушивании: менее 8</p> |
| Салфетки<br>рентгенконтрастные | 30x30 см                     | <p>Размер 30 x 30 см, <math>\pm 1\%</math>, с подвернутыми внутрь кромками,</p> <p>Количество слоев: 4.</p> <p>метод отбеливания – безхлорный (3 % перекисью водорода).</p> <p>Длина рентгенконтрастной петли: <math>38 \pm 0.5</math> см</p> <p>Ширина рентгенконтрастной петли: <math>1 \pm 0.1</math> см</p> <div data-bbox="500 1588 859 2026" data-label="Diagram"> <p>0.8 см</p> <p>Рентгенконтрастная петля</p> <p>38 см</p> <p>28 см</p> </div> <p>Поверхностная масса - не менее 23 г/м<sup>2</sup>.</p> <p>плотность плетения не менее 20 нитей на 1 см<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          | Плетение: Простая сетка 1/1<br>Сила разрыва:<br>-основа не менее 50 Н/5 см<br>-уток не менее 30 Н/5 см<br>рН: 6-8<br>Смачиваемость, с, не более: 10<br>Капиллярность, см/ч, не менее:10<br>Влажность, %, не более: 7<br>Зольность, %, не более: 0.3<br>Белизна, %, не менее: 80<br>Степень устойчивости белизны, %, не более: 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | 45x45 см | Размер 45x 45 см, $\pm 1\%$ , с подвернутыми внутрь кромками,<br>Количество слоев: 4.<br>метод отбеливания – безхлорный (3 % перекисью водорода).<br><b>Длина рентгенконтрастной петли: <math>14 \pm 0.5</math> см</b>  <p>Рентгенконтрастная петля</p> <p>38 см</p> <p>28 см</p> <p>1 см</p> <p>Поверхностная масса - не менее 23 г/м<sup>2</sup>.<br/> плотность плетения не менее 20 нитей на 1 см<sup>2</sup><br/> Плетение: Простая сетка 1/1<br/> Сила разрыва:<br/> -основа не менее 50 Н/5 см<br/> -уток не менее 30 Н/5 см<br/> рН: 6-8<br/> Смачиваемость, с, не более: 10<br/> Капиллярность, см/ч, не менее:10<br/> Влажность, %, не более: 7<br/> Зольность, %, не более: 0.3<br/> Белизна, %, не менее: 80<br/> Степень устойчивости белизны, %, не более: 10 </p> |
| Скальпель<br>с<br>рукояткой | №11      | Тип: остrokонечное<br>Форма режущей кромки: прямолинейная<br>Размер: 11<br>Длина: 40 мм, $\pm 1\%$<br>- Твердость по Роквеллу 51...58;<br>- Шероховатость режущих кромок менее Ra 0.63мкм.Параметр шероховатости остальных поверхностей Ra 1,25 мкм.<br>-Ширина режущей кромки не более 3 мкм.<br>Режущие кромки должны быть острыми по всей длине и не должны иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест.<br>Поверхность изделия: блестящая<br>На поверхности изделий не должно быть вмятин, трещин, царапин, заусенцев и раковин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |        | Длина ручки: 108 мм или 43 мм, $\pm 1\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | №15    | <p>Тип: брюшистое</p> <p>Форма режущей кромки: дугообразная</p> <p>Размер: 15</p> <p>Длина: 37 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>- Твердость по Роквеллу 51...58;</p> <p>- Шероховатость режущих кромок менее Ra 0.63мкм.Параметр шероховатости остальных поверхностей Ra 1,25 мкм.</p> <p>-Ширина режущей кромки не более 3 мкм.</p> <p>Режущие кромки должны быть острыми по всей длине и не должны иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест.</p> <p>Поверхность изделия: блестящая</p> <p>На поверхности изделий не должно быть вмятин, трещин, царапин, заусенцев и раковин.</p> <p>Длина ручки: 108 мм, <math>\pm 1\%</math></p> |
|                                        | №23    | <p>Тип: радиусное</p> <p>Форма режущей кромки: дугообразная</p> <p>Размер: 23</p> <p>Длина: 60 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>- Твердость по Роквеллу 51...58;</p> <p>- Шероховатость режущих кромок менее Ra 0.63мкм.Параметр шероховатости остальных поверхностей Ra 1,25 мкм.</p> <p>-Ширина режущей кромки не более 3 мкм.</p> <p>Режущие кромки должны быть острыми по всей длине и не должны иметь трещин, зазубрин и выкрошенных мест.</p> <p>Поверхность изделия: блестящая</p> <p>На поверхности изделий не должно быть вмятин, трещин, царапин, заусенцев и раковин.</p> <p>Длина ручки: 114 мм, <math>\pm 1\%</math></p> |
| Губка для обработки операционного поля |        | <p>Размеры губки: 70 x30 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Длина палочки: 110 мм, <math>\pm 1\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Турникет                               |        | <p>Длина: 40 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Диаметр: 12 Fr (4 мм, <math>\pm 1\%</math>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Трубка аспирационная                   | 200 см | <p>Длина: 200 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внутренний диаметр трубки: 4 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр рубки: 8 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Размер коннектора: внутренний диаметр 8 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Должна сохранять не менее 50 % внутреннего диаметра по всей длине при вакууме минус 60 кПа</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | 250 см | <p>Длина: 250 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внутренний диаметр трубки: 4 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр рубки: 8 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Размер коннектора: внутренний диаметр 8 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Должна сохранять не менее 50 % внутреннего диаметра по всей длине при вакууме минус 60 кПа</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | 350 см | <p>Длина: 350 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внутренний диаметр трубки: 4 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Внешний диаметр рубки: 8 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Размер коннектора: внутренний диаметр 8 мм, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Должна сохранять не менее 50 % внутреннего диаметра по всей длине при вакууме минус 60 кПа</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Халат                                  | S      | Размер S,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| хирургический с усиленным впитывающим слоем |    | <p>Длина: 120 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}</math></p> <p>Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></p> <p>Пыле-, ворсоотделение: <math>&lt; 4,0 \text{ Lg}</math> (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></p>                   |
|                                             | M  | <p>Размер M,</p> <p>Длина: 120 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}</math></p> <p>Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></p> <p>Пыле-, ворсоотделение: <math>&lt; 4,0 \text{ Lg}</math> (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></p>  |
|                                             | L  | <p>Размер L,</p> <p>Длина: 130 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}</math></p> <p>Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></p> <p>Пыле-, ворсоотделение: <math>&lt; 4,0 \text{ Lg}</math> (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></p>  |
|                                             | XL | <p>Размер XL,</p> <p>Длина: 150 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}</math></p> <p>Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></p> <p>Пыле-, ворсоотделение: <math>&lt; 4,0 \text{ Lg}</math> (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: <math>&gt; 40 \text{ кПа}</math></p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: <math>&gt; 20 \text{ Н}</math></p> |
| Халат хирургический стандартный             | S  | <p>Размер S,</p> <p>Длина: 120 см, <math>\pm 1\%</math></p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: <math>&lt; 2 \text{ Lg (CFU/дм}^2\text{)}</math></p> <p>Чистота в части инородных частиц: <math>&lt; 3,5 \text{ IPM}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

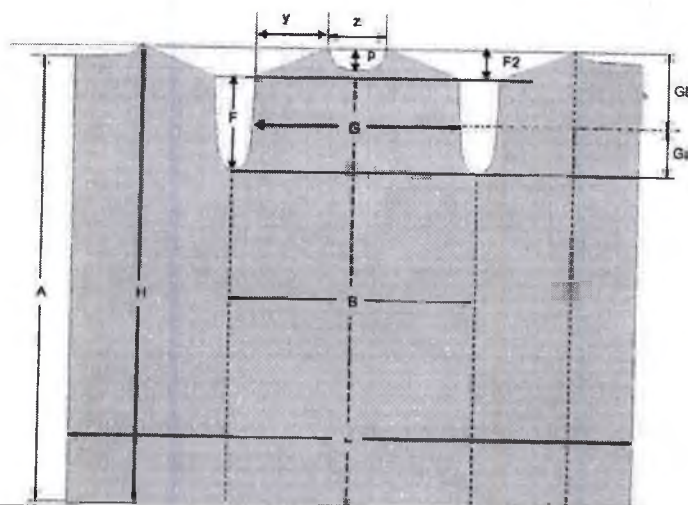
Пыле-, ворсоотделение: <4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)  
 Водоупорность: 100 см H2O  
 Прочность на разрыв в сухом состоянии: >40 кПа  
 Прочность на разрыв во влажном состоянии: >40 кПа  
 Прочность на растяжение в сухом состоянии: >20 Н  
 Прочность на растяжение во влажном состоянии: >20 Н



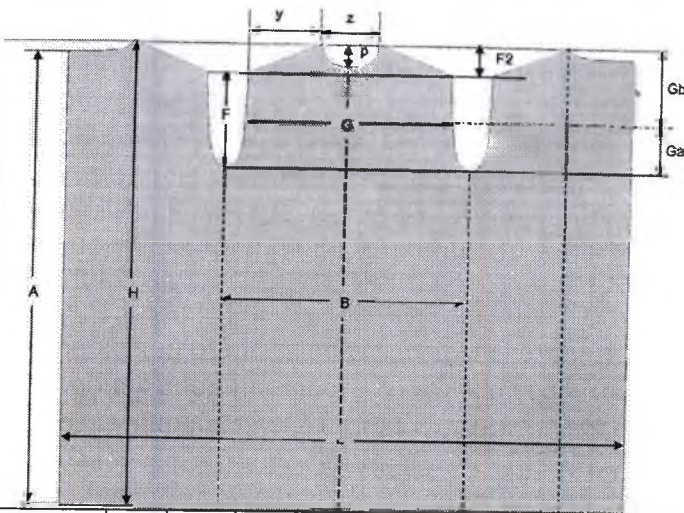
| Длин<br>а, см | F,<br>± | F2<br>,<br>±2 | Y,<br>± | Z,<br>± | P,<br>± | B,<br>± | G,<br>± | Ga<br>,<br>±2 | Gb<br>,<br>±2 | L,<br>±5 | A,<br>±3 | H,<br>±5 |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 120           | 2       | 5,            | 1       | 2       | 9       | 6       | 5       | 14            | 19,           | 15       | 11       | 12       |
|               | 8       | 5             | 7       | 3       |         | 6       | 9       |               | 5             | 0        | 7,5      | 0        |

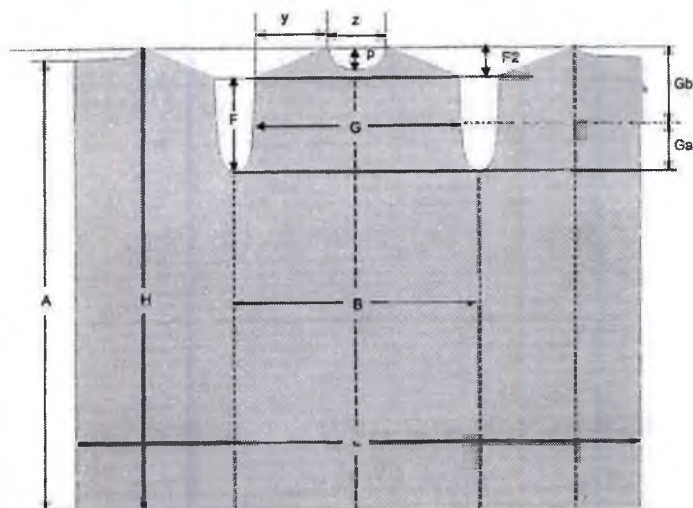
М

Размер М,  
 Длина: 120 см, ±1%  
 Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется  
 Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 ВІ  
 Чистота микробная: <2 Lg (CFU/дм2)  
 Чистота в части инородных частиц: <3,5 ІРМ  
 Пыле-, ворсоотделение: <4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)  
 Водоупорность: 100 см H2O  
 Прочность на разрыв в сухом состоянии: >40 кПа  
 Прочность на разрыв во влажном состоянии: >40 кПа  
 Прочность на растяжение в сухом состоянии: >20 Н  
 Прочность на растяжение во влажном состоянии: >20 Н



| Длин<br>а, см | F,<br>± | F2<br>,<br>±2 | Y,<br>± | Z,<br>± | P,<br>± | B,<br>± | G,<br>± | Ga<br>,<br>±2 | Gb<br>,<br>±2 | L,<br>±5 | A,<br>±3 | H,<br>±5 |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
|               | 2       | ±2            | 2       | 2       | 1       | 2       | 2       | ±2            | ±2            |          |          |          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |          |         |         |         |          |          |          |           |          |          |          |     |        |         |        |        |   |        |        |    |          |         |           |         |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----|--------|---------|--------|--------|---|--------|--------|----|----------|---------|-----------|---------|--|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120           | 2       | 5,       | 1       | 2       | 9       | 6        | 5        | 14       | 19,       | 15       | 11       | 12       |     |        |         |        |        |   |        |        |    |          |         |           |         |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 8       | 5        | 7       | 3       |         | 6        | 9        |          | 5         | 0        | 7,5      | 0        |     |        |         |        |        |   |        |        |    |          |         |           |         |  |
| L             | <p>Размер L,</p> <p>Длина: 130 см, ±1%</p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)</p> <p>Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 IPM</p> <p>Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H20</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н</p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p>  <table><tr><td>Длин<br/>а, см</td><td>F,<br/>±</td><td>F2,<br/>±</td><td>Y,<br/>±</td><td>Z,<br/>±</td><td>P,<br/>±</td><td>B,<br/>±</td><td>G,<br/>±</td><td>Ga,<br/>±</td><td>Gb,<br/>±</td><td>L,<br/>±5</td><td>A,<br/>±3</td><td>H,<br/>±5</td></tr><tr><td>130</td><td>2<br/>8</td><td>5,<br/>5</td><td>1<br/>7</td><td>2<br/>3</td><td>9</td><td>6<br/>6</td><td>5<br/>9</td><td>14</td><td>19,<br/>5</td><td>15<br/>0</td><td>12<br/>7,5</td><td>13<br/>0</td></tr></table> | Длин<br>а, см | F,<br>± | F2,<br>± | Y,<br>± | Z,<br>± | P,<br>± | B,<br>±  | G,<br>±  | Ga,<br>± | Gb,<br>±  | L,<br>±5 | A,<br>±3 | H,<br>±5 | 130 | 2<br>8 | 5,<br>5 | 1<br>7 | 2<br>3 | 9 | 6<br>6 | 5<br>9 | 14 | 19,<br>5 | 15<br>0 | 12<br>7,5 | 13<br>0 |  |
| Длин<br>а, см | F,<br>±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F2,<br>±      | Y,<br>± | Z,<br>±  | P,<br>± | B,<br>± | G,<br>± | Ga,<br>± | Gb,<br>± | L,<br>±5 | A,<br>±3  | H,<br>±5 |          |          |     |        |         |        |        |   |        |        |    |          |         |           |         |  |
| 130           | 2<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,<br>5       | 1<br>7  | 2<br>3   | 9       | 6<br>6  | 5<br>9  | 14       | 19,<br>5 | 15<br>0  | 12<br>7,5 | 13<br>0  |          |          |     |        |         |        |        |   |        |        |    |          |         |           |         |  |
| XL            | <p>Размер XL,</p> <p>Длина: 150 см, ±1%</p> <p>Микробная проницаемость в сухом состоянии: не требуется</p> <p>Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6,0 BI</p> <p>Чистота микробная: &lt;2 Lg (CFU/дм2)</p> <p>Чистота в части инородных частиц: &lt;3,5 IPM</p> <p>Пыле-, ворсоотделение: &lt;4,0 Lg (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность: 100 см H20</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на разрыв во влажном состоянии: &gt;40 кПа</p> <p>Прочность на растяжение в сухом состоянии: &gt;20 Н</p> <p>Прочность на растяжение во влажном состоянии: &gt;20 Н</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |         |          |         |         |         |          |          |          |           |          |          |          |     |        |         |        |        |   |        |        |    |          |         |           |         |  |



| Длин<br>а, см | F,<br>± | F2,<br>± | Y,<br>± | Z,<br>± | P,<br>± | B,<br>± | G,<br>± | Ga,<br>± | Gb,<br>± | L,<br>±5 | A,<br>±3  | H,<br>±5 |
|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 150           | 3<br>0  | 5,<br>5  | 1<br>9  | 2<br>4  | 1<br>0  | 6<br>9  | 6<br>0  | 15       | 20,<br>5 | 16<br>0  | 14<br>7,5 | 15<br>0  |

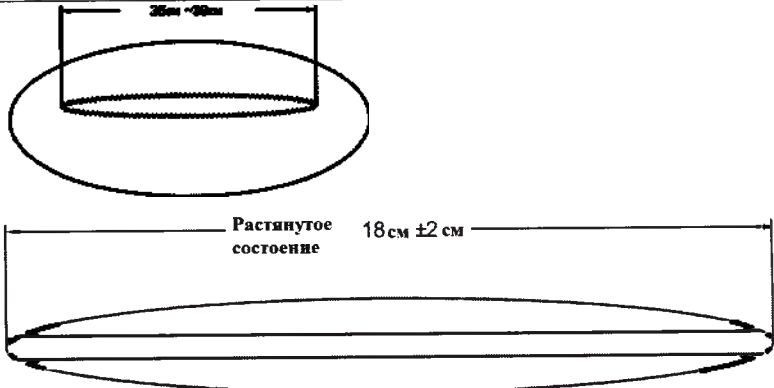
# Чаша

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 60 мл   | Объем: 60 мл, ±1%   |
| 100 мл  | Объем: 100 мл, ±1%  |
| 120 мл  | Объем: 120 мл, ±1%  |
| 250мл   | Объем: 250 мл, ±1%  |
| 500 мл  | Объем: 500 мл, ±1%  |
| 700 мл  | Объем: 700 мл, ±1%  |
| 1000 мл | Объем: 1000 мл, ±1% |
| 1500 мл | Объем: 1500 мл, ±1% |
| 2500 мл | Объем: 2500 мл, ±1% |

# Шприцы

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 мл  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Должны соответствовать ISO 7886-1</li> <li>-Тип наконечника Luer ISO 594-1</li> <li>-Номинальная вместимость: 2 мл</li> <li>-Градировка: каждые 0.1 мл</li> <li>-Полная градуированная вместимость равна номинальной вместимости.</li> <li>-Максимальная вместимость: 2,5 мл, ±1%</li> <li>Вместимость между линиями градуировки с числами: 0.5 мл.</li> <li>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 25 Н</li> <li>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 10 Н</li> <li>Мертвое пространство: не более 0,07</li> </ul>   |
| 5 мл  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Должны соответствовать ISO 7886-1</li> <li>- Тип наконечника Luer ISO 594-1</li> <li>-Номинальная вместимость: 5 мл</li> <li>-Градировка: каждые 0.2 мл</li> <li>-Полная градуированная вместимость равна номинальной вместимости.</li> <li>-Максимальная вместимость: 6 мл, ±1%</li> <li>Вместимость между линиями градуировки с числами: 1 мл.</li> <li>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 25 Н</li> <li>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 10 Н</li> <li>Мертвое пространство: не более 0,07 мл.</li> </ul> |
| 10 мл | - Должны соответствовать ISO 7886-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип наконечника Luer ISO 594-1</li> <li>-Номинальная вместимость: 10 мл</li> <li>-Градуировка: каждые 0.5мл</li> <li>-Полная градуированная вместимость равна номинальной вместимости.</li> <li>Вместимость между линиями градуировки с числами: 1 мл.</li> <li>-Максимальная вместимость: 12 мл, <math>\pm 4\%</math></li> <li>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 25 Н</li> <li>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 10 Н</li> <li>Мертвое пространство: не более 0,075 мл.</li> </ul>                                          |
|                       | 20 мл | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Должны соответствовать ISO 7886-1</li> <li>- Тип наконечника Luer ISO 594-1</li> <li>-Номинальная вместимость: 2 мл</li> <li>-Градуировка: каждые 1 мл</li> <li>-Полная градуированная вместимость равна номинальной вместимости.</li> <li>-Максимальная вместимость: 24 мл, <math>\pm 4\%</math></li> <li>Вместимость между линиями градуировки с числами: 5 мл.</li> <li>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 25 Н</li> <li>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 10 Н</li> <li>Мертвое пространство: не более 0,1 мл.</li> </ul> |
|                       | 50 мл | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Должны соответствовать ISO 7886-1</li> <li>- Тип наконечника Luer ISO 594-1</li> <li>-Номинальная вместимость: 50 мл</li> <li>-Градуировка: каждые 0.5мл</li> <li>-Градуированная вместительность: 60 мл,</li> <li>Вместимость между линиями градуировки с числами: 10 мл.</li> <li>-Максимальная вместимость: 12 мл, <math>\pm 4\%</math></li> <li>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 30 Н</li> <li>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 15 Н</li> <li>Мертвое пространство: не более 0,2 мл.</li> </ul>                        |
| Шприцы для промывания | 2 мл  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Должны соответствовать ISO 7886-1</li> <li>-Тип наконечника Luer ISO 594-1</li> <li>-Номинальная вместимость: 2 мл</li> <li>-Градуировка: каждые 0.1 мл</li> <li>-Полная градуированная вместимость равна номинальной вместимости.</li> <li>-Максимальная вместимость: 2,5 мл, <math>\pm 1\%</math></li> <li>Вместимость между линиями градуировки с числами: 0.5 мл.</li> <li>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 25 Н</li> <li>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 10 Н</li> <li>Мертвое пространство: не более 0,07</li> </ul> |
|                       | 5 мл  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Должны соответствовать ISO 7886-1</li> <li>- Тип наконечника Luer ISO 594-1</li> <li>-Номинальная вместимость: 5 мл</li> <li>-Градуировка: каждые 0.2 мл</li> <li>-Полная градуированная вместимость равна номинальной вместимости.</li> <li>-Максимальная вместимость: 6 мл, <math>\pm 1\%</math></li> <li>Вместимость между линиями градуировки с числами: 1 мл.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

|                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |       | -усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 25 Н<br>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 10 Н<br>Мертвое пространство: не более 0,07 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | 10 мл | - Должны соответствовать ISO 7886-1<br>- Тип наконечника Luer ISO 594-1<br>-Номинальная вместимость: 10 мл<br>-Градуировка: каждые 0.5мл<br>-Полная градуированная вместимость равна номинальной вместимости.<br>Вместимость между линиями градуировки с числами: 1 мл.<br>-Максимальная вместимость: 12 мл, $\pm 4\%$<br>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 25 Н<br>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 10 Н<br>Мертвое пространство: не более 0,075 мл. |
|                     | 20 мл | - Должны соответствовать ISO 7886-1<br>- Тип наконечника Luer ISO 594-1<br>-Номинальная вместимость: 2 мл<br>-Градуировка: каждые 1 мл<br>-Полная градуированная вместимость равна номинальной вместимости.<br>-Максимальная вместимость: 24 мл, $\pm 4\%$<br>Вместимость между линиями градуировки с числами: 5 мл.<br>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 25 Н<br>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 10 Н<br>Мертвое пространство: не более 0,1 мл.     |
|                     | 50 мл | - Должны соответствовать ISO 7886-1<br>- Тип наконечника Luer ISO 594-1<br>-Номинальная вместимость: 50 мл<br>-Градуировка: каждые 0.5мл<br>-Градуированная вместительность: 60 мл,<br>Вместимость между линиями градуировки с числами: 10 мл.<br>-Максимальная вместимость: 12 мл, $\pm 4\%$<br>-усилие, требуемое для приведения шток-поршня в движение: не более 30 Н<br>-Среднее усилие обратного движения шток-поршня: не более 15 Н<br>Мертвое пространство: не более 0,2 мл.                            |
| Чехол на аппаратуру |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Информация о перчатках:

Таблица 4.1 – Информация об изделии

| Цвет        | Тип                                          | Поверхность | Манжета              | Конструкция           | Размеры                        |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Бело-желтый | Хирургические<br>Неопудренные<br>одноразовые | гладкая     | Закатана в<br>венчик | С прямыми<br>пальцами | №6<br>№6.5<br>№7<br>№7.5<br>№8 |

Таблица 4.2 – Габаритные размеры изделия

| Размер | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина пальца, не менее мм | Толщина манжеты, не менее мм | Толщина ладони, не менее мм |
|--------|------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| №6     | 77±5       | 260±10    | 0.10                        | 0.10                         | 0.10                        |
| №6.5   | 83±5       | 260±10    | 0.10                        | 0.10                         | 0.10                        |
| №7     | 89±5       | 270±10    | 0.10                        | 0.10                         | 0.10                        |
| №7.5   | 95±5       | 270±10    | 0.10                        | 0.10                         | 0.10                        |
| №8     | 102±5      | 270±10    | 0.10                        | 0.10                         | 0.10                        |

Толщина венчика перчатки не более 2,50 мм.

Средний предел массы опудривающего вещества составляет не более 2 мг на одну перчатку.

Содержание водорастворимого протеина: не более 200 мкг/дм;

Содержание антигенного протеина: не более 10 мкг/дм.

Должны соответствовать ISO 10282

Таблица 4.3 – Характеристики растяжения

| Характеристика                                                                            | Значения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее                                   | 12,5     |
| Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее                                | 700      |
| Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, Н, не более | 2,0      |
| Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее                                | 9,5      |
| Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее                             | 550      |
| Условная прочность до ускоренного старения, Мпа, не менее                                 | 18       |
| Условная прочность после ускоренного старения, Мпа, не менее                              | 14       |

Таблица 4.4 – Уровни контроля и приемлемые уровни качества (AQL)

| Характеристика                                                                                                                | Уровень контроля | AQL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Размеры (длина, толщина, ширина)                                                                                              | S-2              | 4,0 |
| Герметичность                                                                                                                 | G-1              | 1,5 |
| Усилие и удлинение в момент разрыва (до и после ускоренного старения), усилие при удлинении на 300% (до ускоренного старения) | S-2              | 4,0 |

#### Упаковка наборов:

Должна соответствовать ISO 11607

Общий вес каждого набора: не более 10 кг

#### Маркировка и упаковка

Составляющие каждого набора и лист с перечнем изделий, входящих в состав набора помещены в два пакета. Каждый пакет представляет собой упаковку из пленки ПЭТ/ПП (12/80 мкм соответственно) и медицинской бумаги (Tyvek 1073B) для стерилизации медицинских изделий.

Наборы будут оставаться стерильными, пока упаковка не будет открыта, повреждена или не истек срок годности. Запечатанные пакеты обертываются крепированной бумагой для стерилизации.

К каждому набору прилагается инструкция по применению.



Маркировка упаковки изделия содержит следующую информацию:

- Наименование изделия,
- Код изделия (REF),
- Номер партии (LOT),
- Информация о производителе,
- Информацию о месте производства медицинского изделия,
- Дата изготовления и дата истечения срока годности,
- СЕ маркировка,
- Символ «Стерильно», информация о методе стерилизации изделия,
- Символ «Осторожно! обратитесь к инструкции по применению»,
- Символ, запрещающий повторное применение,
- Символ «Содержит натуральный латекс»,
- Повторная стерилизация запрещена,
- Хранить в сухом месте,
- Штрих-код,

#### Лист-вкладыш для набора\*:

Biometrix Ltd («Биометрикс Лтд»), Израиль.

Kiryat Mada 4, PO Box 45057, Jerusalem 91450, Israel.

– **Набор для операции аортокоронарного шунтирования на работающем сердце I, в составе:**

- Выкусыватель аортальный – 1 шт.
- Игла инъекционная (23 GA) – 2 шт.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr) – 2 шт.
- Катетер торакальный (прямой 28 Fr) – 1 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (14Fr) – 1 шт.
- Лезвие (№22) – 2 шт.
- Лента операционная клейкая – 1 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением) – 1 шт.
- Лоток почкообразный (700 мл) – 1 шт.
- Мешок для отходов – 3 шт.
- Мочеприемник Urimetrix – 1 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – 1 шт.
- Перчатки хирургические (№7) – 2 шт.
- Перчатки хирургические (№7,5) – 5 шт.
- Перчатки хирургические (№8) – 3 шт.
- Пленка кардиохирургическая Ioban (60 x35 см) – 2 шт.

- Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (из перечня: 137 x 180 см) - 1 шт.
- Покрытие одноразовое для стола Mayo - 1 шт.
- Полотенце хирургическое - 10 шт.
- Простыня кардиохирургическая (из перечня: 274 x 320 см) - 1 шт.
- Простыня одноразовая (90x100 см) - 2 шт.
- Простыня одноразовая (100x120см) - 2 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (100 x 100 см) - 6 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим - 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (нерентгенконтрастные) - 250 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (45 x 45 см) - 10 шт.
- Скальпель с рукояткой (№11) - 2 шт.
- Скальпель с рукояткой (№15) - 1 шт.
- Трубка аспирационная (350 см) - 1 шт.
- Турникет - 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (XL) - 3 шт.
- Чаши (250 мл) - 4 шт.
- Чаши (500 мл) - 1 шт.
- Чаши (1500 мл) - 1 шт.
- Шприцы (10 мл) - 1 шт.
- Шприцы (20 мл) - 2 шт.

\*Количество изделий в наборе зависит от комплекта поставки

#### **Ассортимент изделия:**

I. Наборы для кардиоторакальных операций в следующих исполнениях:

1) Набор для операции аортокоронарного шунтирования, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Выкусыватель аортальный - не более 3 шт.
- Держатель трубок - не более 5 шт.
- Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA) - не более 5 шт.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) - не более 5 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) - не более 3 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) - не более 5 шт.
- Лента клейкая операционная - не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) - не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (700 мл, 3000 мл) - не более 4 шт.
- Мешок для отходов - не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный - не более 3 шт.
- Отсос Yankauer - не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша - не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) - не более 15 пар.
- Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 4 шт.
- Покрытие одноразовое для стола Mayo - не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое - не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) - не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) - не более 15 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим - не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) - не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) - не более 400 шт.

- Турникет – не более 15 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.
- Чаши (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

2) Набор для пластики митрального клапана, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Держатель для электрохирургического карандаша – не более 2 шт.
- Держатель трубок – не более 5 шт.
- Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA) – не более 5 шт.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (700 мл, 3000 мл) – не более 4 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Организатор для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 5 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 5 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 5 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки впитывающие шарикообразные (45 мм, 50 мм) – не более 100 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Скальпель с рукояткой (№11, №15, №23) – не более 6 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Чаши (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

3) Набор для имплантации митрального клапана, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Бахилы хирургические (8 x 27 см, 45 x 100 см, 30 x 60 см) – не более 4 пар.
- Держатель аспирационных трубок и катетеров – не более 5 шт.
- Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA) – не более 5 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 10 шт.
- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (700 мл, 3000 мл) – не более 4 шт.

- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка кардиохирургическая Ioban (90 x 45 см, 60 x 35 см) – не более 3 шт.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 4 шт.
- Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 3 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки впитывающие шарикообразные (45 мм, 50 мм) – не более 100 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

4) Набор для операции аортокоронарного шунтирования – 2 шунта, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Выкусыватель аортальный – не более 3 шт.
- Держатель трубок – не более 5 шт.
- Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA) – не более 5 шт.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.
- Коннектор Y-образный – не более 2 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 5 шт.
- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Органайзер для инструментов – не более 2 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 4 шт.
- Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.

- Турникет – не более 15 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.
- Чаши (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

5) Набор для операции аортального клапана, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Бахилы хирургические (8 x 27 см, 45 x 100 см, 30 x 60 см) – не более 4 пар.
- Держатель трубок – не более 5 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 12 шт.
- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (700 мл, 3000 мл) – не более 4 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) - не более 4 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Организатор для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 20 пар.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 4 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 5 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 200 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.
- Чаши (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

6) Набор для интраоперационной радиочастотной абляции, в составе:

- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) - не более 3 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Организатор для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см)- не более 4 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.

- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Чашы (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.

7) Набор для повторного вмешательства, в составе:

- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) - не более 4 шт.
- Организатор для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Покрывало для камеры – не более 4 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 3 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Чашы (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.

8) Набор для миниинвазивной торакотомии, в составе:

- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) - не более 4 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Организатор для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Организатор для инструментов – не более 2 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 3 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.

-Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.

9) Набор для протезирования аорты, в составе:

- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.
- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) - не более 4 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Органайзер для инструментов – не более 2 шт.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Покрывало для камеры – не более 4 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 3 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.

10) Набор для закрытия дефекта межпредсердной перегородки I, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 4 шт.
- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (3000 мл, 700 мл) – не более 3 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) - не более 4 шт.
- Мешок для отходов – не более 3 шт.
- Органайзер для инструментов – не более 2 шт.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Пленка кардиохирургическая Ioban (90 x 45 см, 60 x 35 см) – не более 4 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 3 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Чаша (60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл) – не более 15 шт.



-Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

11) Набор для закрытия дефекта межпредсердной перегородки II, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 5 шт.
- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (3000 мл, 700 мл) – не более 2 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) – не более 4 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Органайзер для инструментов – не более 2 шт.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 4 шт.
- Покрытие одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) - не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Чашы (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

12) Набор для операции на дуге аорты, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Держатель трубок – не более 5 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 10 шт.
- Лента клейкая операционная – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (3000 мл, 700 мл) – не более 4 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 2 шт.
- Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 5 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160

см) – не более 20 шт.

-Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.

-Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.

-Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.

-Трубка аспирационная (из 200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.

-Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.

-Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.

-Чашки (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.

-Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

-Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 15 шт.

13) Набор для оперативного лечения врожденных пороков сердца, в составе:

-Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).

-Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.

-Лента клейкая операционная – не более 5 шт.

-Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.

-Лоток почкообразный (3000 мл, 700 мл) – не более 3 шт.

-Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) – не более 4 шт.

-Мешок для отходов – не более 5 шт.

-Мочеприемник Urimetrix.

-Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.

-Органайзер для инструментов – не более 2 шт.

-Отсос Yankauer – не более 3 шт.

-Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.

-Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 шт.

-Пленка кардиохирургическая Ioban (90 x 45 см, 60 x 35 см) – не более 4 шт.

-Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 3 шт.

-Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 4 шт.

-Полотенце хирургическое – не более 15 шт.

-Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.

-Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.

-Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.

-Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.

-Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.

-Скальпель с рукояткой (№11, №15, №23) – не более 8 шт.

-Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.

-Турникет – не более 15 шт.

-Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.

-Чашки (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.

-Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

14) Набор для операции на работающем сердце, в составе:

-Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).

-Выкусыватель аортальный – не более 3 шт.

-Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.

-Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.

-Лента клейкая операционная – не более 5 шт.

- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (3000 мл, 700 мл) – не более 3 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) – не более 4 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Органайзер для инструментов – не более 2 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 3 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 5 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Скальпель с рукояткой (№11, №15, №23) – не более 5 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Турникет – не более 15 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Чашки (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 10 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

15) Набор для аортобифemorального шунтирования, в составе:

- Держатель трубок – не более 15 шт.
- Лента операционная клейкая – не более 3 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 3 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 4 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие шарикообразные (45 мм, 50 мм) – не более 50 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

16) Набор для пластики трехстворчатого клапана, в составе:

- Бахилы хирургические (8 x 27 см, 45 x 100 см, 30 x 60 см) – не более 4 пар.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.

- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.
- Коннектор Y-образный – не более 2 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 5 шт.
- Лента операционная клейкая – не более 3 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 3 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 3 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) - не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Турникет – не более 15 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.
- Чашки (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.

17) Набор для имплантации кардиостимулятора, в составе:

- Губка для обработки операционного поля – не более 5 шт.
- Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA) – не более 5 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 4 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Чашки (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Чехол на аппаратуру - не более 5 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

18) Набор для операции аортокоронарного шунтирования на работающем сердце I, в составе:

- Выкусыватель аортальный – не более 3 шт.
- Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA) – не более 5 шт.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (6Fr, 8Fr, 10 Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr) – не более 3 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 4 шт.

- Лента операционная клейкая – не более 3 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (3000 мл, 700 мл) – не более 3 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка кардиохирургическая Ioban (90x45 см, 60 x35 см) – не более 4 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 4 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая (90x100 см, 100x120см) – не более 6 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) - не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Скальпель с рукояткой (№11, №15, № 23) – не более 6 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Турникет – не более 15 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Чашки (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

19) Набор для операции аортокоронарного шунтирования на работающем сердце II, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Держатель трубок – не более 5 шт.
- Капельница для внутривенных инфузий.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 8 шт.
- Мешок для диатермии (35 x 43 см, 35 x 45 см) - не более 4 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Организатор для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Организатор для инструментов – не более 2 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Пленка кардиохирургическая Ioban (90 x 45 см, 60 x 35 см) – не более 4 шт.
- Пленка хирургическая клейкая (10 x 25 см, 9 x 35 см) – не более 3 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 4 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) - не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетка впитывающая – не более 100 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.

- Скальпель с рукояткой (№11, №15, №23) – не более 6 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Чаши (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

20) Набор для торакотомии, в составе:

- Бахилы хирургические (8 x 27 см, 45 x 100 см, 30 x 60 см) – не более 4 пар.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.
- Лента операционная клейкая – не более 2 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 3 шт.
- Покрытие одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) - не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.

21) Набор для проведения операций при расслоении аорты, в составе:

- Бахилы хирургические (8 x 27 см, 45 x 100 см, 30 x 60 см) – не более 4 пар.
- Катетер торакальный (загнутый 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr; прямой 28 Fr, 32 Fr, 36 Fr) – не более 5 шт.
- Лента операционная клейкая – не более 2 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Органайзер для игл и лезвий магнитный – не более 3 шт.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Покрытие защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 5 шт.
- Покрытие одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Ручка-держатель с электродом электрохирургическим – не более 2 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.

22) Набор для имплантации клапана и коронарного шунтирования, в составе:

- Банка дренажная Thorametrix (High Capacity 2300 мл, High Capacity Dry Suction 2300 мл, Compact 1150 мл, Compact Dry Suction 1150 мл, Single Bottle Chest Drainage System 1100 мл).
- Держатель трубок – не более 10 шт.
- Игла инъекционная (18 GA, 21 GA, 22 GA, 23 GA, 27 GA) – не более 10 шт.
- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.
- Лоток для инструментов (с одним отделением, с четырьмя отделениями) – не более 5 шт.
- Лоток почкообразный (3000 мл, 700 мл) – не более 3 шт.

- Мешок для отходов – не более 5 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Очиститель наконечника хирургического электронного карандаша – не более 2 шт.
- Перчатки хирургические (№6, №6.5, №7, №7.5, №8) – не более 15 пар.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) - не более 5 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Полотенце хирургическое – не более 15 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Салфетки рентгенконтрастные (30 x 30 см, 45 x 45 см) – не более 100 шт.
- Турникет – не более 15 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Халат хирургический стандартный (S, M, L, XL) – не более 6 шт.
- Чаши (60 мл, 100 мл, 120 мл, 250 мл, 500 мл, 700 мл, 1000 мл, 1500 мл, 2500 мл, 3000 мл) – не более 15 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.
- Шприцы для промывания LL (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

23) Набор для детской кардиохирургической операции, в составе:

- Катетер Фолея силиконовый (6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr) – не более 3 шт.
- Лезвие (№11, №15, №20, №22) – не более 3 шт.
- Лента операционная клейкая – не более 4 шт.
- Мочеприемник Urimetrix.
- Отсос Yankauer – не более 3 шт.
- Покрывало защитное на стол для интраоперационного инструментария (137 x 180 см, 150 x 250 см, 137 x 150 см) – не более 3 шт.
- Покрывало одноразовое для стола Mayo – не более 4 шт.
- Простыня кардиохирургическая (274 x 320 см, 270 x 310 см, 240 x 355 см) – не более 5 шт.
- Простыня одноразовая с липучкой (50 x 75 см, 75 x 100 см, 100 x 100 см, 90 x 160 см, 200 x 160 см) – не более 20 шт.
- Салфетки впитывающие многослойные (рентгенконтрастные, нерентгенконтрастные) – не более 400 шт.
- Трубка аспирационная (200 см, 250 см, 350 см) – не более 4 шт.
- Халат хирургический с усиленным впитывающим слоем (S, M, L, XL) – не более 10 шт.
- Шприцы (2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – не более 10 шт.

### **Санитарная обработка**

Наборы для кардиоторакальных операций поставляются стерильными.

Параметры стерилизации: стерилизующий агент 100% этиленоксид (газ), значение остаточного этиленоксида соответствует требованиям ISO 10993-7. Уровень обеспечения стерильности – 10<sup>-6</sup>.

### **Транспортирование и хранение**

*Условия транспортирования:* температура воздуха от +10°C до +30°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

*Условия хранения:* температура воздуха от +10°C до +30°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

## **Рекомендации врачу-специалисту**

### **Показания:**

Наборы применяются в кардиохирургии.

-аномалий развития и заболеваний сосудистой системы

-опухолевых, паразитарных и других поражений различных органов

-позволяет изучать топографоанатомические особенности сосудов, их функциональное состояние, скорость кровотока, пути окольного кровообращения.

### **Противопоказания:**

Аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие.

### **Потенциальный осложнения:**

Отсутствуют.

### **Меры предосторожности**

Изделие является стерильным до вскрытия упаковки.

Изделие применяется одноразово, после использования утилизируется.

Изделие предназначено для использования только с одним пациентом, неиспользованные изделия следует утилизировать в соответствии с рекомендациями по утилизации.

Повторная стерилизация изделия категорически запрещена.

## **Указания по применению**

### **Способ применения:**

Перед началом процедуры все инструменты подготавливают следующим образом: Открывают упаковку со стерильным набором - инструменты в упаковке уже готовы к применению сразу после вскрытия упаковки. Кардиолог надевает стерильный халат, который идет в комплекте с набором.

В операционных одноразовыми простынями и покрытиями застилают операционный и инструментальный стол, делают ширму, накрывают аппаратуру. Для накрытия малого инструментального стола может использоваться покрытие на столик Мейо.

После обработки операционного поля пациент укрывается одной специализированной простыней с вырезами, отверстиями и т.д., снабженных адгезивными краями, впитывающими зонами, карманами и т.д.

Каждое изделие сложено особым образом в зависимости от его дальнейшего использования с учетом более удобного и быстрого способа применения.

Простыни и покрытия с липким краем можно закреплять непосредственно на поверхности операционного стола, либо на сухой неповрежденной коже пациента. Для их закрепления необходимо удалить силиконизированную бумагу-подложку.

Шприц и иглу используют в комбинации для забора лекарственного препарата из флакона, такого как стеклянная бутылка с резиновой пробкой, и затем введения лекарственного средства в пациента.

Салфетки впитывающие используют для остановки кровотечения из закрытого участка прокола.

**Пластиковые чаши** – могут быть использованы для разных целей, например для удержания оставшихся неиспользованных лекарственных средств и прочих неиспользованных оставшихся продуктов после операции, или для контрастной среды.

### **Дренажная банка.**

1. Заполните камеру водяного затвора стерильной водой (55-60мл) через порт обозначенной как «solution» (1) (вакуум) до уровня, отмеченной синей линией.

2. Заполните стерильной водой камеру контроля вакуума (suction control) до необходимого вам уровня вакуума (рекомендуемый – 20см). Для заполнения камеры контроля необходимо открыть крышку отверстия камеры контроля, находящегося в левом верхнем углу устройства. **Внимание: запрещено каким-либо образом герметично закрывать крышку.**

3. Подсоедините трубку пациента (patient tube) (3) к порту «А» (port A) (4). Камеры для сбора.

4. При осуществлении двухстороннего дренажа откройте порт «В» (Port B) и присоедините трубку пациента к порту В (только для системы большой емкости).

5. Установите пружину, препятствующую образованию перегибов трубки пациента у основания

порта А.

6.Прочно закрепите коннектор на конце трубки пациента у катетера пациента, убедитесь, что связь герметичная.

7.Проверьте отсутствие перегибов и узлов вдоль трубки пациента.

8.Установите в системе минимальный вакуум с помощью регулировочного болта. Минимум устанавливается закручиванием болта до упора

9.Подсоедините трубку вакуума больницы к порту «Solution» (1).

10.Поворачивая регулировочный болт, установите необходимый вам вакуум. Эффективность вакуума можно отследить по количеству пузырей в камере контроля вакуума. Рекомендуется для более комфортной эксплуатации установить минимальную интенсивность образования пузырей. Образование пузырей предполагает испарение жидкости. Для обеспечения нормальной работы прибора периодически проверяйте уровень жидкости в камере контроля вакуума и камере водяного затвора. В случае нехватки, добавить до необходимого уровня.

### **Внимание: не добавляйте жидкость в устройство, подключенного к вакууму.**

- Зафиксируйте мочеприемник URIMETRIX на рамке кровати при помощи ремней, крючков или шнура. Убедитесь, что сливной кран закрыт и повернут вверх. Удостоверьтесь, что приводная трубка размещена правильно. Избегайте провисания приводной трубки с образованием петли. Поднимите приводную трубку и удерживайте ее над камерой до полного ее опорожнения. Перед взятием пробы мочи наложите зажим на трубку рядом с портом для забора пробы мочи. Во время транспортировки больного положите систему на кровать лицевой стороной вверх.

- Катетер Фоллея, предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Надеть перчатки. Взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу. Свободный конец катетера захватить между 4 и 5 пальцами правой руки. Смазать вводимый конец катетера в стерильном глицерине или стерильном вазелиновом масле. Обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина. Свободный конец отпустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику.

Ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи.

Шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема (5 мл. или 50 мл.) используя физиологический раствор или воздух. По окончании выведения мочи шприцем убрать, нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки. Промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном.

Также есть еще инструменты, о которых не упоминалось в инструкциях

### **Технический ремонт и обслуживание**

Техническому ремонту и обслуживанию не подлежит.

Не используйте изделие повторно.

### **Сведения об утилизации**

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

### **Гарантии**

Гарантийный срок хранения – 3 года,

Срок сохранения стерильности – 3 года.

#### Производитель:

Biometrix Ltd («Биометрикс Лтд»), Израиль.

Kiryat Mada 4, PO Box 45057, Jerusalem 91450, Israel

Тел: +972-2-5861241; Факс :+972-2-5861322.

sales@biometrixmedical.com

Адрес для приема рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Эскамед» (ООО «Эскамед»)

115162, Москва, ул. Шаболовка п 31

Телефон: +74992130252

Biometrix Ltd  
Kiryat Mada 4  
Jerusalem 91450 Israel

\*  
NOTA

## УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ КОПИИ

№ 102/17

Я, нижеподписавшийся, **Гедалия Зисквит**, нотариус, адрес: Израиль, г. Иерусалим, ул. Элиаш, 5,

настоящим удостоверяю, что прилагаемый с пометкой "А" документ является точной копией оригинального документа, составленного на английском языке и предъявленного мне.

В подтверждение чего, я удостоверяю подлинность прилагаемой копии и ставлю свою подпись и печать сегодня 17 августа 2017 г.

За услуги взыскан сбор в размере 306.00 израильских шекелей, включая НДС

*/подпись/*

Подпись и печать нотариуса

Круглая печать: [Нотариус Гедалия Зисквит]

## АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: **ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ**

Настоящий официальный документ

2. был подписан

Юристом Гедалия Зисквит

3. выступающим в качестве Нотариуса,

4. и удостоверен печатью указанного Нотариуса

### Удостоверено:

5. в Мировом Суде Иерусалима 6. дата: 18 августа 2017 года

7. кем: Официальным представителем Министерства Юстиции  
согласно Закону о Нотариате, 1976 г.

8. № 227

9. Печать: 10. Подпись: */подпись/*

Гербовая печать:

[Мировой Суд Иерусалима]

Штамп: [Ефрат Кохен]

Штамп: [Биометрикс Лтд, Кирьят Мада, 4,  
Иерусалим 91450 Израиль]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Фроловой Мариной Михайловной

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого августа две тысячи семнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Фроловой Марины Михайловны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 9-57/96

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: ---- руб.



Г.Б. Акимов



Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 66 лист(-а, -ов).

Нотариус:

-ва

Российская Федерация  
Город Москва

25 АВГ 2017

Я, Михалина Алла Владимировна, нотариус города Москвы,  
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 8501/17-6004  
Взыскано по тарифу: 1100  
Уплачено за оказание услуг правового  
и технического характера:

А.В. Михалина



Всего прошито,  
пронумеровано и  
скреплено печатью  
лист 2  
Нотариус:

