

«Утверждаю»

Директор

ООО «Малтри»



В.Я.Малый

### **Инструкция по применению**

**Корректоры стопы SP-I-900, SP-I-901, SP-I-902, SP-I-903, SP-I-904, SP-I-905, SP-I-906, SP-I-907, SP-I-908, SP-I-909, SP-I-910, SP-I-911, SP-I-912, SP-I-913, SP-I-914, SP-I-915, SP-I-916, SP-I-917, SP-I-918, SP-I-919, SP-I-920, SP-I-921, SP-I-922, SP-I-923, SP-I-924, SP-I-925, SP-I-926, SP-I-927, SP-I-928, SP-I-929, SP-I-930, SP-I-931, SP-I-932, SP-I-933, SP-I-934, SP-I-935, SP-I-936, SP-I-937, SP-I-938, SP-I-939, SP-I-940, SP-I-941, SP-I-942, SP-I-943, SP-I-944, SP-I-945, SP-I-946, SP-I-947, SP-I-948, SP-I-949, SP-I-950, SP-I-951, SP-I-952, SP-I-953, SP-I-954, SP-I-955, SP-I-956, SP-I-957, SP-I-958, SP-I-959, SP-I-960, SP-I-961, SP-I-962, SP-I-963, SP-I-964, SP-I-965, SP-I-966, SP-I-967, SP-I-968, SP-I-969.**

**Назначение:**

Обеспечивает необходимую амортизацию по всей подошвенной поверхности.

Поддерживает поперечные своды стоп в анатомически правильном положении.

Снижает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник при ходьбе и занятиях спортом, уменьшает чувство дискомфорта и усталости при ходьбе, улучшает комфортность обуви.

Уменьшает болезненность по всей подошвенной поверхности стопы.

Обеспечивает гигиену ног за счет воздушных отверстий по всей поверхности стельки.

**Показания к применению:**

Выраженные явления артрозов нижних конечностей, остеохондроз позвоночника.

Тромбооблитерирующие заболевания (атеросклероз, эндартериит сосудов нижних конечностей, болезнь Бюргера, посттромбофлебитическая болезнь, синдром диабетической стопы).

Поперечное плоскостопие с выраженным болевым синдромом и трофическими расстройствами (натоптыши, трещины).

Остеохондропатии (болезни Хаглунда-Шинца, Келера I, Келера II, Диаза-Вейса-Мюллера), пяточной шпоре и повреждениях покрова опорной подушки пятки.

Пяточная шпора и повреждения покрова опорной подушки пятки.

Растяжение и воспаление Ахиллова сухожилия.

Растяжение и ушибы нижних конечностей.

Период беременности.

Коррекция укорочения нижних конечностей до 0,8-1,0 см.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость силикона.

Использование: рекомендуется носить как ежедневно, так и периодически, во время проявления болезненных ощущений.

Обработка: рекомендуется обрабатывать теплой водой (не выше 40°C) или слабым мыльным раствором. Не выкручивать и не выжимать! Сушить вдали от нагревательных приборов в разложенном виде.

Размер подбирается индивидуально в соответствии с ассортиментным рядом.

