


«Утверждаю»

Директор

ООО «Малтри»

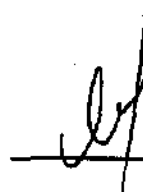

В.Я.Малый

**Инструкция по применению
Бандажи на переднюю брюшную стенку.**

Бандажи абдоминальные АВ-412, АВ-309, АВ-512, АВ-409.

Бандажи поддерживающие ВВ-206, ВВ-207, ВВ-209

Особенности: Части бандажа (прилегающая к спине и осуществляющая фиксацию) выполнены из эластичного полотна. Часть, располагающаяся на животе - многослойная, плотная и нерастяжимая. Поверхность, обращенная к телу, изготовлена из приятной хлопчатобумажной ткани.

Функциональное назначение: Эластичная компрессия бандажа позволяет поддерживать нормальный тонус передней брюшной стенки при повышении внутрибрюшного давления. Предохраняет поврежденную брюшную стенку от перенапряжения, что обеспечивает стабильность формирующегося послеоперационного рубца и создает оптимальные условия для процесса заживления.

Эффект:


- поддерживающий эффект;
- предохраняют переднюю брюшную стенку от перерастяжения;
- позволяют поддерживать нормальный тонус передней брюшной стенки;
- предотвращают расхождение послеоперационных швов;
- обеспечивают правильное формирование послеоперационного рубца и создают оптимальные условия для его заживления.

Показания к применению:

- применяется при локализации проблемных зон выше пупочного кольца;
- слабость передней брюшной стенки;
- период после оперативных вмешательств на брюшной полости, в том числе после кесарева сечения;
- наличие или предупреждение образования вентральной грыжи;
- опущение внутренних органов;
- послеродовой период.

Послеоперационный бандаж может применяться с целью создания утягивающего эффекта после липосакции области живота и спины.

Стирка и уход: закрыть липучую застежку, стирать изделие вручную в теплой воде (40°C) с использованием мягких моющих средств, не содержащих хлора, не выкручивать. Сушить в разложенном состоянии без использования нагревательных приборов.

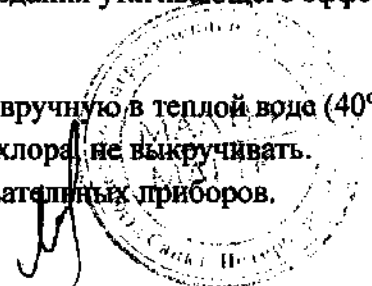

Размер подбирается индивидуально в соответствии с ассортиментным рядом от XXS до XXL

