

«Утверждаю»

Директор

ООО «Малтри»



В.Я.Малый

Инструкция по применению

Бандажи дородовые MB-89, MB-99, MS-86, MS-86.

Назначение в дородовом периоде. Обхватывая боковые поверхности увеличивающегося в размере живота, поддерживает живот снизу, одновременно разгружая поясничный отдел позвоночника и не нарушая при этом кровообращение плода.

Использование бандажа позволяет:

- избежать перерастяжения брюшной стенки;
- предотвратить образование растяжек кожи;
- снизить давление матки на органы брюшной полости (кишечник, мочевой пузырь, нижнюю полую вену), что обеспечит их нормальное функционирование;
- осуществить разгрузку поясницы и соединений костей таза;
- предупредить возникновение болей в спине;
- создать оптимальные условия для правильного развития плода.

Противопоказания: не выявлены.

Использование:

Во время беременности. Надевать бандаж необходимо лежа на спине, желательно на хлопчатобумажное белье. Освободить стяжки. Закрепить бандаж при помощи застежки «велкро» под животом. Растянуть стяжки и зафиксировать на боковых поверхностях.

Степень натяжения бандажа регулируется индивидуальными ощущениями.

Внимание! Избегать контакта застежки «велкро» с внутренней поверхностью изделия для предотвращения образования затяжек.

Стирка и уход. Перед стиркой закрыть застежку. Стирать в теплой воде с использованием мягких моющих средств, не содержащих хлора. Не выкручивать. Сушить в разложенном виде без применения нагревательных приборов.

Размер подбирается индивидуально в соответствии с ассортиментным рядом.

