

«Утверждаю»

Директор

ООО «Малтри»



 В.Я.Малый

**Инструкция по применению
Корсеты ортопедические для пояснично-крестцового, грудного отделов
позвоночника**

- **Корсеты пояснично-крестцовые противорадикулитные пояса RWA, TWA, BCW, NWA, AWA, PWA.**
- **Корсеты грудно-пояснично-крестцовый RWA, TWA, BCW, NWA, AWA, PWA.**
- **Корсеты противорадикулитные RWA, TWA, BCW, NWA, AWA, PWA.**

Функциональное назначение:

фиксация пояснично-крестцового отдела позвоночника;
разгрузка позвонков и предохранение их от дальнейшего смещения;
предупреждение травматизации корешков спинного мозга;
снижение нагрузки на межпозвонковые диски, восстановление в них водно-солевого обмена;

предохранение мышц спины от избыточного перенапряжения.

Показания к применению:

остеохондроз, спондилез, остеоартроз межпозвонковых суставов поясничного отдела позвоночника с неврологическими проявлениями (радикулиты, люмбагия, люмбоишиалгия, ишиалгия);
наличие грыж межпозвонковых дисков;
нестабильность в пояснично-крестцовом отделе;
поздний период реабилитации после травм и операций на пояснично-крестцовом отделе позвоночника;
нарушение структуры тел позвонков.
нарушения осанки;

- сколиозы I, I-II степени;
- компрессионные переломы тел позвонков (не более трех) I и II степени компрессии, в том числе у пожилых людей, страдающих остеопорозом;
- период реабилитации после травм и операций;
- остеохондроз, спондилез, остеоартроз межпозвонковых соединений, наличие грыж межпозвонковых дисков с болевым синдромом;
- смещение позвонков, нестабильность;
- межреберные невралгии, боли в спине, передней грудной клетке, в том числе приступы псевдостенокардии;
- остеохондропондилопатии (болезни Кальве, Шойермана-May);
- остеохондроз, спондилез, остеоартроз межпозвонковых соединений, смещение позвонков, нестабильность, наличие грыж межпозвонковых дисков;
- межреберные невралгии, радикулопатии, боли в спине, передней грудной клетке, в том числе приступы псевдостенокардии;
- нарушение структуры тел позвонков в результате остеопороза, опухолевого, туберкулезного и др. процессов.

Противопоказания.

Абсолютные: не выявлено. **Относительные:** локальные дерматиты, гнойничковая инфекция, открытые повреждения кожных покровов.

Длительность применения: без ограничений.



Использование: Пояс рекомендуется надевать на хлопчатобумажное белье, лежа на спине. Расстегнув предварительно застёжки, обернуть пояс вокруг талии. Затем растянуть панели и соединить их спереди внахлест. Далее, растянув дополнительные стяжки до необходимой фиксации, закрепить их спереди (сбоку) на застёжку типа «контакт».

Размер: согласно размерной сетке, указанной на упаковке.

Стирка и уход: закрыть липучую застёжку, стирать изделие вручную в теплой воде (40°C) с использованием мягких моющих средств, не содержащих хлора, не выкручивать. Сушить в разложенном состоянии без использования нагревательных приборов.

Размер подбирается индивидуально в соответствии с ассортиментным рядом от XXS до XXL

