

«Утверждаю»

Директор

ООО «Малтри»



В.Я.Малый

**Инструкция по применению
Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей**

**Бандажи на коленный сустав
BKN, SKN, TKN, BCK, NKN, AKN, PKN**

**Бандажи на голеностопный сустав
BAN, KAN, TAN, BSA, NRN, NAN, PAN, BTN, KTN, TTN, BCT, NTN, ATN.**

**Бандажи на лучезапястный сустав
SWR\L\U, KWR\L\U, TWR\L\U, BWR\L\U, NWR\L\U, AWR\L\U, PWR\L\U.**

**Бандажи на локтевой сустав BEL, KEL, TEL, BCE, NEL, AEL,
PEN.**

**Бандаж на тазобедренный сустав PF, HIB, HIK, HBC, HIN,
HAN.**

**Бандажи на плечевой сустав BSR\L\U, KSR\L\U, TSR\L\U,
CSR\L\U, NSR\L\U, ASR\L\U, PSR\L\U.**

Бандажи на межфаланговый сустав FS.

Показания к применению и особенности:

- Профилактика и лечение заболеваний и травм (артриты, артрозы, слабость связочного аппарата, ушибы, частичные повреждения мышц, миозиты, мышечные грыжи, межмышечные гематомы, переломы костей, вывихи, подвывихи)
- Реабилитация после травм и операций на суставах
- Снижение нагрузки на сустав
- Компенсация частично утраченной функции связочного аппарата
- Улучшение кровообращения и согревающее воздействие
- Защита суставов от травм при занятиях спортом
- Изделия изготовлены с учетом анатомических особенностей строения суставов
- В ряде позиций бандажи усилены ребрами жесткости и силиконовыми вкладышами.
- Длительность использования определяется по назначению врача

Противопоказания:

- Воспаление кожи в области сустава, острая инфекция мягких тканей
- Нарушение артериального кровообращения конечностей
- Трофические язвы

Инструкция по применению:

На суставы бандажи одевают после отдыха (сустав не должен быть отечным), так, чтобы швы были расположены на сгибательной поверхности сустава, а ребра жесткости (при их наличии) - на боковых поверхностях. Силиконовые вставки должны проецироваться на участки предполагаемого усиления компрессионного воздействия. Инструкция по уходу за изделием.

Перед стиркой извлекают ребра жесткости (если это предусмотрено конструкцией изделия)

Рекомендуется ручная стирка в теплом, слабощелочном растворе с последующим легким отжимом без выкручивания. Сушить изделие следует вдали от нагревательных приборов.

Размер подбирается индивидуально в соответствии с ассортиментным рядом от XXS до XXL

