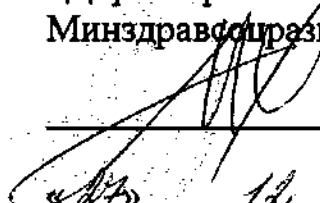
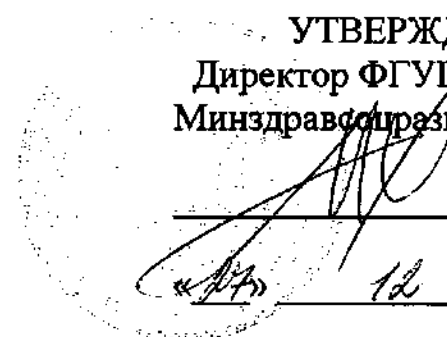


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Реутовский экспериментальный завод средств протезирования»
Минздравсоцразвития России
(ФГУП «РЭЗ СП» Минздравсоцразвития России)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГУП «РЭЗ СП»
Минздравсоцразвития России


П.И.Махонин

 12 2010г.

ЧЕХОЛ СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ КУЛЬТИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
6 Y 42 R

Модель 503

Инструкция по назначению



КОПИЯ ГЕРНА


ДИРЕКТОР ПРЕДП. ИЯТИЯ

П.И. МАХОНИН

Главный инженер
ФГУП «РЭЗ СП»
Минздравсоцразвития России

 В.В.Холин

Главный технолог

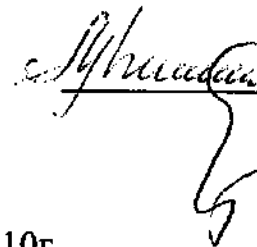 Н.В.Максименко

2010г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕХЛА

1.1. Чехол силиконовый для культы нижней конечности предназначен исключительно для использования в протезировании пациентов после транстибиальной ампутации. Чехол модель 503 имеет индекс 6 Y 42 R.

1.2. Чехол силиконовый, с наружным трикотажным слоем и внутренним усиливающим чехлом позволяет осуществить надежное крепление протеза на культе с помощью специального замка, и предназначен для создания комфортных условий и повышенного амортизационного эффекта.

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Чехол с соединительной системой для протеза голени 6 Y 42 R модель 503 изготавливается из силиконового геля и наружного трикотажного покрытия с дистальным креплением, предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протеза на культю нижней конечности. Конструкция чехла обеспечивает жесткое силовое соединение между приемной гильзой и несущим модулем за счет специального пина 6 Y 13 =1 (Отто Бокк) и замкового устройства 6 A 20=10 или 6 A 30=30.

Размеры чехла с соединительной системой для протеза голени 6 Y 42 R модель 503 соответствуют длине окружности культы в мм 180, 200, 210, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 450.

2.2. Эластичные свойства силиконового чехла способствуют плотному и равномерному покрытию и обхвату культы по всей ее поверхности. Высокий коэффициент сцепления, свойственный для силиконов, используется в чехлах для того, чтобы получить неподвижное сцепление с поверхностью кожи. Данный эффект исключает трение кожи в приемной гильзе протеза и тем самым предохраняет ее от возможных повреждений.

Полный контакт чехла с ампутированной конечностью улучшает циркуляцию крови.

3. ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Чехлы для культей нижних конечностей назначают инвалидам с цилиндрической или конической культей при первичном и повторном протезировании в случае односторонней и двусторонней ампутации на границе верхней и средней трети и средней и нижней трети культы с хорошим мышечным покровом, а также имеющих избыточный объем мягких

тканей. Пациентам с низким и средним уровнем активности. Стабилизирующая матрица чехла не должна перекрывать головку малоберцовой кости.

3.2. Чехлы силиконовые могут назначаться инвалидам с культей голени независимо от возраста и причины ампутации, но с учетом уровня ампутации. Прямым показанием к назначению являются культы с последствиями термических поражений кожных покровов, множественными рубцами кожных покровов и рубцами спаянными с подлежащими тканями, при поражении сосудистой системы, сахарном диабете, людям пожилого и старческого возраста, инвалидам с высокой двигательной активностью и занимающихся спортом.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ

4.1. Противопоказаниями к назначению чехлов силиконовых являются открытые раны культы, трофические язвы, потертости, травмоиды, булавовидная форма культы.

4.2. Попадание любых видов пудры (талька, детской присыпки) между культей и чехлом может привести к раздражению кожных покровов культы и истиранию материала чехла. Просьба не пользоваться никакой пудрой с внутренней стороны чехла.

4.3. Повышенная потливость культы не является противопоказанием, так как бактерицидные добавки в структуре силикона в течение короткого времени нормализуют потоотделение культы. Дополнительные меры гигиены также способствуют уменьшению потоотделения. Ежедневное двухразовое мытье культы рН-нейтральным мылом утром и вечером способствует снижению потливости. Не рекомендуется носить чехол более 20 часов в сутки. Не следует наносить на культю кремы, дезодоранты, спиртовые растворы перед надеванием чехла.

5. ГАРАНТИЯ

5.1. Гарантийный срок носки чехла с соединительной системой 6 Y / 42 R модель 503 составляет 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и производственный брак. Гарантия действует при условии использования изделия по назначению. Помимо этого, использование изделий допустимо только под ответственность техника-ортопеда, прошедшего обучение по обращению с настоящим изделием.

Разработал: инженер-технолог



Т.В.Пескова

Нормоконтроль:



Г.И.Маслова

Прошнуровано и пронумеровано

Мри

листов

Начальник



Маслова