



Remy & Geiser GmbH

Unternehmensgruppe für pharmazeutische Verpackungsmittel

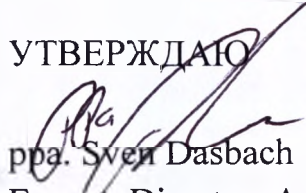
Remy & Geiser GmbH · Remy & Geiser-Str. 1 · 56584 Anhausen



Verwaltung / Vertrieb

Remy & Geiser-Straße 1 · 56584 Anhausen
Telefon: 0 26 39/93 11-0 · Telefax: 0 26 39/12 30
E-Mail: info@remy-geiser.de
Internet: www.remy-geiser.de

УТВЕРЖДАЮ


ггг. Sven Dasbach

Export Director, Authorized Person

“ 10 ” МАЯ 2017

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Флаконы медицинские бесцветные и коричневые из стекла

1-го, 2-го, 3-го гидролитического класса, объемом 1 – 100 мл

Verwaltung / Vertrieb
Remy & Geiser-Straße 1
56584 Anhausen

WERK I
Remy & Geiser-Straße 1
98553 Nahetal-Waldau/OT Hinternah

WERK II
Remy & Geiser-Straße 1
98701 Altenfeld

Hiermit beglaubige ich

Notar Dr. iur. Hubert Kögler

die vorstehende, vor mir geleistete Namensunterschrift von

Herrn Sven Dasbach, geboren am 28. Januar 1978, wohnhaft in 56584 Anhausen, Lessingstraße 24.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund Einsicht in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Montabaur HR B 14335 durch Online-Abruf vom heutigen Tage, dass Herr Sven Dasbach einzelvertretungsberechtigter Prokurist der Remy & Geiser GmbH in Anhausen eingetragen ist.

Der Unterzeichnende ist dem Notar von Person bekannt.

Neuwied, den 10. Mai 2017



Dr. Kögler, Notar





Remy & Geiser GmbH

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Флаконы медицинские бесцветные и коричневые из стекла 1-го, 2-го, 3-го гидролитического класса, объемом 1 – 100 мл:

1. Флаконы медицинские бесцветные из стекла 1-го гидролитического класса, объемом 1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл.
2. Флаконы медицинские бесцветные из стекла 3-го гидролитического класса, объемом 1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл.
3. Флаконы медицинские коричневые из стекла 1-го гидролитического класса, объемом 1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл.
4. Флаконы медицинские коричневые из стекла 2-го гидролитического класса, объемом 1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Remy & Geiser GmbH»

Remy & Geiser Str. 1, DE-56584 Anhausen, Germany

Место производства медицинского изделия:

1. Remy-Geiser- Straße 1, 56584 Anhausen/Ww, Germany
2. Remy & Geiser-Straße 1, 98553 Nahetal-Waldau/ OT-Hinternah, Germany
3. Remy & Geiser-Straße 1, 98701 Altenfeld, Germany

Назначение

Предназначены для упаковывания фармацевтических препаратов и лекарственных средств, для хранения и обеспечения сохранности фармацевтических препаратов и лекарственных средств в процессе транспортирования, хранения и эксплуатации

Показания:

Расфасовка, хранение, транспортирование лекарственных средств.

Противопоказания:

Противопоказания отсутствуют.

Возможные побочные действия:

Не выявлены.

Способ применения:

Флаконы применяются в качестве первичной упаковки для жидких и сыпучих форм фармацевтических субстанций на фармацевтических предприятиях, для хранения, транспортирования лекарственных средств в больницах, лечебных и оздоровительных учреждениях, аптеках.



Remy & Geiser GmbH

Условия применения:

Изделие предназначено как для использования в условиях фармацевтических предприятий, лечебных и диагностических учреждений квалифицированным персоналом, имеющим медицинское или фармацевтическое образование, так и для самостоятельного использования пациентом.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Флаконы медицинские бесцветные и коричневые из стекла 1-го, 2-го, 3-го гидролитического класса, объемом 1 – 100 мл применяются для фасовки и хранения лекарственных средств в виде жидкостей, порошков или таблеток. Используют в качестве первичной упаковки для препаратов инъекционного, перорального или парентерального способа применения. После извлечения из упаковки флаконы хранятся в чистых помещениях при температурном режиме от -25 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

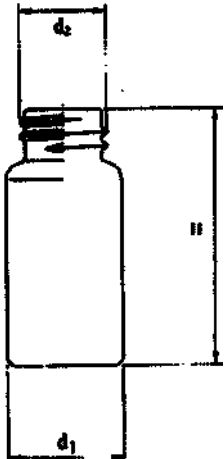


Remy & Geiser GmbH

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

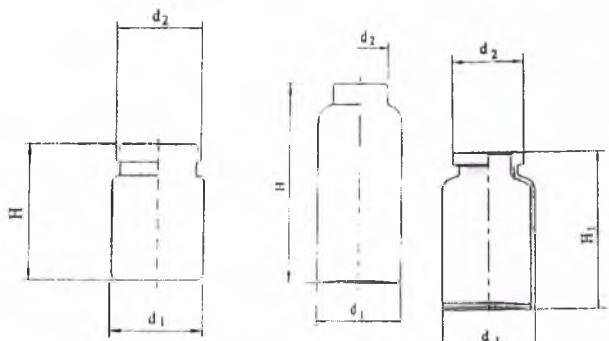
Таблица 1.

Флаконы медицинские бесцветные из стекла 1-го гидролитического класса, объемом 1 – 10 мл, шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 – 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл

№ пункта	Характеристики	Значение
Тип и марка стекла		
1.	Торговая марка стекла	Fiolax®clear / Gx51-D clear
2.	Марка стекла в соответствии с ГОСТ 19808-86	НС-3
3.	Тип стекла	нейтральное
4.	Цвет стекла	бесцветное
Физико-химические характеристики стекла		
1.1.	Водостойкость стекла, мг Na ₂ O на 1г стекла, не более	0,050, что соответствует 1 гидролитическому классу
2.2.	Термическая стойкость стекла, °С, не менее	150
2.3.	Щелочестойкость стекла, мг/дм ² , не более	100
2.4.	Светозащитные свойства стекла	неприменимо
3. Габаритные размеры и внешний вид изделия		
3.1.	Флаконы с винтовым горлом	
3.1.1.	Номинальная вместимость (объем), мл	1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 – 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл*
3.1.2.	Масса, г	2,3 – 37 ±3 г
3.1.3.	Тип крышки, используемой для изделия	крышка винтовая
3.1.4.	Внешний вид изделия	 где H – высота флакона; d1 - диаметр флакона d2 - диаметр горловины



Remy & Geiser GmbH

№ пункта	Характеристики	Значение
1.5.	Диаметр флакона(d_1)	11-34 мм $\pm 0,5$ мм
1.6.	Диаметр горловины(d_2)	8,60 – 24,75 $\pm 0,25$ мм
1.7.	Высота флакона (H)	28,0 – 120 $\pm 0,5$ мм
2.	Флаконы с гладким горлом	
2.1.	Номинальная вместимость	1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл*
2.2.	Масса	2,5 – 23 ± 3 г 2,5 – 22 ± 3 г 8,5 – 23 ± 3 г
2.3.	Тип крышки, используемой для изделия	-крышка металлическая обжимная -крышка пластиковая
2.4.	Внешний вид изделия	 где H – высота флакона; d_1 - диаметр флакона d_2 - диаметр горловины
3.2.5.	Диаметр флакона(d_1)	16-30 мм $\pm 0,5$ мм 11-34 мм $\pm 0,5$ мм 11,7-30,5 мм $\pm 0,5$ мм
3.2.6.	Диаметр горловины(d_2)	10,8 – 20 $\pm 0,2$ мм 10,8 - 28,7 $\pm 0,2$ мм 12,3 – 19,5 $\pm 0,2$ мм
3.2.7.	Высота флакона (H)	32 – 100 $\pm 0,5$ мм 32 – 100 $\pm 0,5$ мм 45 – 110 $\pm 0,5$ мм

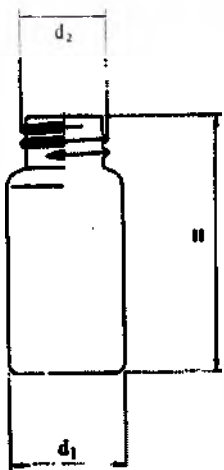
*- погрешность объема составляет $\pm 1\%$



Remy & Geiser GmbH

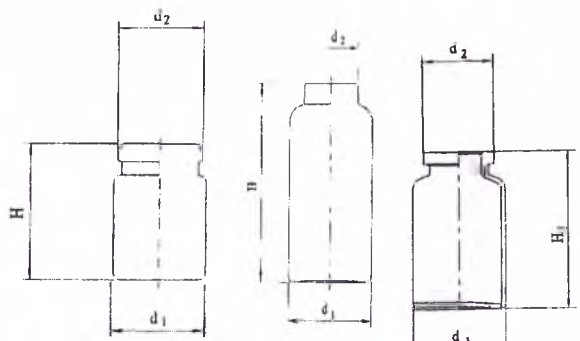
Таблица 2.

Флаконы медицинские бесцветные из стекла 3-го гидrolитического класса, объемом 1 – 10 мл, шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл

№ пункта	Характеристики	Значение
1. Тип и марка стекла		
1.	Торговая марка стекла	AR@clear
2.	Марка стекла в соответствии с ГОСТ 19808-86	МТО
3.	Тип стекла	медицинское тарное обесцвеченное
4.	Цвет стекла	бесцветное
2. Физико-химические характеристики стекла		
2.1.	Водостойкость стекла, мг Na ₂ O на 1г стекла, не более	0,600, что соответствует 3 гидrolитическому классу
2.2.	Термическая стойкость стекла, °С, не менее	125
2.3.	Щелочестойкость стекла, мг/дм ² , не более	85
2.4.	Светозащитные свойства стекла, %	неприменимо
3. Габаритные размеры и внешний вид изделия		
3.1.	Флаконы с винтовым горлом	
3.1.1.	Номинальная вместимость (объем), мл	1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл*
3.1.2.	Масса, г	2,3 – 37 ±3 г
3.1.3.	Тип крышки, используемой для изделия	крышка винтовая
3.1.4.	Внешний вид изделия	 где H – высота флакона; d1 - диаметр флакона d2 - диаметр горловины



Remy & Geiser GmbH

№ пункта	Характеристики	Значение
1.5.	Диаметр флакона(d_1)	11-34 мм $\pm 0,5$ мм
1.6.	Диаметр горловины(d_2)	8,60 – 24,75 $\pm 0,25$ мм
1.7.	Высота флакона (H)	28,0 – 120 $\pm 0,5$ мм
2.	Флаконы с гладким горлом	
2.1.	Номинальная вместимость	1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 – 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл*
2.2.	Масса	2,5 – 23 ± 3 г 2,5 – 22 ± 3 г 8,5 – 23 ± 3 г
2.3.	Тип крышки, используемой для изделия	-крышка металлическая обжимная -крышка пластиковая
3.2.4.	Внешний вид изделия	 где H – высота флакона; d_1 - диаметр флакона d_2 - диаметр горловины
3.2.5.	Диаметр флакона(d_1)	16-30 мм $\pm 0,5$ мм 11-34 мм $\pm 0,5$ мм 11,7-30,5 мм $\pm 0,5$ мм
3.2.6.	Диаметр горловины(d_2)	10,8 – 20 $\pm 0,2$ мм 10,8 - 28,7 $\pm 0,2$ мм 12,3 – 19,5 $\pm 0,2$ мм
3.2.7.	Высота флакона (H)	32 – 100 $\pm 0,5$ мм 32 – 100 $\pm 0,5$ мм 45 – 110 $\pm 0,5$ мм

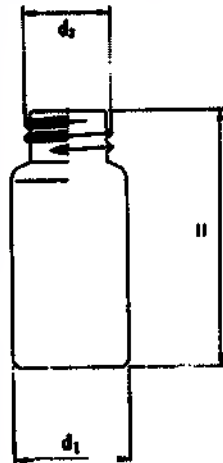
*- погрешность объема составляет $\pm 1\%$



Remy & Geiser GmbH

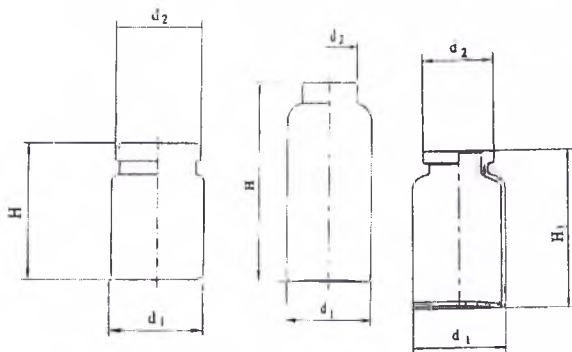
Таблица 3.

Флаконы медицинские коричневые из стекла 1-го гидролитического класса, объемом 1 – 10 мл, шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл

№ пункта	Характеристики	Значение
Тип и марка стекла		
1.	Торговая марка стекла	Fiolax®amber / Gx51-L(A) amber
2.	Марка стекла в соответствии с ГОСТ 19808-86	СНС-1
3.	Тип стекла	нейтральное
4.	Цвет стекла	коричневое
Физико-химические характеристики стекла		
1.	Водостойкость стекла, мг Na ₂ O на 1г стекла, не более	0,060, что соответствует 1 гидролитическому классу
2.	Термическая стойкость стекла, °С, не менее	140
3.	Щелочестойкость стекла, мг/дм ² , не более	90
4.	Светозащитные свойства стекла, %, не более	35
3. Габаритные размеры и внешний вид изделия		
3.1.	Флаконы с винтовым горлом	
3.1.1.	Номинальная вместимость (объем), мл	1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл*
3.1.2.	Масса, г	2,3 – 37 ±3 г
3.1.3.	Тип крышки, используемой для изделия	крышка винтовая
3.1.4.	Внешний вид изделия	 где H – высота флакона; d1 - диаметр флакона d2 - диаметр горловины



Remy & Geiser GmbH

№ пункта	Характеристики	Значение
1.5.	Диаметр флакона(d_1)	11-34 мм $\pm 0,5$ мм
1.6.	Диаметр горловины(d_2)	8,60 – 24,75 $\pm 0,25$ мм
1.7.	Высота флакона (H)	28,0 – 120 $\pm 0,5$ мм
2.	Флаконы с гладким горлом	
2.1.	Номинальная вместимость	1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 – 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл*
2.2.	Масса	2,5 – 23 ± 3 г 2,5 – 22 ± 3 г 8,5 – 23 ± 3 г
2.3.	Тип крышки, используемой для изделия	-крышка металлическая обжимная -крышка пластиковая
3.2.4.	Внешний вид изделия	 где H – высота флакона; d1 - диаметр флакона d2 - диаметр горловины
3.2.5.	Диаметр флакона(d_1)	16-30 мм $\pm 0,5$ мм 11-34 мм $\pm 0,5$ мм 11,7-30,5 мм $\pm 0,5$ мм
3.2.6.	Диаметр горловины(d_2)	10,8 – 20 $\pm 0,2$ мм 10,8 - 28,7 $\pm 0,2$ мм 12,3 – 19,5 $\pm 0,2$ мм
3.2.7.	Высота флакона (H)	32 – 100 $\pm 0,5$ мм 32 – 100 $\pm 0,5$ мм 45 – 110 $\pm 0,5$ мм

*- погрешность объема составляет $\pm 1\%$



Remy & Geiser GmbH

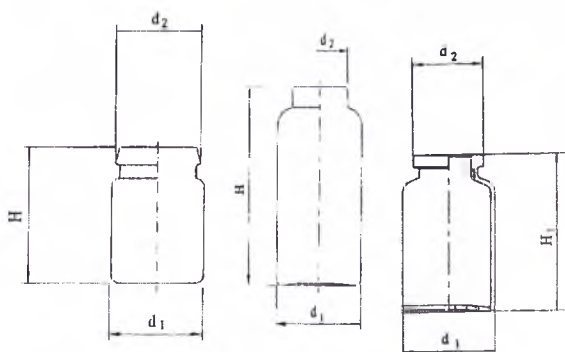
Таблица 4.

Флаконы медицинские коричневые из стекла 2-го гидролитического класса, объемом 1 – 10 мл, шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл

№ пункта	Характеристики	Значение
Тип и марка стекла		
1.	Торговая марка стекла	Illax®amber
2.	Марка стекла в соответствии с ГОСТ 19808-86	НС-1
3.	Тип стекла	нейтральное
4.	Цвет стекла	коричневое
1. Физико-химические характеристики стекла		
2.1.	Водостойкость стекла, мг Na ₂ O на 1г стекла, не более	0,060, что соответствует 2 гидролитическому классу
2.2.	Термическая стойкость стекла, °С, не менее	150
2.3.	Щелочестойкость стекла, мг/дм ² , не более	85
2.4.	Светозащитные свойства стекла, %, не более	40
3. Габаритные размеры и внешний вид изделия		
3.1.	Флаконы с винтовым горлом	
3.1.1.	Номинальная вместимость (объем), мл	1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 - 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл*
3.1.2.	Масса, г	2,3 – 37 ±3 г
3.1.3.	Тип крышки, используемой для изделия	крышка винтовая
3.1.4.	Внешний вид изделия	 где H – высота флакона; d1 - диаметр флакона d2 - диаметр горловины



Remy & Geiser GmbH

№ пункта	Характеристики	Значение
1.5.	Диаметр флакона(d_1)	11-34 мм $\pm 0,5$ мм
1.6.	Диаметр горловины(d_2)	8,60 – 24,75 $\pm 0,25$ мм
1.7.	Высота флакона (H)	28,0 – 120 $\pm 0,5$ мм
2.	Флаконы с гладким горлом	
3.2.1.	Номинальная вместимость	1 – 10 мл, с шагом 0,5 мл; 10 – 40 мл, с шагом 1 мл; 40 – 80 мл, с шагом 5 мл; 80 – 100 мл, с шагом 10 мл*
3.2.2.	Масса	2,5 – 23 ± 3 г 2,5 – 22 ± 3 г 8,5 – 23 ± 3 г
3.2.3.	Тип крышки, используемой для изделия	-крышка металлическая обжимная -крышка пластиковая
3.2.4.	Внешний вид изделия	 где H – высота флакона; d_1 - диаметр флакона d_2 - диаметр горловины
3.2.5.	Диаметр флакона(d_1)	16-30 мм $\pm 0,5$ мм 11-34 мм $\pm 0,5$ мм 11,7-30,5 мм $\pm 0,5$ мм
3.2.6.	Диаметр горловины(d_2)	10,8 – 20 $\pm 0,2$ мм 10,8 – 28,7 $\pm 0,2$ мм 12,3 – 19,5 $\pm 0,2$ мм
3.2.7.	Высота флакона (H)	32 – 100 $\pm 0,5$ мм 32 – 100 $\pm 0,5$ мм 45 – 110 $\pm 0,5$ мм

*- погрешность объема составляет $\pm 1\%$



Remy & Geiser GmbH

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использовать это изделие по назначению: для упаковывания лекарственных средств;
- Хранить в транспортной упаковке, в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей;
- Хранить в недоступном для детей месте;

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Изделия однократного применения, поставляются нестерильными.

Перед применением возможна предстерилизационная очистка изделия по следующей методике:

1. Изделие замачивается в моющем растворе (содержащий перекись водорода и моющее средство типа: «Лотос-медицинский», «Лотос», «Лотос-автомат», «Астра», «Айна», «Маричка», «Прогресс», «Кристал-автомат», «Аист-универсал М») на время не более 30 мин.;
2. Далее следует ручная мойка каждого изделия при помощи ерша, щетки, ватно-марлевого тампона - 0,5 минут на изделие;
3. Далее ополаскивание под проточной водой до исчезновения щелочности - от 5 до 10 минут;
4. Ополаскивание (обессоливание) в дистиллированной воде из расчета: на 1 литр дистиллированной воды;
5. Сушка горячим воздухом при температуре +60°.

После очистки изделия стерилизуются в автоклавах с использованием насыщенного пара под высоким давлением, с соблюдением следующих режимов стерилизации:

Варианты исполнения	Метод стерилизации	Режим стерилизации
Флаконы медицинские бесцветные из стекла 1-го гидролитического класса	Паровая стерилизация	134°C в течение 5 мин
Флаконы медицинские бесцветные из стекла 3-го гидролитического класса	Паровая стерилизация	121°C в течение 20 мин
Флаконы медицинские коричневые из стекла 1-го гидролитического класса	Паровая стерилизация	134°C в течение 5 мин
Флаконы медицинские коричневые из стекла 2-го гидролитического класса	Паровая стерилизация	134°C в течение 5 мин

Для использованных изделий допустимо проведение дезинфекции методом замачивания флаконов в дезинфицирующем растворе галогенсодержащих веществ («Хлорамин Б», «Хлорэфект», «Гипохлорид натрия», «Пресепт», «Хлоргексидин глюконат») в течение 60 минут.



Remy & Geiser GmbH

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Медицинское изделие при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Данное медицинское изделие транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Изделия в холодное время года перед использованием должны быть выдержаны в помещении при температуре не ниже 15 °С до тех пор, пока они не нагреются до температуры этого помещения.

Изделия при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов для температурного режима от +5 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%, и вибрационной нагрузке частотой 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм, ударные нагрузки при ускорении 10 g в течении 16 мс.

На всех участках перемещения стеклянной тары в процессе эксплуатации должны быть исключены удары, вызывающие ее повреждение и разрушение.

Данное медицинское изделие при транспортировании и хранении устойчиво к воздействию температур от -25 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, без образования конденсата, при атмосферном давлении от 200 до 1500 гПа, вибрационной нагрузке частотой 10-55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм, ударные нагрузки при ускорении 10 g в течении 16 мс.



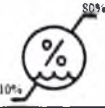
Remy & Geiser GmbH

СИМВОЛЫ НА МАРКИРОВКЕ

В транспортную тару вкладывают упаковочный лист, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак;
- условное обозначение изделия;
- марку стекла;
- артикул изделия;
- количество единиц изделий в упаковке;
- дату изготовления.

Символы на маркировке:

1.		Производитель, адрес, наименование.
2.		Дата производства.
3.		Использовать до.
4.		Номер партии.
5.		Не стерильно
6.		Не использовать повторно
7.		Температурный диапазон.
8.		Диапазон влажности

Транспортная упаковка маркируется с нанесением манипуляционного знака «Хрупкое. Осторожно!».

СРОК ГОДНОСТИ

Срок службы и срок годности составляет не менее 10 лет со дня производства.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Медицинские изделия должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями, в соответствии с требованиями местных организаций и правилами утилизации в данном регионе.

Утилизация не использованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А СанПин 2.1.7.2790-10. Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями и/или лекарственными веществами поводится в соответствии с классом Б СанПин 2.1.7.2790-10.



Remy & Geiser GmbH

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования и хранения в течение всего срока годности – 10 лет.

РЕКЛАМАЦИЯ

При возникновении вопросов, проблем или неполадок обращайтесь к уполномоченному представителю:

ООО «ФармаПак»

101000, Москва, Архангельский пер., дом 9, офис 6

Тел.: (495)980-68-70, (495) 721-29-06, (495) 721-29-35

info@medbiopack.ru

Remy & Geiser GmbH
(«Реми энд Гайзер Гмбх»)

Группа компаний по производству упаковки для фармацевтических средств

«Реми энд Гайзер Гмбх» • Реми энд Гайзер-штр. 1 • 56584 Анхаузен

Администрация / Служба продаж
Реми энд Гайзер -штрассе 1 • 56584 Анхаузен
Телефон: 0 26 39/93 11-0 • Факс: 0 26 39/12 30
Электронная почта: info@remy-geiser.de
Интернет-страница: www.remy-geiser.de

УТВЕРЖДАЮ

Подпись

п.д. Свен Дасбах

Директор по экспорту, уполномоченное лицо

Администрация / Служба продаж
Реми энд Гайзер -штрассе 1
56584 Анхаузен

ПРЕДПРИЯТИЕ I
Реми энд Гайзер -штрассе 1
98553 Назталь-Вальдау / ОТ Хинтерна

ПРЕДПРИЯТИЕ II
Реми энд Гайзер -штрассе 1
98701 Альтенфельд

Коммерческий директор: Кристоф Ханшке • Участковый суд Монтабаур HRB 14335 • Ид.№ плательщика налога с оборота: DE 149510995
Вестервальд Банг еГ • IBAN: DE27 5739 1800 0080 5022 06 • БИК: GENODE31WW1
Коммерцбанк АГ • IBAN: DE26 5704 0044 0203 2894 00 • БИК: COBADE33XXX

Настоящим я,

нотариус, др. юр. Хуберт Кёглер

свидетельствую подлинность подписи, поставленной выше в моем присутствии

господином Свеном Дасбахом, дата рождения 28 января 1978 года, проживает по адресу: 56584 Анхаузен, Лессингсштрассе 24.

Одновременно удостоверяю на основании проверки электронного коммерческого реестра земельного суда Монтабаур HR В 14335 через интернет-запрос от сегодняшнего дня, что г-н Свен Дасбах зарегистрирован как уполномоченное лицо, имеющее право единоличного представительства «Реми энд Гайзер Гмбх» в г. Анхаузен.

Личность лица, подписавшего документ, установлена.

г.Нойвид, 10 мая 2017 г.

Подпись
Д-р Кёглер, нотариус

[Печать: др. юр. Хуберт Кёглер, нотариус г. Нойвид]

*Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Мамедовым Тимуром
Джаванишировицем*

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого июня две тысячи семнадцатого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса
города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика
Мамедова Тимура Джаванишировица.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 15-24096

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: ---- руб.

Н.А. Мартынова

Н.А. Мартынова



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 17 лист(а)(ов)

ВРИО Нотариуса

Н.А. Мартынова

