

«УТВЕРЖДАЮ»



исполнительный директор
ФАО «Фармавед»

Е.В.Ерофеев

Ерофеев 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения

**«Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых:
«Аквалор форте мини», 50 мл; «Аквалор форте», 125 мл, 150 мл»
производства YS LAB, Франция**

1. Описание.
2. Состав.
3. Формы выпуска.
4. Свойства.
5. Показания к применению.
6. Противопоказания.
7. Побочные действия.
8. Способ применения.
9. Условия хранения.
10. Срок годности.
11. Производитель.
12. Условия отпуска из аптек.

1. Наименование ИМН и описание: «Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых: «Аквалор форте мини», 50 мл; «Аквалор форте», 125 мл, 150 мл, производства YS LAB, Франция - прозрачная бесцветная жидкость без запаха представляет собой стерильный гипертонический раствор натуральной морской воды, расфасованный под давлением в металлические баллончики с внутренним антисептическим покрытием различной вместимости. (Nitrogen < 1 %).

2. Состав: Натуральная неразбавленная стерильная гипертоническая (содержание NaCl 21 г/л) морская вода. Содержит все активные вещества и микроэлементы морской воды: K, Mg, Na, Cl, Se, I, Ca, Zn, Cu, Fe и др.
Не содержит консервантов.

3. Формы выпуска: «Аквалор форте мини», 50 мл.; «Аквалор форте», 125 мл., 150 мл.
Раствор находится под давлением в металлическом баллоне с внутренним антисептическим покрытием. Благодаря специальному одностороннему клапану сохраняет стерильность в течение всего периода использования и предупреждает обратный ток, что предотвращает попадание окружающего воздуха в баллон.

4. Свойства:

- Тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки, активно очищая их от бактерий, вирусов, аллергенов, корок, слизи, частиц пыли.
- Уменьшает отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, способствует восстановлению носового дыхания.
- Оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие, снимает раздражение.
- Повышает местный иммунитет.
- Ускоряет процессы регенерации слизистой оболочки полости носа и носоглотки, снижает риск развития осложнений после операций в полости носа и околоносовых пазух.
- Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия, способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа и носоглотки.
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа (сосудосуживающие, антибиотики, противоаллергические и др.), уменьшает их потребление и побочные эффекты.

5. Показания к применению:

*Профилактика и комплексное лечение острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):

- острые и хронические риниты (насморк)
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит)
- острые и хронические аденоиды
- аллергические и вазомоторные риниты
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки)

* Комплексное лечение ОРВИ и гриппа.

* Ежедневная гигиена полости носа и носоглотки.

* Профилактика простудных заболеваний в период эпидемий.

* Состояние после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух.

6. Противопоказания:

Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.

У детей может использоваться с 6-ти месяцев.

7. Способ применения:

Для детей до 2-х лет	Для детей старше 2-х лет и взрослых
Промывание носа у ребенка раннего возраста проводится в положении лежа. Повернуть голову ребенка набок. Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость. Посадить ребенка и помочь ему высморкаться. При необходимости повторить процедуру. Провести процедуру с другим носовым ходом.	Наклонить голову набок. Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость. Высморгаться. При необходимости повторить процедуру. Провести процедуру с другим носовым ходом.

Взрослым и детям проводят по 3-4 впрыскивания не менее 2-3 раз в сутки (при необходимости можно чаще).

Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

8. Побочные действия: не выявлены. Лекарственное взаимодействие не отмечалось.

9. Условия хранения: при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

10. Срок годности: 3 года. Использовать до даты, указанной на упаковке. Сохраняет стерильность в течение всего периода использования.

11. Производитель: YS LAB, Le Forum 2, rue Felix Le Dantec, 29000 Quimper, France.

Изготовлено по заказу: ЗАО «Фармамед», Россия, 109088, ул. 2-я Машиностроения, д. 12, тел. 744-06-18, факс 438-12-07

12. Условия отпуска из аптеки

Генеральный директор
ЗАО «Фармамед»



Е.В. Ерофеев

«21» сентября 2010 г.



Генеральный директор
ЗАО «Фармамед»



Е.В. Ерофеев