

97

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СИМКО ТРЕЙДИНГ»
М.В.Баулин

« » апреля 2009 г.



Инструкция по применению

**Материалов зуботехнических для дублирования VERTEX:
Castasil 21 (Base A Catalyst, Base B); Putty 1:1 (Base A Catalyst,
Base B), производства фирмы Vertex-Dental B.V., Нидерланды**

Силикон для дублирования Vertex Castasil 21 Base A Catalyst, Base B

Дублирующий материал на основе силикона, аддитивный, с высокой эластичностью, жидкотекучий, цвет: голубой (основная масса) и белый (катализатор)/

Применение

Для дублирования паковочных масс и гипсовых моделей

Дозировка

1 часть основной массы / 1 часть катализатора по объему или весу (1 мл / 0,77 г)
Надежная и безошибочная дозировка возможна при одинаковом соотношении смеси (объем или вес) катализатора и основной массы. Различные цвета основной и катализаторной массы обеспечивают хороший контроль при смешивании.

Рабочий процесс

Использовать одинаковые количества (объем или вес) основного материала (голубой) и катализаторной массы (белая) или поместить в специальный смеситель. Оба компонента смешать в течение указанного времени смешивания, пока не получится однородный цвет. При работе вручную затем следует заполнить дублирующую форму (ковегу) поставить на вибростол, чтобы исчезли пузырьки воздуха.

Время смешивания	около 1 минуты	технические характеристики
Время обработки*	5+/-1 мин.	
Нет клейкого эффекта спустя	20 мин.	твердость Shore A (через 30 мин.) 16-24
Вынимание из формы спустя*	30 мин.	твердость Shore A (через 60 минут)
около 24		
Залить спустя*	60 мин.	плотность 1,3 г/мл

- Указанные значения действительны для 23°C (73,4°F) и относит. влажности 50+/- 5%. Отклонения указанных данных в зависимости от температуры могут удлинять указанное время или укорачивать.

Срок годности

См. оттиск на упаковке, минимум 2 года.

Хранение

Хранить при температуре не выше 25°C.

Указания по безопасности

Избегать контакта материала с глазами и одеждой, в случае попадания в глаза промыть большим количеством воды, немедленно обратиться к врачу. Избегать пятен на одежде, т.к. эластомерные слепочные материалы химически устойчивы.

Общие указания

Использование поставляемых нами материалов находится исключительно в Вашей компетенции, т.к. мы не располагаем возможностью контроля. Наши устные или письменные консультации являются только обязательными указаниями. Тем самым Вы не освобождаетесь от обязанности собственного контроля поставленного товара на его пригодность для предусмотренных целей и технологий. Наша ответственность ограничивается в любом случае за всякий ущерб только стоимостью поставленного нами и использованного Вами товара.

Силикон для дублирования VERTEX Putty 1:1 Base A Catalyst, Base B

Зуботехнический силикон. Супертвердый, конденсационный, термостойкий (до 200°), высокой конечная твердости (> 85 Shore A), пастообразный – очень высокой консистенции.

Для применения только вне ротовой полости!

Применение

Для дублирования паковочных масс и гипсовых моделей

Дозировка

1 часть основной массы / 1 часть катализатора по объему или весу (1 мл / 0,77 г)

Надежная и безошибочная дозировка возможна при одинаковом соотношении смеси (объем или вес) катализатора и основной массы. Различные цвета основной и катализаторной массы обеспечивают хороший контроль при смешивании.

Рабочий процесс

Использовать одинаковые количества (объем или вес) основного материала (голубой) и катализаторной массы (белая) или поместить в специальный смеситель. Оба компонента смешать в течение указанного времени смешивания, пока не получится однородный цвет. При работе вручную затем следует заполненную дублирующую форму (кювету) поставить на вибростол, чтобы исчезли пузырьки воздуха.

Условия окружающей среды: при примерно 23°C, влажности воздуха 50% ±5%

Дозирование:

1 мерная ложка VERTEX Putty 1:1

1 мерная ложка VERTEX Putty 1:1 активатора

Время смешивания:

около 30 секунд