



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СИМКО БИОТЕК»
С.А.Баулина

Инструкция

ECO LightBox

Производства фирмы Vertex-Dental B.V.

ECO LightBox – устройство для световой полимеризации индивидуальных слепочных ложек. Применяется в зуботехнических лабораториях при изготовлении индивидуальных слепочных ложек.

1. Распаковать блок.
2. Убедиться, что имеются 2 лампы (71 цветные) по 9 В, 2 лампы (78 цветные) по 9W.
3. Установить лампы в специальные гнезда.
4. Подсоединить кабель питания.
5. Открыть блок и поместить 3-4 модели.
6. Выбрать требуемое время работы, нажатием левой кнопки на «5 мин» или «10 мин».
7. Начать работу, нажав правой кнопкой «on».
8. Выключить устройство правой кнопкой, нажав на «off».

Требования безопасности.

1. Не касаться рабочих электрических частей.
2. Выключать оборудование на время обслуживания.
3. Не открывать крышку во время работы оборудования.
4. Не открывать ящик во время работы, это опасно для глаз.
5. Не трогать крышку во время работы.

Габариты : 111 x 119 x 310 мм

Вес : 3,5 кг