

C8

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СИМКО ТРЕЙДИНГ»
М.В.Баулин
« » апреля 2009г.

Инструкция по применению

Материалов зуботехнических для дублирования VERTEX: Castagel (Clear, Blue and Plaster Pink), производства фирмы Vertex-Dental B.V., Нидерланды

Материалы зуботехнические для дублирования VERTEX: Castagel (Clear, Blue and Plaster Pink), предназначены для применения в зуботехнической лаборатории для дублирования с гипсовых моделей при изготовлении цельнолитых протезов.

Материалы зуботехнические для дублирования VERTEX: Castagel (Clear, Blue and Plaster Pink), отличаются между собой цветовым оттенком: Blue – голубой, Clear – прозрачный, Plaster Pink-розовый.

Нарезать Castagel на мелкие кубики. Нагреть кубики до температуры 90-95 град.С (желательно использовать спец. аппарат для нагрева дублирующей массы), пока они не расплавятся окончательно. Не допускать закипания массы. Охладить расплавленную массу до температуры 46-48 град.С . Расплавленный гель оставляется, пока он не остынет до нужной температуры.

Подготовка модели. Пропитать модель водой перед размещением в кюветте.

Положить заполненную кюветту в холодную воду. Количество воды должно быть примерно в два раза меньше веса кюветты. Дайте кюветте остыть примерно 30 мин. пока гель не затвердеет.

Плавление 90-95 град.	Охлаждение 46-48 град.	Охлаждение до твердого состояния
		при комн.температуре

Хранение

Хранить твердый гель в закрытом контейнере при температуре 5-26 град.