

Руководство по эксплуатации изделия медицинского назначения
«красящая жидкость для диоксида циркония Lava Frame Shade»

Наименование изделия

Красящая жидкость для диоксида циркония Lava Frame Shade

Использование изделия

Прокраска каркаса является одним из этапов производства коронок и мостов системой Lava. На этапе прокраске действия следующие:

- Погрузите каркас в красящую жидкость Lava Frame Shade
- Подождите 2 минуты.
- Извлеките каркас из ванночки для прокраски

Хранение изделия


Хранить окрашивающую жидкость LAVA Frame Shade при температуре 15 - 25°C.

Избегать прямого попадания солнечных лучей.

Не использовать после истечения срока годности.

Руководитель отдела Здравоохранение
ЗАО «ЗМ Россия»

9 апреля 2007 г.

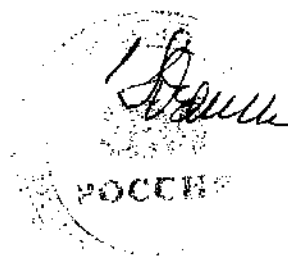

М.Е. Юртов