


Плотный контакт с тканью

Полный контакт с тканью приводит к полному электрическому контакту.


В отличие от иных приспособлений, Synergy обеспечивает равномерное сдавление ткани по всей длине зажима.

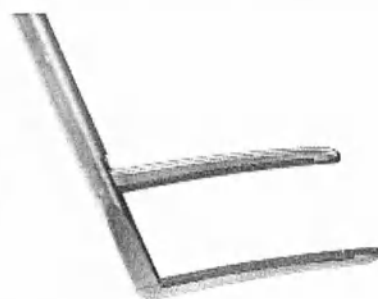


Параллельный зажим



~11.34 кг

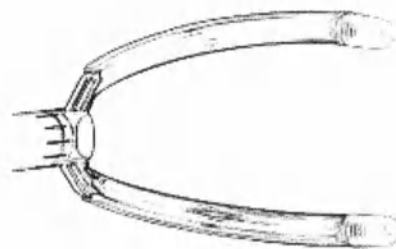

В форме ножниц

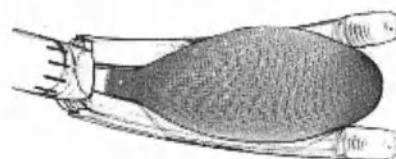

~5.90 кг

>14.06 кг

<0.45 кг

Рациональная подача энергии

Пик температуры находится между пульсирующими парами электродов Synergy. Благодаря динамическому мониторингу и подстройке мощности в зависимости от проводимости ткани, энергия подается в объеме, необходимом для формирования постоянной трансуральной деструкции. Дозированная и контролируемая подача энергии обеспечивает защиту смежных тканей и структур.

ArtiCure – постоянный мониторинг = индивидуализированная абляция в режиме реального времени
1000 измерений за одну абляцию



Система AtriCure обеспечивает стабильную мощность на единицу объема, независимо от толщины ткани. В системах с фиксированной подачей энергии с увеличением толщины ткани резко падает энергия на единицу объема.

