

Генеральный директор
ЗАО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора образцов сывороток крови, содержащих
антиген p24 ВИЧ-1 в различных концентрациях
«ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартная панель сывороток»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартная панель сывороток» предназначен для определения чувствительности выявления антигена p24 вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в сыворотке крови. Может быть использован для контроля качества работы и входном контроле.

В состав набора входят 6 сывороток p24 вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в различных концентрациях.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Общие положения:

ВИЧ-1 p24-антиген (+)
стандартная панель сывороток
6 образцов сывороток крови

ТУ 9398-373-23548172-2012



ПАСПОРТ № 1707-12
ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартная панель сывороток
Набор образцов сывороток крови, содержащих антиген p24 ВИЧ-1 в различных концентрациях
ТУ 9398-373-23548172-2012

Хранить при температуре 2-8°C	Внешний вид	Сыворотки ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартной панели	Номер серии	2
Наименование показателя	Сыворотки ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартной панели	Характеристика	Дата изготовления	29.06.2012
Технические характеристики	Сыворотки ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартной панели	Аморфная масса светло-желтого цвета	Дата выдачи паспорта	29.06.2012
Срок годности	Сыворотки ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартной панели	Все 6 образцов панели должны выявляться как положительные	Срок годности наборов до	29.06.2017
Условия хранения	Сыворотки ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартной панели	Рез-ты контроля	Аморфная масса светло-желтого цвета (соответствует)	4 (соответствует)
Условия транспортировки	Сыворотки ВИЧ-1 p24-антиген (+) стандартной панели	Все 6 образцов панели должны выявляться как положительные (соответствует)		